



INSTALLATIONSANLEITUNG ENDERMOLINK™

CELLU M6 INFINITY®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT ENDERMOLINK™

MINDEST ERFORDERLICHE SOFTWAREVERSIONEN::

- iOS: **iOS 17**
- Android: **Android 12**

Frühere Versionen können die Benutzererfahrung einschränken und den Zugang zu bestimmten Funktionen begrenzen. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Updates auf Android 12 je nach Hersteller und Modell variieren kann.

Wir empfehlen Ihnen, die Spezifikationen jedes Geräts zu überprüfen oder den Hersteller zu konsultieren, um die Kompatibilität zu bestätigen.

01

ENDERMOLINK™-APP

ANDROID-VERSION



endermolink™-anwendung


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

VERBINDEN SIE DAS TABLET MIT IHREM WLAN-NETZWERK

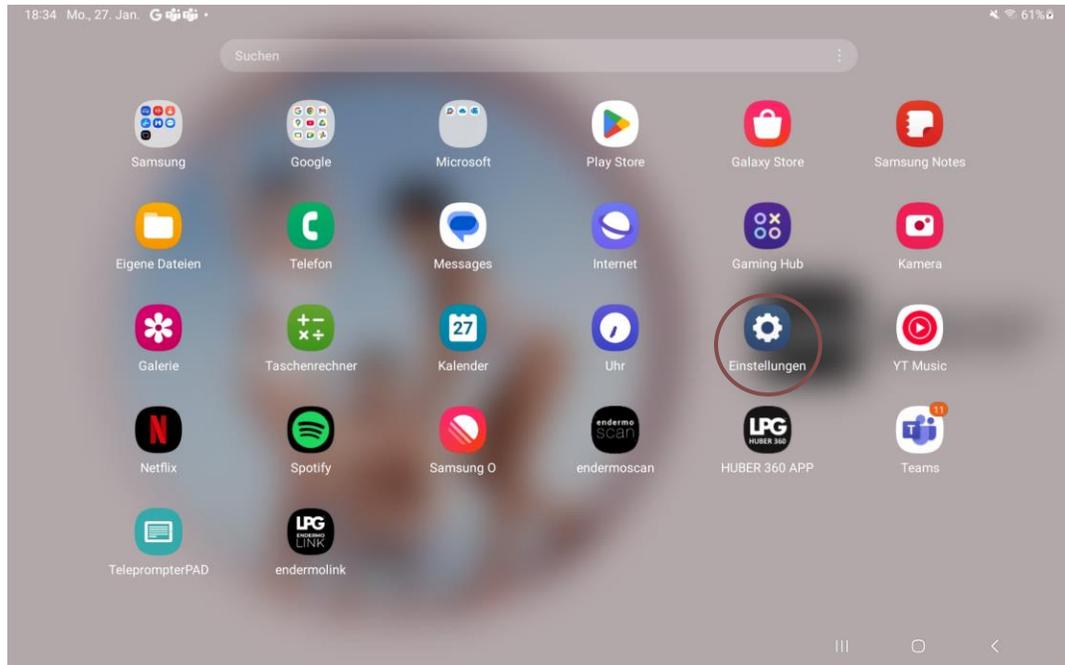


Starten Sie die Anwendung „**Einstellungen**“ die auf dem Startbildschirm Ihres Tablets verfügbar ist.

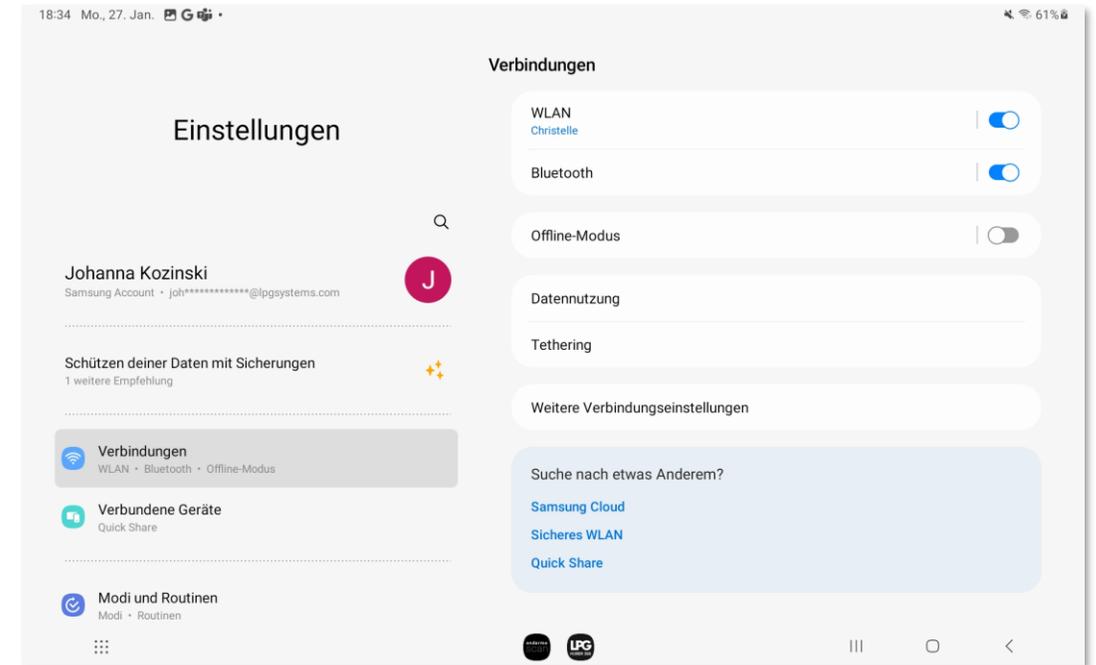


Wählen Sie den Abschnitt „**Verbindungen**“ und tippen Sie dann auf „**WLAN**“ Wählen Sie Ihr **WLAN**-Netzwerk aus.

ZUGANG ZUM PLAY STORE: MELDEN SIE SICH BEI IHREM GOOGLE-KONTO AN

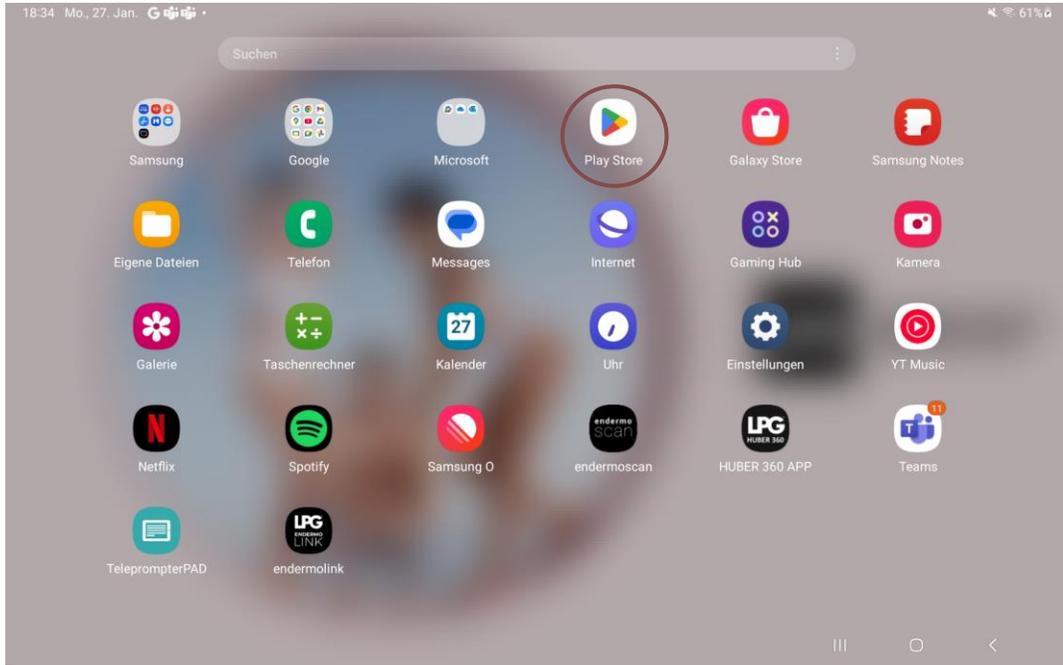


Starten Sie dann die App „**Play Store**“ auf dem Startbildschirm Ihres Tablets.

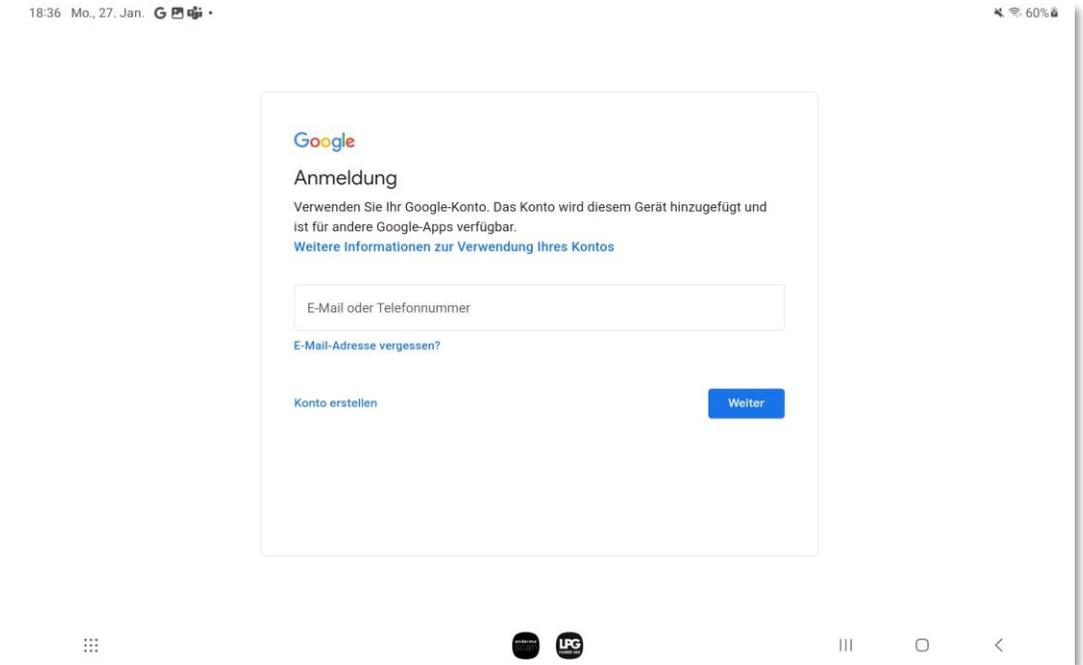


Melden Sie sich bei Ihrem **Google-Konto** an. Geben Sie **Ihren Benutzernamen** (Ihre persönliche E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort ein.

ZUGANG ZUM PLAY STORE: MELDEN SIE SICH BEI IHREM GOOGLE-KONTO AN

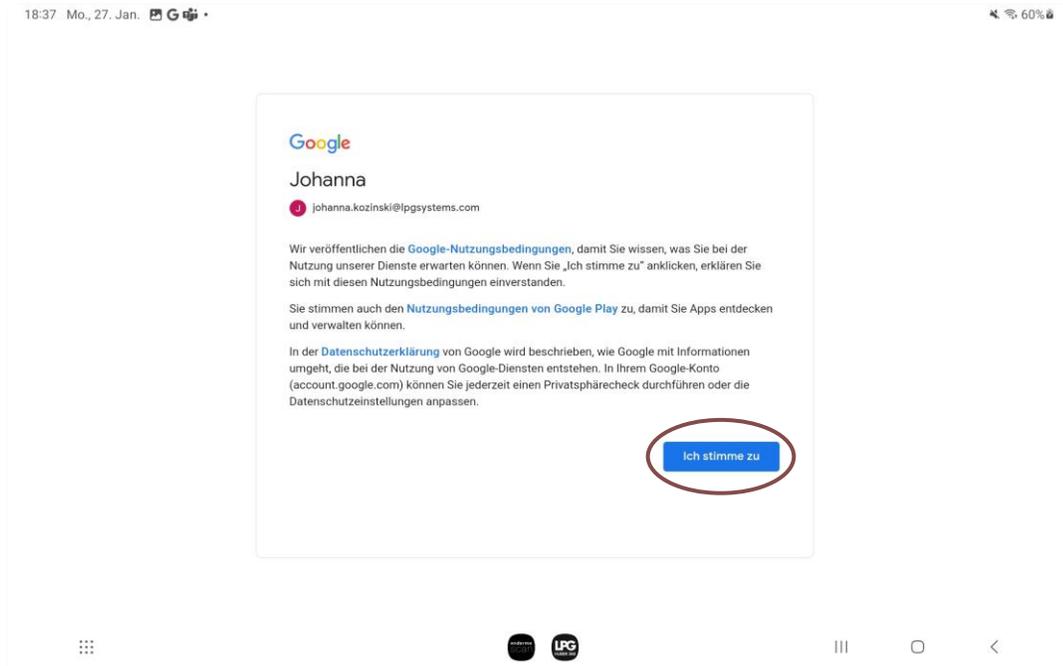


Sie können die Daten auf Ihrem Gerät speichern, indem Sie auf „**Ich stimme zu**“ tippen.

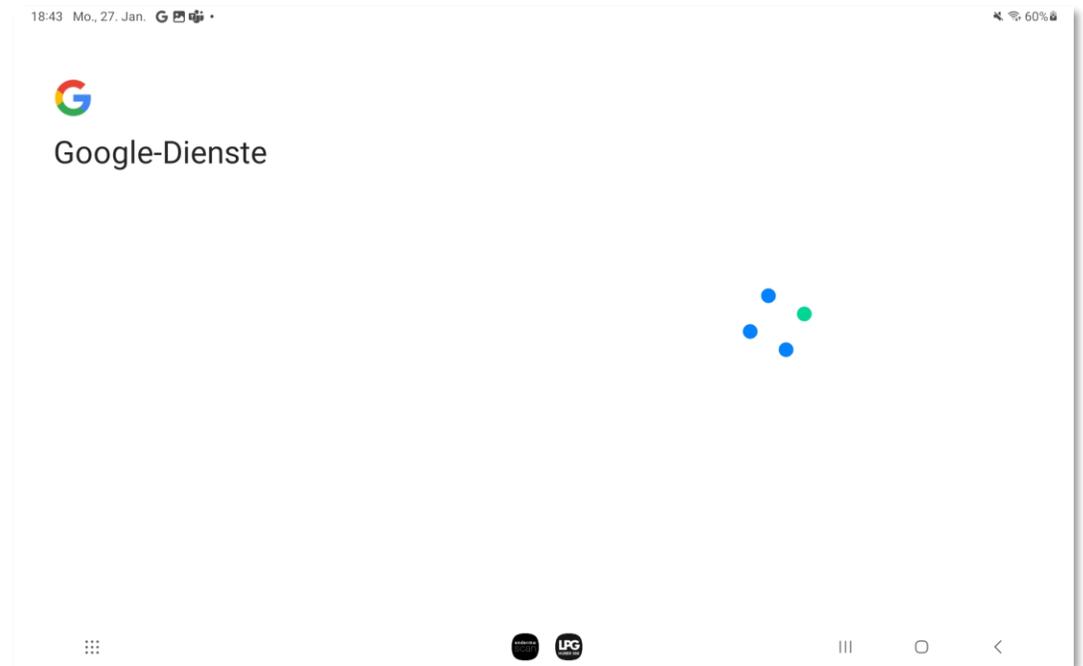

Sie sind jetzt **angemeldet**.


DOWNLOAD DER Endermolink™-App

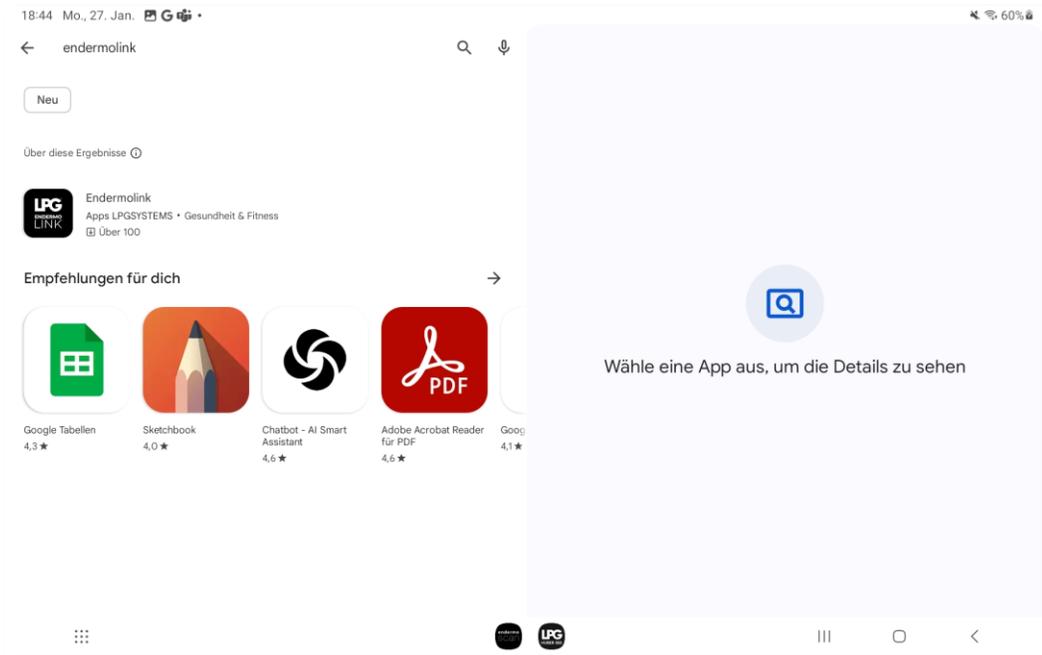

Suchen Sie in der **Suchleiste des Play Store** nach der **Endermolink™-App**.

Endermolink™-App


Cellu M6 Infinity®

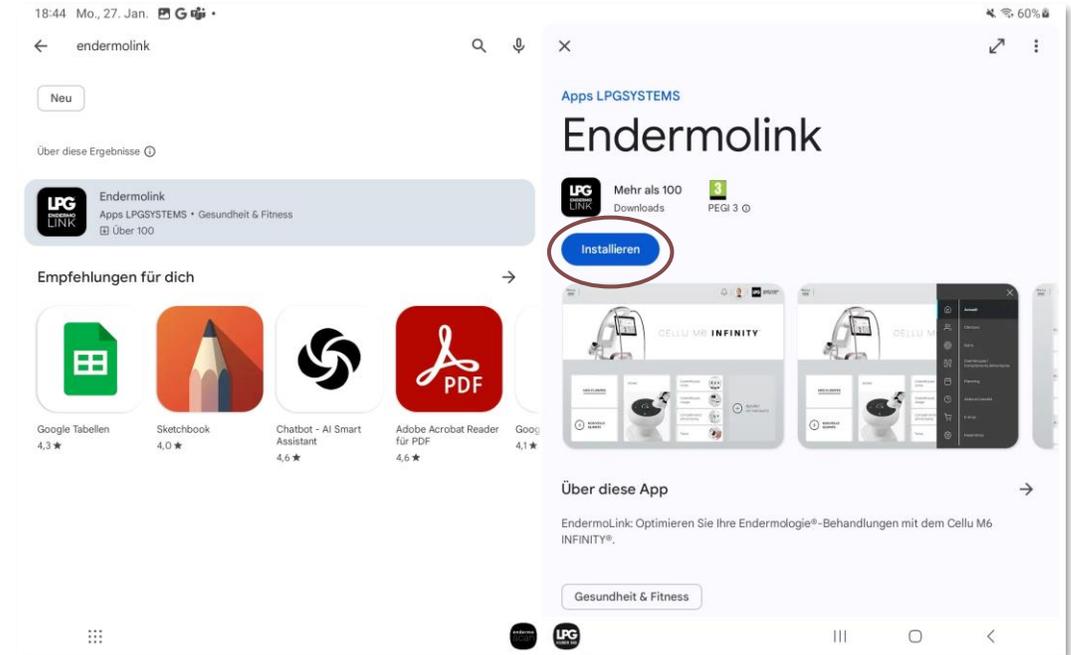


Die **Endermolink™-App** wird angezeigt. Tippen Sie auf „**Installieren**“.



DOWNLOAD DER Endermolink™-App

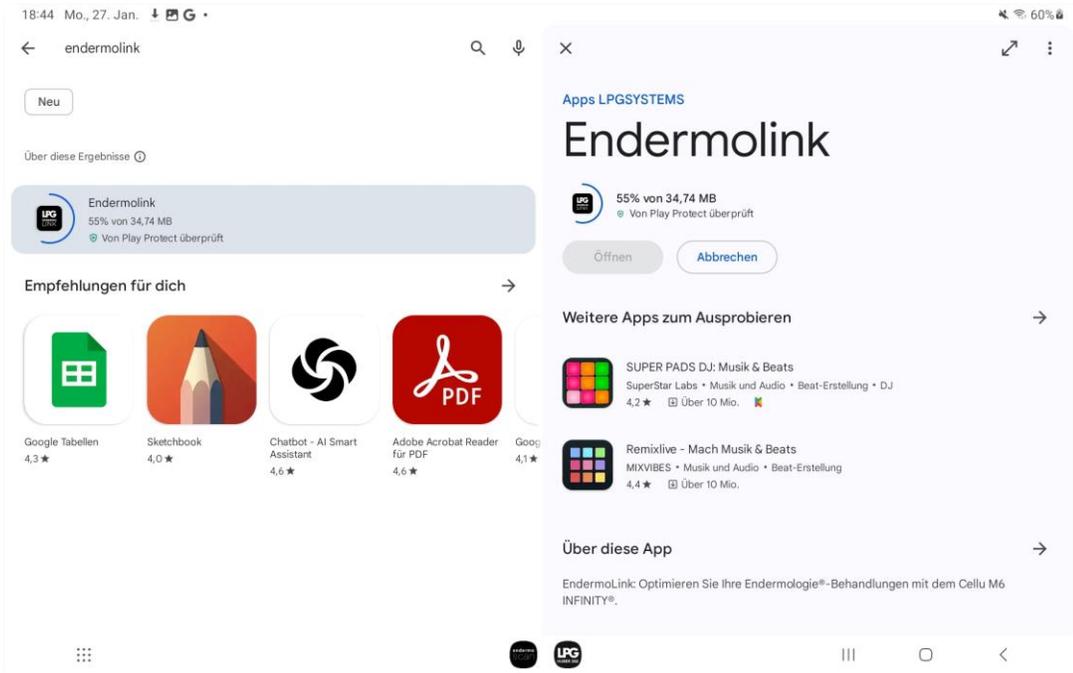

Die **Endermolink™**-App wird heruntergeladen.

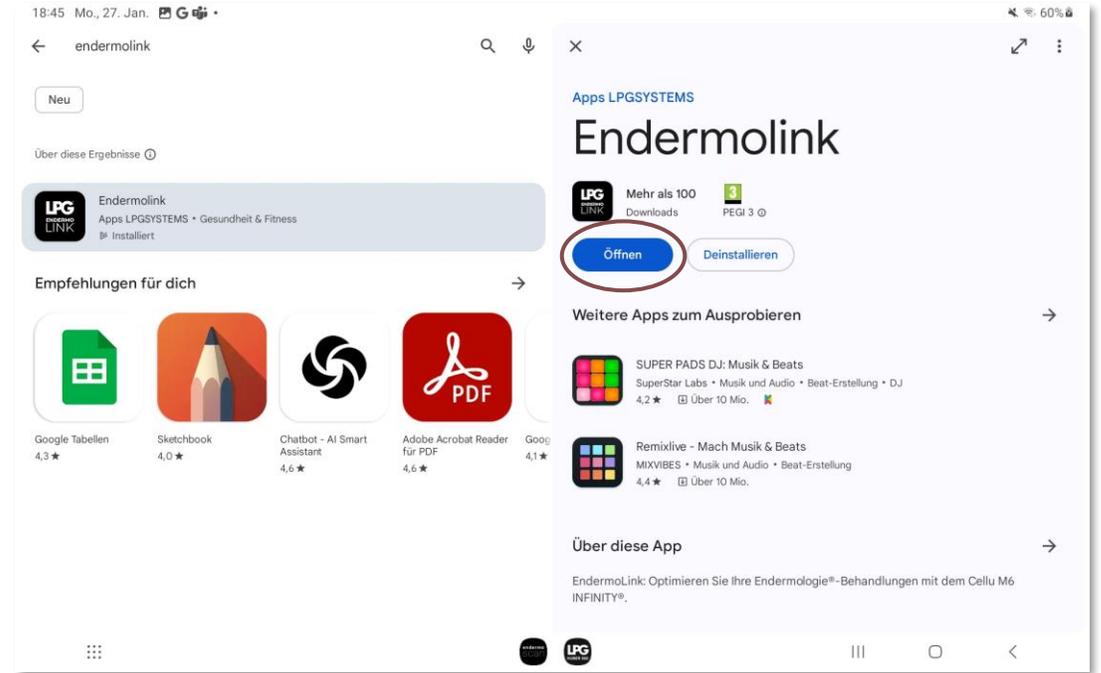

Die **Endermolink™**-App wurde erfolgreich heruntergeladen, klicken Sie auf **Öffnen**.


Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

STARTEN SIE DIE Endermolink™-App

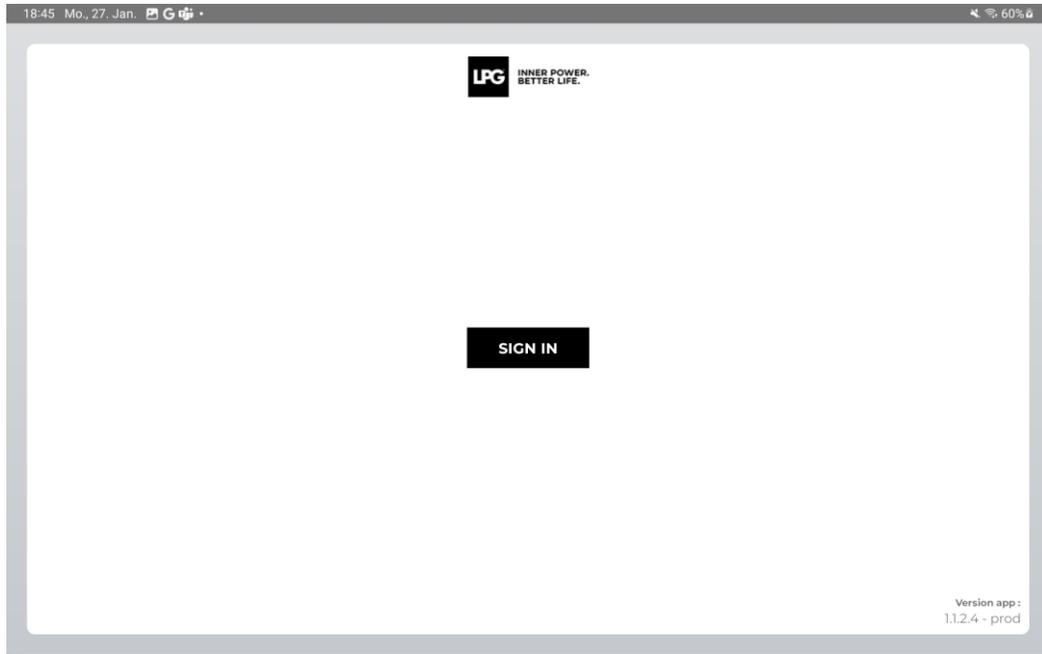


Um die Endermolink™-App zu öffnen, klicken Sie auf **SIGN IN**.

Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®


! Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf „Passwort vergessen?“ oder auf den folgenden Link:
<https://portal.lpgsystems.com/password> um Ihr Passwort zurückzusetzen.

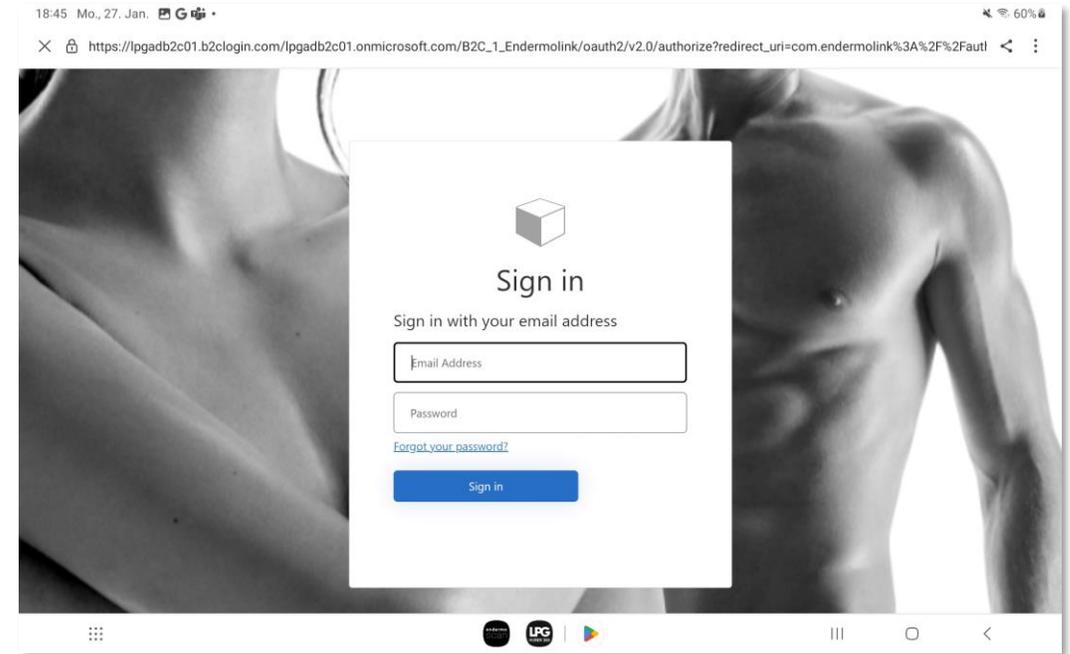


Geben Sie Ihren Benutzernamen (die mit ihrem LPG®-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort ein. Das Passwort ist entweder bereits vorhanden, wenn Sie schon Kunde bei LPG® sind, oder wurde von Ihnen selbst gewählt



STARTEN SIE DIE Endermolink™-App

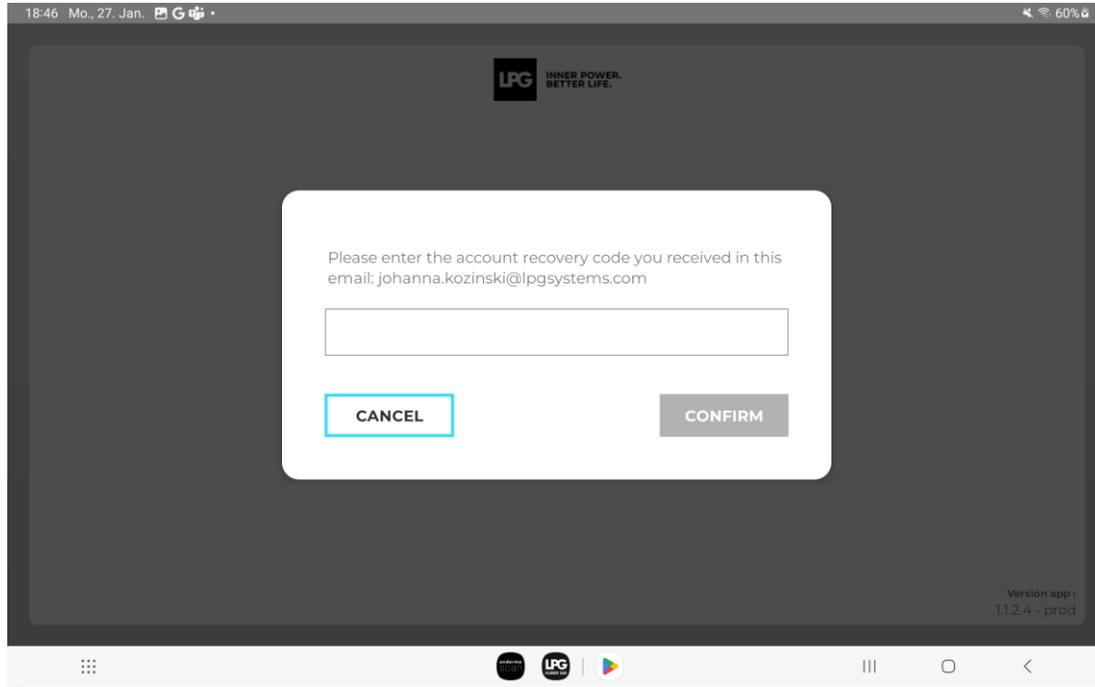

Sie erhalten per E-Mail **einen Code, um ein Konto** zu erstellen. Geben Sie den Code ein und klicken Sie auf **CONFIRM**.

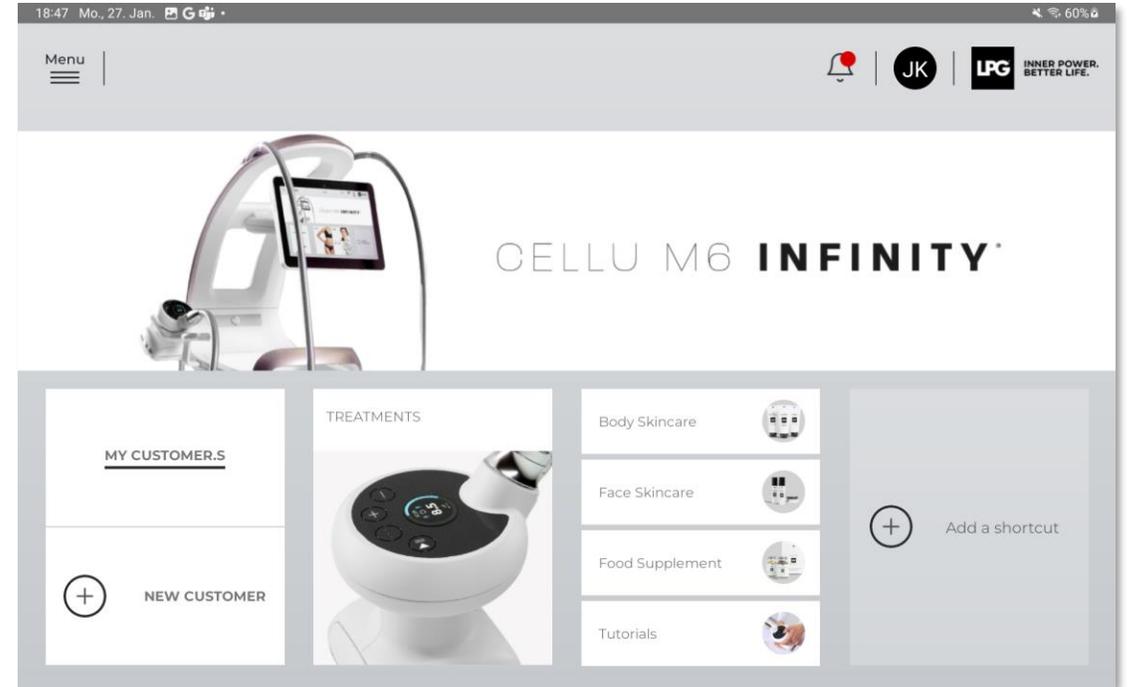

Willkommen bei der **Endermolink™-App!**
Sie können die App jetzt nutzen **und von ihren zahlreichen Vorteilen genießen.**

Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®



02

ENDERMOLINK™-APP

APPLE iOS-VERSION



Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

VERBINDEN SIE DAS TABLET MIT IHREM WLAN-NETZWERK



Starten Sie die Anwendung „**Einstellungen**“ auf dem Startbildschirm Ihres Tablets.

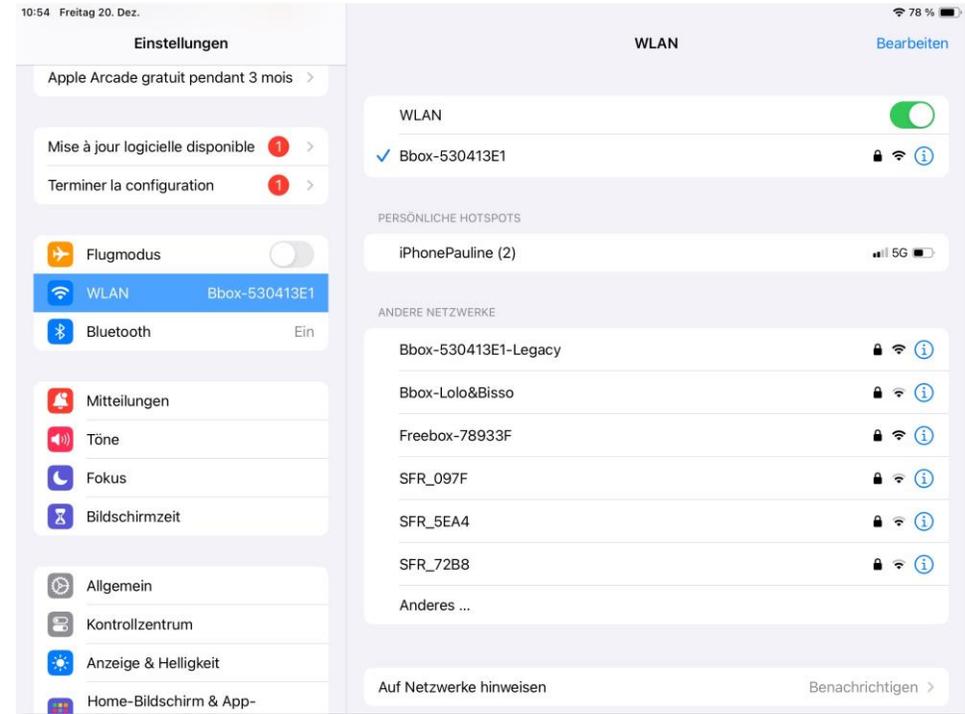


Wählen Sie den Abschnitt „**WLAN**“ und wählen Sie dann Ihr **WLAN**-Netzwerk.

DOWNLOAD DER Endermolink™ App



Starten Sie die App „**App Store**“ auf dem Startbildschirm Ihres Tablets.

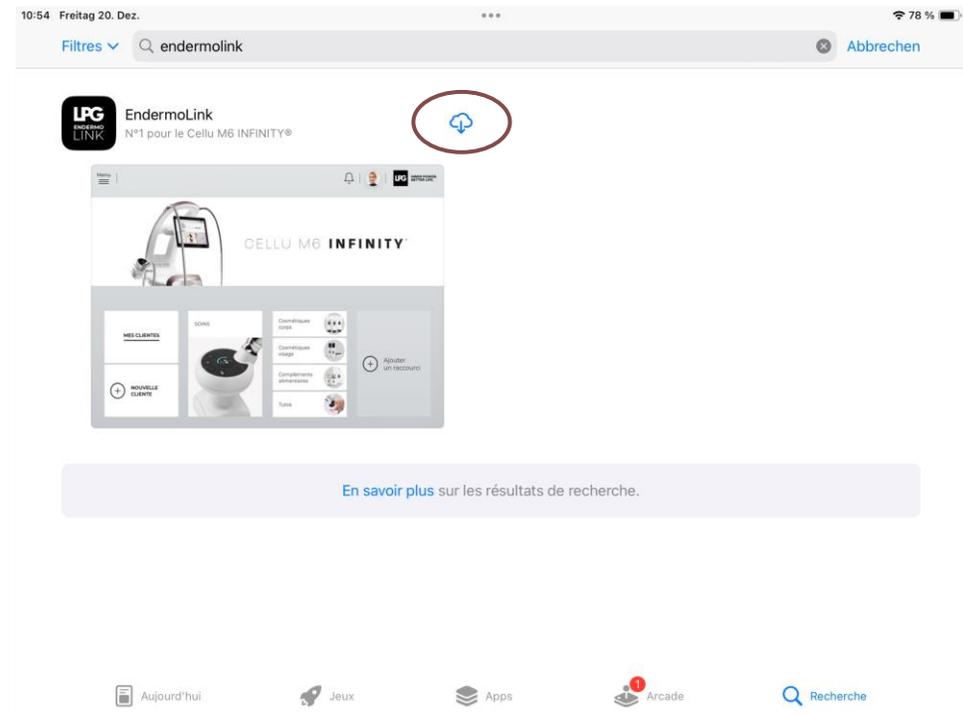

Suchen Sie in der Suchleiste nach der **Endermolink™**-App. Sobald sie angezeigt wird, **tippfen Sie darauf**


Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

DOWNLOAD DER Endermolink™ App

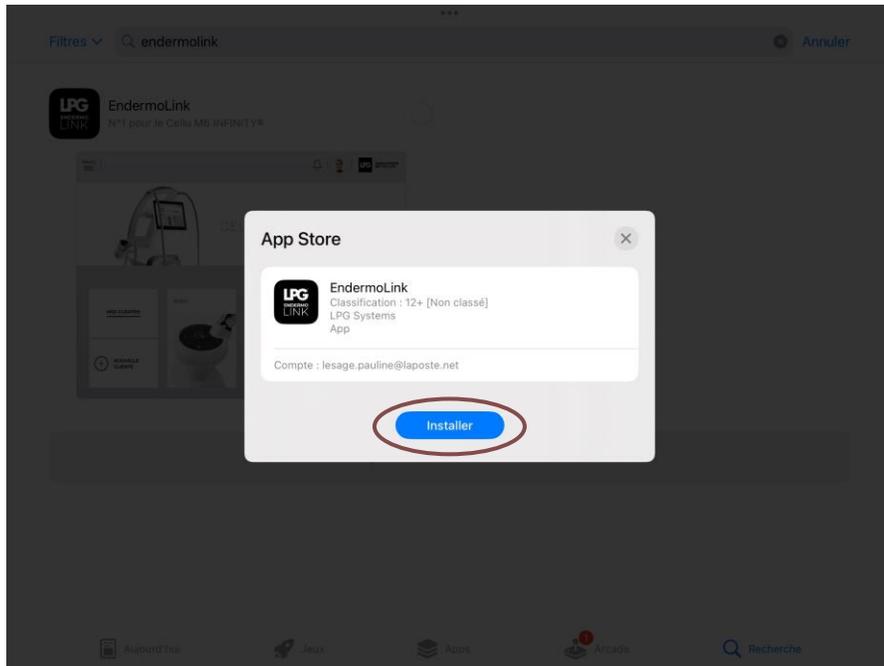


Tippen Sie dann auf **Installieren**.

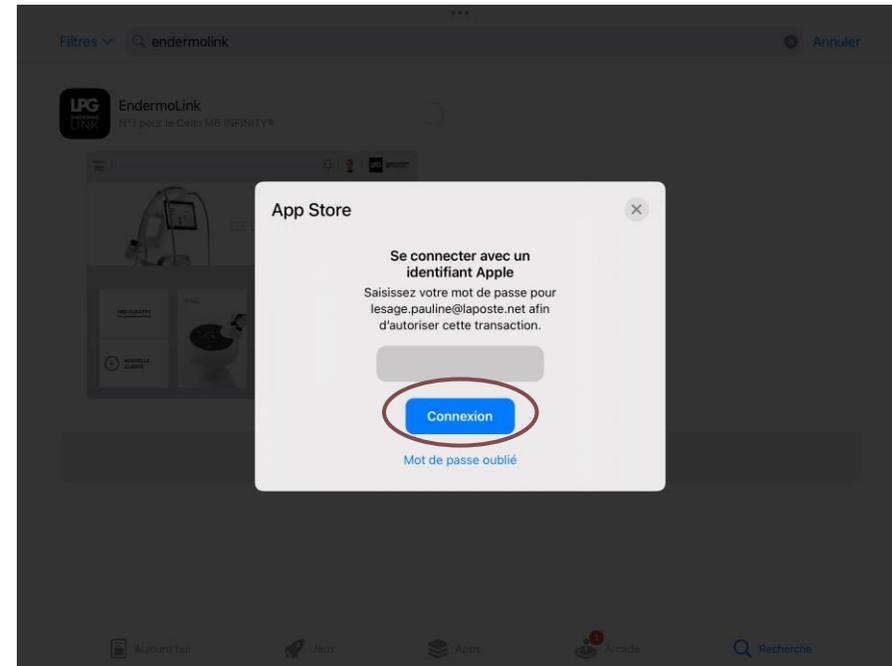


Um die App herunterzuladen, melden Sie sich bei Ihrem **Apple-Konto** an. Geben Sie Ihr **Passwort** ein und tippen Sie auf „**Verbinden**“.

DOWNLOAD DER Endermolink™ App

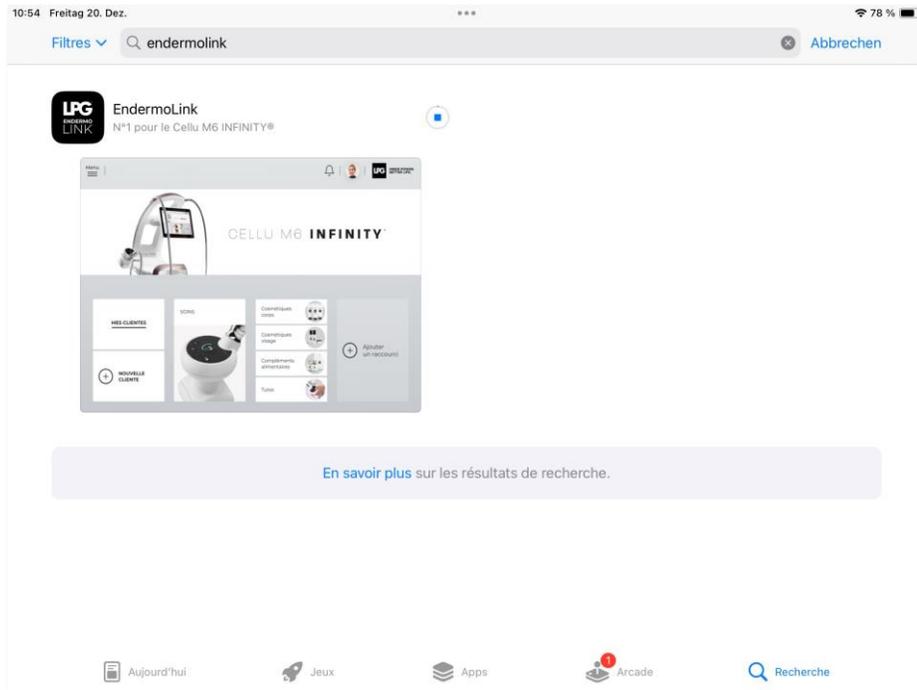

Die **Endermolink™**-App ist jetzt zum Download verfügbar.

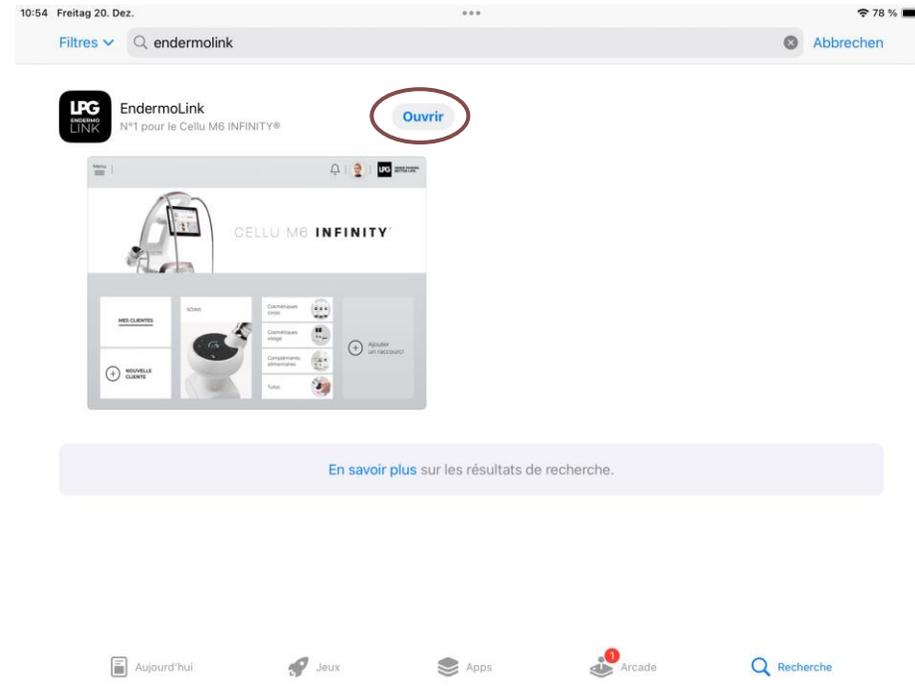

Die **Endermolink™**-App wurde heruntergeladen. Tippen Sie auf „**Öffnen**“.


Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

STARTEN SIE DIE Endermolink™-App

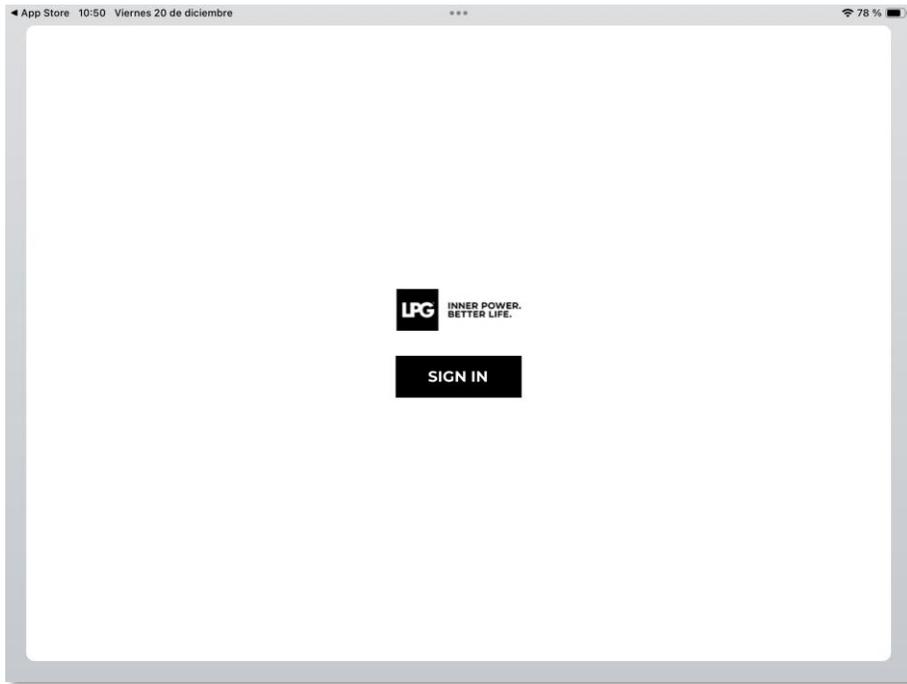


Klicken Sie auf „**SIGN IN**“, um die **Endermolink™**-App zu öffnen.

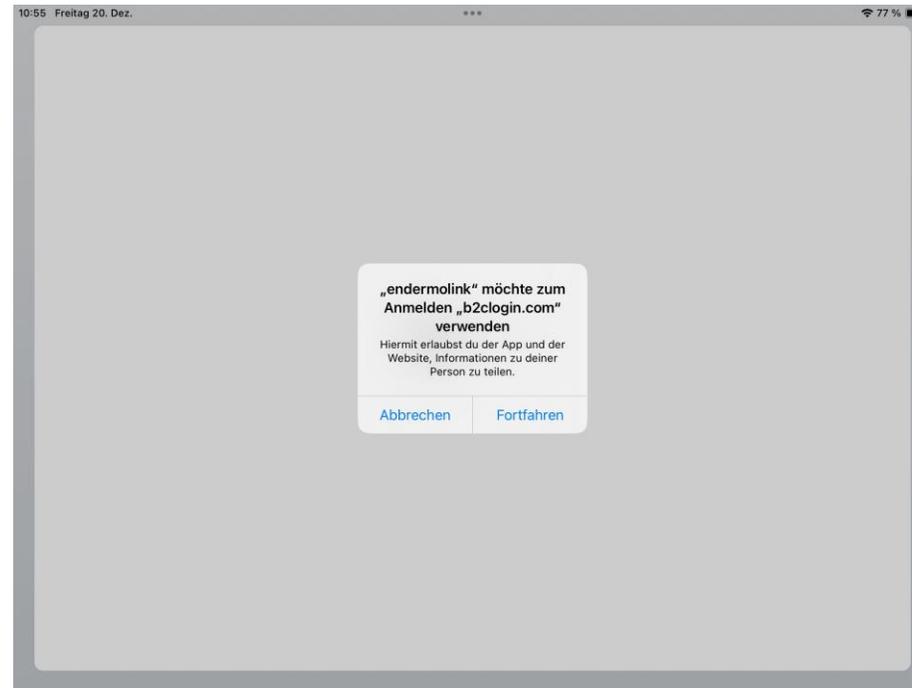

Ein **Anmelde-Pop-up** erscheint. Tippen Sie auf „**Fortfahren**“.


STARTEN SIE DIE endermolink™-Anwendung

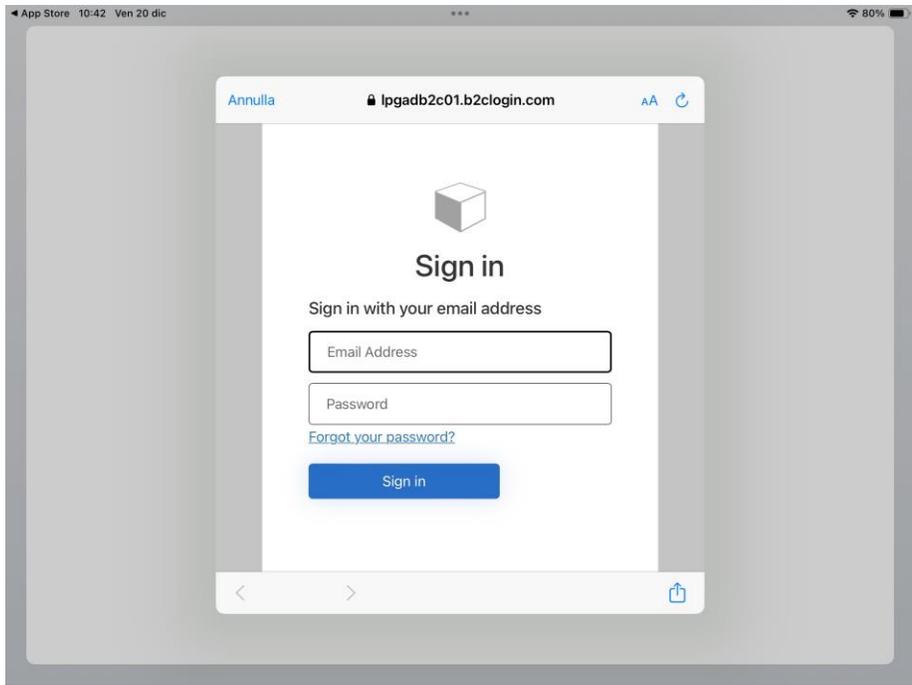

Geben Sie Ihren Benutzernamen (E-Mail-Adresse, die mit Ihrem LPG®-Konto verknüpft ist) und Ihr Passwort ein (vorhanden, wenn Sie bereits Kunde bei LPG® sind, oder selbst gewählt).

Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®

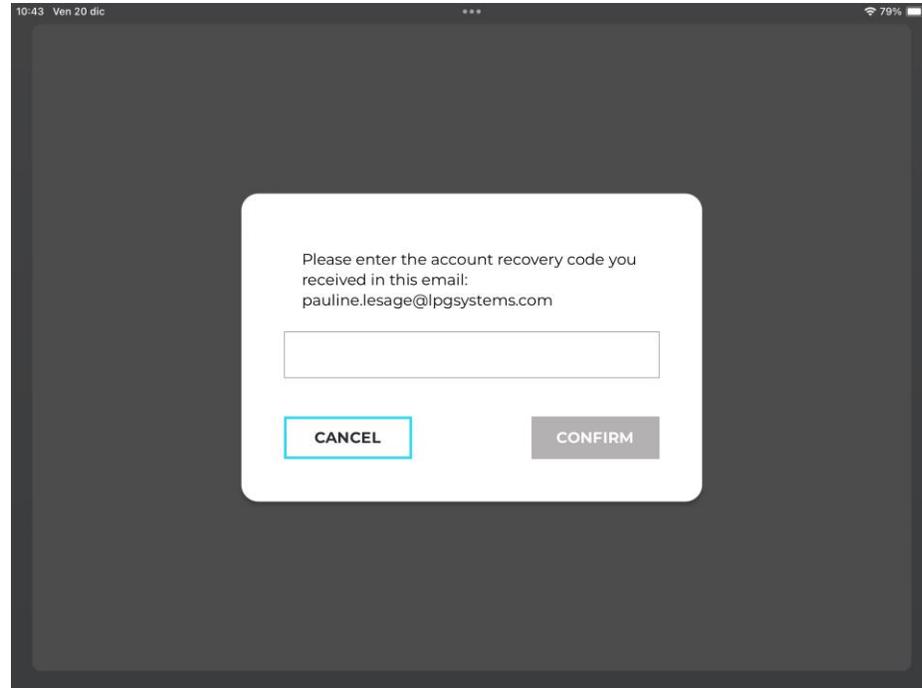


Sie erhalten per E-Mail einen Code, um ein Konto zu erstellen. Geben Sie den Code ein und klicken Sie auf **CONFIRM**.

! Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf „Passwort vergessen?“ oder auf den folgenden Link:
<https://portal.lpgsystems.com/password> um Ihr Passwort zurückzusetzen.



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

STARTEN SIE DIE Endermolink™-App

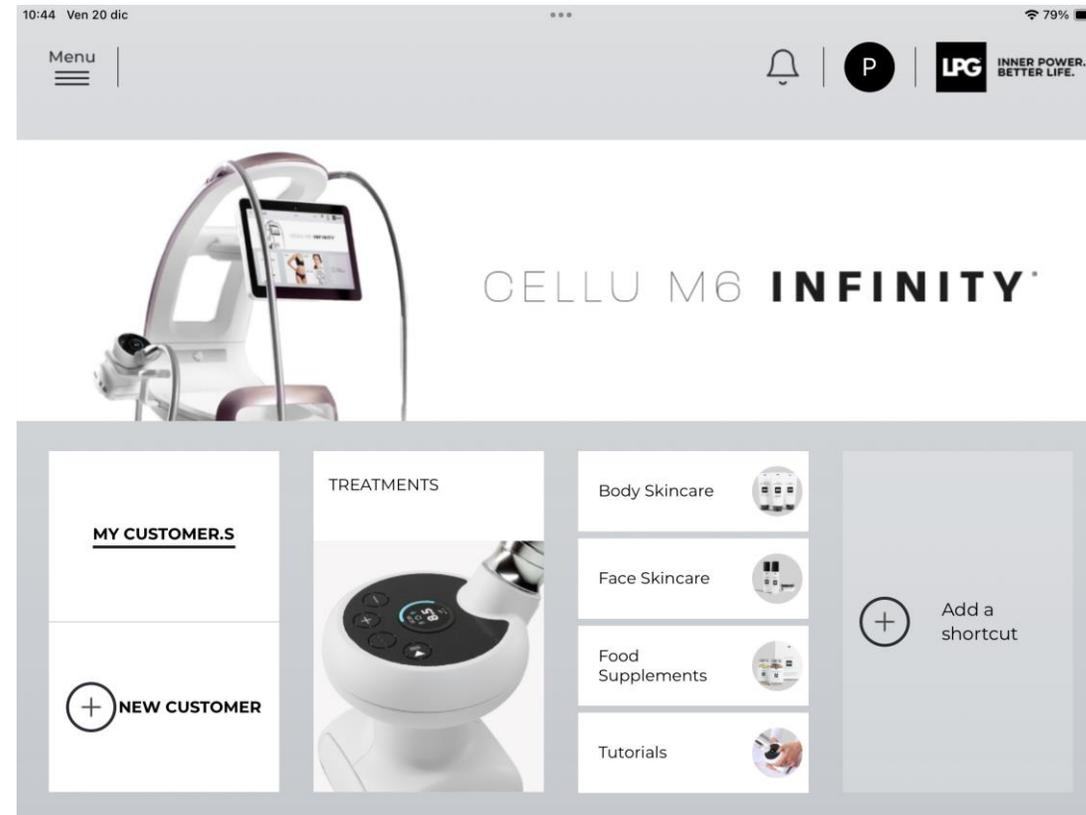

Willkommen bei der **Endermolink™-App!**
Sie können die App jetzt nutzen **und von ihren zahlreichen Vorteilen genießen.**

Endermolink™-App

Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

LPG[®]

**INNER POWER.
BETTER LIFE.**