



ENDERMOLINK™ INSTALLATIEGIDS

CELLU M6 INFINITY®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT ENDERMOLINK™

MINIMAAL VEREISTE SOFTWAREVERSIES:

- iOS: **iOS 17**
- Android: **Android 12**

Eerdere versies kunnen de gebruikerservaring beperken en de toegang tot bepaalde functies beperken. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van updates naar Android 12 per fabrikant en model kan verschillen.

We raden je aan de specificaties van elk apparaat te controleren of de fabrikant te raadplegen om de compatibiliteit te bevestigen.

01

ENDERMOLINK™ TOEPASSING

ANDROID-VERSIE



endermolink™ toepassing


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

SLUIT DE TABLET AAN OP UW WI-FI NETWERK

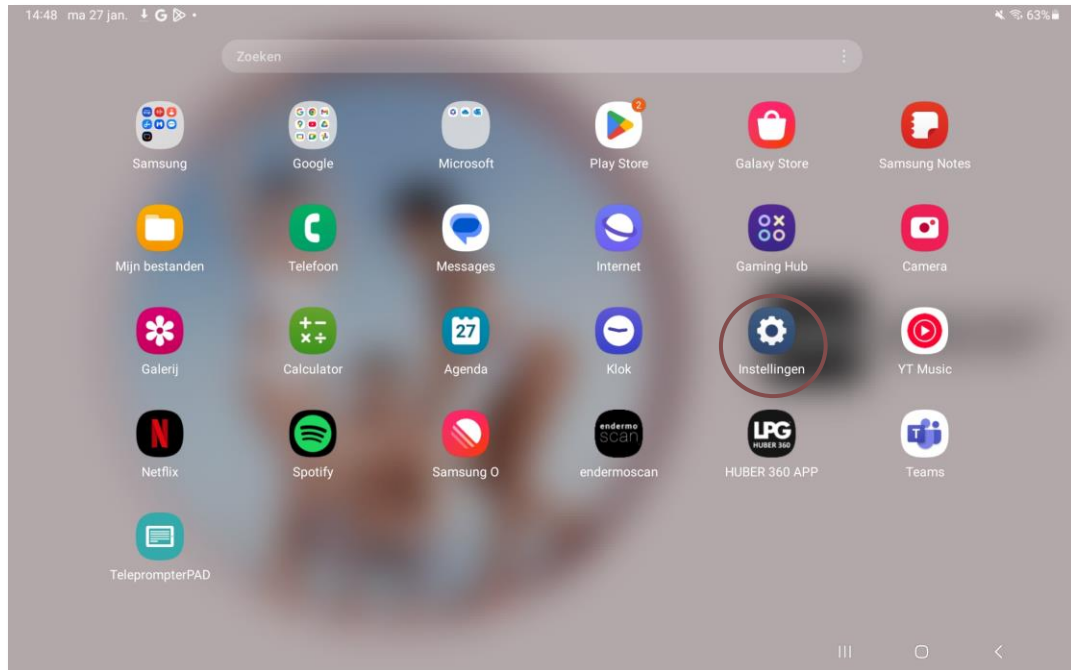


Start de toepassing "**Instellingen**" die beschikbaar is op het beginscherm van uw tablet.

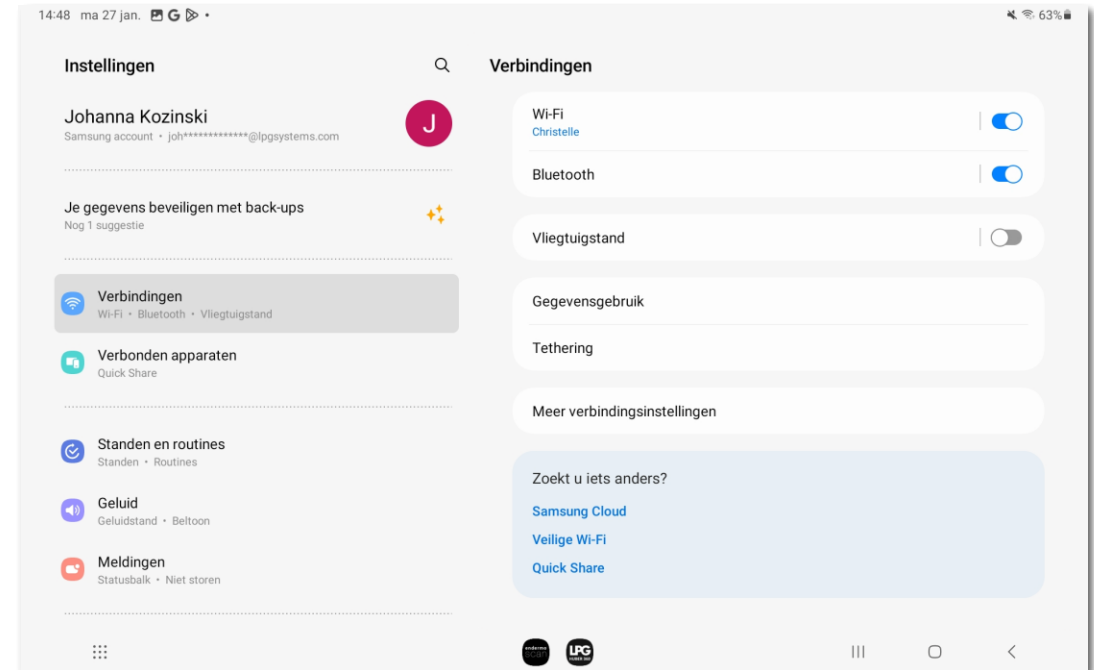


Selecteer de sectie "**Verbindingen**" en klik vervolgens op "**WI-FI**". Selecteer uw **WI-FI**-netwerk.

TOEGANG TOT PLAY STORE AANMELDEN BIJ JE GOOGLE-ACCOUNT

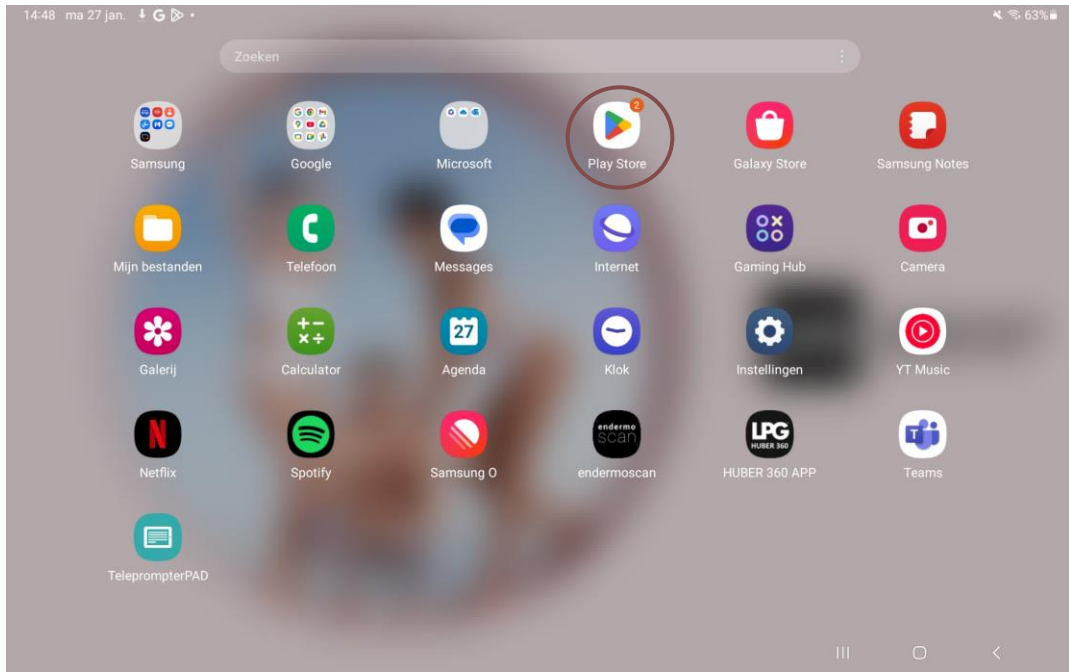


Start vervolgens de applicatie "**Play Store**" op het beginscherm van uw tablet.

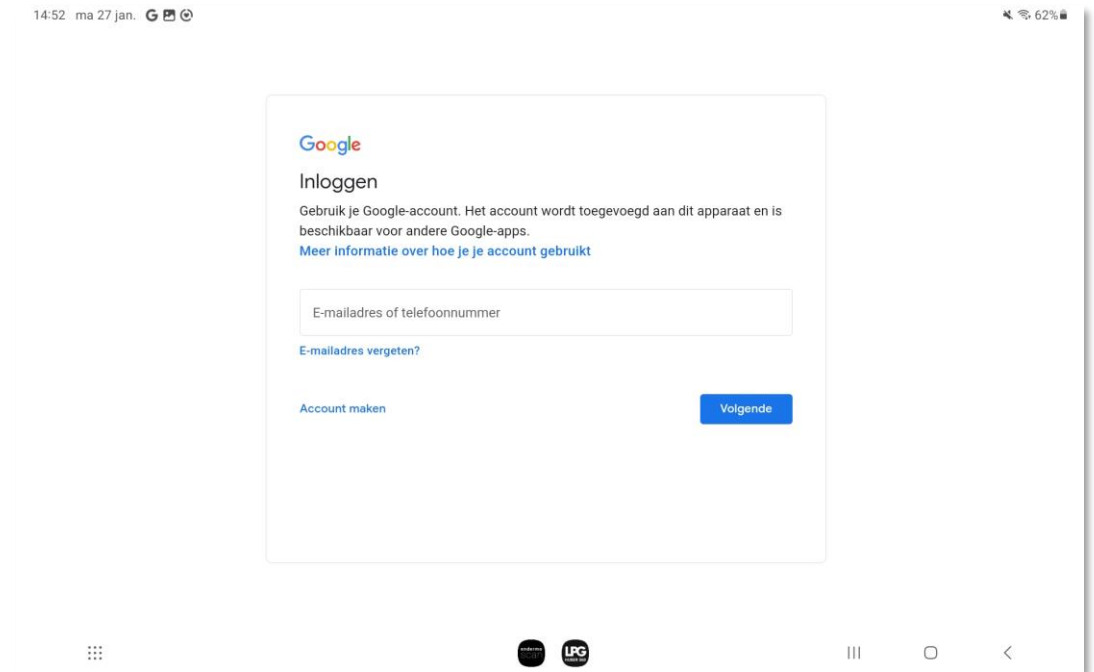


Meld je aan bij je **Google-account**. Voer **je gebruikersnaam** (persoonlijk e-mailadres) en wachtwoord in.

TOEGANG TOT PLAY STORE AANMELDEN BIJ JE GOOGLE-ACCOUNT

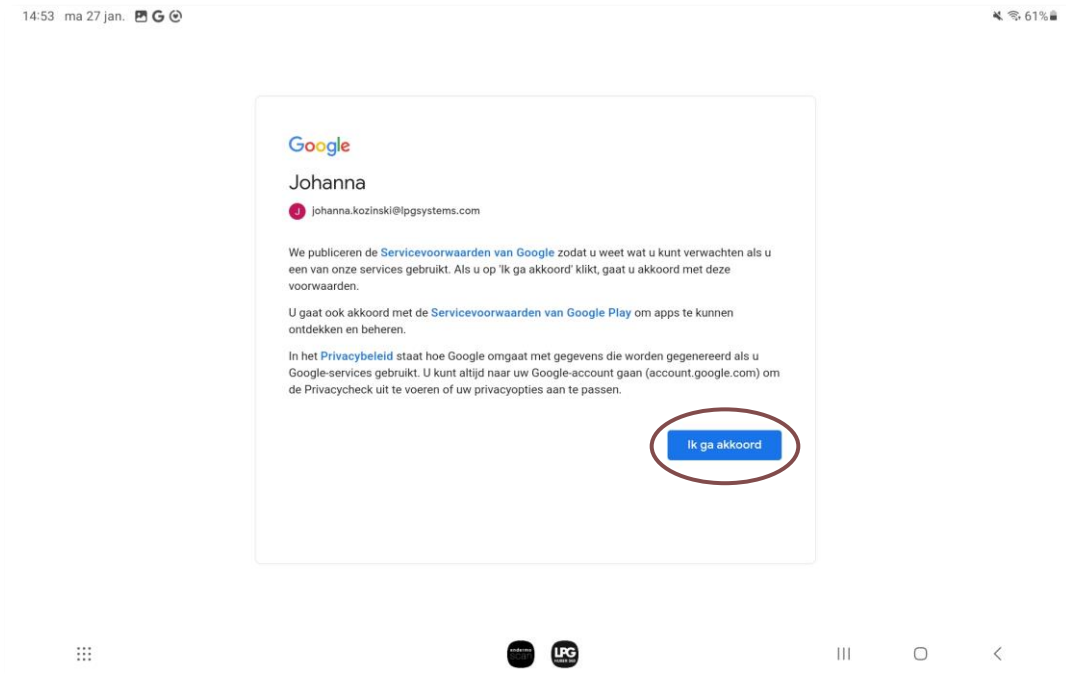


U kunt de gegevens op uw apparaat opslaan door op **Ik ga akkoord** te klikken.

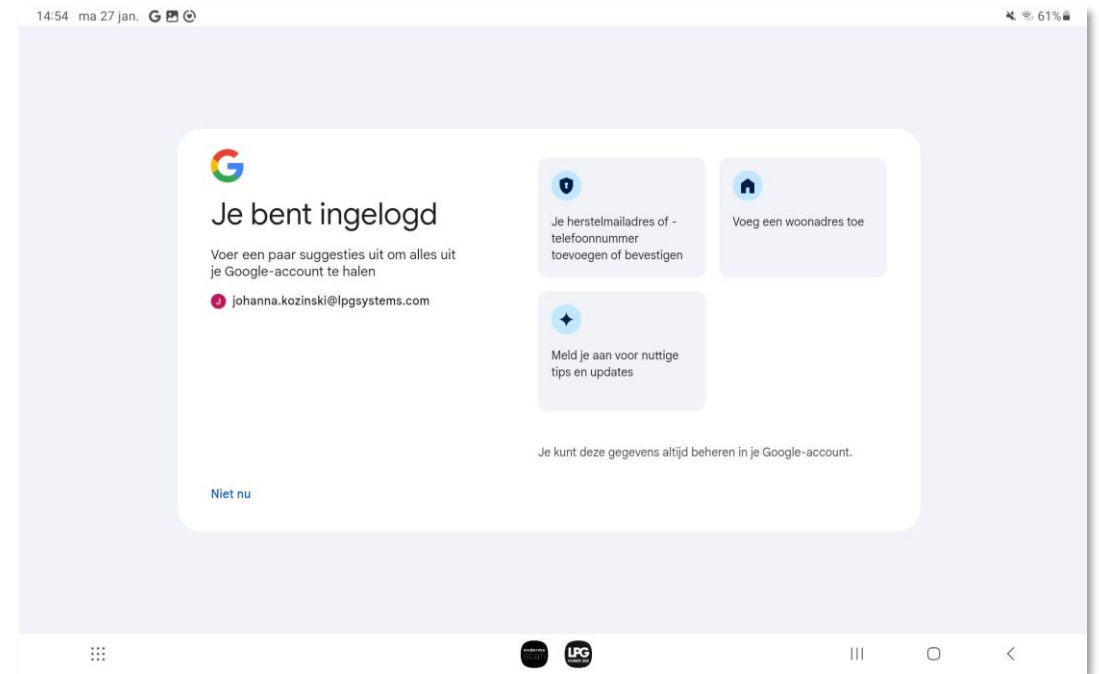


Je bent nu **ingelogd**.

DOWNLOAD DE endermolink™ toepassing

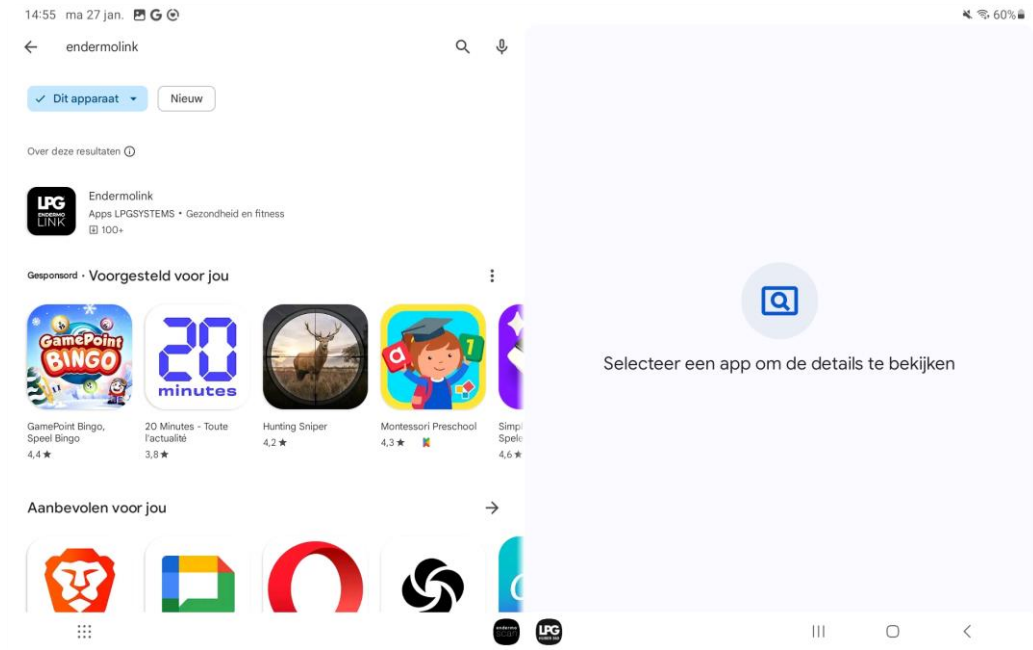

Start een zoekopdracht naar de **Endermolink™**-app in de **zoekbalk van Play Store**.

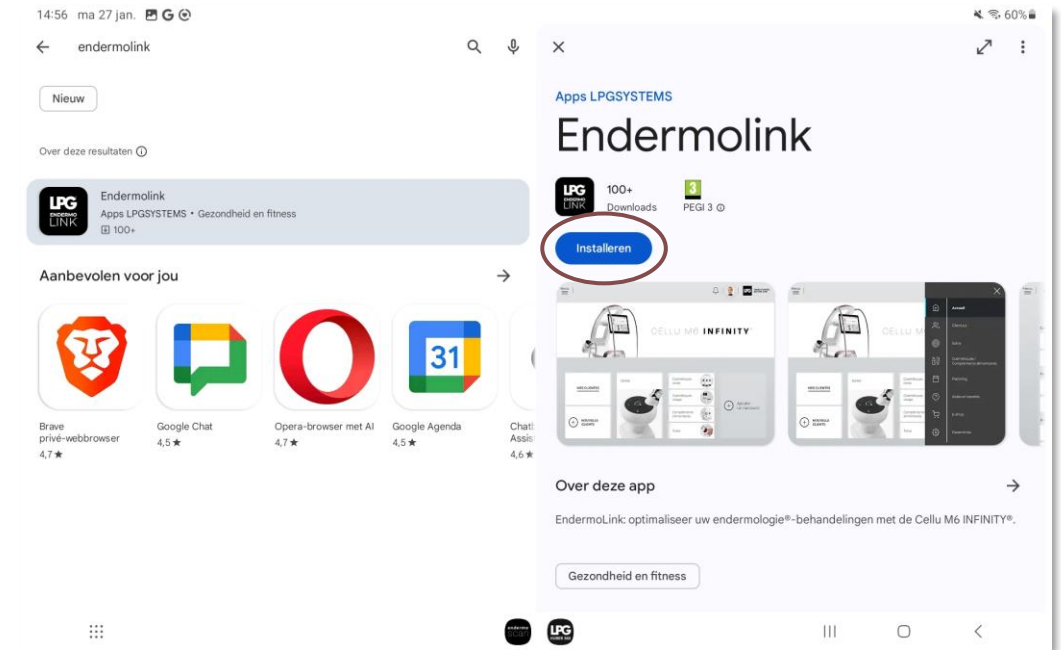


De **Endermolink™**-app verschijnt, klik op **Installeren**.


endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®

DOWNLOAD DE endermolink™ toepassing

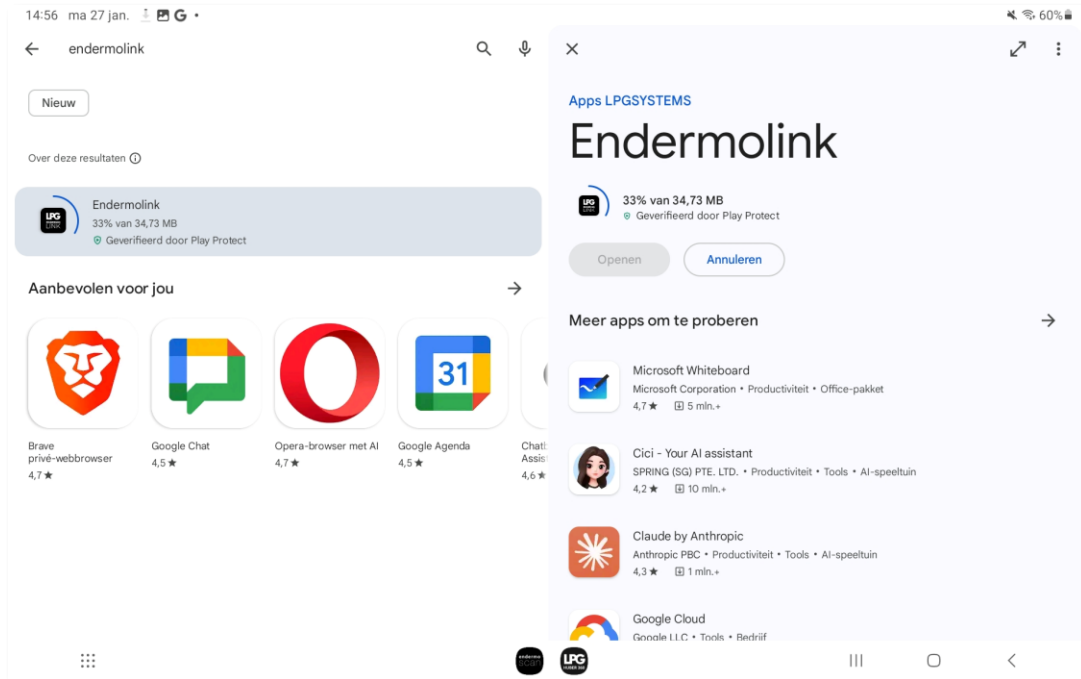


De **Endermolink™**-app wordt gedownload.

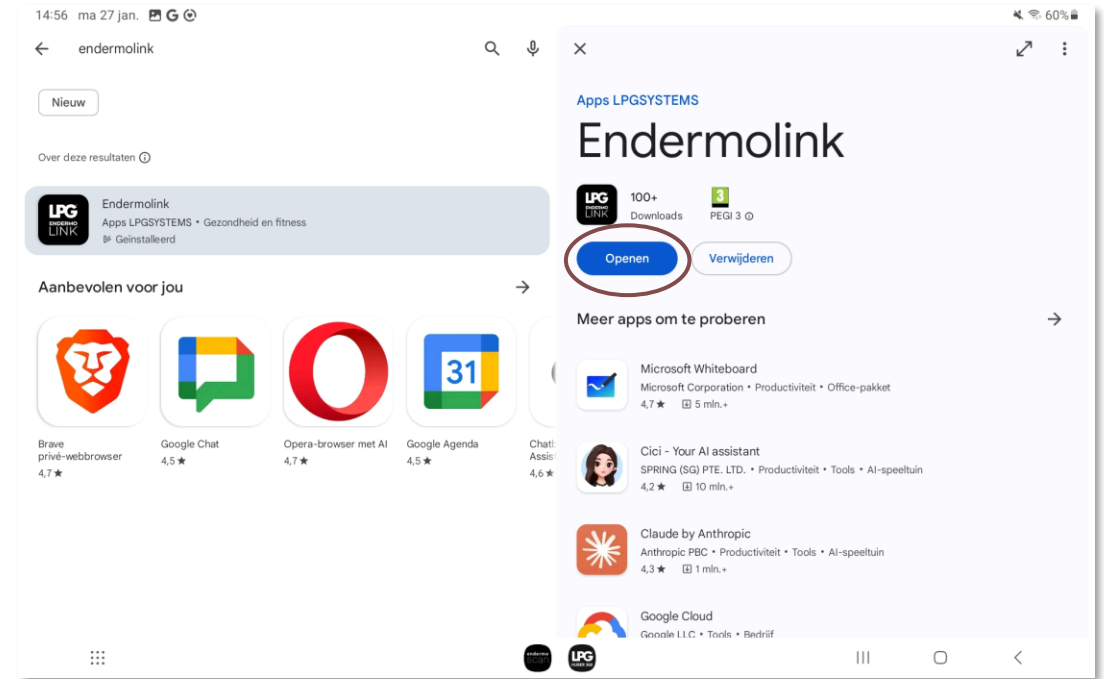


De **Endermolink™**-app is nu gedownload, klik op **Openen**.

START DE endermolink™ toepassing

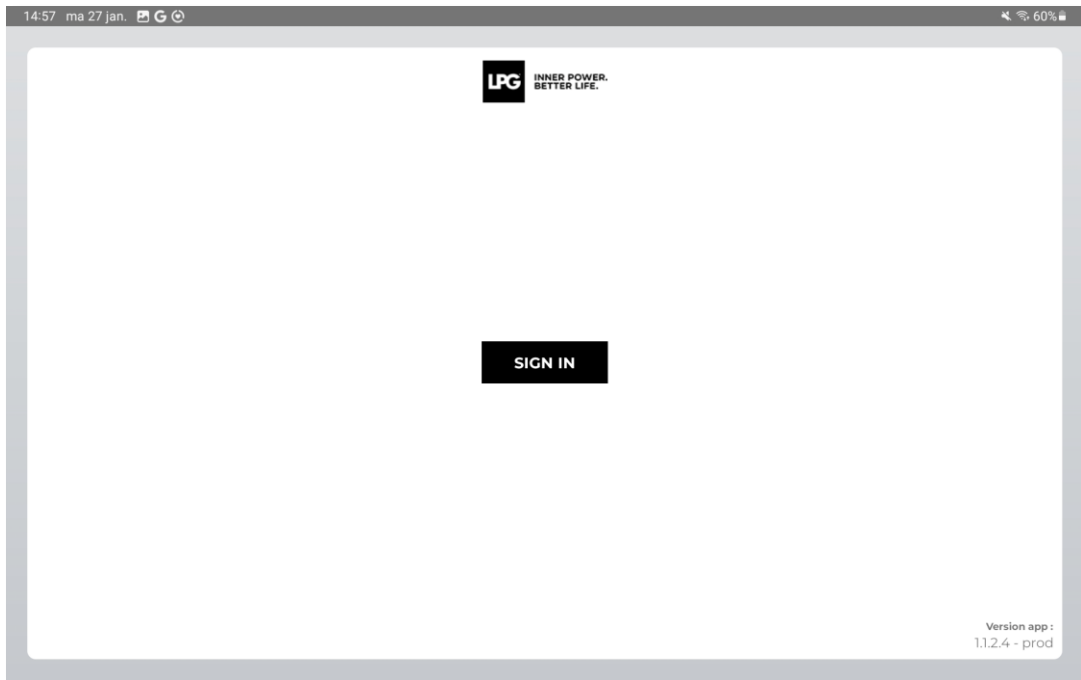

Klik op AANMELDEN (SIGN IN) om de **Endermolink™**-toepassing te starten..

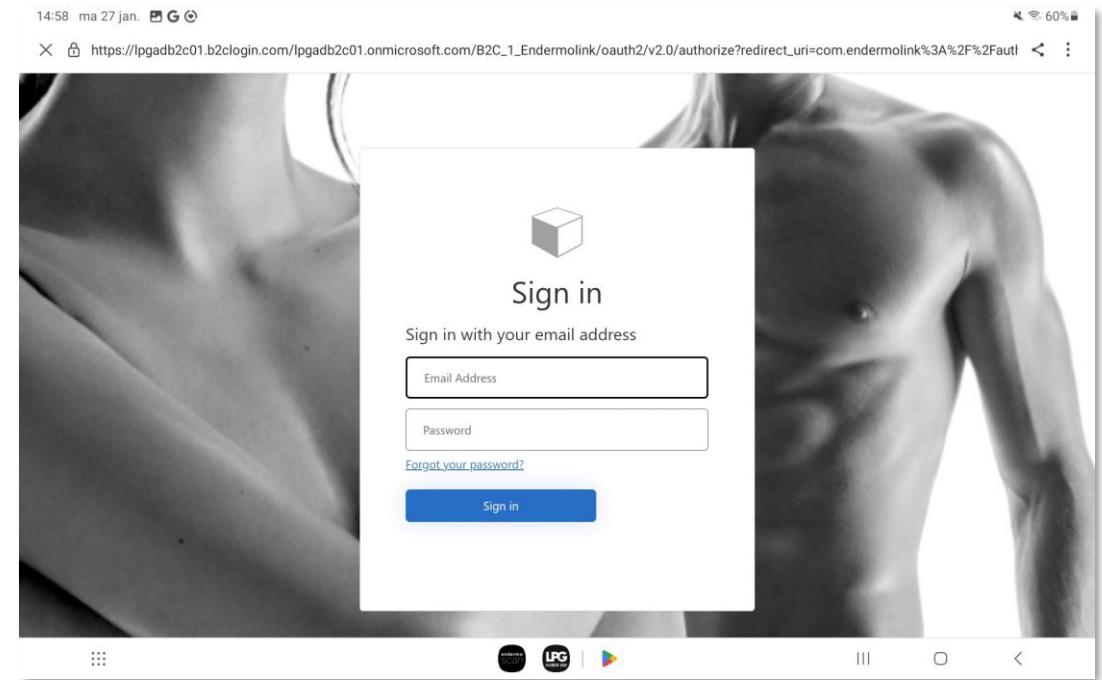

Voer uw gebruikersnaam (e-mailadres gekoppeld aan uw LPG® account) en wachtwoord in (bestaand als u al klant bent van LPG® of zelf gekozen).


endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®


! Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan op "Wachtwoord vergeten?" of op de volgende link: **<https://portal.lpgsystems.com/password>** uw wachtwoord opnieuw in te stellen.



START DE endermolink™ toepassing

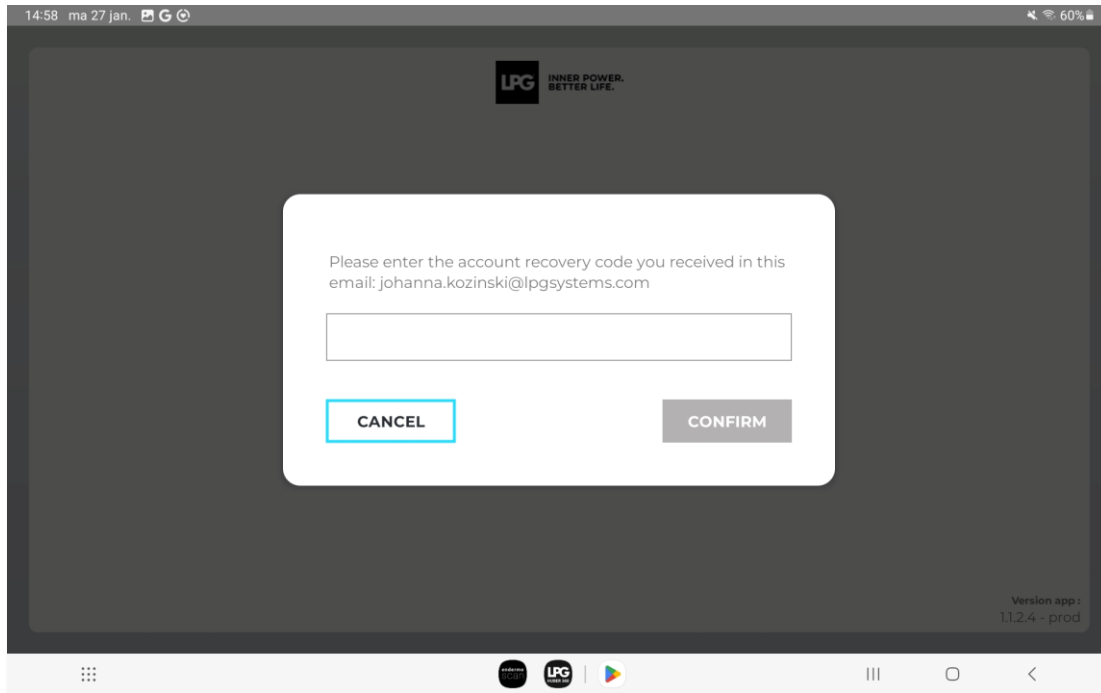

Je ontvangt per e-mail **een code om een account** aan te maken. Voer de code in en klik op **CONFIRM**.

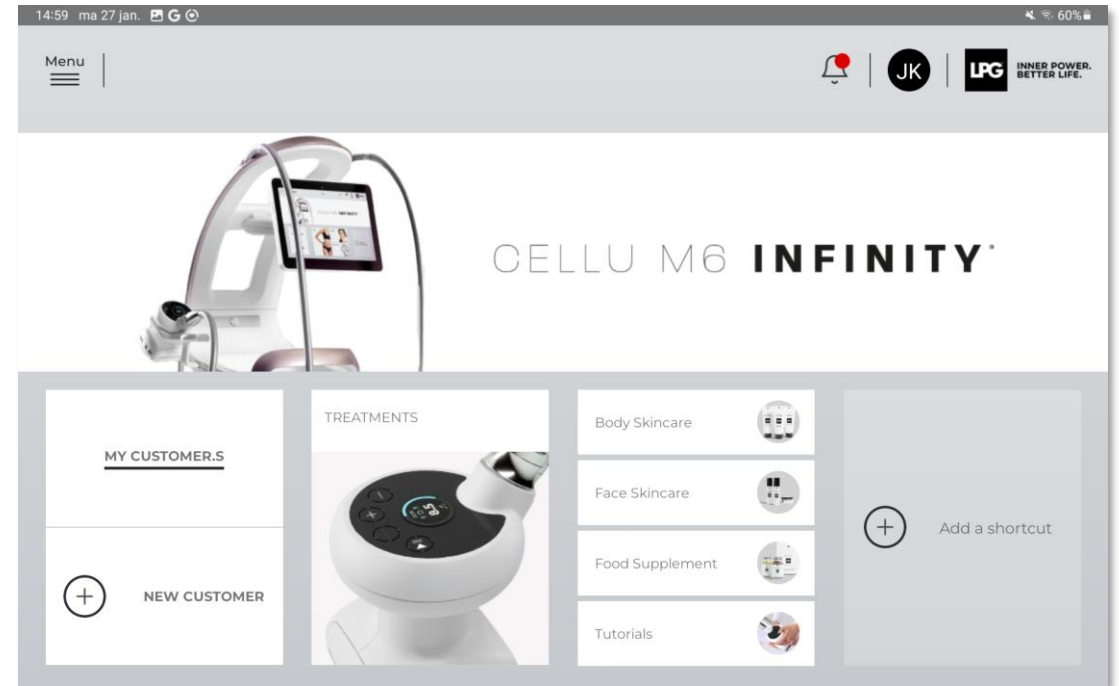

Welkom bij de **Endermolink™-applicatie!**
Je kunt de applicatie nu gebruiken en **genieten van de vele voordelen.**

endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®



02

ENDERMOLINK™ TOEPASSING

iOS APPLE-VERSIE



endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

SLUIT DE TABLET AAN OP UW WI-FI NETWERK



Start de toepassing "**Instellingen**" op het beginscherm van uw tablet.

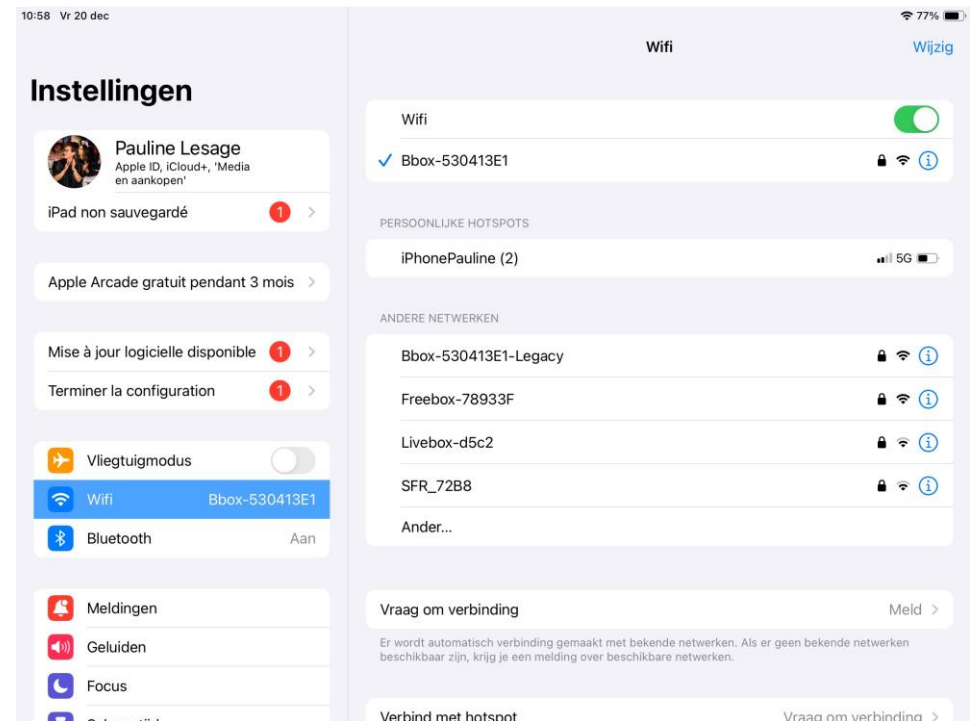

Selecteer de sectie "**WI-FI**" en kies vervolgens uw **WI-FI**-netwerk.


DOWNLOAD DE endermolink™ toepassing



Start de toepassing "**App Store**" op het beginscherm van uw tablet.

endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®

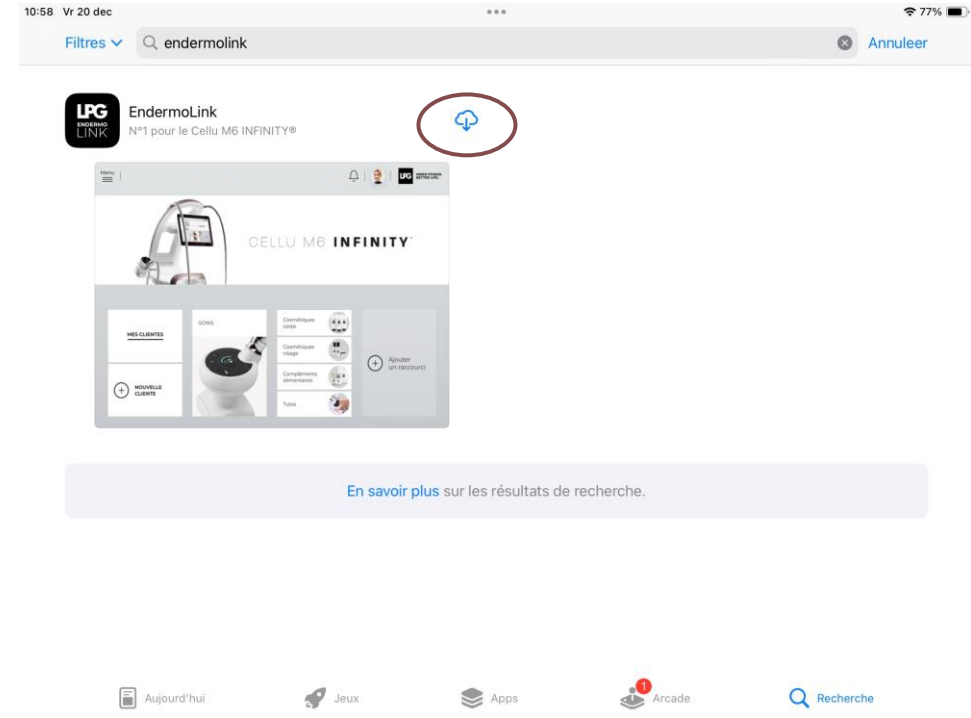


Zoek naar de **Endermolink™**-toepassing in de zoekbalk.

Wanneer deze verschijnt, **klik erop.**




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

DOWNLOAD DE endermolink™ toepassing

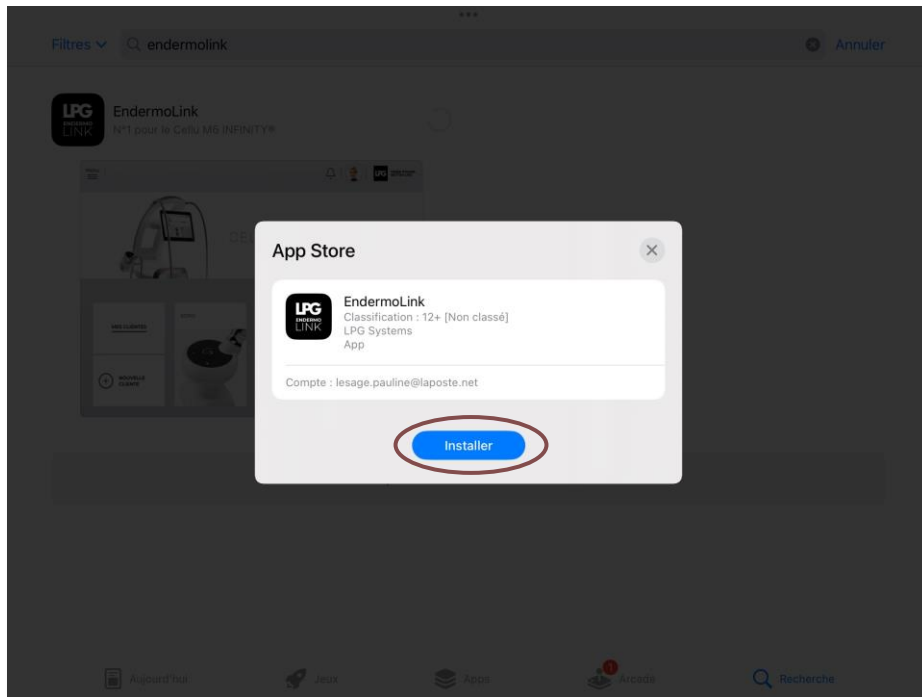

Klik vervolgens op **Installeren**.

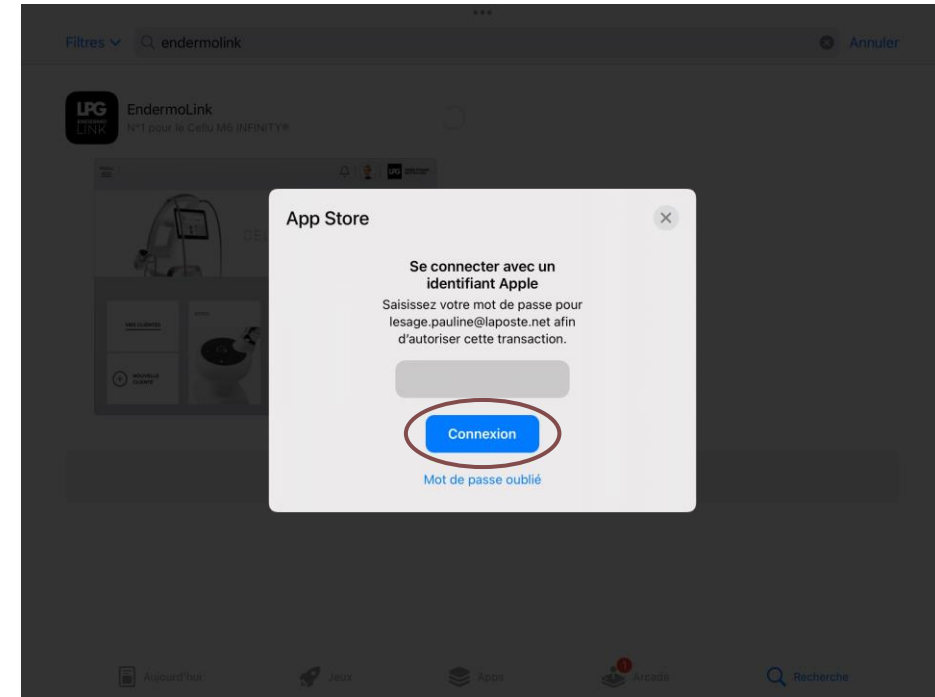


Om de applicatie te downloaden, meld je je aan bij **je Apple account**. Voer je **wachtwoord** in en klik op **Verbinding** maken.


endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®

DOWNLOAD DE endermolink™ toepassing

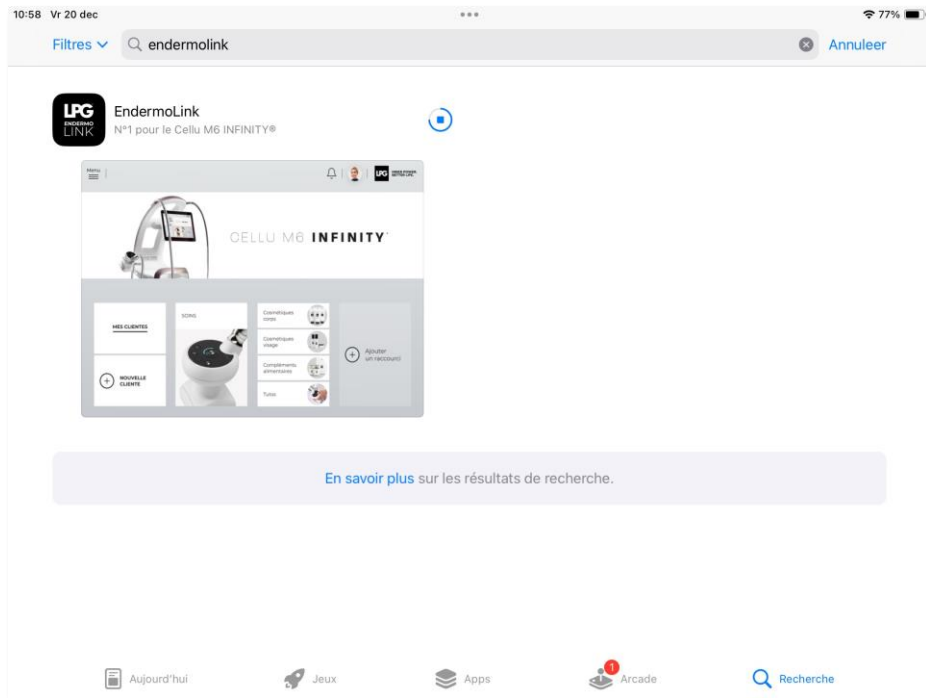

De **Endermolink™**-app is nu te downloaden.

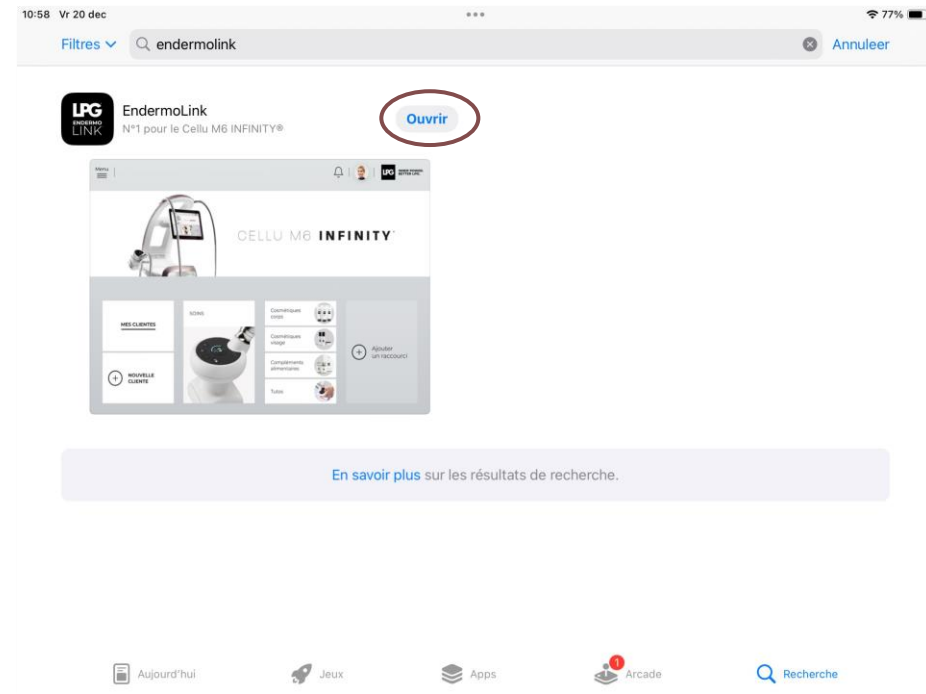

De **Endermolink™**-toepassing is gedownload,
klik op **Openen**.


endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

START DE endermolink™ toepassing

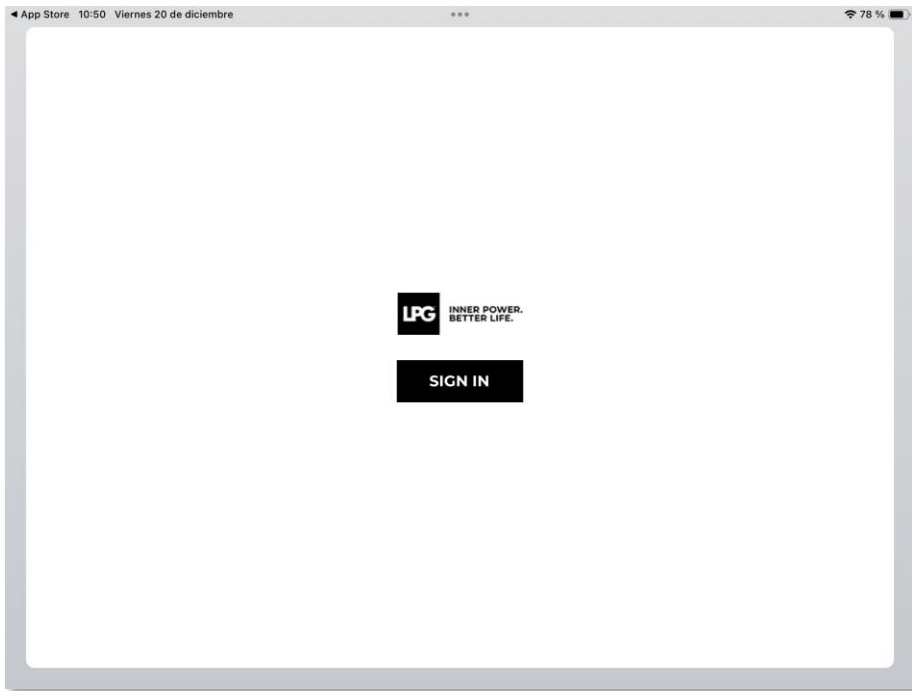

Klik op **SIGN IN** om de **Endermolink™**-toepassing te openen.

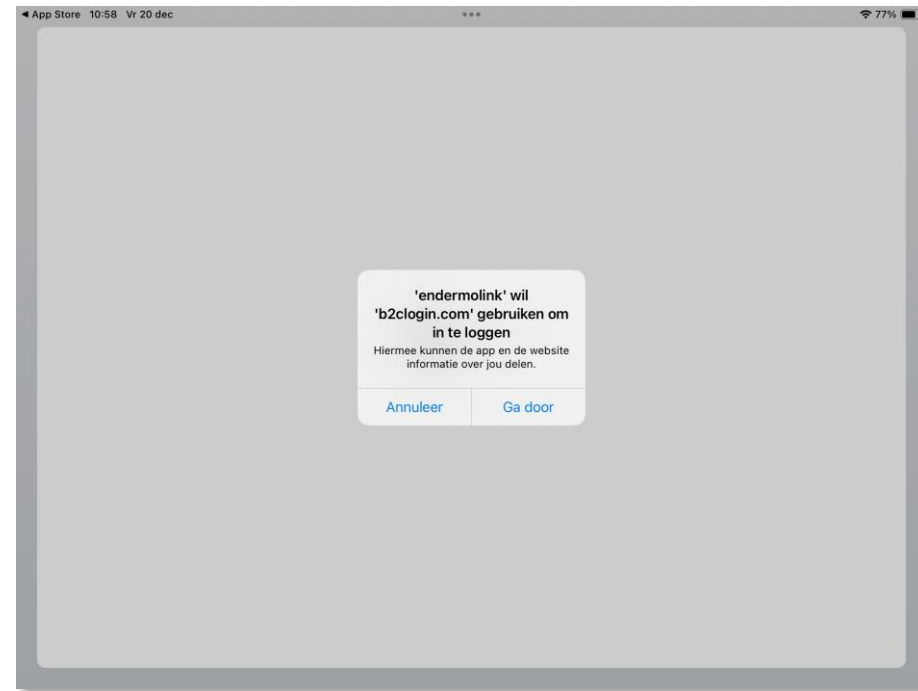

Er verschijnt een **login pop-up**, klik op **Ga door**.


endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®



INNER POWER.
BETTER LIFE.


START DE endermolink™ toepassing

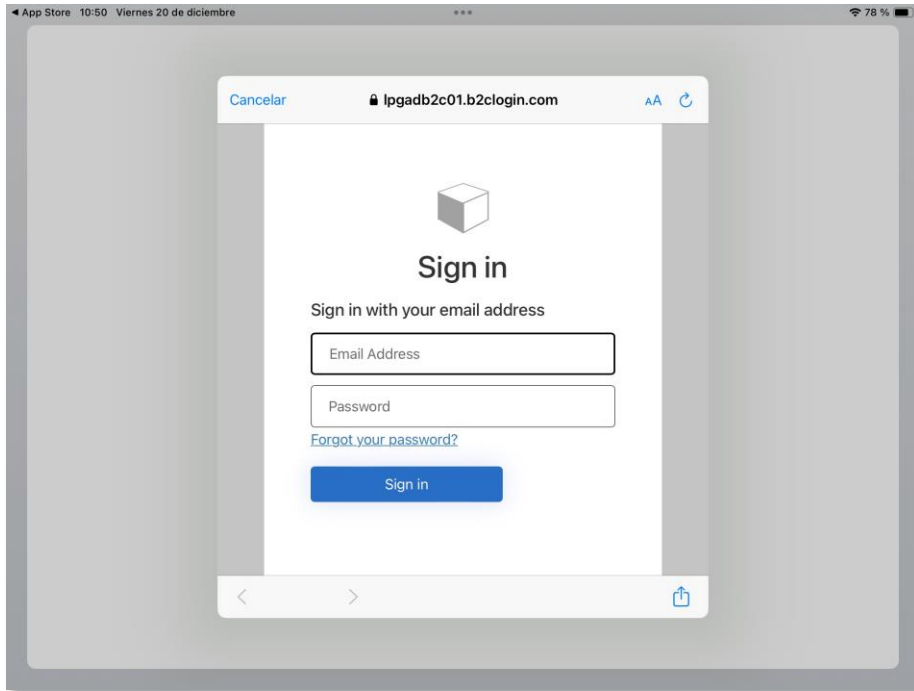

Voer uw gebruikersnaam (e-mailadres gekoppeld aan uw LPG® account) en wachtwoord in (bestaand als u al klant bent van LPG® of zelf gekozen).

endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®

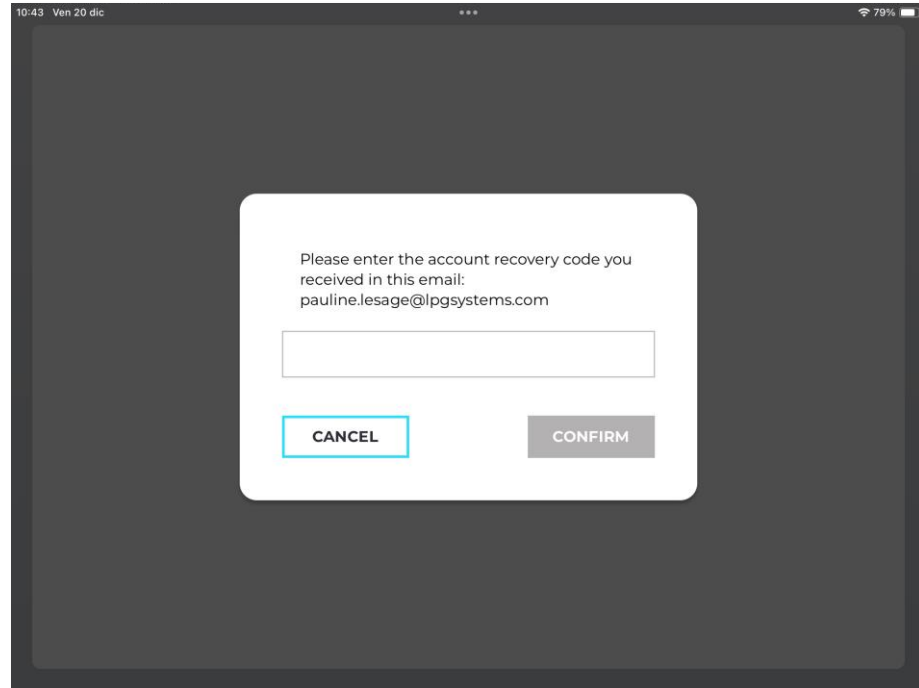


Je ontvangt per e-mail een code om een account aan te maken. Voer de code in en klik op **CONFIRM**.

! Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan op "Wachtwoord vergeten?" of op de volgende link: **<https://portal.lpgsystems.com/password>** uw wachtwoord opnieuw in te stellen.



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

START DE endermolink™ toepassing

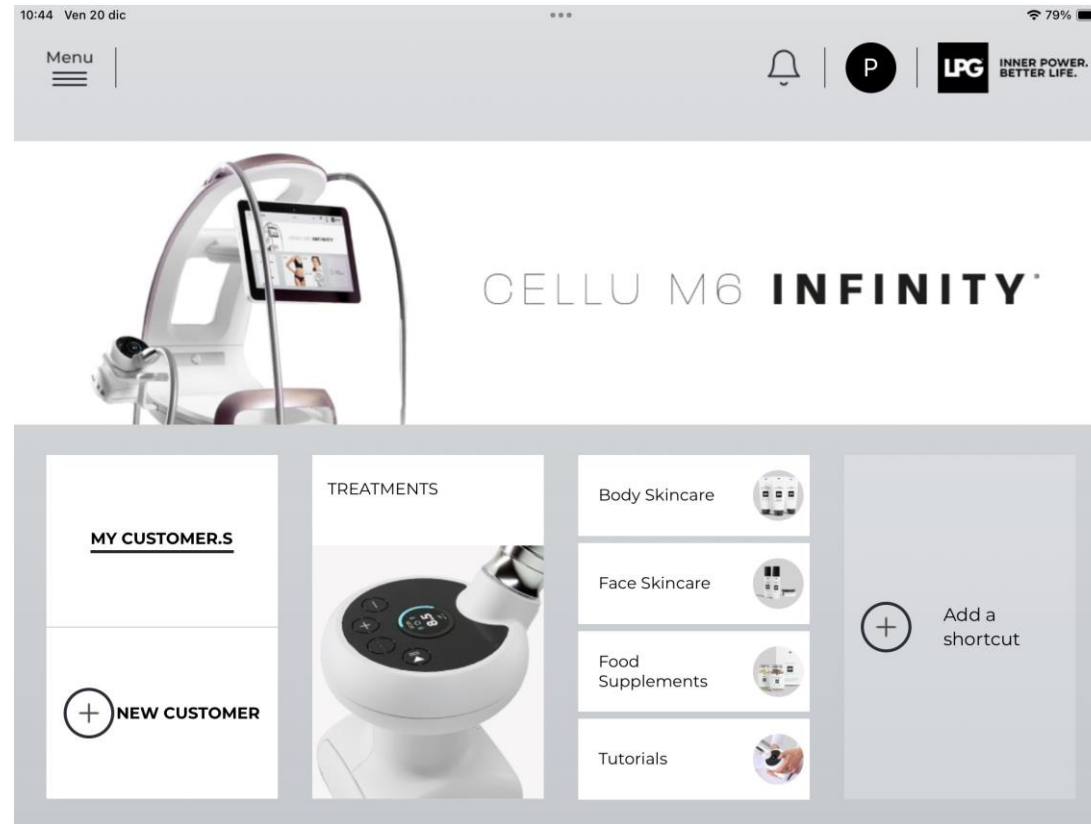

Welkom bij de **Endermolink™-applicatie!**
Je kunt de applicatie nu gebruiken en **genieten van de vele voordelen.**

endermolink™ toepassing

Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**



**BEDANKT VOOR UW
AANDACHT**

LPG[®]

**INNER POWER.
BETTER LIFE.**