



ENDERMOLINK™ GUÍA DE INSTALACIÓN

CELLU M6 INFINITY®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

COMPATIBILIDAD DE APLICACIONES ENDERMOLINK™

VERSIONES MÍNIMAS DE SOFTWARE NECESARIAS :

- ✓ iOS : **iOS 17**
- ✓ Android : **Android 12**

Las versiones anteriores pueden limitar la experiencia del usuario y restringir el acceso a determinadas funciones. Tenga en cuenta que la disponibilidad de las actualizaciones a Android 12 puede variar según el fabricante y el modelo.

Te recomendamos que compruebes las especificaciones de cada dispositivo o consultes al fabricante para confirmar la compatibilidad.

01

APLICACIÓN
ENDERMOLINK™

VERSIÓN ANDROID



Aplicación endermolink™


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

CONECTE LA TABLET A LA RED WI-FI

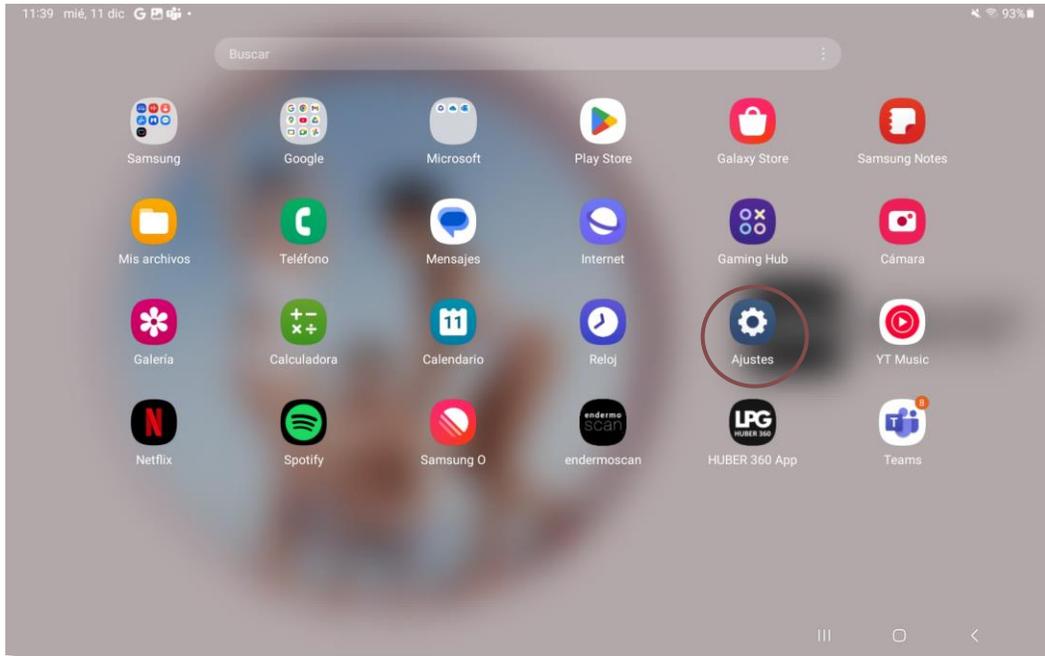


Inicie la aplicación "**Ajustes**" disponible en la pantalla de inicio de la tablet.

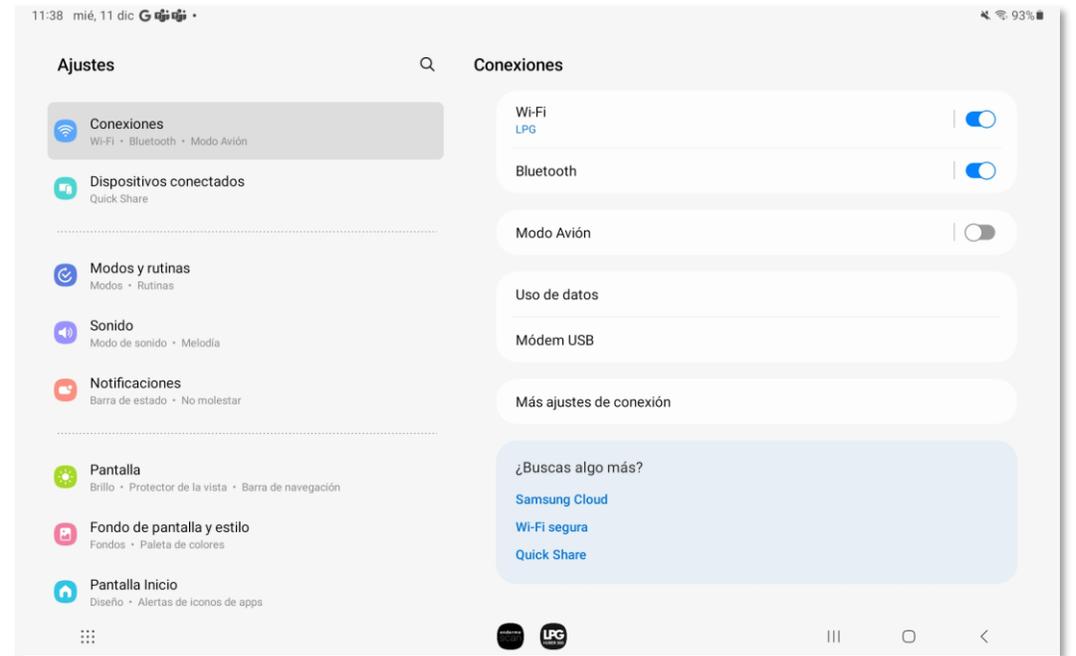


Seleccione la sección "**Conexiones**" y, a continuación, haga clic en "**WI-FI**". Seleccione la red **WI-FI**.

ACCEDER A PLAY STORE INICIANDO SESIÓN EN TU CUENTA DE GOOGLE

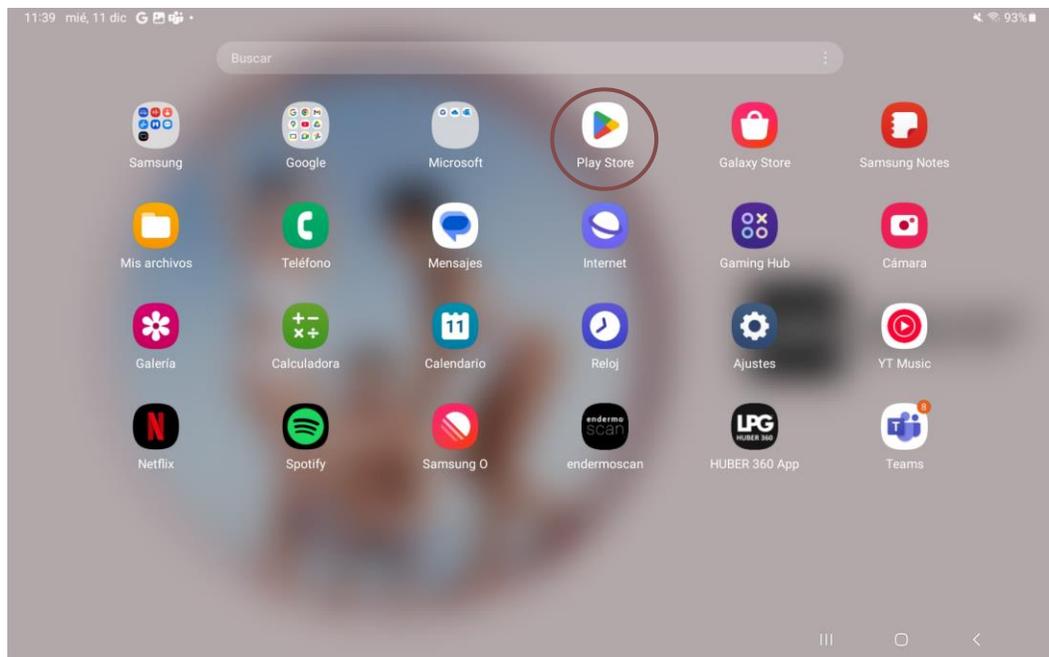


A continuación, inicie la aplicación **"Play Store"** en la pantalla de inicio de la tablet.

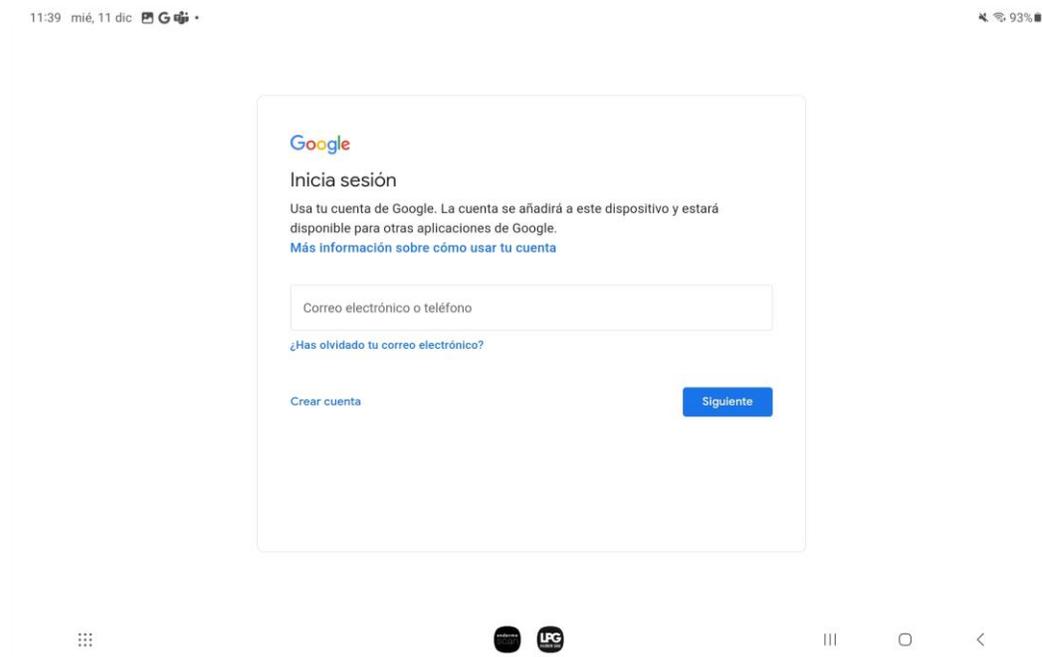


Acceda a **su cuenta de Google**. Introduce tu nombre de usuario (dirección de correo electrónico personal) y tu contraseña.

ACCEDER A PLAY STORE INICIANDO SESIÓN EN TU CUENTA DE GOOGLE

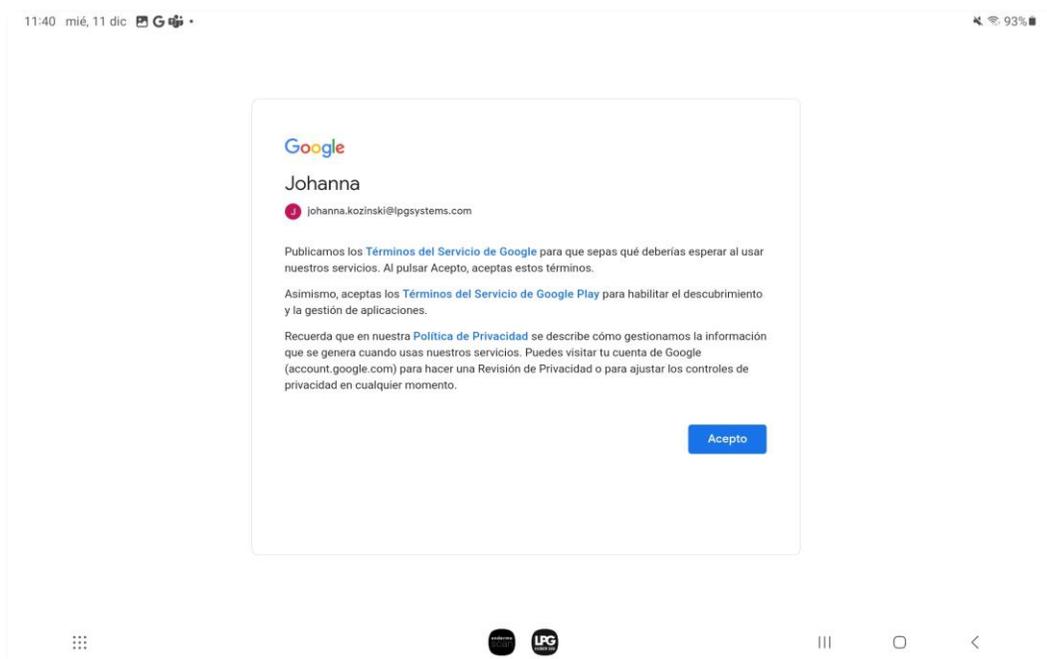


Ha iniciado sesión.

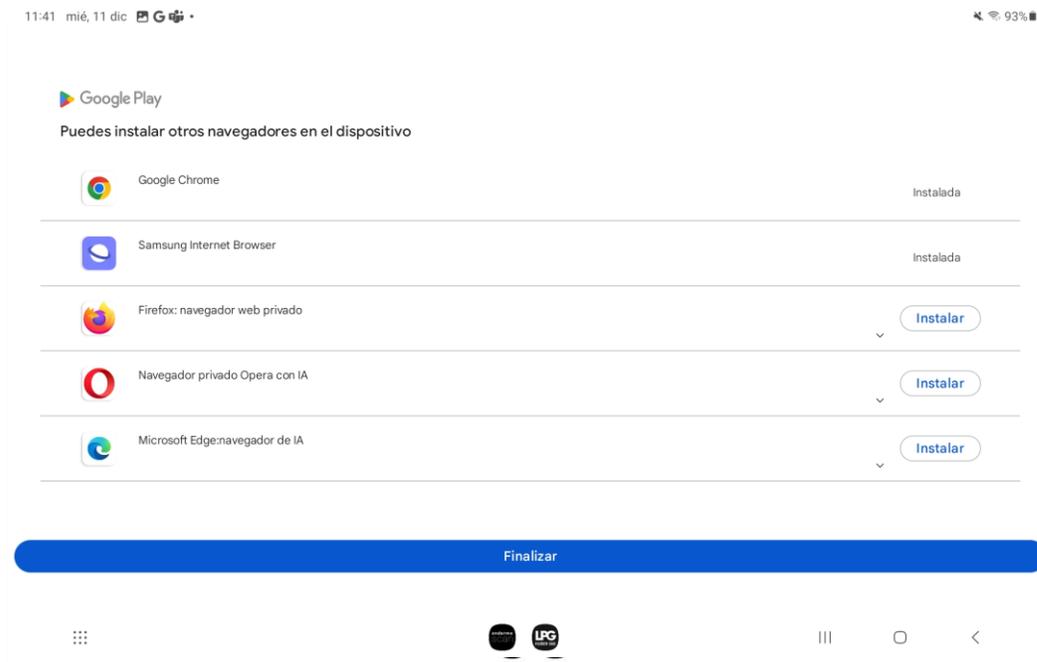


Puedes guardar los datos en el dispositivo pulsando **Finalizar**.

DESCARGAR LA APLICACIÓN endermolink™

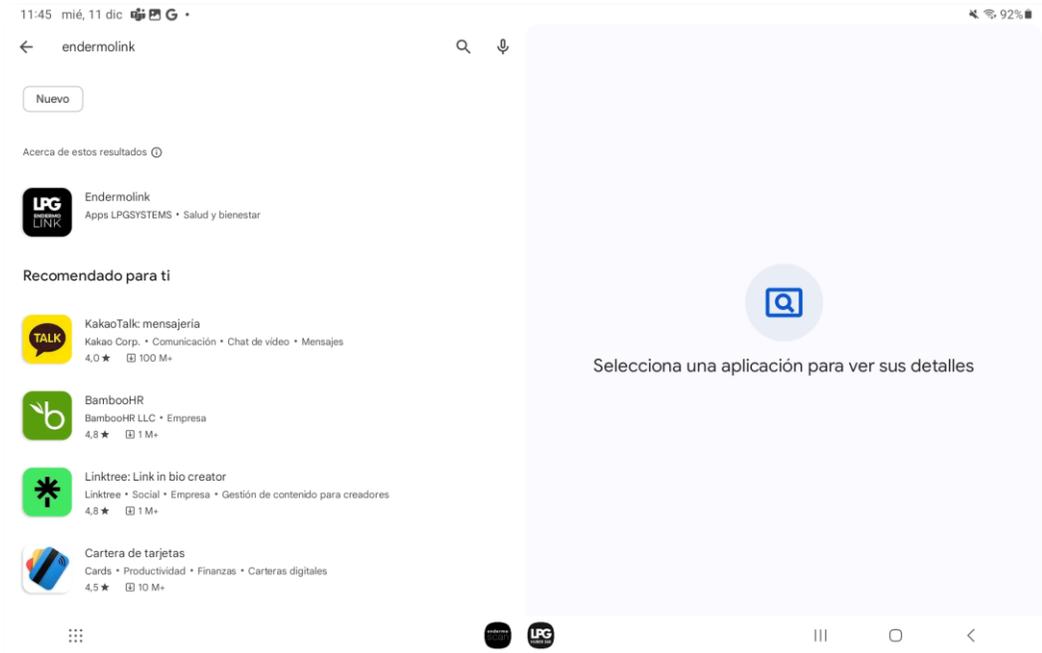

Empieza a buscar la aplicación **Endermolink™** en la barra de búsqueda de Play Store.

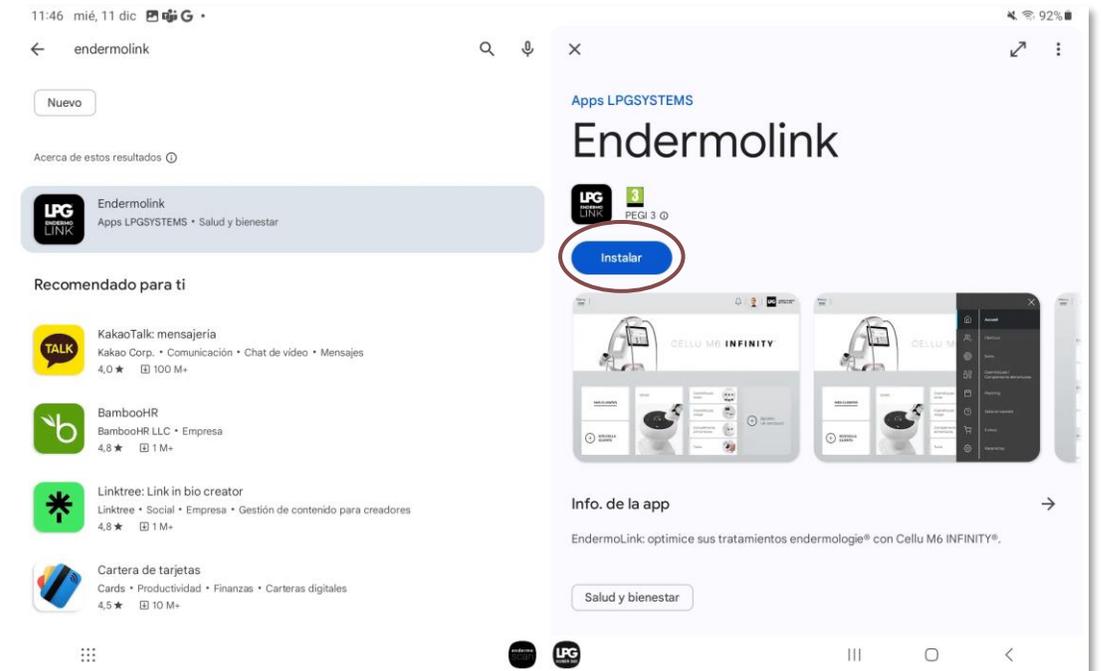

Aparece la aplicación **Endermolink™**, haga clic en **Instalar**.


Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®



INNER POWER.
BETTER LIFE.


DESCARGAR LA APLICACIÓN endermolink™

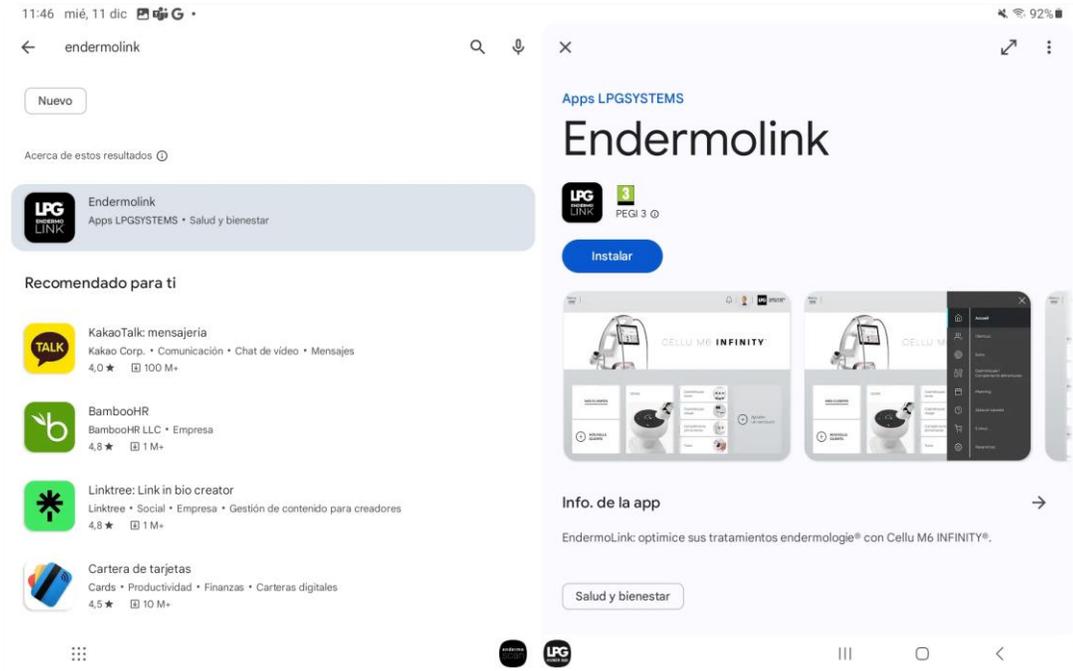

La aplicación **Endermolink™** se está descargando.

Aplicación **endermolink™**

Cellu M6 Infinity®

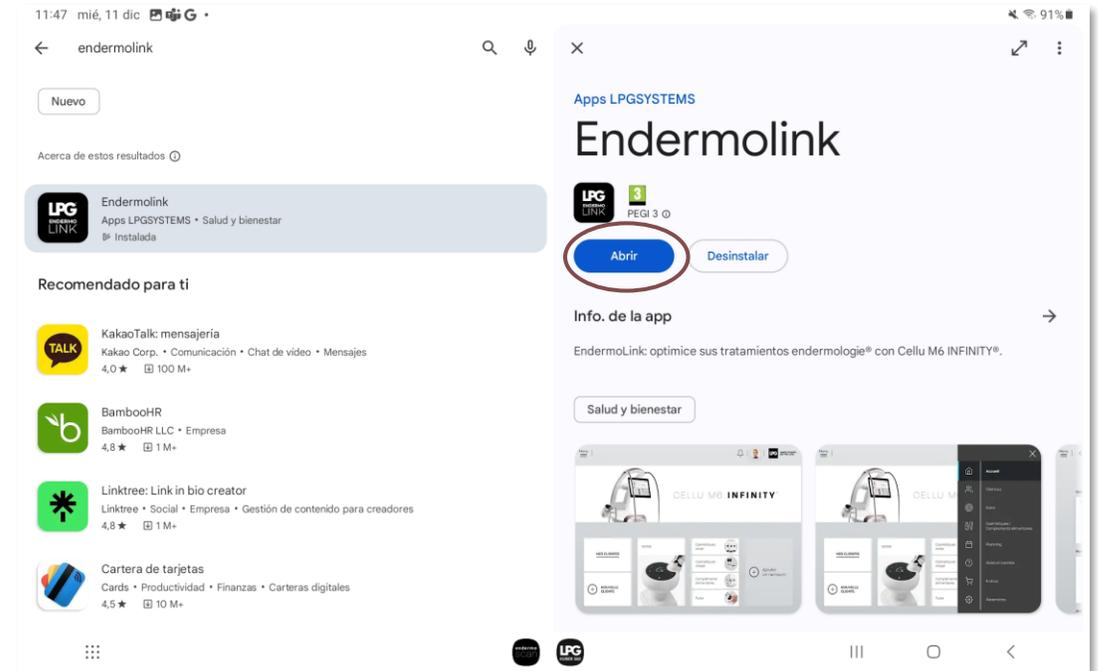


La aplicación **Endermolink™** se ha descargado, haga clic en **Abrir**.



LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN endermolink™



Para abrir la aplicación **Endermolink™**, haga clic en **SIGN IN**.

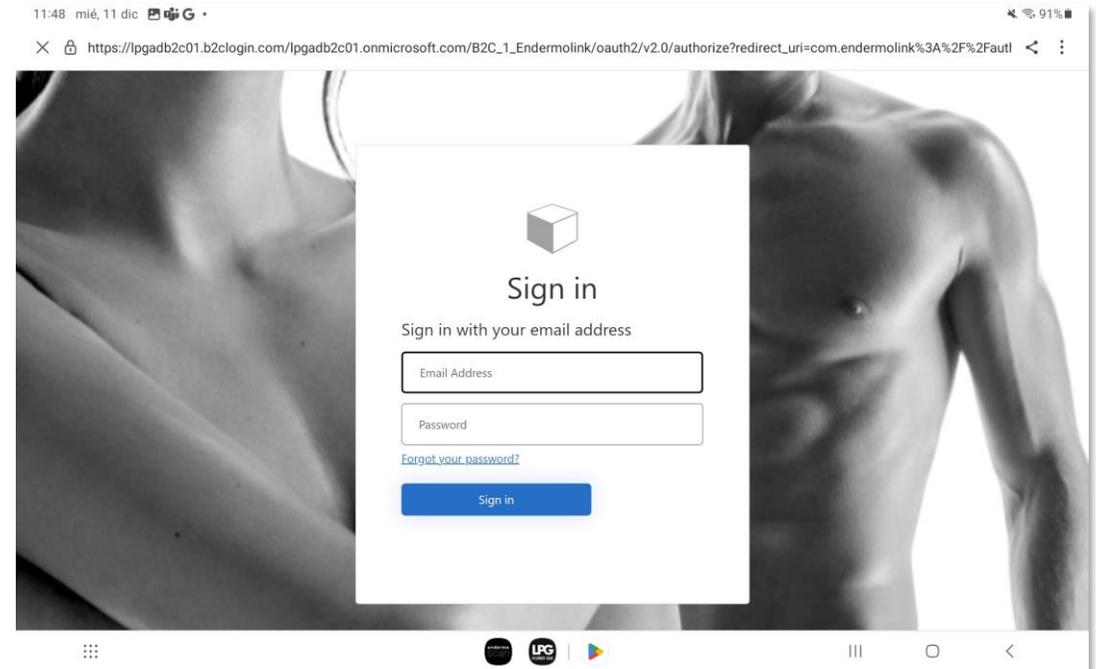

Introduzca su nombre de usuario (dirección de correo electrónico asociada a su cuenta LPG®) y su contraseña (existente si ya es cliente de LPG® o elegida por usted).


Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®

! Si ha olvidado su contraseña, haga clic en "¿Ha olvidado su contraseña?" o en el siguiente enlace: <https://portal.lpgsystems.com/password> para restablecer su contraseña.




LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN endermolink™

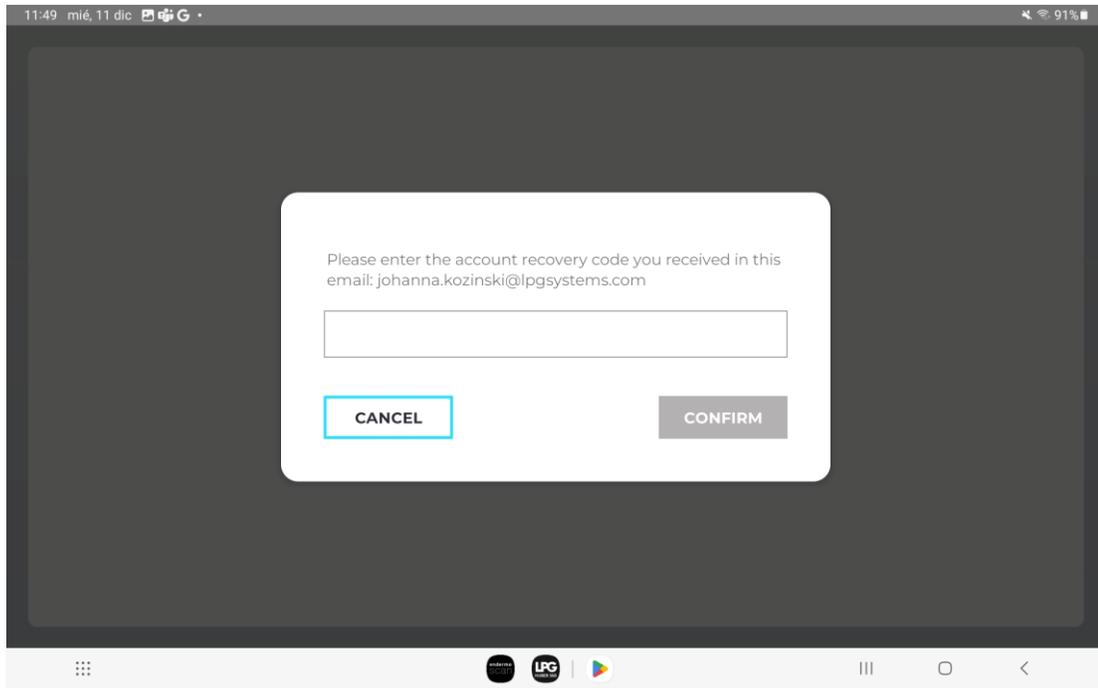

Recibirá un **código de creación de cuenta** por correo electrónico. Introduzca el código y haga clic en **CONFIRM**.

Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®

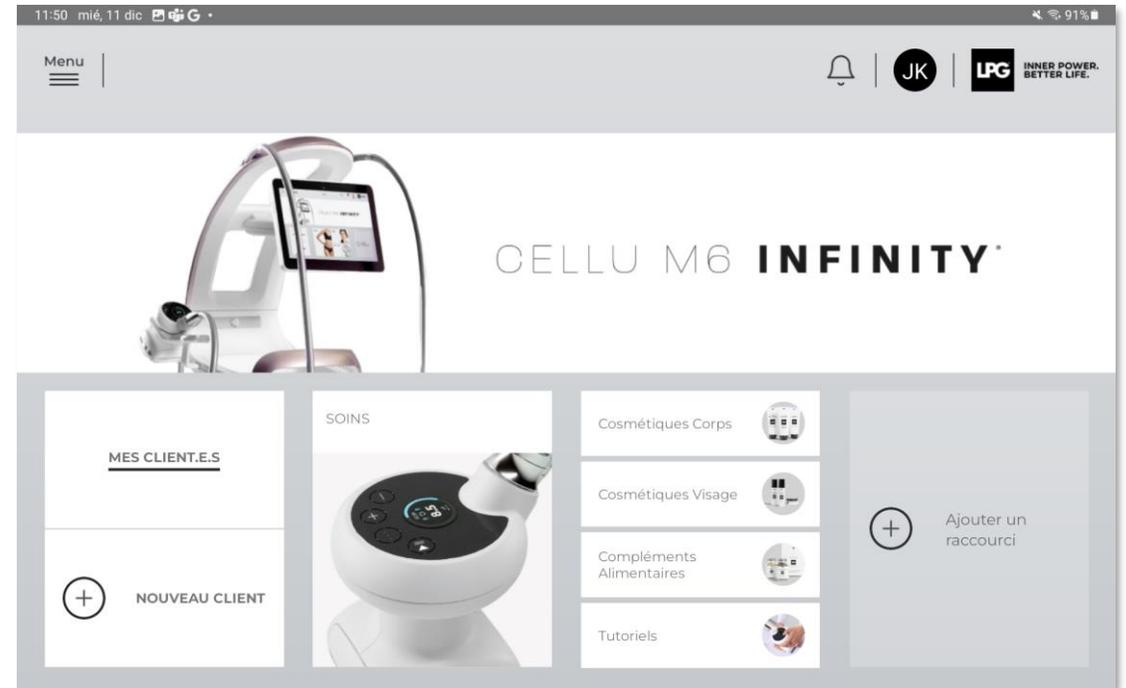

¡Bienvenido a **la aplicación Endermolink™!**
Ya puede utilizar la aplicación y disfrutar de **sus numerosas ventajas.**



02

APLICACIÓN
ENDERMOLINK™

VERSIÓN iOS APPLE



Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®


LPG

INNER POWER.
BETTER LIFE.

CONECTE LA TABLET A LA RED WI-FI




Inicie la aplicación "**Ajustes**" disponible en la pantalla de inicio de la tablet.

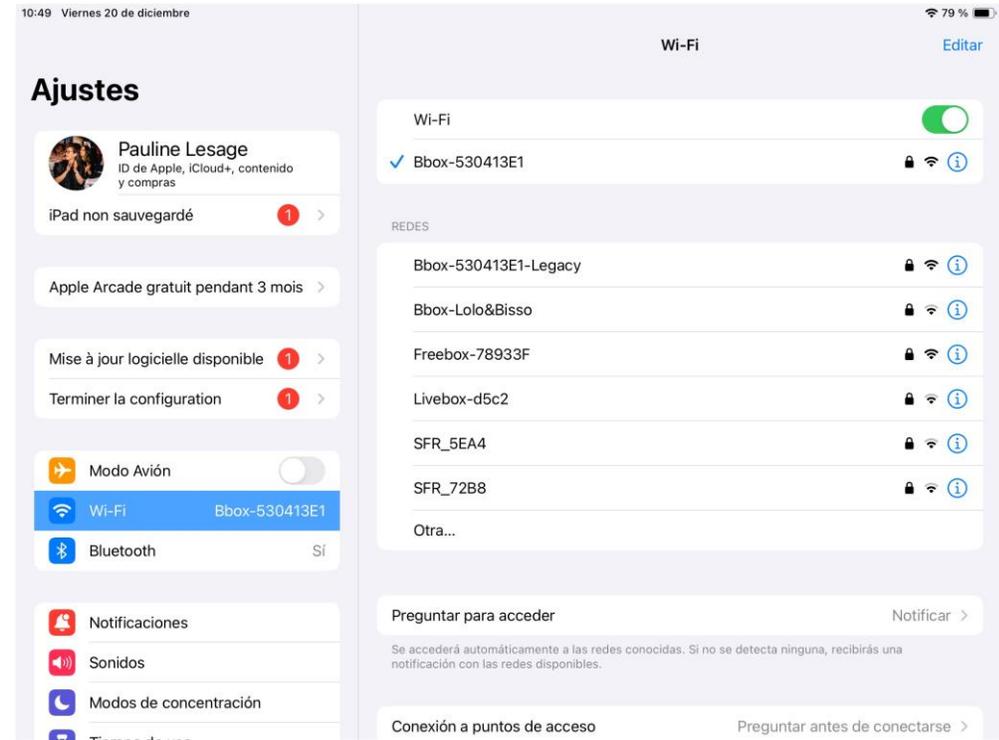


Seleccione la sección "**WI-FI**" y, a continuación, elija la red **WI-FI**.

DESCARGAR LA APLICACIÓN endermolink™

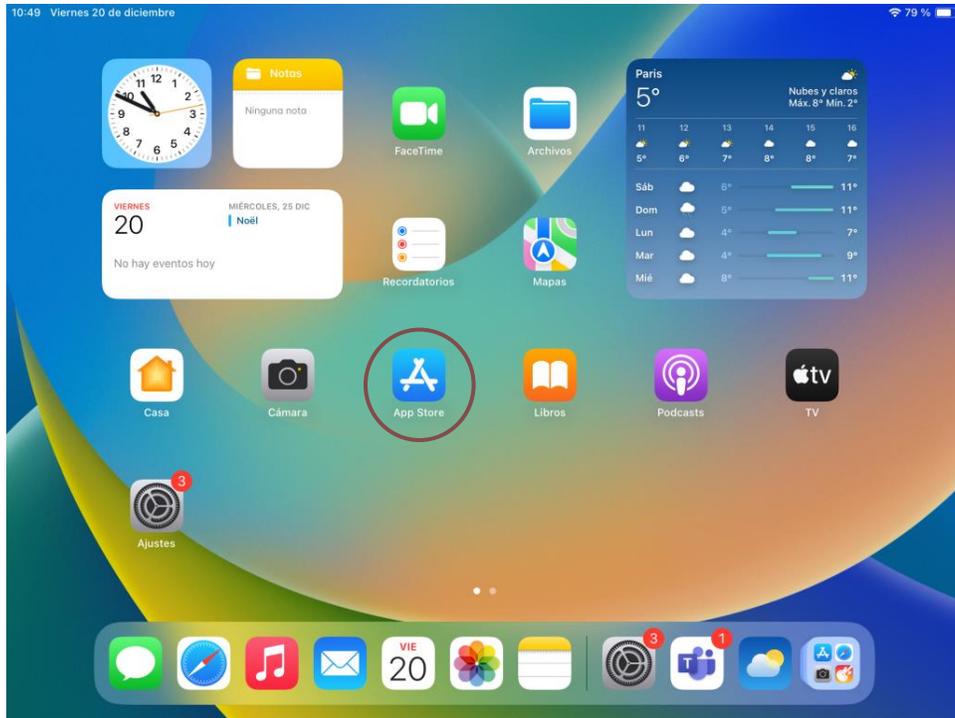

Inicie la aplicación "**App Store**" en la pantalla de inicio de la tablet.

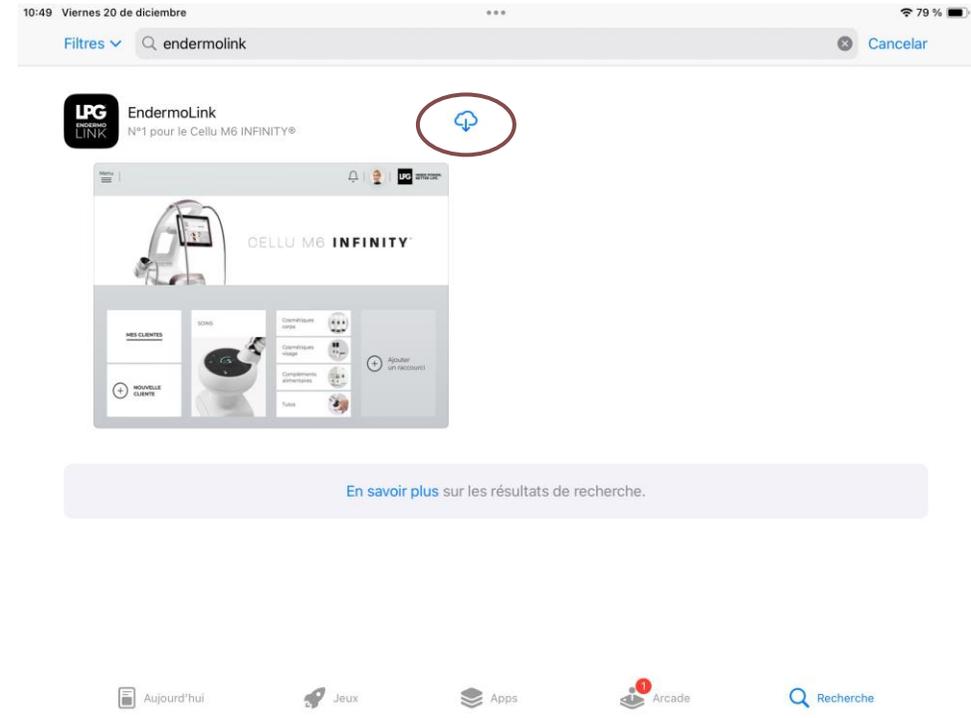

Busque la aplicación **Endermolink™** en la barra de búsqueda.
Aparecerá, **haga clic en ella.**


Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

DESCARGAR LA APLICACIÓN endermolink™

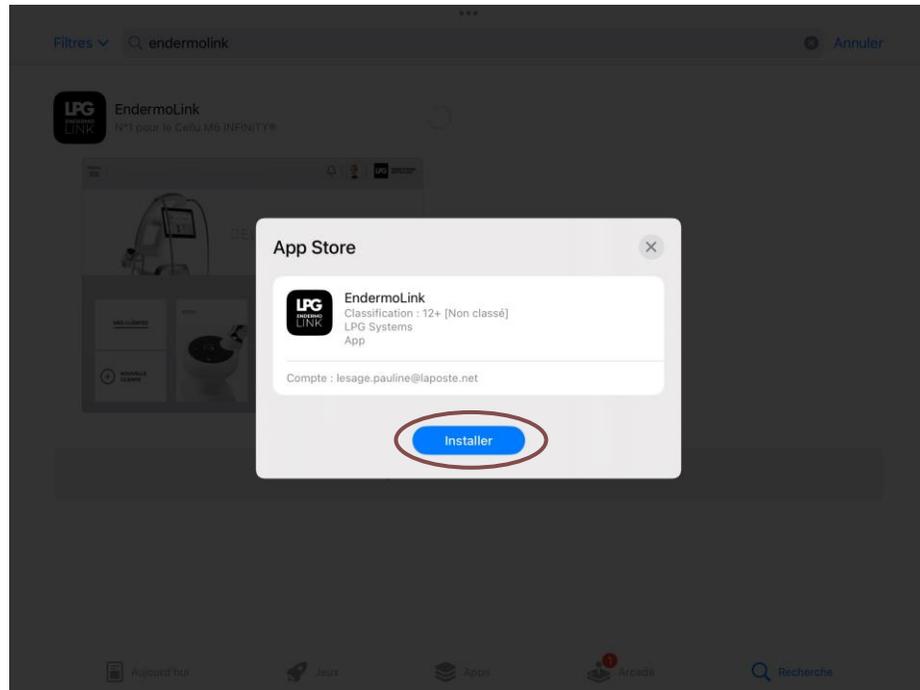


A continuación, haga clic en **Instalar**.

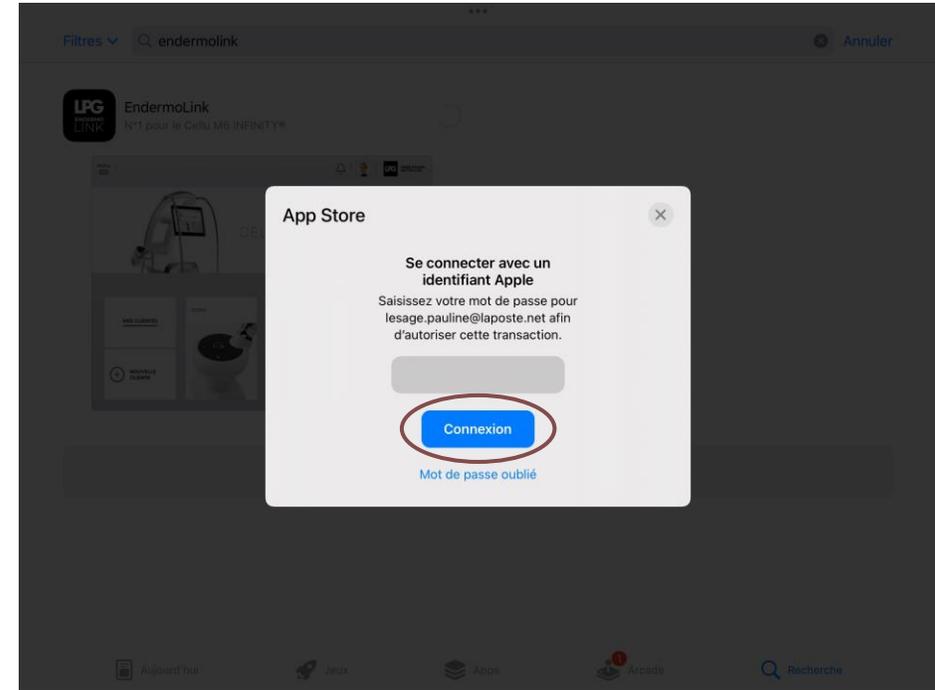


Para descargar la aplicación, **conéctate a tu cuenta de Apple**, introduce **tu contraseña** y haz clic en **Conectar**.

DESCARGAR LA APLICACIÓN endermolink™

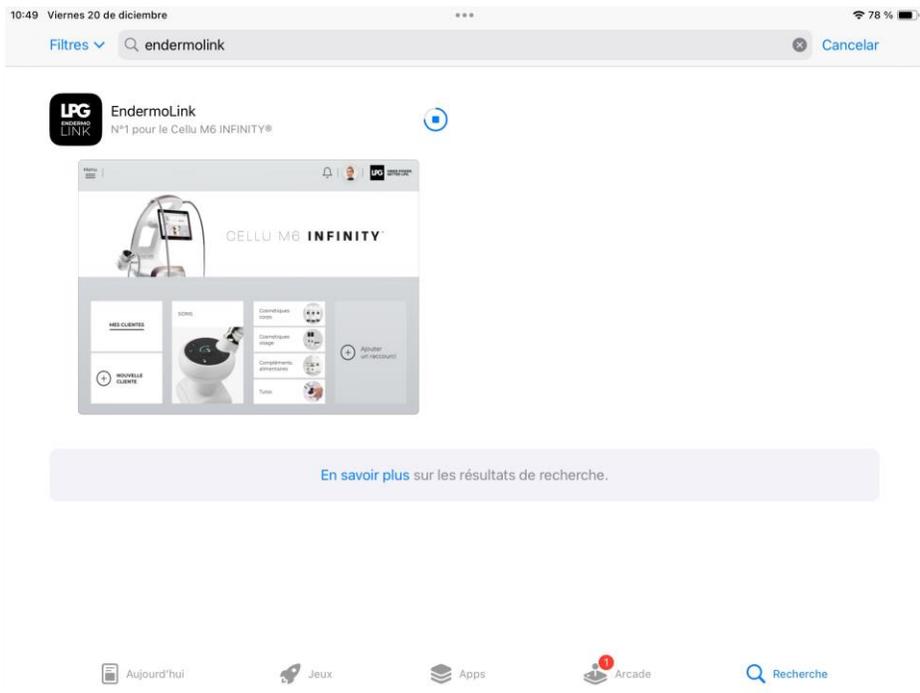

La aplicación **Endermolink™** se está descargando.

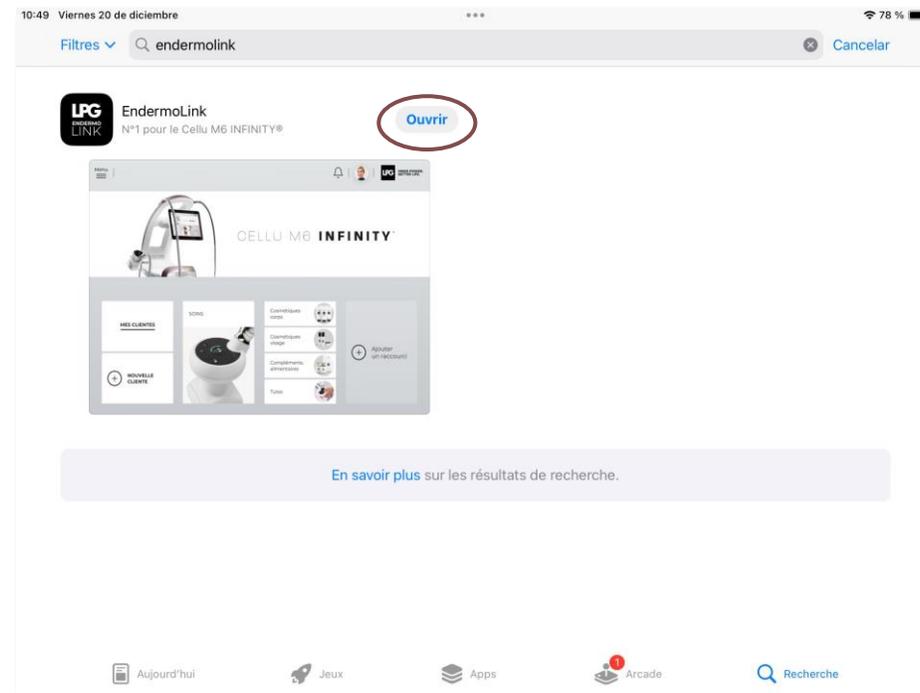

La aplicación **Endermolink™** se ha descargado, haga clic en **Abrir**.


Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN endermolink™

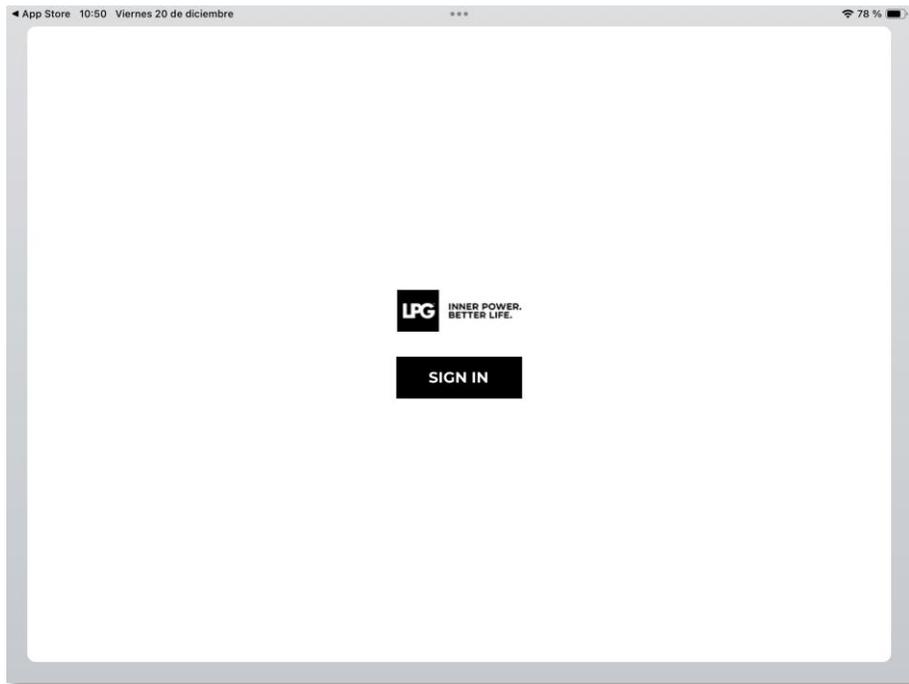

Para abrir la aplicación **Endermolink™**, haga clic en **SIGN IN**.

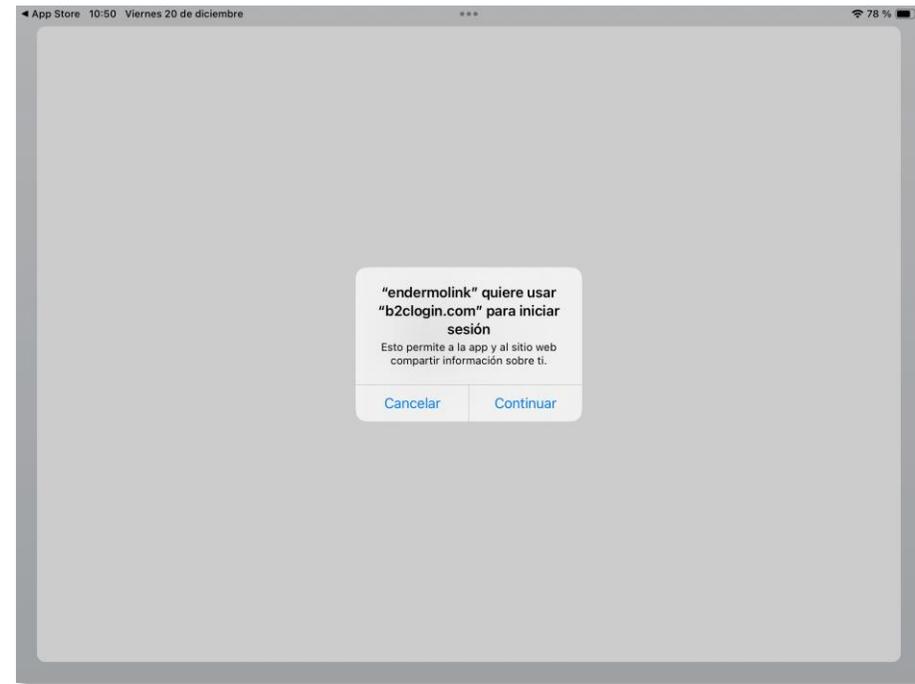

Aparecerá una **ventana emergente de inicio** de sesión, haga clic en **Continuar**.


Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN endermolink™

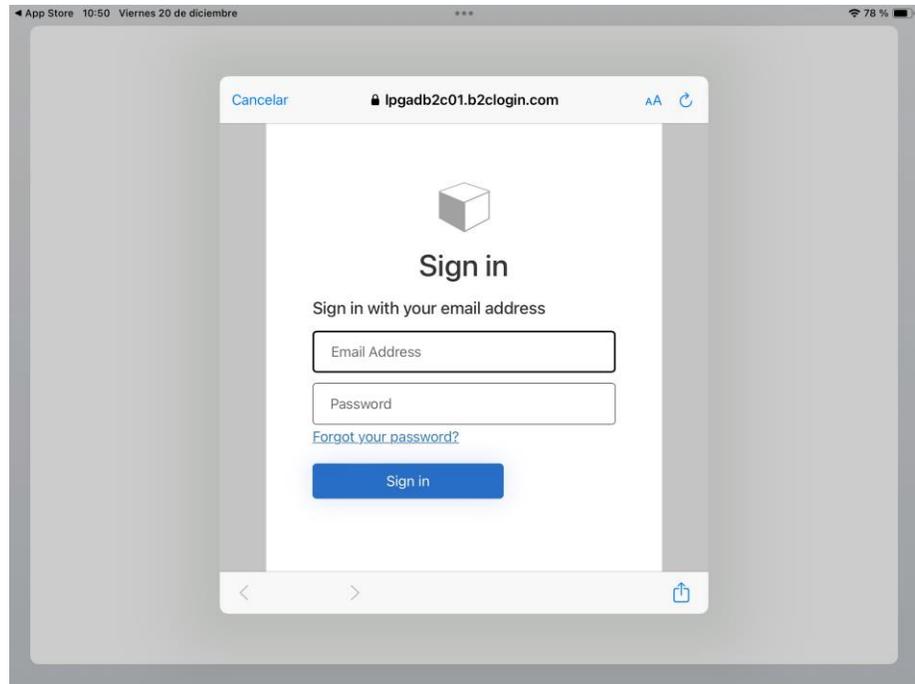

Introduzca su nombre de usuario (dirección de correo electrónico asociada a su cuenta LPG®) y su contraseña (existente si ya es cliente de LPG® o elegida por usted).

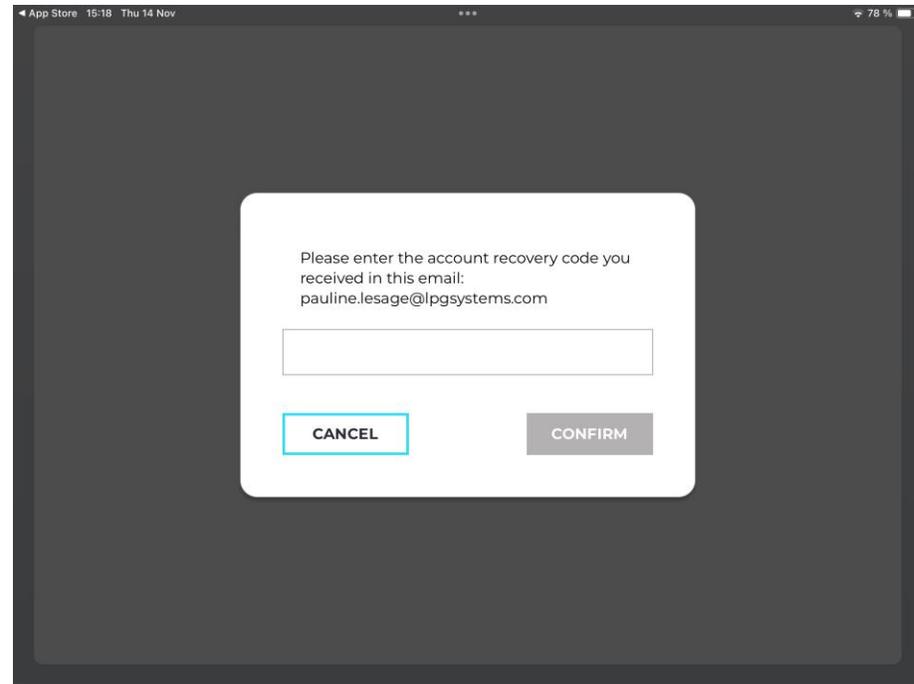

Recibirá **un código de creación de cuenta** por correo electrónico. Rellénelo y haga clic en **CONFIRM**.

Aplicación endermolink™


Cellu M6 Infinity®

! Si ha olvidado su contraseña, haga clic en "¿Ha olvidado su contraseña?" o en el siguiente enlace: <https://portal.lpgsystems.com/password> para restablecer su contraseña.



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN endermolink™

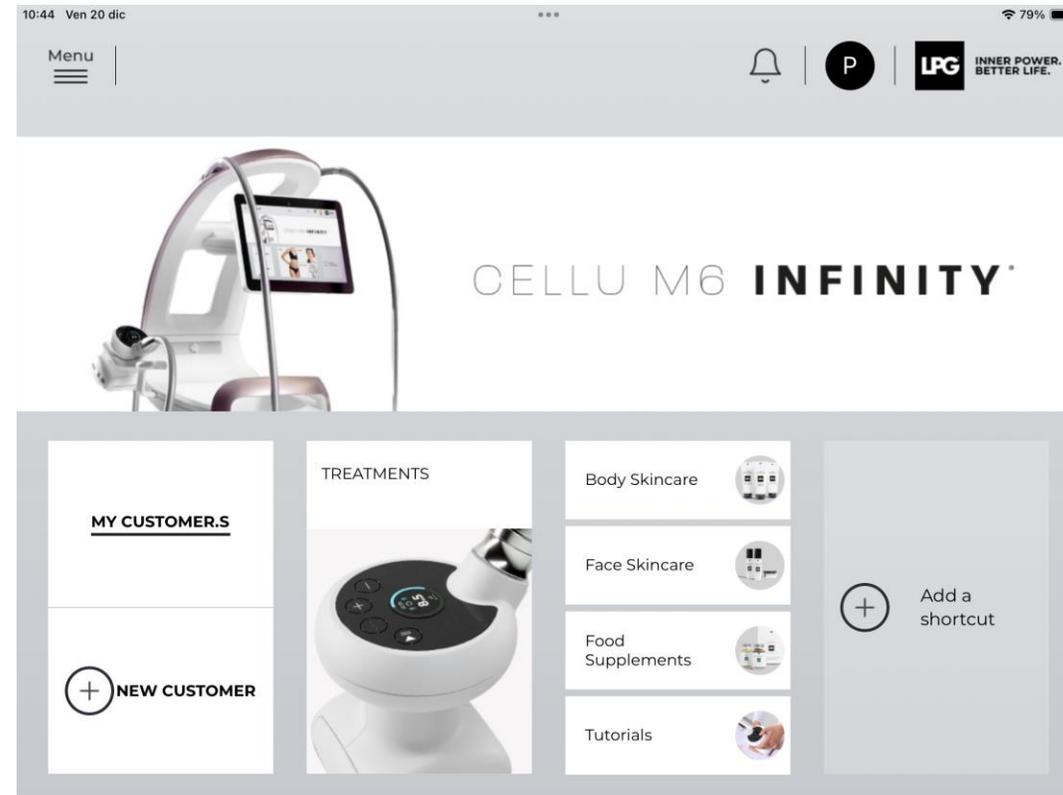

¡Bienvenido a **la aplicación Endermolink™!**
Ya puede utilizar la aplicación y disfrutar de **sus numerosas ventajas.**

Aplicación endermolink™

Cellu M6 Infinity®



INNER POWER.
BETTER LIFE.



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

LPG[®]

INNER POWER.
BETTER LIFE.