



GUIDA
ALL'INSTALLAZIONE
DI ENDERMOLINK™

CELLU M6 INFINITY®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

COMPATIBILITÀ DELL'APPLICAZIONE ENDERMOLINK™

VERSIONI SOFTWARE MINIME RICHIESTE:

- iOS: iOS 17
- Android: Android 12

Le versioni precedenti possono limitare l'esperienza dell'utente e l'accesso ad alcune funzionalità. Si noti che la disponibilità degli aggiornamenti ad Android 12 può variare a seconda del produttore e del modello.

Si consiglia di verificare le specifiche di ciascun dispositivo o di consultare il produttore per confermare la compatibilità.



01

APPLICAZIONE
ENDERMOLINK™

VERSIONE ANDROID



Applicazione endermolink™


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

COLLEGARE IL TABLET ALLA RETE WI-FI

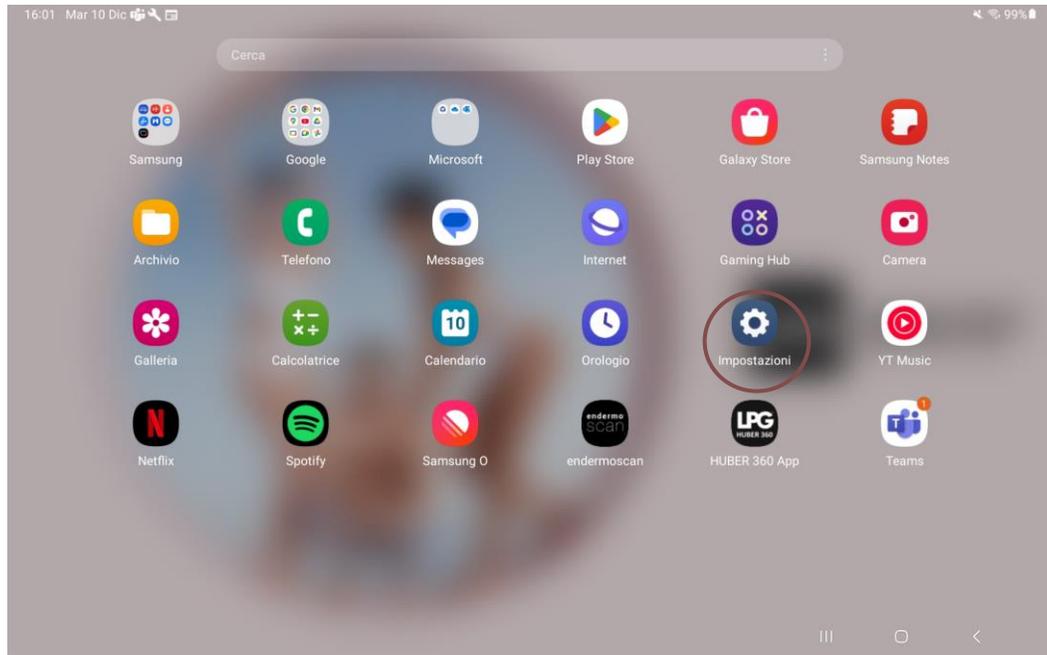


Avviare l'applicazione "**Impostazioni**" disponibile nella schermata iniziale del tablet.

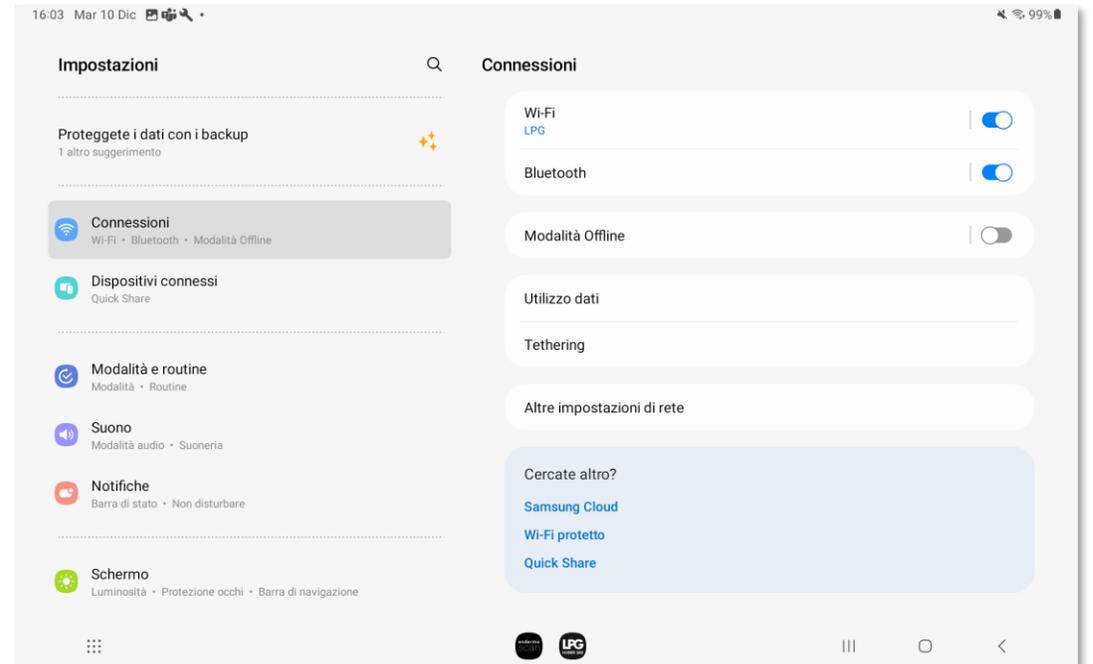


Selezionare la sezione "**Connessioni**", quindi fare clic su "**WI-FI**". Selezionare la rete **WI-FI**.

ACCEDERE A PLAY STORE E ALL'ACCOUNT GOOGLE

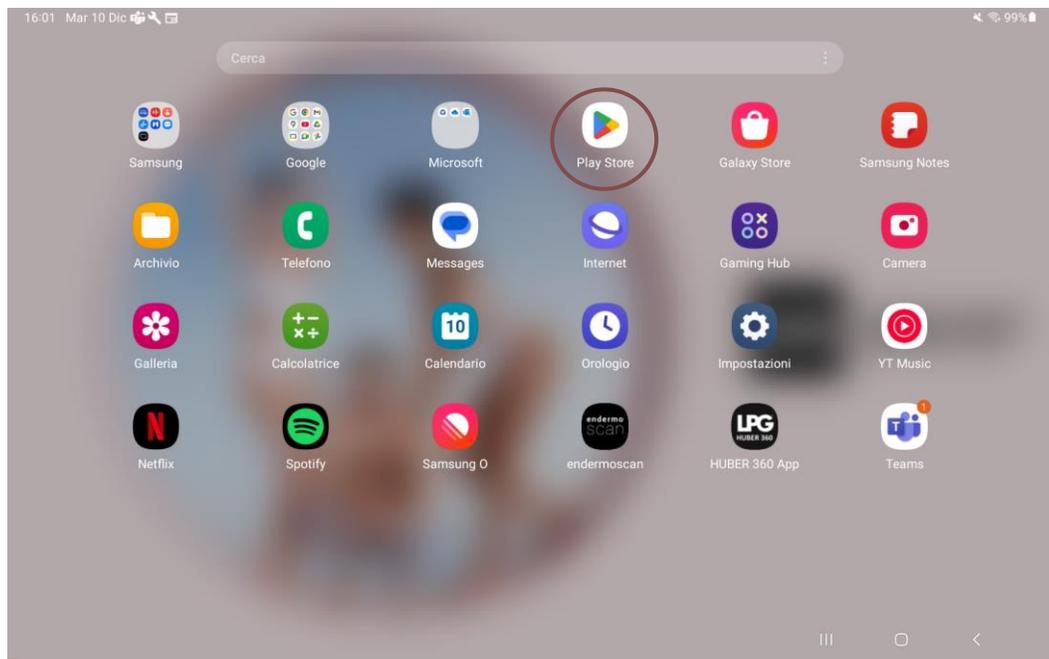


Avviare quindi l'applicazione "**Play Store**" sulla schermata iniziale del tablet.

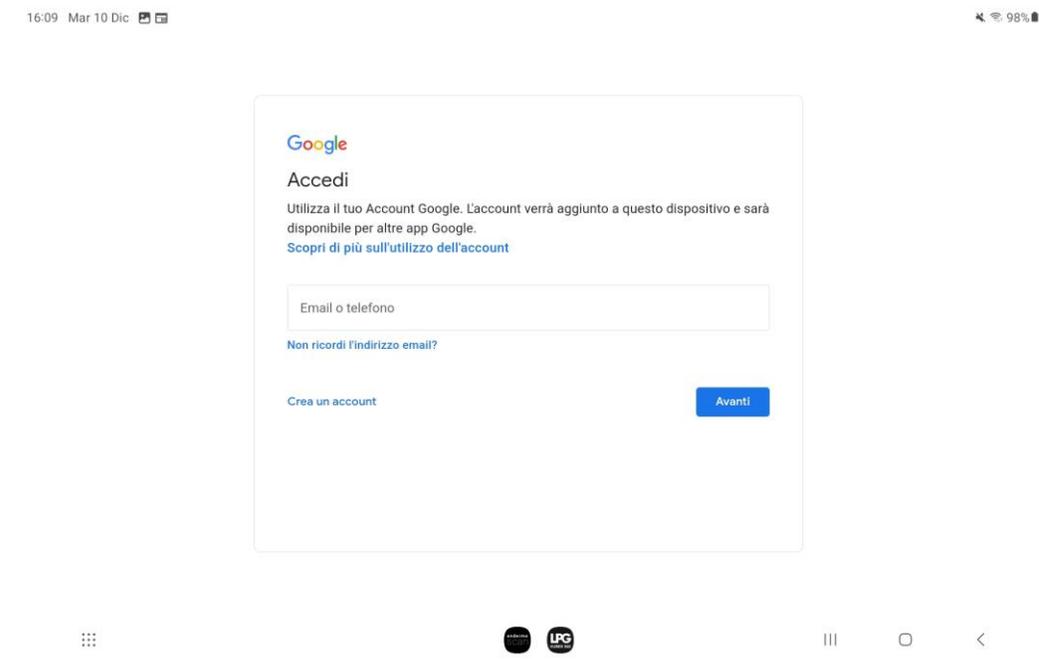


Accedere al **proprio account Google**. Inserire il nome utente (indirizzo e-mail personale) e la password.

ACCEDERE A PLAY STORE E ALL'ACCOUNT GOOGLE

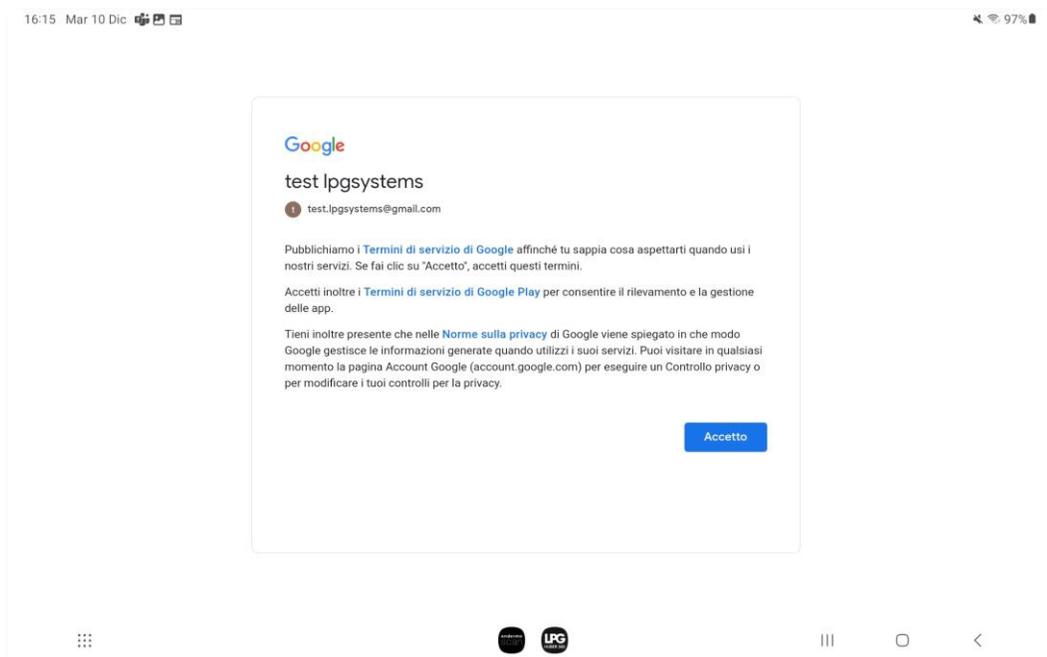

Ora hai effettuato **l'accesso**.

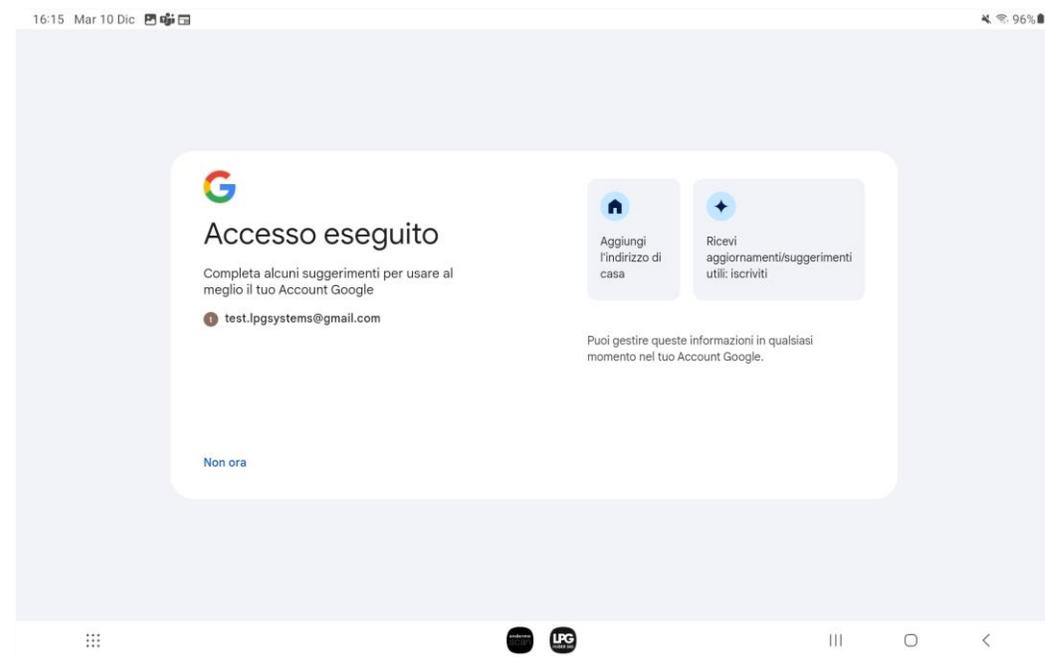

È possibile salvare i dati sul dispositivo facendo clic su **Accetta**.



Applicazione endermolink™

Cellu M6 Infinity®



INNER POWER.
BETTER LIFE.

SCARICA l'applicazione endermolink™

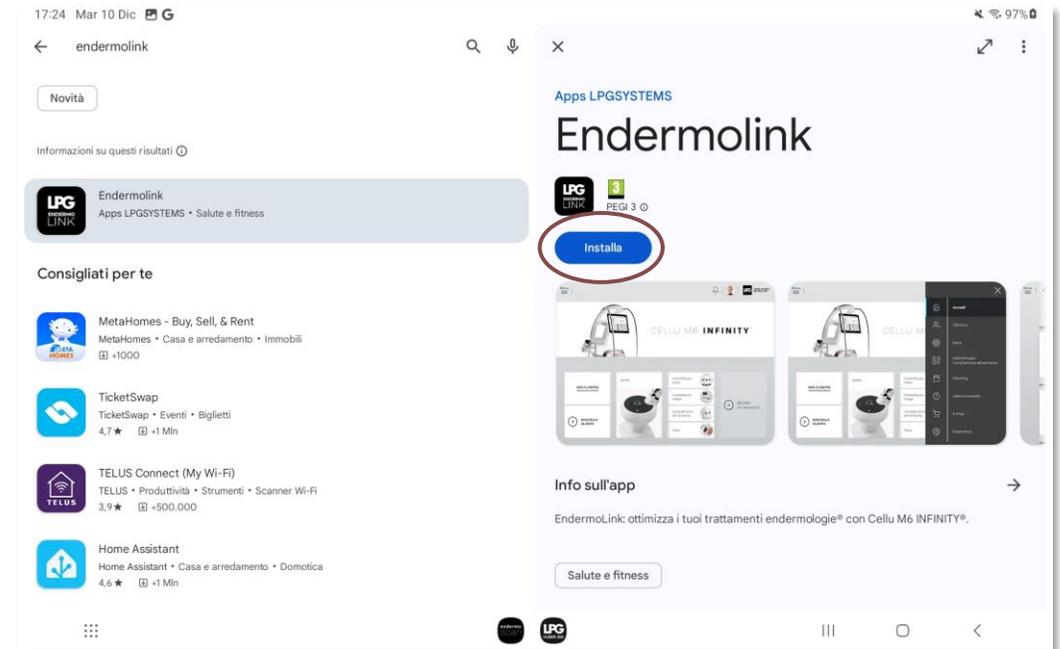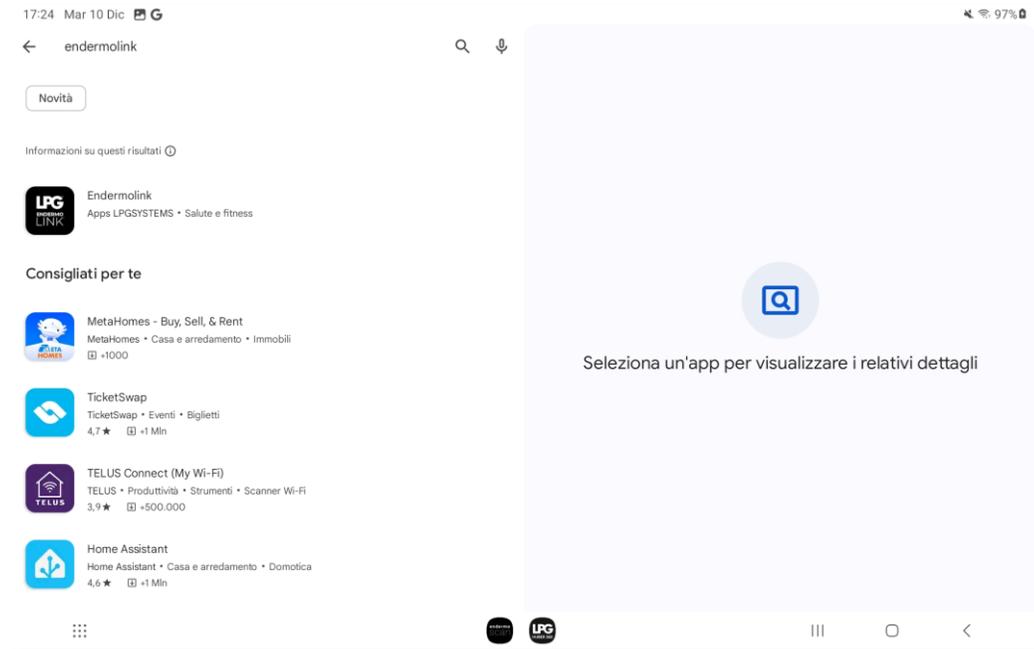

Avviare la ricerca dell'applicazione **Endermolink™** nella barra di **ricerca dell'app Play Store**.

Selezionare l'applicazione **Endermolink™** e fare clic su **Installa**.


Applicazione endermolink™

Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

SCARICA l'applicazione endermolink™

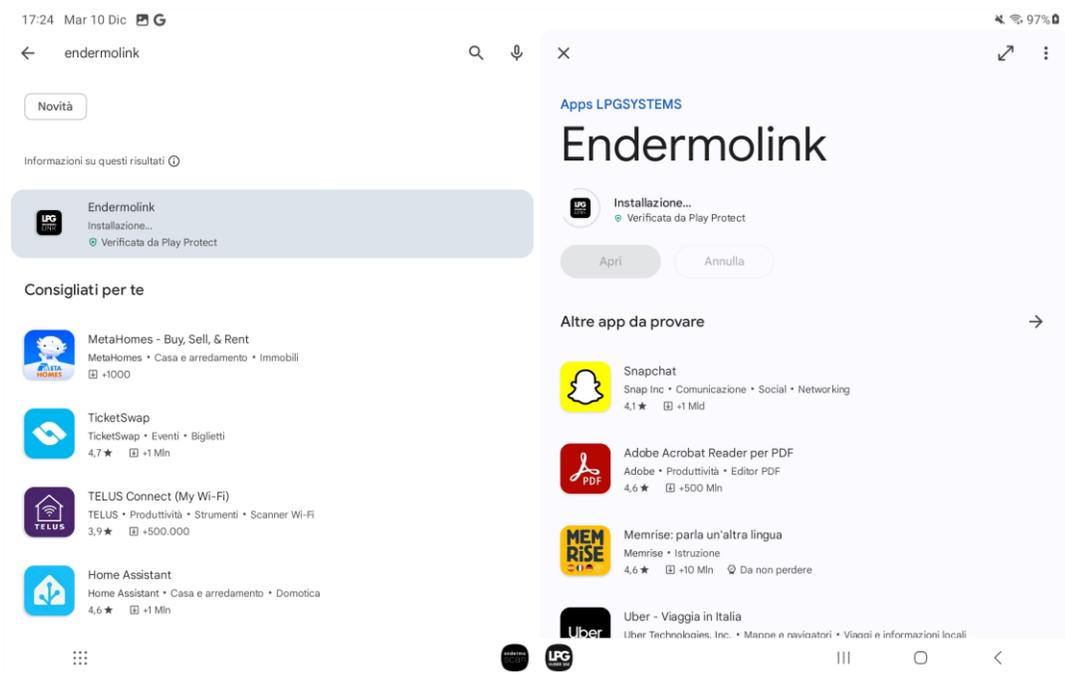

L'applicazione **Endermolink™** è in fase di download.

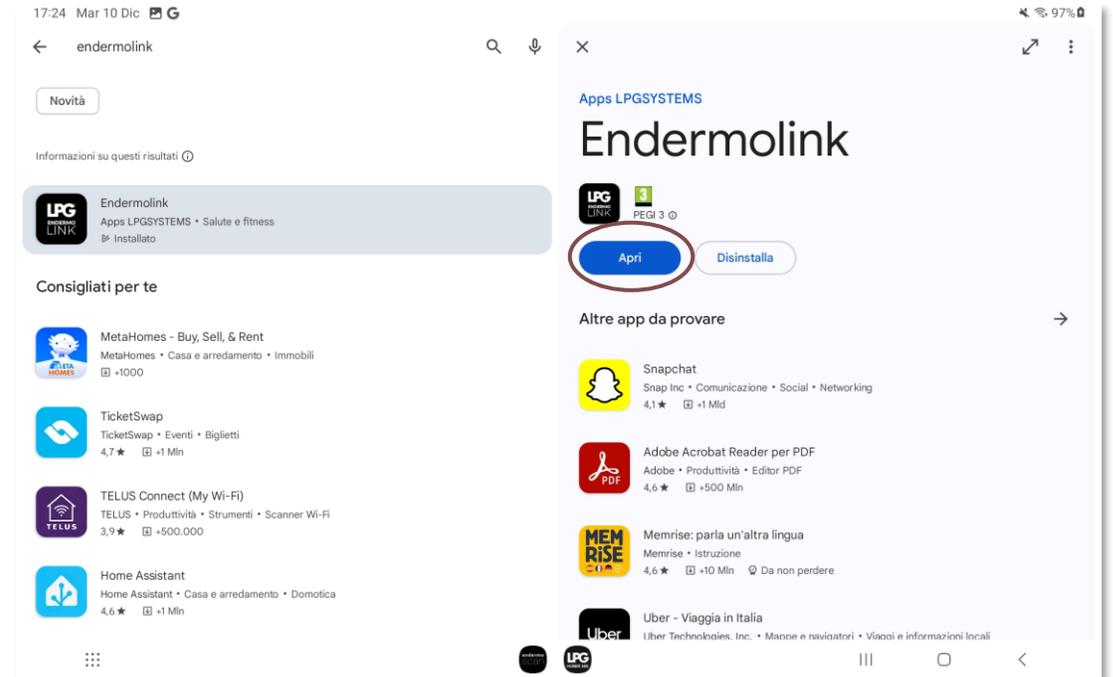

L'applicazione **Endermolink™** è stata scaricata, fare clic su **Apri**.


Applicazione endermolink™

Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

AVVIA l'applicazione endermolink™

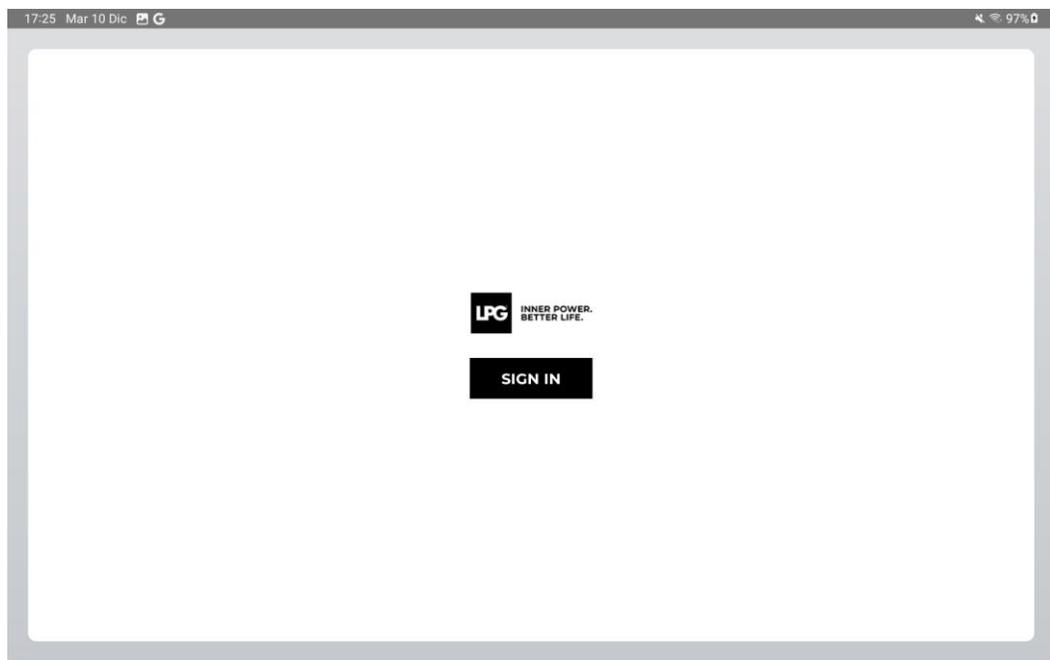

Per aprire l'applicazione **Endermolink™**, fare clic su **SIGN IN**.

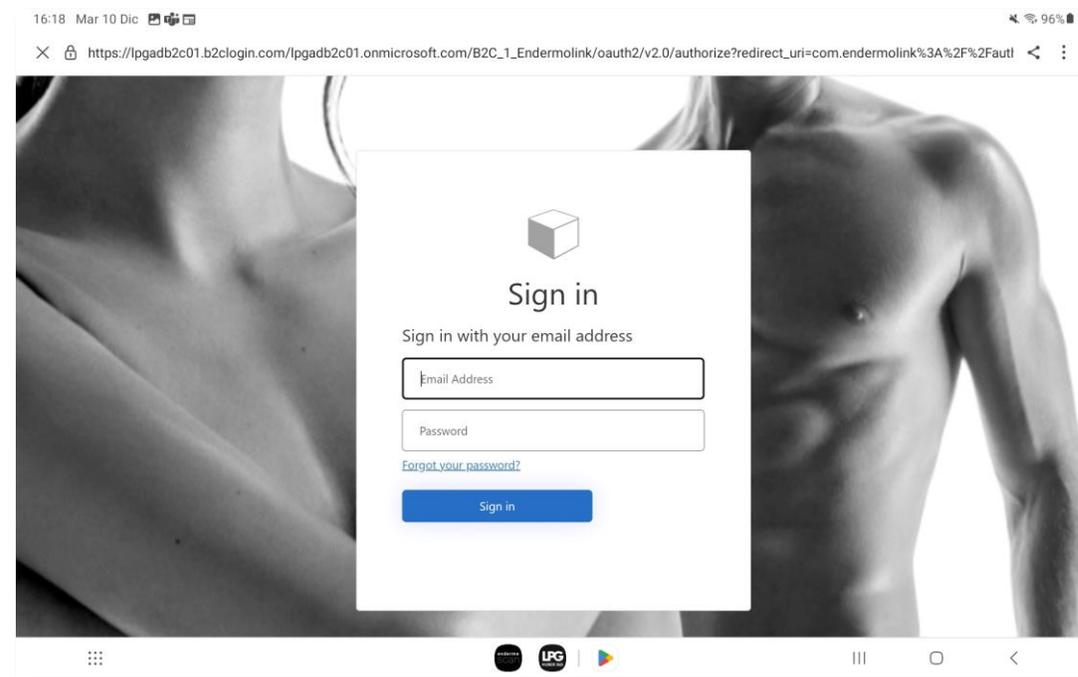

Inserisci il tuo nome utente (indirizzo e-mail associato al tuo account LPG®) e la tua password (esistente se sei già cliente LPG® o scelta da te).

Applicazione endermolink™


Cellu M6 Infinity®

! Se hai dimenticato la password, clicca su "Forgot your password?" o sul seguente link: <https://portal.lpgsystems.com/password> per reimpostare la password.




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

AVVIA l'applicazione endermolink™

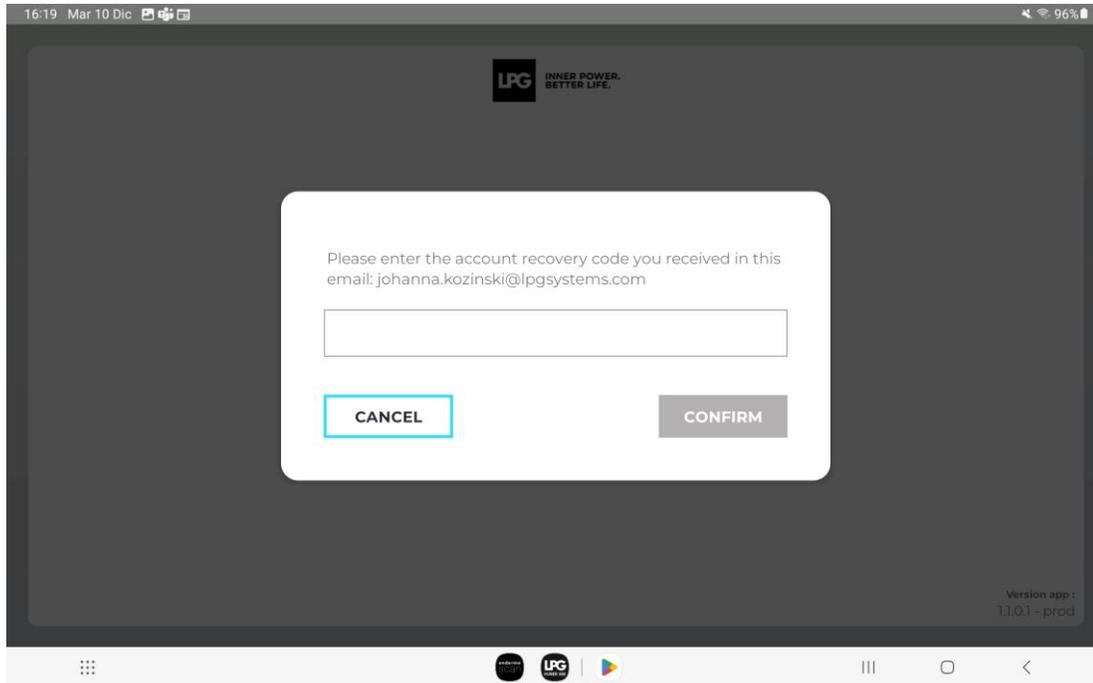

Riceverai **un codice di creazione dell'account** via e-mail. Inserisci il codice e fare clic su **CONFIRM**.

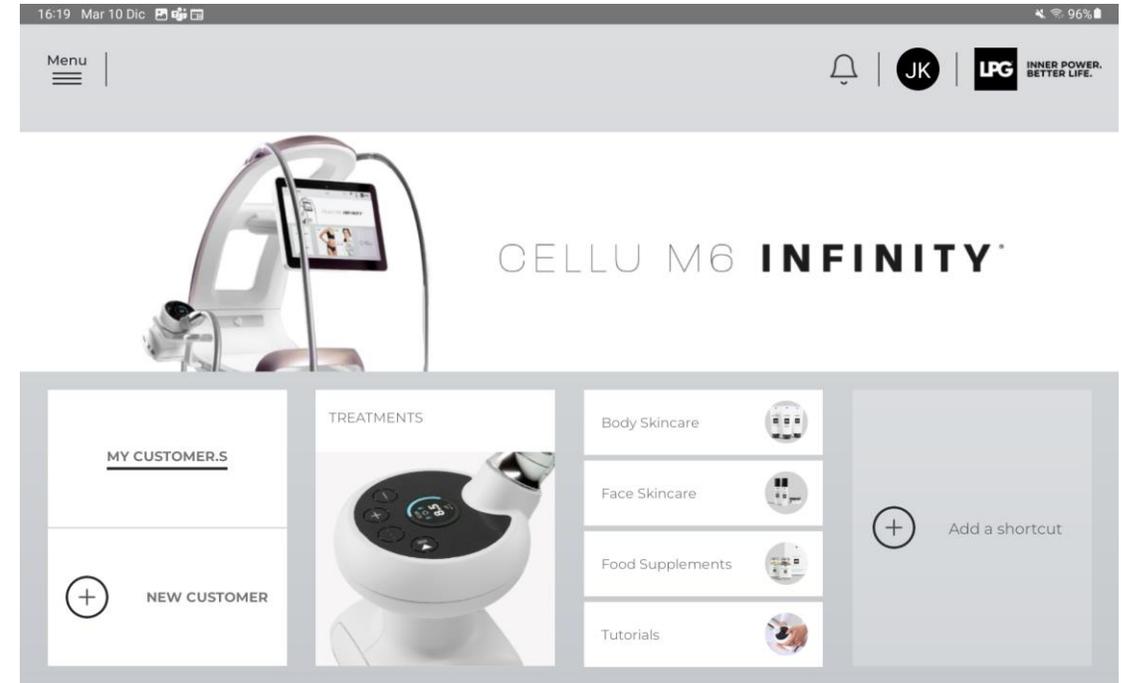

Benvenuti **nell'applicazione Endermolink™!**
Ora è possibile utilizzare l'applicazione e godere dei **suoi numerosi vantaggi**.

Applicazione endermolink™

Cellu M6 Infinity®



02

APPLICAZIONE
ENDERMOLINK™

VERSIONE iOS APPLE



Applicazione endermolink™

Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

COLLEGARE IL TABLET ALLA RETE WI-FI



Avviare l'applicazione "**Impostazioni**" sulla schermata iniziale del tablet.

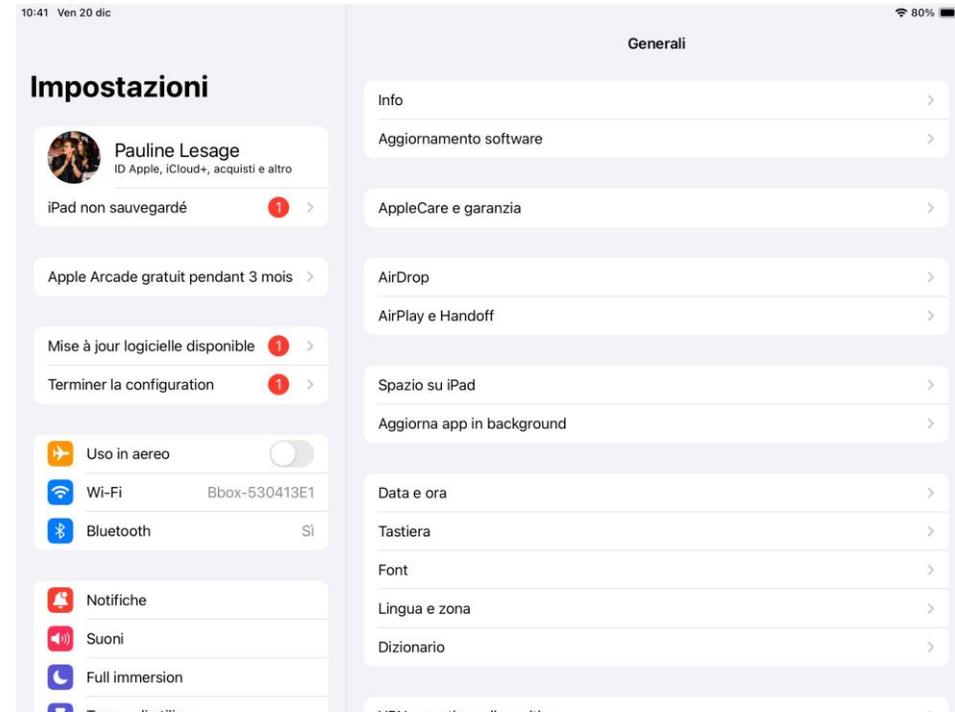


Selezionare la sezione "**WI-FI**", quindi scegliere la rete **WI-FI**.

SCARICA l'applicazione endermolink™



Avviare l'applicazione "**App Store**" sulla schermata iniziale del tablet.

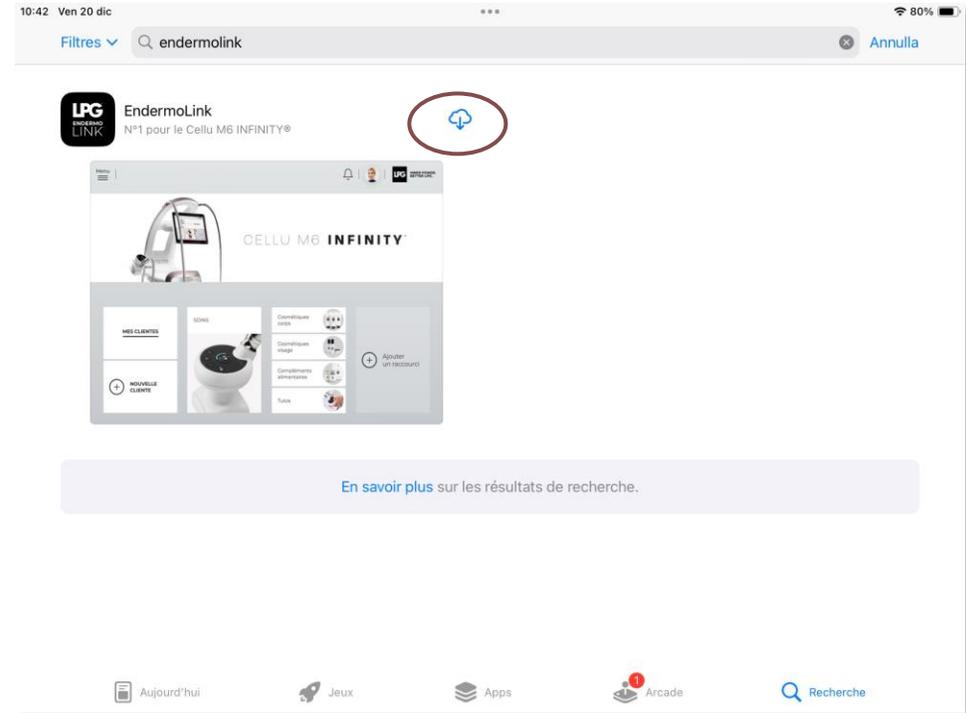

Cerca l'applicazione **Endermolink™** nella barra di ricerca. Quando apparirà l'app corretta, fare **clik** **sul simbolo cerchiato**.


Applicazione endermolink™

Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

SCARICA l'applicazione endermolink™

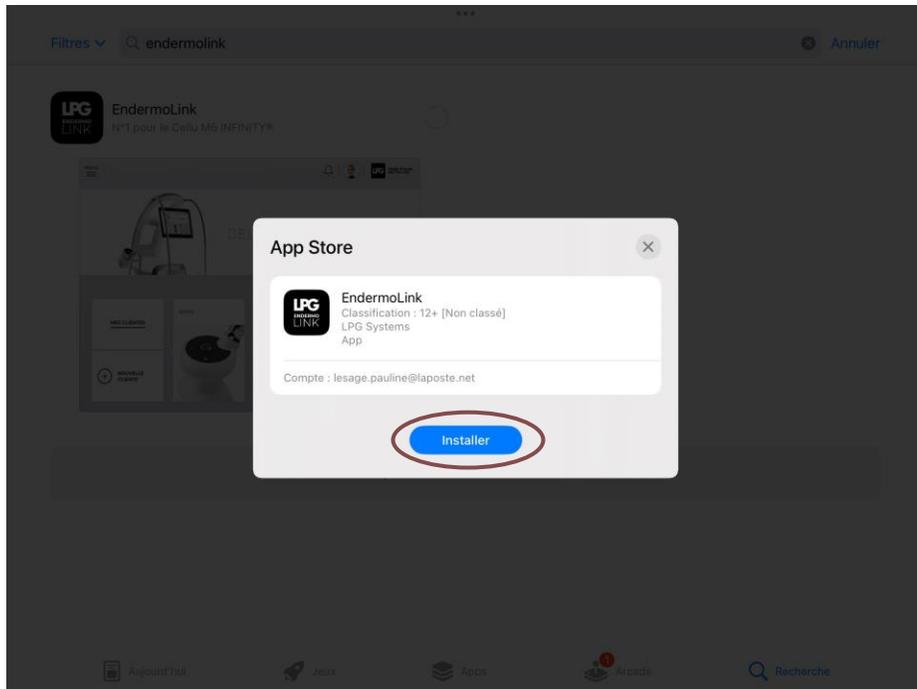


Quindi fare clic su **Installa**.

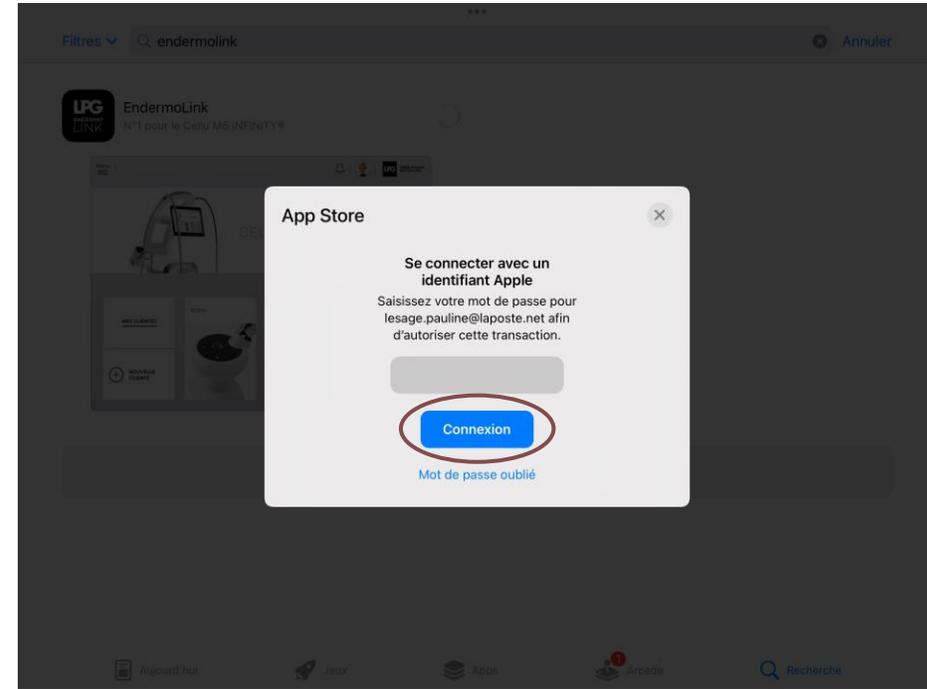


Per scaricare l'applicazione, accedi **al tuo account Apple**, inserisci la tua **password** e clicca su **Connessione**.

SCARICA l'applicazione endermolink™

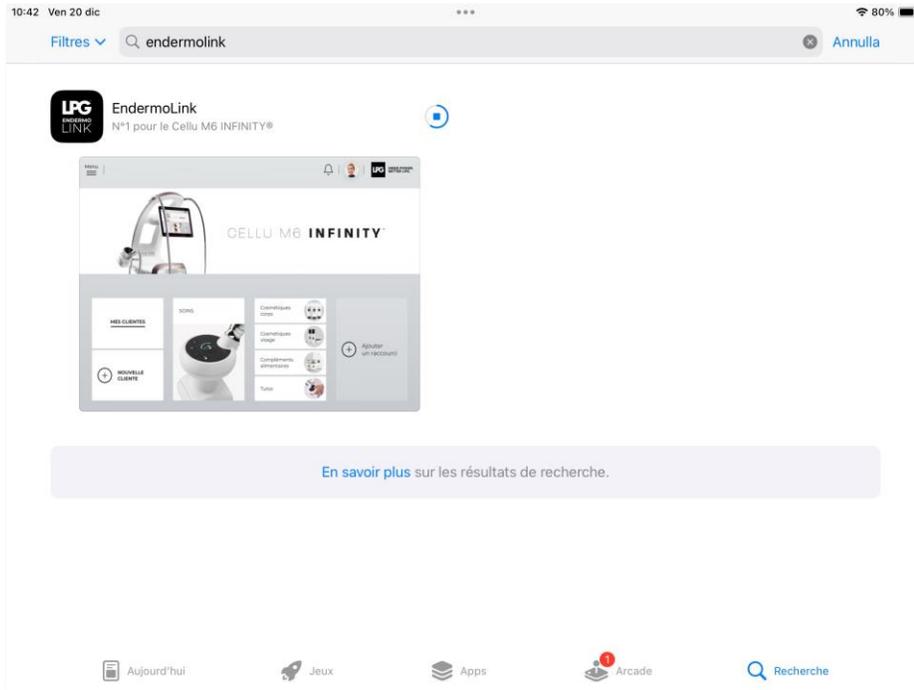

L'applicazione **Endermolink™** è in fase di download.

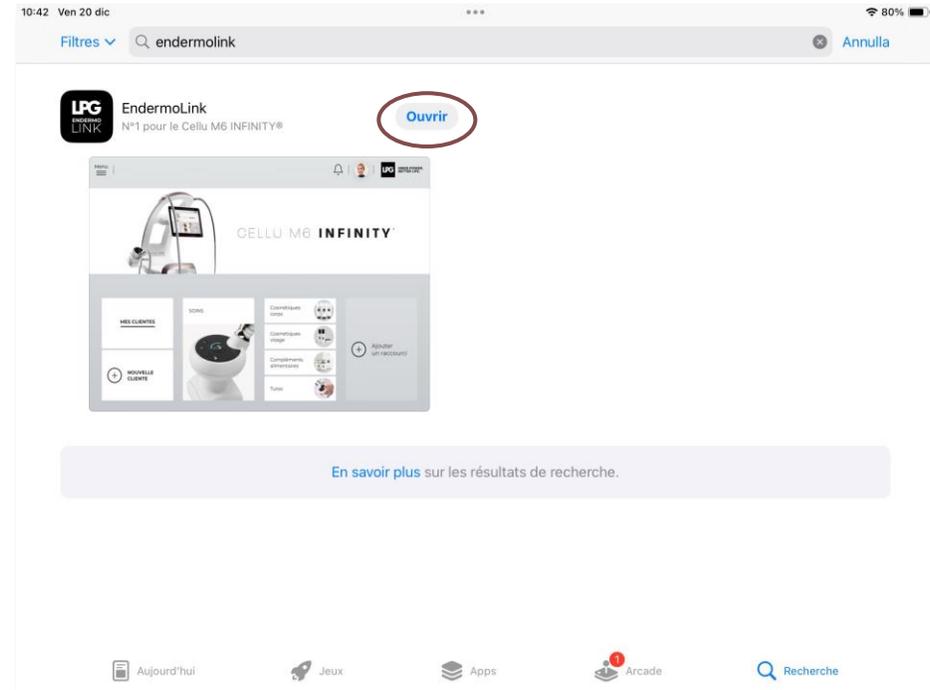

L'applicazione **Endermolink™** è stata scaricata, fare clic su **Apri**.

Applicazione endermolink™


Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

AVVIA

l'applicazione endermolink™

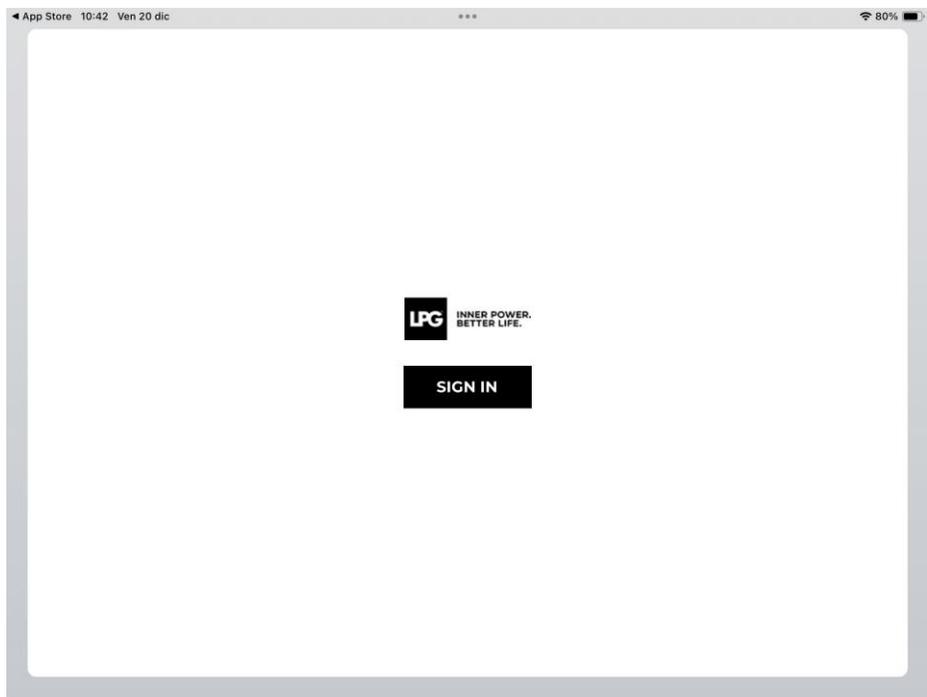

Per aprire l'applicazione **Endermolink™**, fare clic su **SIGN IN**.

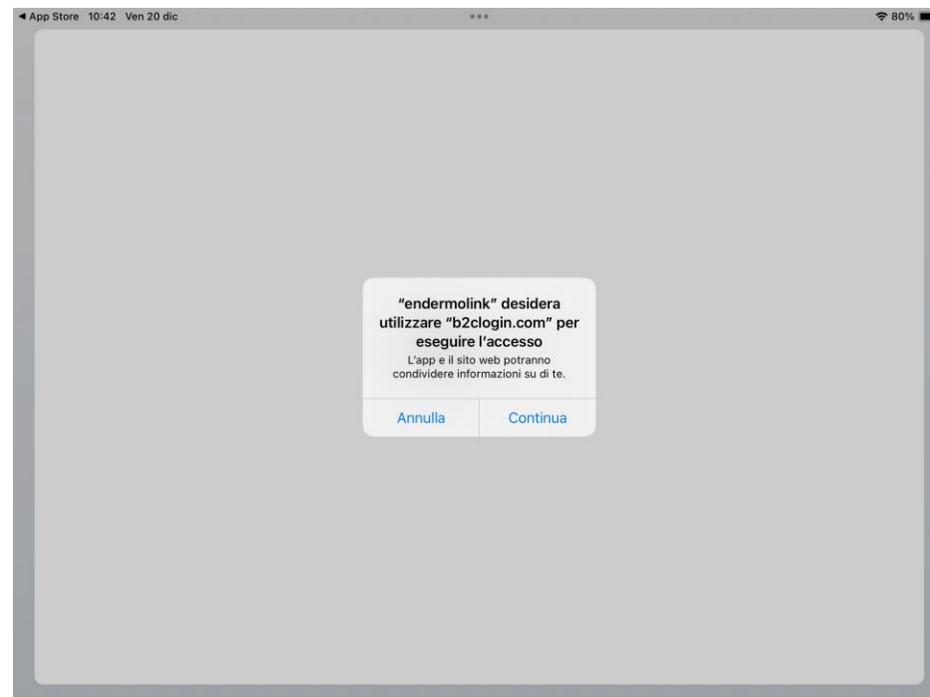

Verrà visualizzato **un pop-up di accesso**, fare clic su **Continua**.

Applicazione endermolink™


Cellu M6 Infinity®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

AVVIA

l'applicazione endermolink™

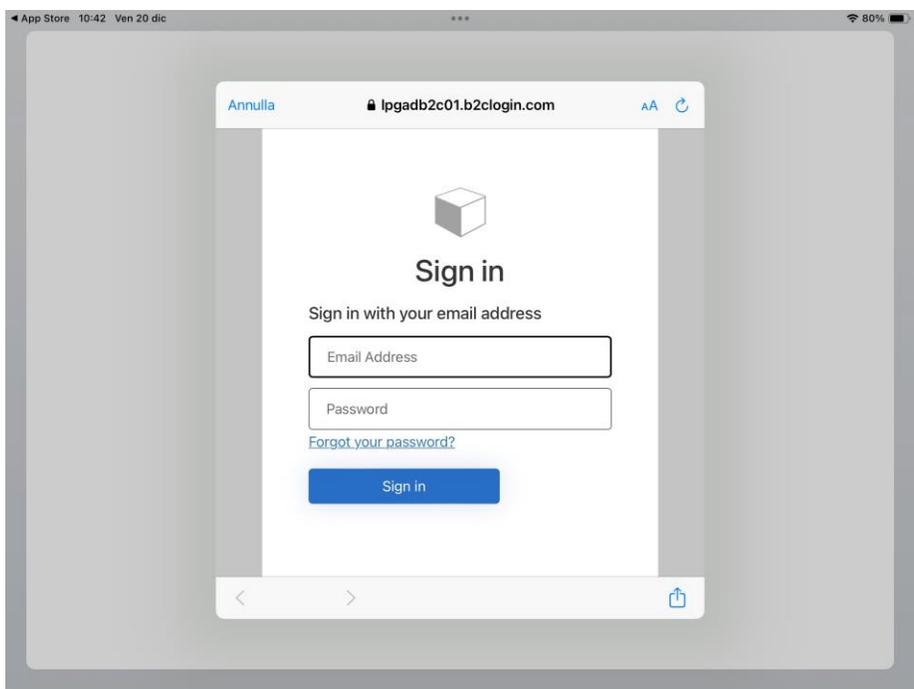

Inserisci il tuo nome utente (indirizzo e-mail associato al tuo account LPG®) e la tua password (esistente se sei già cliente LPG® o scelta da te).

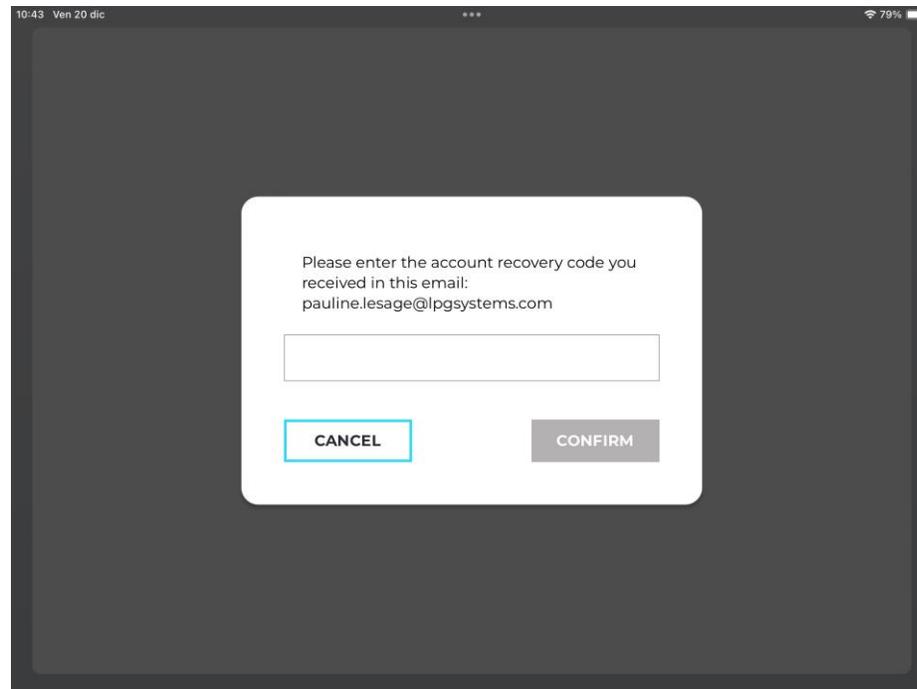

Riceverai **un codice di creazione dell'account** via e-mail. Inserire il codice e fare clic su **CONFIRM**.

Applicazione endermolink™


Cellu M6 Infinity®

! Se hai dimenticato la password, clicca su "Forgot your password?" o sul seguente link: <https://portal.lpgsystems.com/password> per reimpostare la password.



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

AVVIA l'applicazione endermolink™

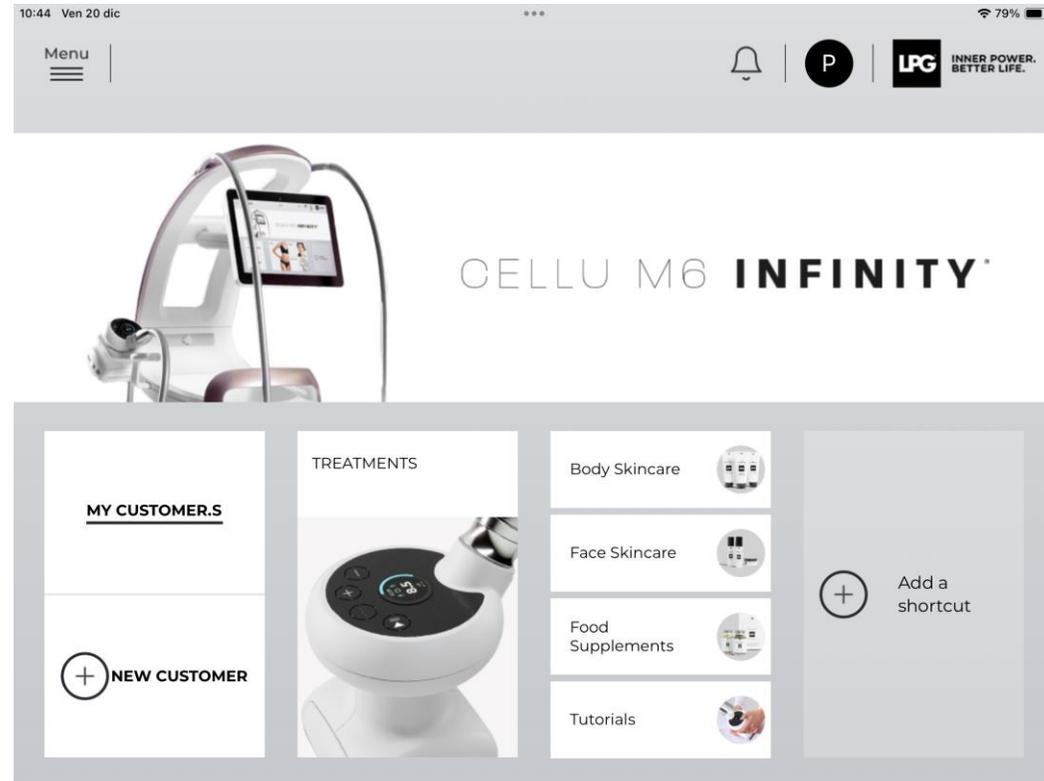

Benvenuti **nell'applicazione Endermolink™!**
Ora è possibile utilizzare l'applicazione e godere dei **suoi numerosi vantaggi.**

Applicazione endermolink™

Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

LPG[®]

**INNER POWER.
BETTER LIFE.**