



GUIDE INSTALLATION ENDERMOLINK™

CELLU M6 INFINITY®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

COMPATIBILITÉ DE L'APPLICATION ENDERMOLINK™

VERSIONS LOGICIELLES MINIMALES REQUISES :

- iOS : **iOS 17**
- Android : **Android 12**

Les versions antérieures pourraient limiter l'expérience utilisateur et restreindre l'accès à certaines fonctionnalités. Veuillez noter que la disponibilité des mises à jour vers Android 12 peut varier en fonction des fabricants et des modèles.

Nous vous recommandons de vérifier les spécifications de chaque appareil ou de consulter le fabricant pour confirmer leur compatibilité.

01

APPLICATION ENDERMOLINK™

VERSION ANDROID



Application endermolink™


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

CONNEXION DE LA TABLETTE À VOTRE RÉSEAU WI-FI

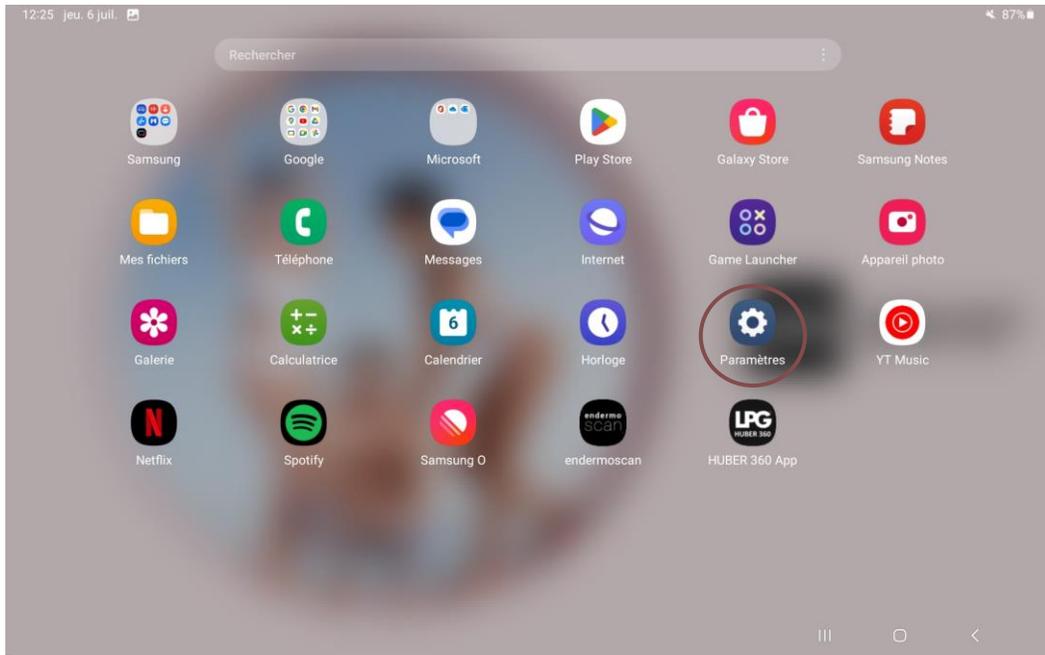


Démarrez l'application « **Paramètres** » présente sur l'écran d'accueil de votre tablette.

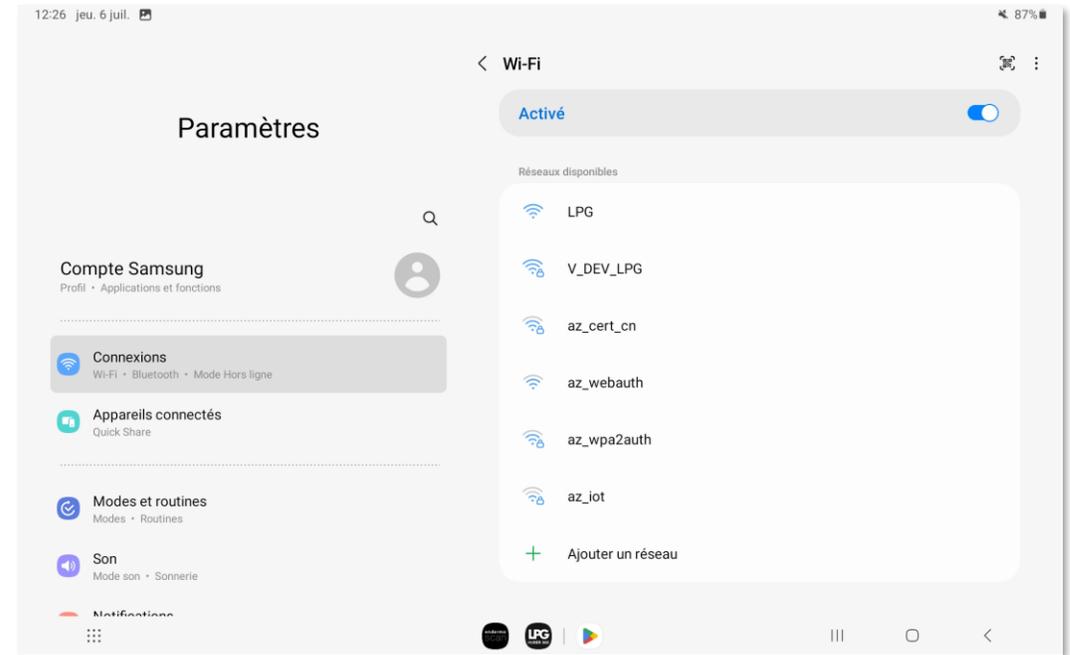


Sélectionnez la rubrique « **Connexions** » puis cliquez sur « **WI-FI** ». Sélectionnez votre réseau **WI-FI**.

ACCÈS PLAY STORE CONNEXION À VOTRE COMPTE GOOGLE

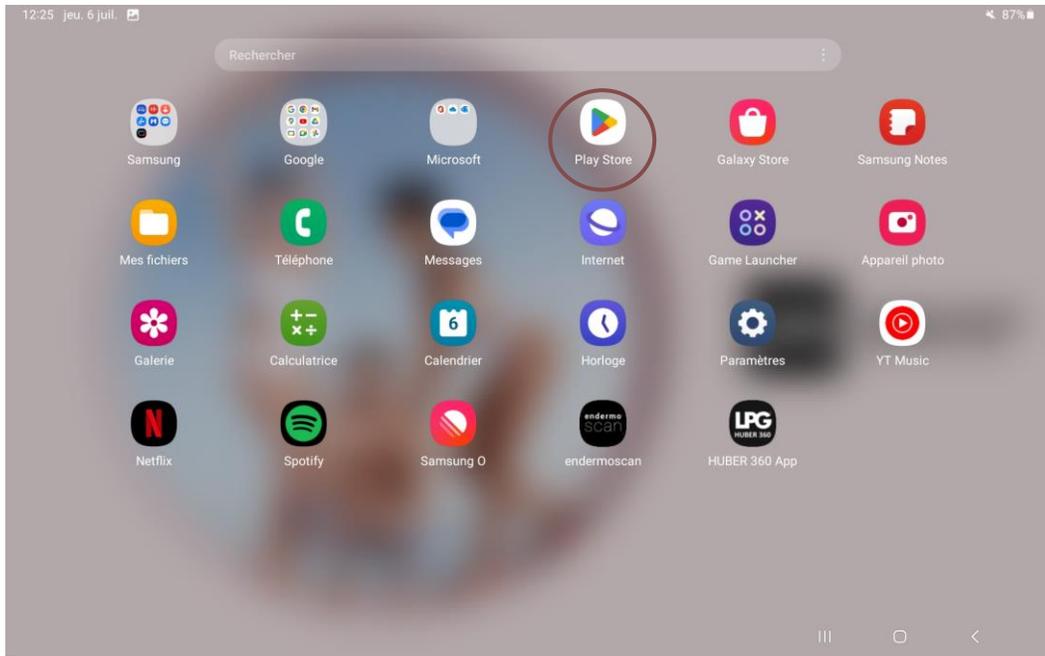

Ensuite, démarrez l'application « **Play Store** » présent sur l'écran d'accueil de votre tablette.

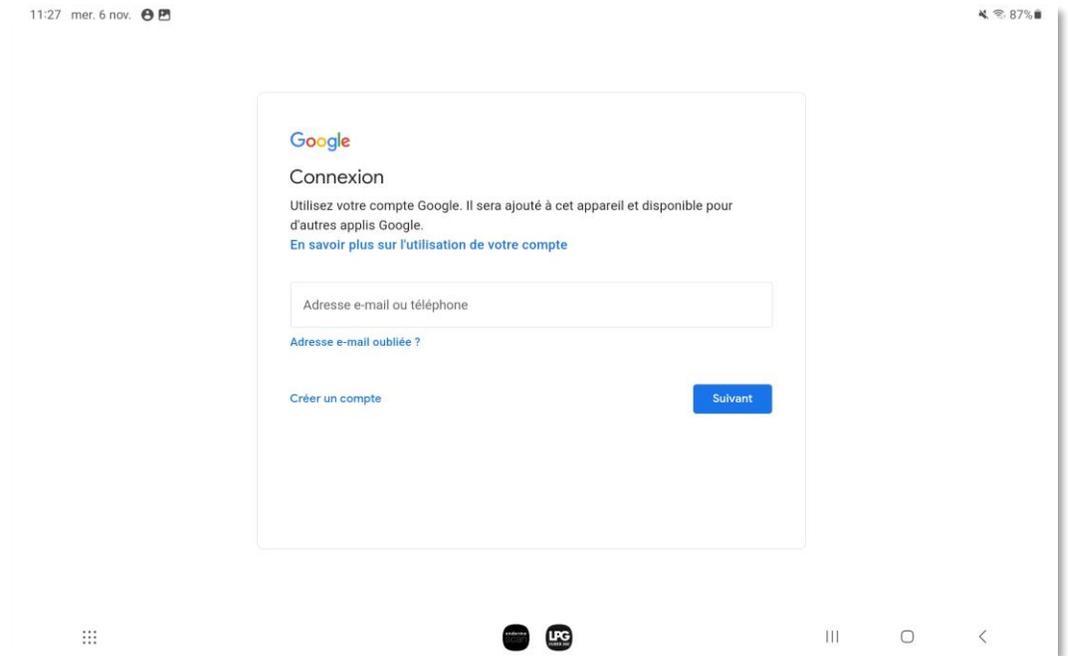

Connectez-vous à **votre compte Google**.
Renseignez **votre identifiant** (adresse e-mail personnelle) et mot de passe associé.

Application endermolink™


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

ACCÈS PLAY STORE CONNEXION À VOTRE COMPTE GOOGLE


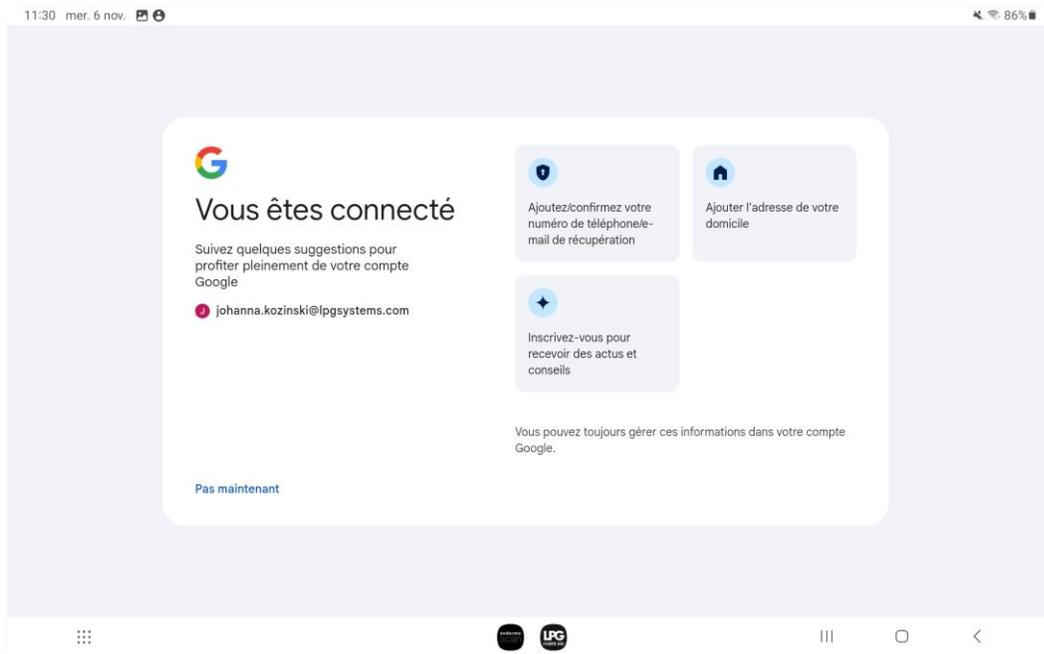


Vous êtes désormais **connecté(e)**.

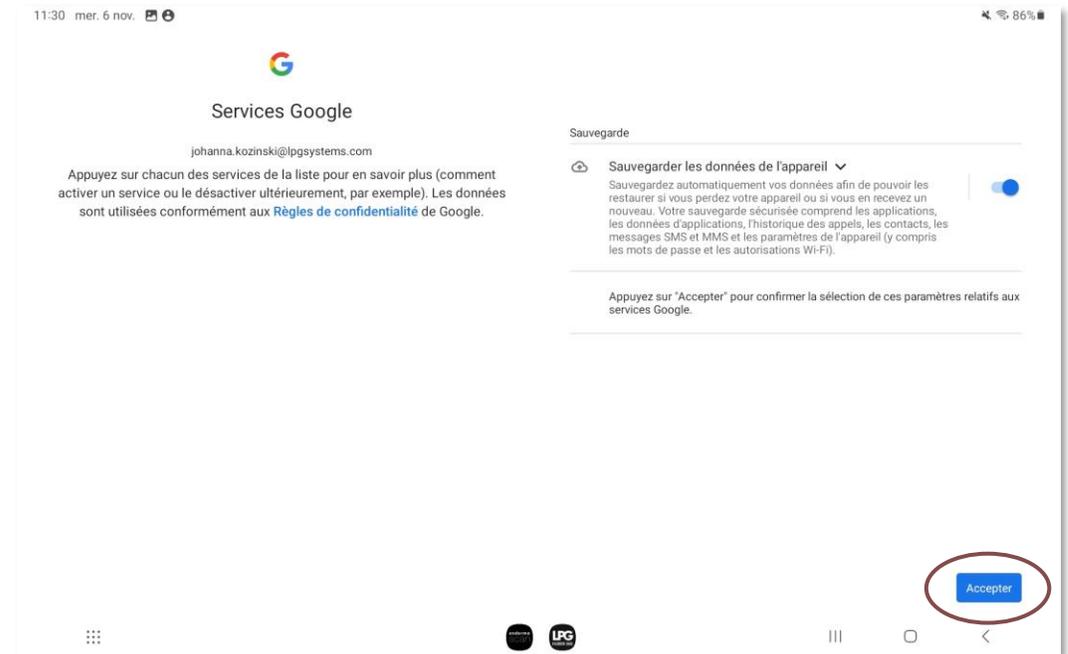

Vous pouvez sauvegarder les données de l'appareil, cliquez sur **Accepter**.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION endermolink™

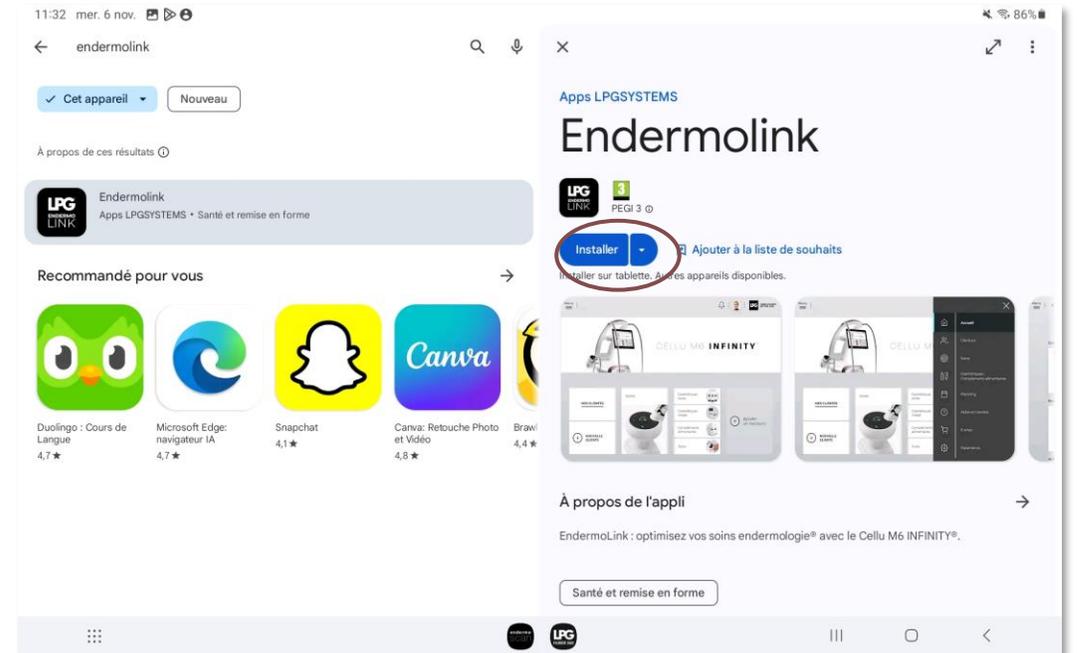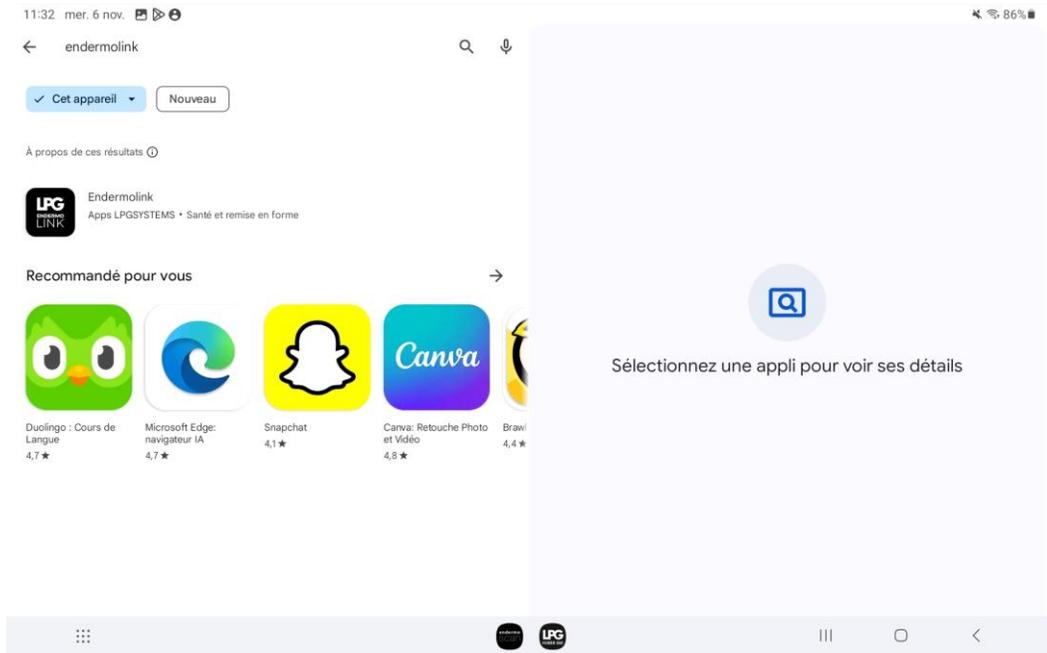

Lancez une recherche de l'application **Endermolink™** dans la **barre de recherche** de **Play Store**.

Application endermolink™

Cellu M6 Infinity®


L'application **Endermolink™** apparait, cliquez sur **Installer**.




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION endermolink™

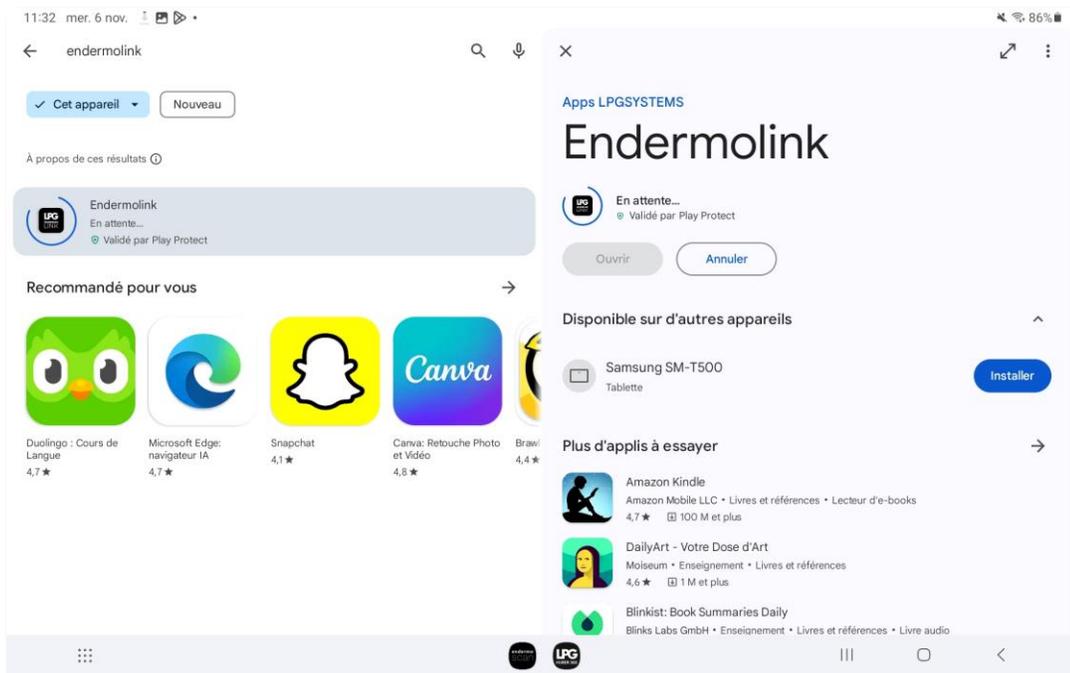

L'application **Endermolink™** est en cours de téléchargement.

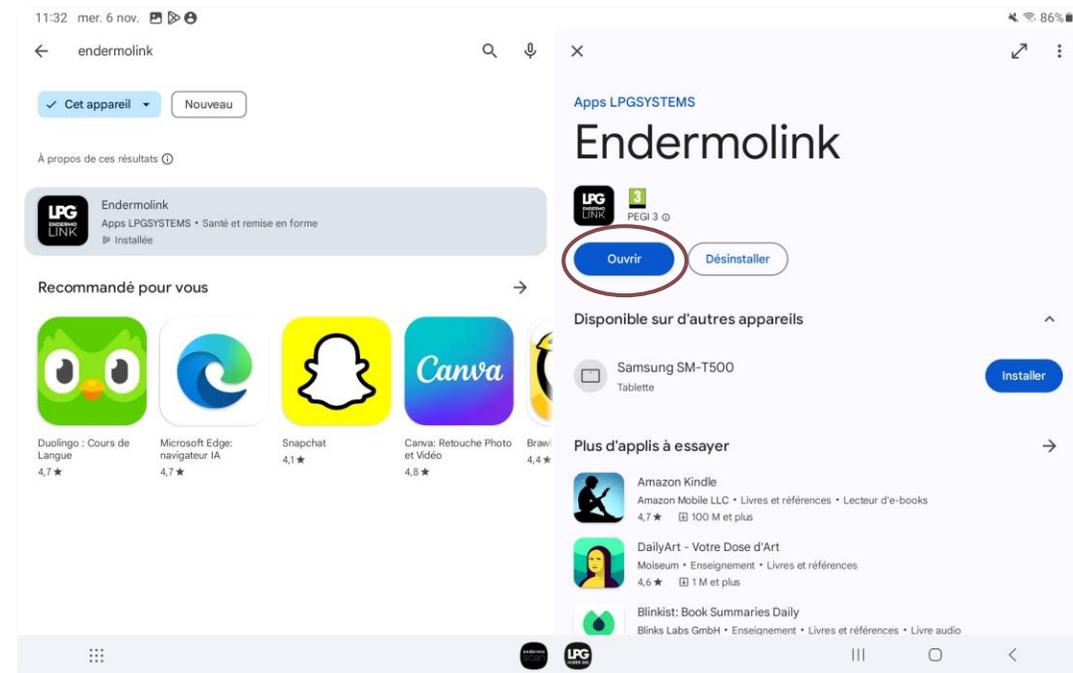

L'application **Endermolink™** est maintenant téléchargée, cliquez sur **Ouvrir**.

Application endermolink™

Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur


LANCEMENT DE L'APPLICATION endermolink™



Pour ouvrir l'application **Endermolink™**, cliquez sur **SE CONNECTER**.

Application endermolink™

Cellu M6 Infinity®

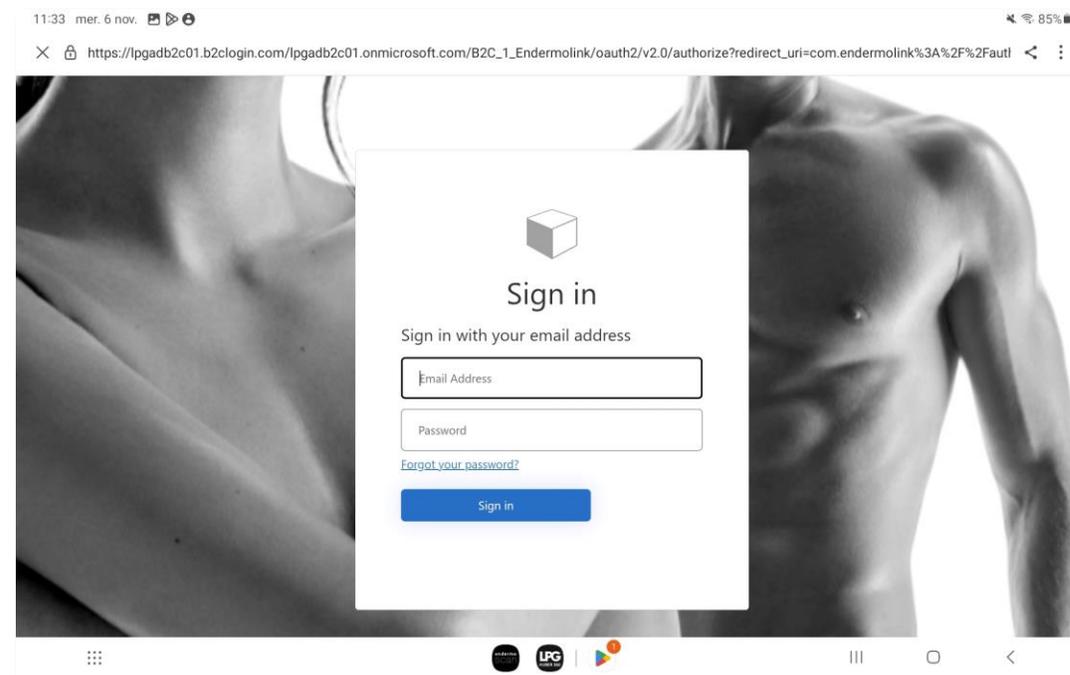

Renseignez votre identifiant (adresse email rattachée à votre compte LPG®) et votre mot de passe (existant si déjà client LPG® ou choisi par vos soins).


! En cas de mot de passe oublié, cliquez sur « Mot de passe oublié ? » ou sur le lien suivant : <https://portal.lpgsystems.com/password> pour réinitialiser votre mot de passe.




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

LANCEMENT DE L'APPLICATION endermolink™

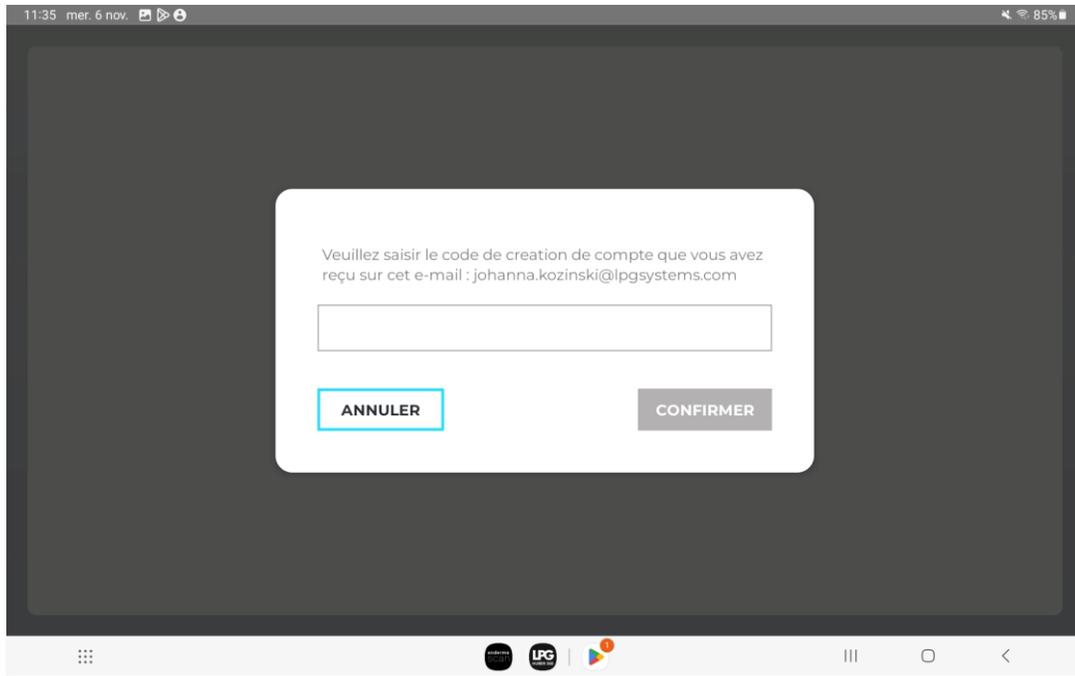

Vous recevez **un code de création de compte** par email. Renseignez-le et cliquez sur **CONFIRMER**.

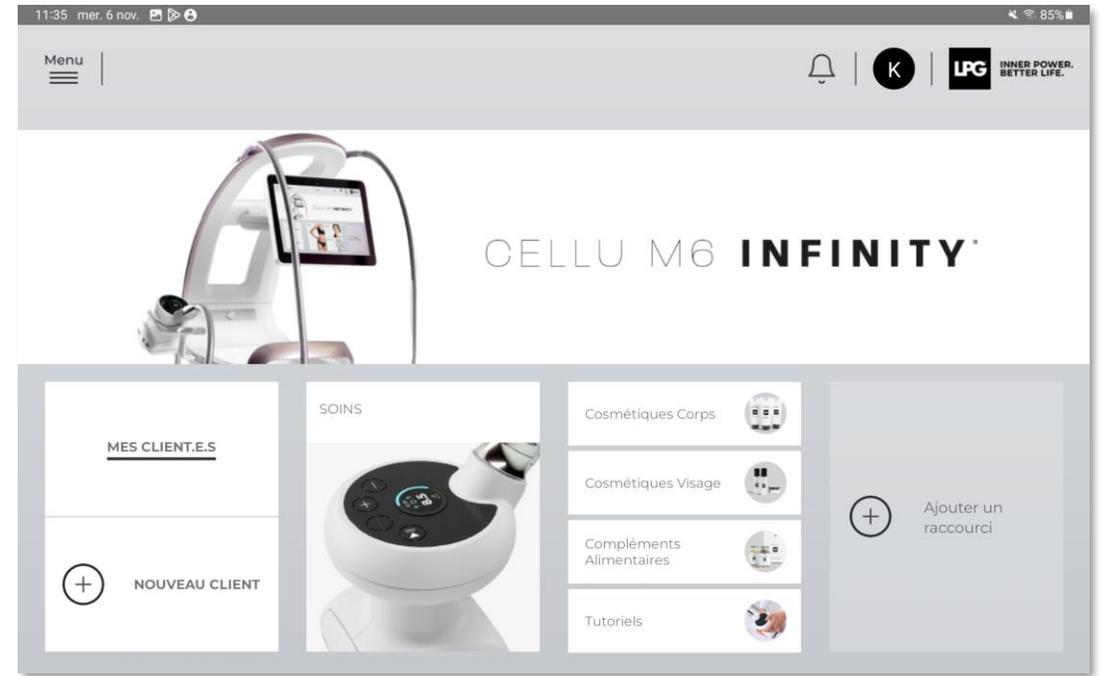

Bienvenue sur **l'application Endermolink™ !**
Vous pouvez dès à présent utiliser l'application et profiter de **ses nombreux avantages**.

Application endermolink™

Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

02

APPLICATION ENDERMOLINK™

VERSION iOS APPLE



Application endermolink™

Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

CONNEXION DE LA TABLETTE À VOTRE RÉSEAU WI-FI



Démarrez l'application « **Réglages** » présente sur l'écran d'accueil de votre tablette.

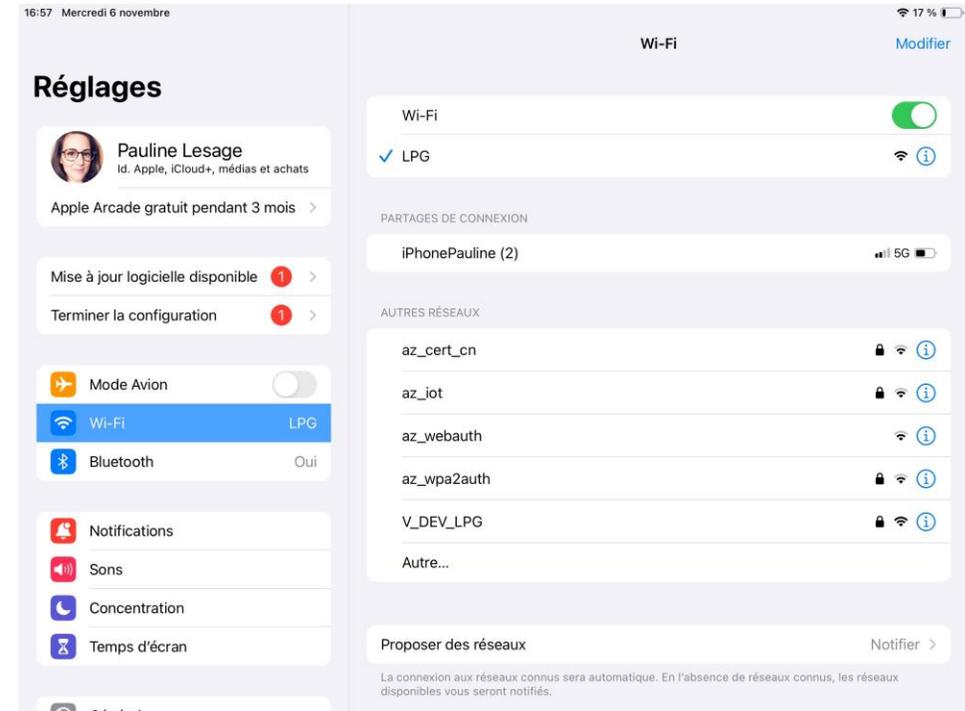


Sélectionnez la rubrique « **WI-FI** » puis **choisissez** votre réseau **WI-FI**.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION endermolink™



Démarrez l'application « **App Store** » présent sur l'écran d'accueil de votre tablette.

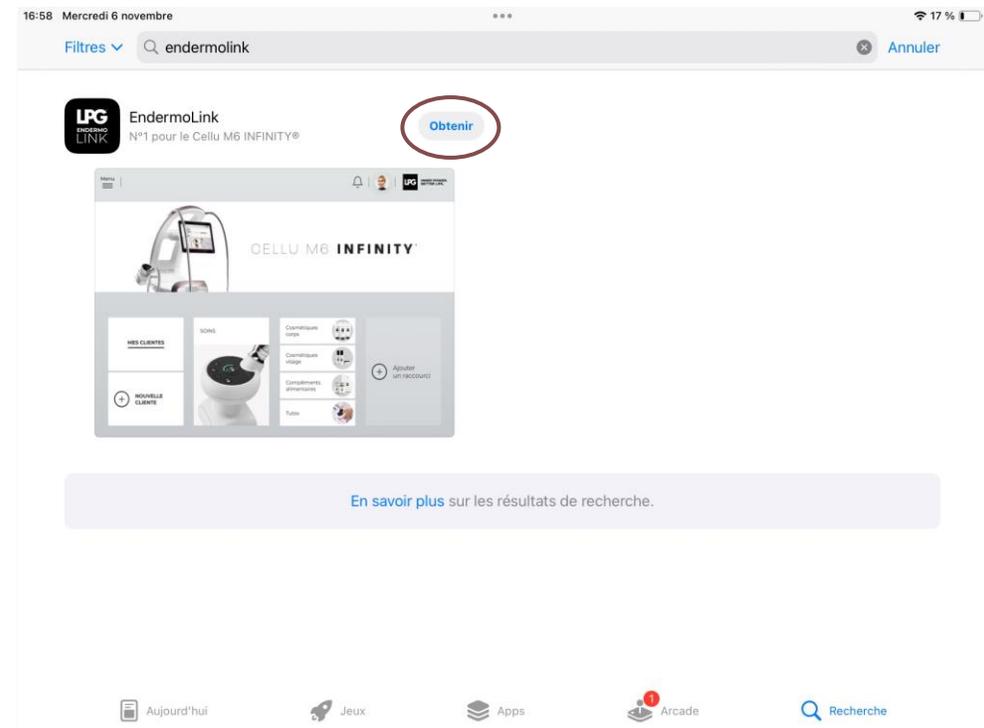

Lancez une recherche de l'application **Endermolink™** dans la **barre de recherche**. Celle-ci apparaît, cliquez sur **Obtenir**.

Application endermolink™


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION endermolink™

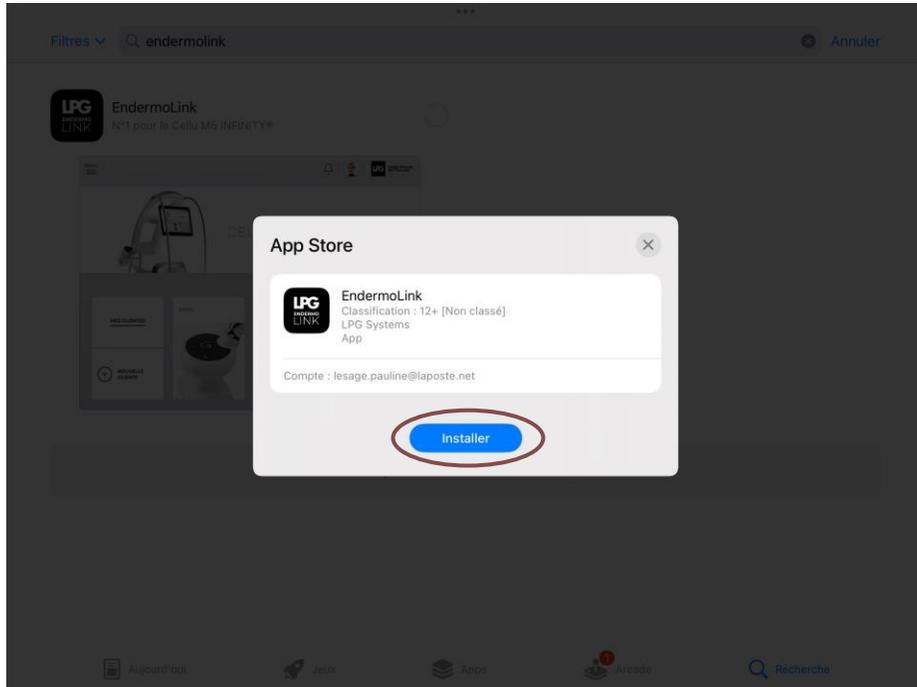

Puis cliquez sur **Installer**.

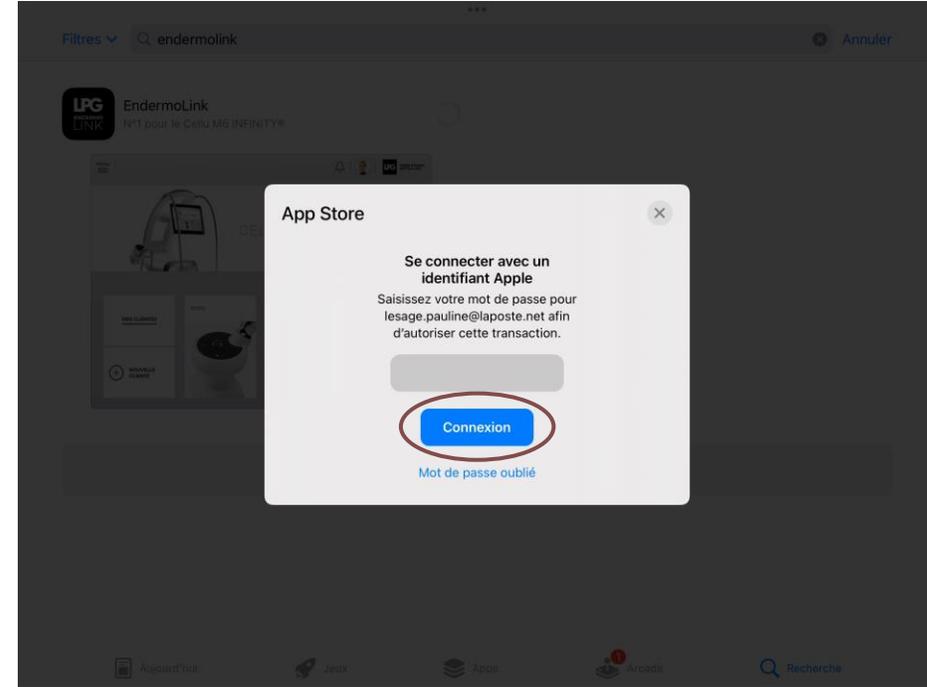

Afin de pouvoir télécharger l'application, connectez-vous **à votre compte Apple**. Renseignez votre **mot de passe** puis cliquez sur **Connexion**.

Application endermolink™


Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION endermolink™

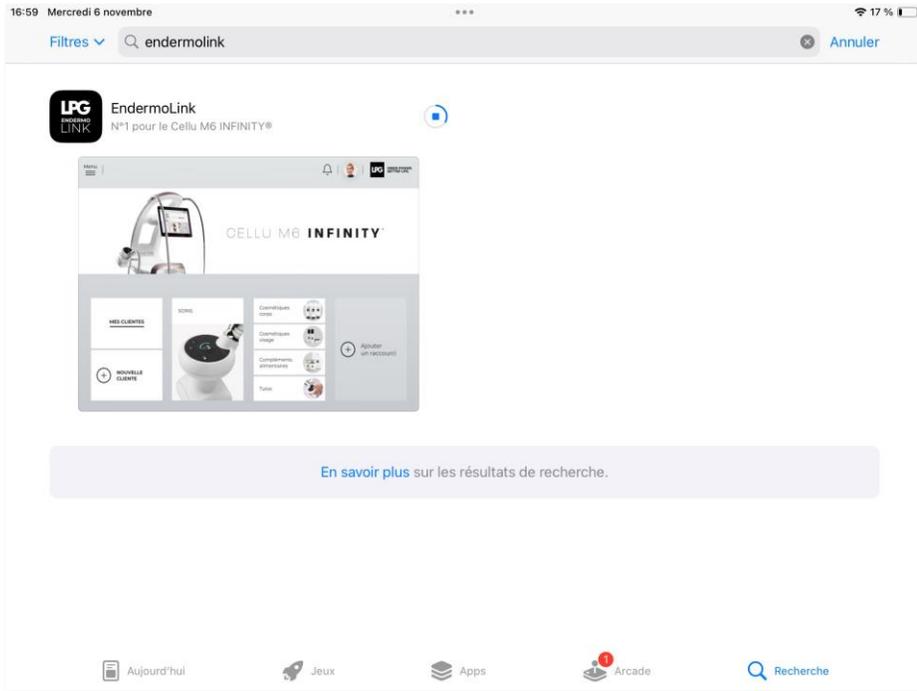

L'application **Endermolink™** est en cours de téléchargement.

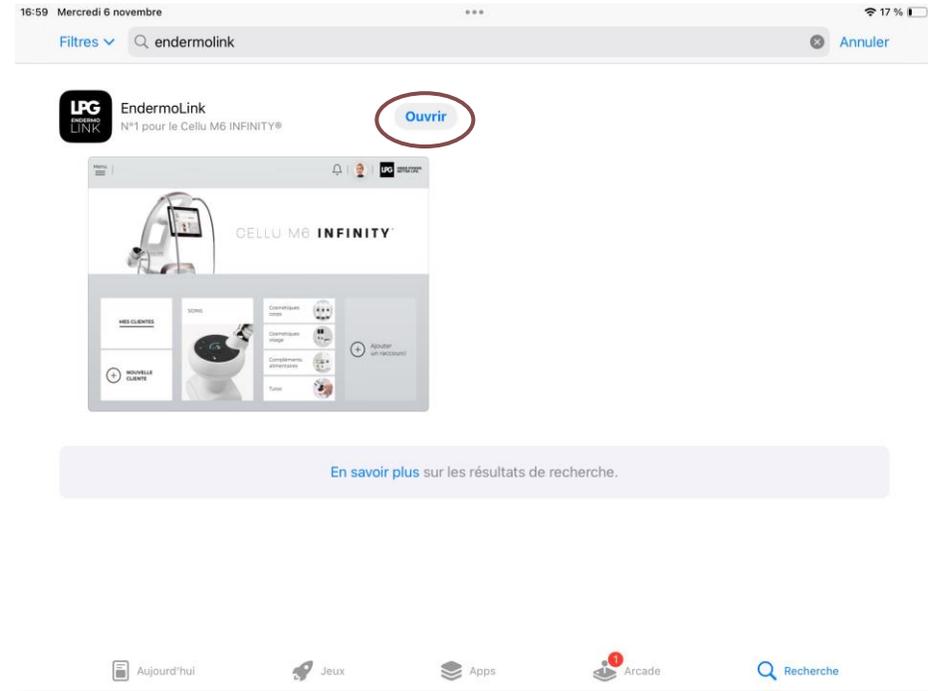

L'application **Endermolink™** est maintenant téléchargée, cliquez sur **Ouvrir**.

Application **endermolink™**

Cellu M6 Infinity®




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

LANCEMENT DE L'APPLICATION endermolink™



Pour ouvrir l'application **Endermolink™**, cliquez sur **SE CONNECTER**.

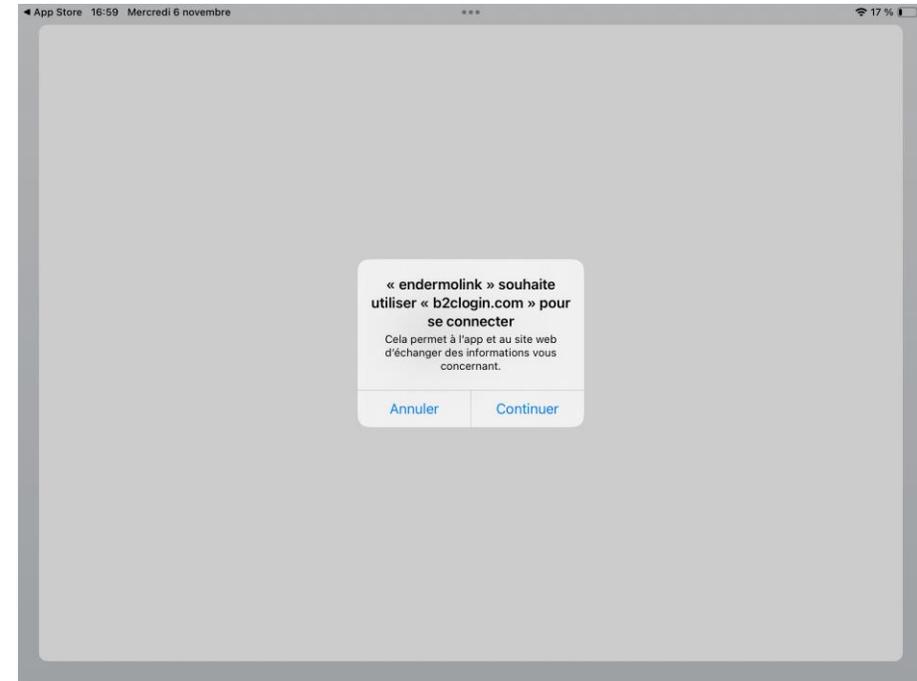

Un **pop-up de connexion** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

Application endermolink™



Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

LANCEMENT DE L'APPLICATION endermolink™

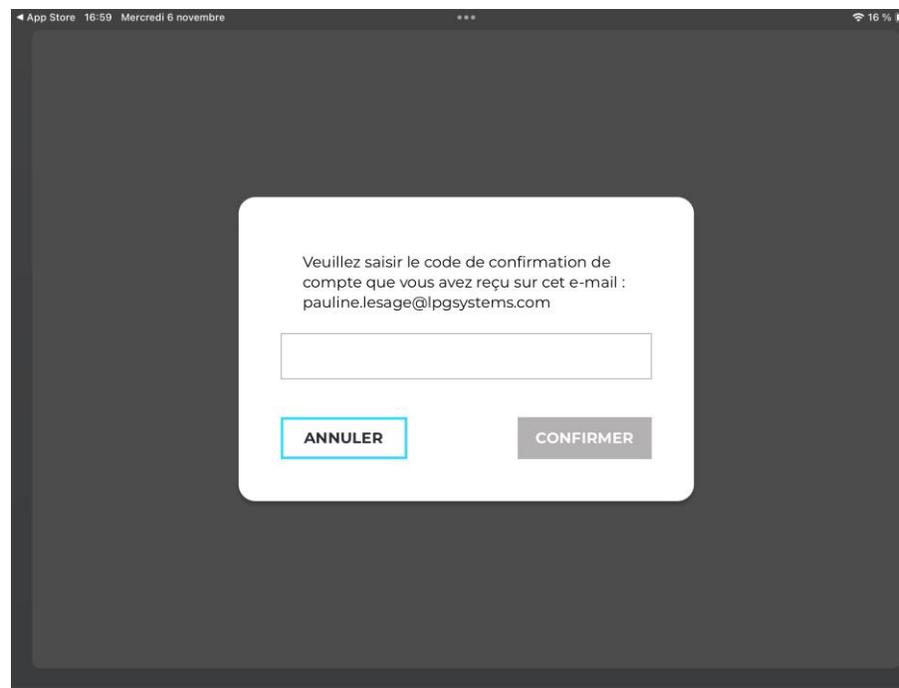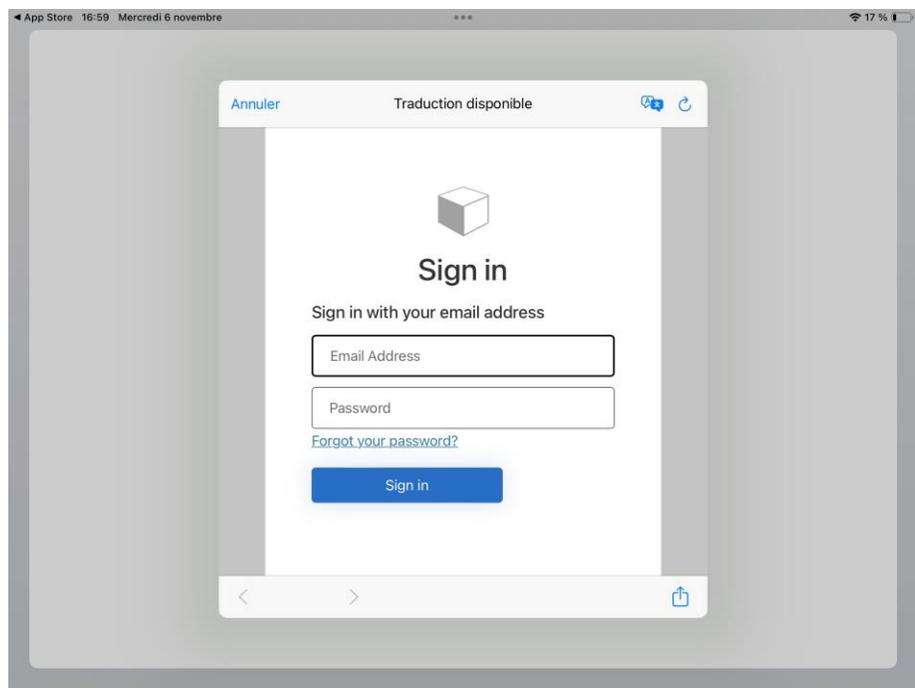

Renseignez votre identifiant (adresse email rattachée à votre compte LPG®) et votre mot de passe (existant si déjà client LPG® ou choisi par vos soins).

Vous recevez **un code de création de compte** par email. Renseignez-le et cliquez sur **CONFIRMER**.

Application endermolink™

Cellu M6 Infinity®


! En cas de mot de passe oublié, cliquez sur « Mot de passe oublié ? » ou sur le lien suivant : <https://portal.lpgsystems.com/password> pour réinitialiser votre mot de passe.



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur

LANCEMENT DE L'APPLICATION endermolink™

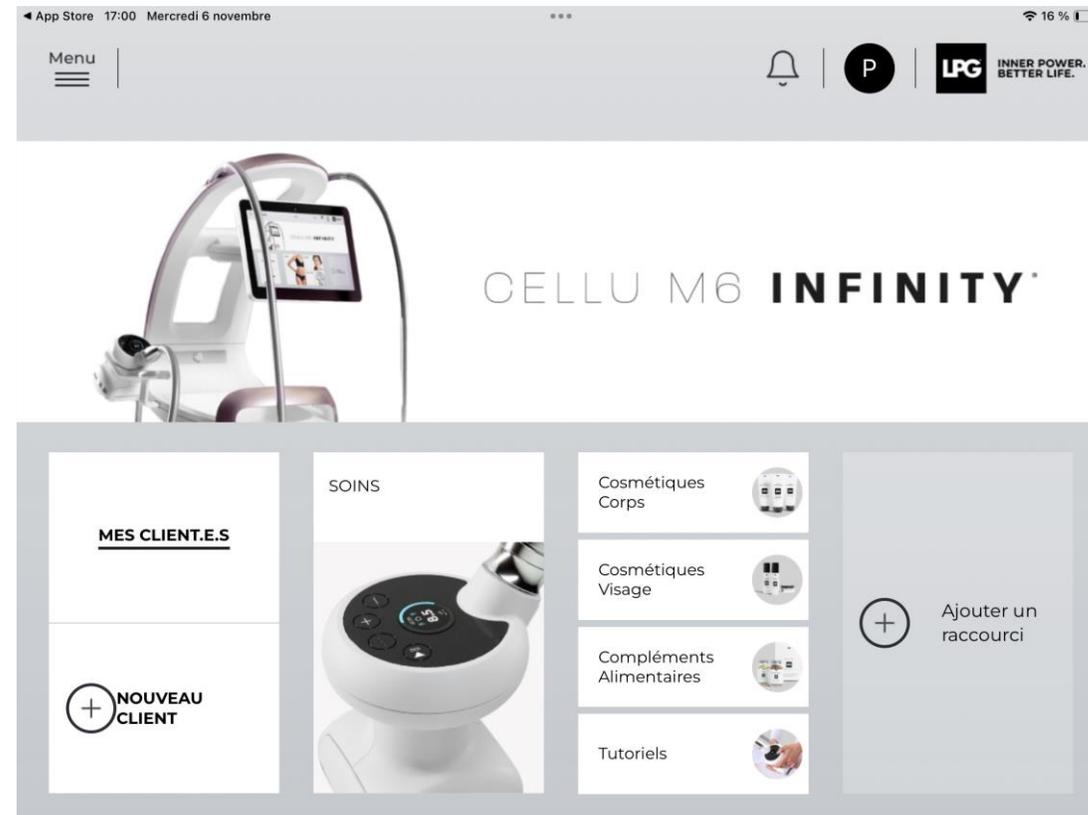

Bienvenue sur **l'application Endermolink™ !**
Vous pouvez dès à présent utiliser l'application et profiter
de **ses nombreux avantages.**

Application endermolink™

Cellu M6 Infinity®



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

Agir de l'intérieur. Pour le meilleur



MERCI
DE VOTRE ATTENTION

LPG[®]

INNER POWER.
BETTER LIFE.