



Concept înregistrat

MANUAL DE UTILIZARE

CELLU M6 Alliance[®] Medical

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual
înainte de utilizarea echipamentului.

© Copyright 2024. LPG[®], Cellu M6[®], Endermowear[™] și Endermologie[®] sunt mărci înregistrate
LPG SYSTEMS și/sau mărci comerciale asupra cărora acesta deține drepturi exclusive.
Reproducerea, chiar și parțială, este strict interzisă.

GU1601-RO
Indice B1 01/2024



Felicitări pentru achiziționarea aparatului dvs. CELLU M6 Alliance® Medical. Acest model este rezultatul multor ani de experiență în proiectarea și fabricarea sistemelor pentru tratamentul țesutului cutanat. Veți experimenta de deplin perfecțiunea și fiabilitatea tehnică a LPG Systems, care este lider în acest domeniu. Conceput pentru a oferi în permanență satisfacție, dispozitivul dvs. este prevăzut cu un software specific, inventat pentru a asigura conexiunea cu serverul dedicat al LPG Systems. Pe baza datelor colectate prin acest software, LPG Systems va putea să vă ofere servicii mai bune de asistență și întreținere.

Acest manual de utilizare conține descrierea funcțională, instrucțiunile pentru întreținerea de bază, care trebuie realizată periodic, precum și instrucțiunile de siguranță.

Dispozitivul dvs. este conceput pentru a fi utilizat în tratamentul țesutului conjunctiv. El trebuie utilizat numai de un profesionist care a participat la instruirea producătorului, oferită de LPG Systems sau de un furnizor autorizat, în cazul în care locuiți în afara Franței.

În cazul în care aveți vreun dubiu de orice fel cu privire la utilizarea sau întreținerea echipamentului dvs., nu ezitați să contactați LPG Systems prin intermediul Departamentului Asistență Clienți al distribuitorului dvs.

+33 (0)4 75 78 69 00

ATENȚIE

Pentru a satisface mai bine cerințele și așteptările clienților, LPG Systems este în continuă căutare a unor modalități de îmbunătățire a designului și a calității produselor sale. Acest lucru va explica acele câteva diferențe minore între echipamentul dvs. și cel descris în acest manual.

→ CONȚINUTUL PACHETULUI

- > Un dispozitiv CELLU M6 Alliance® Medical
- > Un cap Alliance 80
- > Un cap Alliance 50
- > Un cap TR30
- > Un set de micro-duze și micro-capete
- > Un cap Ergolift®
- > Două camere Ergolift® (Lift20 și Lift10)
- > Un cablu de alimentare pentru curent electric
- > Un ghid cu instrucțiuni de despachetare și instalare rapidă
- > Un set de marketing

Lista accesoriilor furnizate împreună cu dispozitivul dvs.:

În funcție de versiunea pe care o aveți, (vezi numărul de serie de pe plăcuța de identificare), anumite protocoale nu sunt activate și accesoriile aferente acestora nu sunt furnizate.

În consecință, paragrafele care le descriu nu se referă la această versiune (vezi tabelul de mai jos).

În cazul în care aveți dubii privind funcționarea unității dvs. sau doriți să obțineți un model complet, contactați Departamentul Asistență Clienți al LPG Systems sau al distribuitorului dvs.

	Cellu M6 Alliance® Medical	Cellu M6 Alliance® Medical Plus	Cellu M6 Alliance® Medical Premium
Alliance 80	✓	✓	✓
Alliance 50		✓	✓
TR30		✓	✓
Micro-duze și micro-capete		✓	✓
Ergolift			
Ghid cu instrucțiuni de despachetare și instalare rapidă	✓	✓	✓
Cablu	✓	✓	✓
Set de marketing	✓	✓	✓

→ CUPRINS

1. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	5
2. DESCRIEREA COMENZILOR	7
3. PRECAUȚIE PENTRU UTILIZARE	10
4. ÎNTREȚINERE	14
5. DEPANARE	22
6. SPECIFICAȚII TEHNICE	23
7. CAPETE DE TRATAMENT	24
8. ENDERMOWEAR	39
9. CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE	40
10. ANEXĂ: COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ	44

ATENȚIE

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice ale produsului fără o notificare prealabilă. Orice reproducere – chiar și parțială – este strict interzisă. Ilustrațiile prezentate în acest manual de utilizare nu au caracter obligatoriu.

→ DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Dispozitivul CELU M6 Alliance® Medical este destinat utilizării în scop terapeutic. Poate fi folosit pentru:

1. Reducerea limfedemului secundar al brațului după o masectomie
2. Îmbunătățirea limfedemului secundar
3. Îmbunătățirea circulației limfatice în zona tratată
4. Ameliorarea durerilor musculare minore
5. Ameliorarea spasmelor musculare
6. Îmbunătățirea temporară a circulației sanguine locale
7. Îmbunătățirea temporară a durerii musculare minore asociată febrei musculare (durere musculară cu debut întârziat)
8. Îmbunătățirea circulației locale în timpul refacerii pielii după arsuri
9. Reducerea aspectului de coajă de portocală și a circumferinței zonelor tratate
10. Îmbunătățirea temporară a circulației limfatice și a circulației sanguine locale pentru îmbunătățirea troficității pielii în zonele tratate
11. Îmbunătățirea calității pielii în caz de cicatrici, fibroză
12. Ameliorarea îmbătrânirii pielii (riduri, linii fine, piele căzută, grăsime infiltrată, fermitate, elasticitate, culoarea tenului, pungi sub ochi)
13. Stimularea fibroblastelor (sinteza de collagen, elastină, acid hialuronic)

Dispozitivul poate fi utilizat în spitale și clinici de reabilitare de către specialiști și fizioterapeuți. Trebuie utilizat numai la pacienții adulți, indiferent de greutate și sex. Este un dispozitiv independent care nu poate fi utilizat cu alte aparate. Trebuie utilizat numai de către profesioniști care au fost instruiți în mod special de LPG Systems cu privire la modul de utilizare și nu este adecvat pentru a fi utilizat acasă. Dispozitivul trebuie utilizat numai la adulți.

PRINCIPII DE FUNCȚIONARE:

Principiile de funcționare ale dispozitivului medical CELLU M6 Alliance® Medical se referă la o forță de aspirație combinată cu mișcările roletelor/supapelor, realizate cu capetele de tratament. Aceste capete sunt așezate pe pielea sănătoasă a pacientului, iar apoi sunt deplasate peste zona care trebuie tratată, de către profesionistul care a fost instruit de LPG Systems.

→ DISPOZITIVUL CELLU M6 ALLIANCE® MEDICAL

FURTUN STÂNGA

ECRAN TACTIL
ORIENTAT FRONTAL

SUPORT PENTRU CAP

MECANISM
DE BLOCARE A ROȚILOR

FURTUN DREAPTA

SUPORT PENTRU CAP

TAVĂ DE DEPOZITARE
A CAPULUI

SERTAR DE DEPOZITARE
A CAPULUI

ROȚI

Înainte de utilizare, asigurați-vă că este complet derulat cablul de alimentare.

UȘĂ DE ACCES LA FILTRU

ÎNTRERUPĂTOR GENERAL,
PRIZĂ ȘI INDICAREA PUTERII
ELECTRICE

PLĂCUȚĂ
DE IDENTIFICARE

⚠ ATENȚIE

Unitatea poate funcționa numai dacă este conectată la rețeaua de alimentare cu energie electrică prin cablul său de alimentare și cu condiția ca întrerupătorul ON (PORNIT) să fi fost activat, iar lumina verde ce indică prezența tensiunii să fie aprinsă. După pornirea unității, așteptați câteva secunde pentru ca ecranul să afișeze informații.

→ ACCESUL LA FILTRU



FILTRU FURTUN DREPT


FILTRU FURTUN STÂNG

ACCESUL LA FILTRE

Filtrele sunt accesibile prin partea din spate a unității.

→ ECRAN DE COMANDĂ

INDICATOR PUTERE ELECTRICĂ

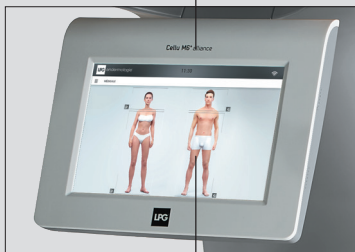

ECRAN TACTIL


ACCES PORT USB



⚠ ATENȚIE

Pentru instrucțiuni detaliate privind utilizarea interfeței tactile, consultați manualul de utilizare a interfeței tactile primit în timpul instruirii și disponibil la Departamentul Asistență Clienți.


→ CAP ALLIANCE 80

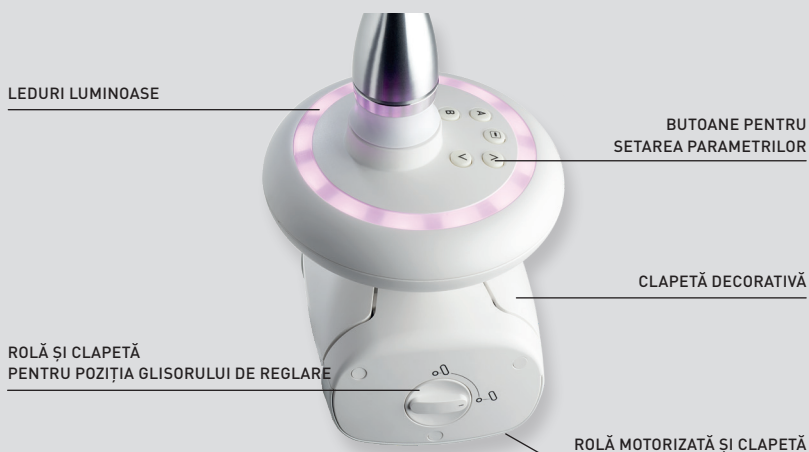

→ CAPETE ALLIANCE 50 ȘI TR30



→ CAP ERGOLIFT ADAPTOR

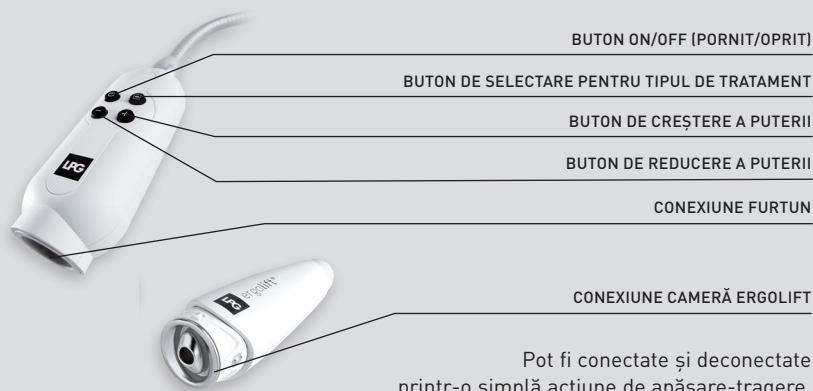

→ ROȚI

Dispozitivul CELLU M6 Alliance® Medical este prevăzut cu roți de blocare. Urmați procedura de mai jos pentru a bloca sau a debloca roțile:



⚠ ATENȚIE

În cazurile în care unitatea nu a fost deplasată un timp îndelungat, este posibil să se formeze urme pe sol, acolo unde sunt roțile. Acest fenomen este rezultatul unei reacții chimice între componentele anumitor pardoseli și cele ale roților dispozitivului CELLU M6 Alliance® Medical.

→ INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

În timpul utilizării dispozitivului electric trebuie respectate toate măsurile de siguranță. Înainte de utilizarea dispozitivului, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și măsurile de siguranță.

PERICOL - PENTRU REDUCEREA LA MINIM A RISCULUI DE ȘOC ELECTRIC:

- După utilizare și înainte de curățare și întreținere, deconectați întotdeauna dispozitivul de la priza de alimentare electrică.
- Verificați dacă tensiunea de alimentare a unității, indicată pe plăcuța cu date tehnice, corespunde cu tensiunea rețelei de alimentare cu energie electrică.
- Unitatea trebuie conectată prin cablul1 de alimentare furnizat la o priză cu împământare, în conformitate cu standardele electrice uzuale. Cu acest echipament nu trebuie folosite adaptoare electrice.
- Asigurați-vă că unitatea este conectată la un sistem cu protecție diferențială pentru CC și CA.

→ AVERTISMENT

- **PENTRU A REDUCE LA MINIM RISCUL DE ARSURI, INCENDIU, ȘOC ELECTRIC SAU VĂTĂMARE:**
- Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare electrică.
- Deconectați unitatea de la sursa de alimentare electrică dacă nu intenționați să o folosiți o perioadă îndelungată.
- O atenție deosebită trebuie acordată în timpul utilizării dispozitivului cu sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu dizabilități.
- Nu utilizați niciodată unitatea în alte scopuri în afara celor recomandate de LPG Systems. Utilizați numai capetele de tratament furnizate împreună cu unitatea dvs. sau recomandate de LPG Systems.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă:
 - Priza sau cablul de alimentare electrică sunt deteriorate. Dispozitivul nu funcționează corect. Dispozitivul este deteriorat sau a căzut sau a fost aruncat. Dispozitivul a fost expus la umiditate excesivă.
- Nu deplasați unitatea trăgând de cablul de alimentare electrică.
- Derulați în întregime cablul de alimentare electrică și țineți-l la distanță de suprafețele calde.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă orificiile de ventilație sunt blocate. Asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt păstrate curate, fără praf sau alte impurități.
- Nu lăsați resturi solide, lichide sau alte corpuri străine să cadă sau să fie aspirate în unitate, întrucât ele ar putea provoca daune.

⚠ ATENȚIE

Orice incident grav care apare în legătură cu dispozitivul dvs. CELLU M6 ALLIANCE® MEDICAL trebuie notificat distribuitorului dvs. LPG local și autorității competente

→ INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Nu utilizați niciodată dispozitivul pe o podea prăfuită sau denivelată sau într-o atmosferă umedă.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul în prezența aerosolilor sau a oxigenului.
- Înainte de a deconecta unitatea de la sursa de alimentare electrică, setați toate comenzile în poziția „off” („oprit”) și decuplați unitatea. Deconectarea unității înseamnă deconectarea de la priza de curent.
- Este interzisă modificarea acestui echipament fără aprobarea prealabilă din partea producătorului.
- Este interzisă utilizarea unor componente sau piese de schimb care nu sunt recomandate de LPG Systems.
- Returnați dispozitivul la Centrul de Service al LPG Systems pentru examinare și reparație.

→ PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE

ATENȚIE: PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚII.

Dispozitivul dvs. trebuie utilizat pe piele sănătoasă. Înainte de utilizarea dispozitivului este important să citiți și să respectați următoarele precauții și contraindicații.

- Nu atingeți niciodată în același timp pacientul și cablurile sau conexiunile neprotejate ale dispozitivului.
- Nu utilizați niciodată adaptorul drept cap de tratament și nu-l lăsați să intre în contact direct cu pielea.
- Utilizați numai capetele de tratament furnizate împreună cu unitatea dvs. sau recomandate de LPG Systems.
- Nu utilizați capetele de tratament direct pe piele. Purtați costumul de tratament ENDERMOWEAR™ furnizat de LPG Systems.
- LPG Systems nu va fi responsabil în cazul utilizării necorespunzătoare a echipamentului.
- Utilizarea incorectă a dispozitivului poate provoca durere sau vătămarea țesutului.
- Operatorul trebuie să fie deosebit de atent la senzațiile pe care le percepe persoana supusă tratamentului.
- Operatorul trebuie să se asigure că parametrii (intensitate, secvențialitate, diferențiere...) sunt întotdeauna adaptați țesutului care este tratat.
- Nu vă sprijiniți, nu vă rezemați și nu vă așezați pe unitate.
- La trecerea peste un prag sau o treaptă, vă recomandăm să deplasați unitatea cu atenție, ținând ferm brațul central al monitorului pentru a evita riscul de basculare.
- Nu folosiți conexiunea USB în timpul tratamentului.
- Nu utilizați unitatea în condiții de mediu nefavorabile (vezi specificațiile tehnice).
- Ștecherul este utilizat ca dispozitiv de deconectare. Deconectarea unității înseamnă decuplarea ștecherului.
- Poziționați dispozitivul astfel încât unitatea rețelei de alimentare cu energie electrică să fie întotdeauna accesibilă.
- Nu atingeți în același timp pacientul și conexiunile furtunului.
- Nu utilizați capetele de tratament în contact cu uleiuri vegetale.

→ ATENȚIE

Europa VII-H05VVF3G1,50-C19; Italia I/3/16-H05VVF3G1,50-C19; Elveția 23G-H05VVF3G1,50-C19; Marea Britanie BS13/13-H05VVF3G1,50-C19; Japonia 498GJ-VCTF3X2,00-C19; SUA, Canada, Mexic N5/15-SJT3X14AWG-C19 (conectați la priza de curent de la spital în mediul spitalicesc).

→ CONTRAINDICAȚII

- Nu tratați rănila deschise, ochii, zonele intracavitare, mucoasele, organele genitale sau sânii.
- Acest dispozitiv nu este recomandat pentru femeile însărcinate. În cazul unei sarcini, nu tratați regiunea lombară-abdominală. Consultați un medic cu privire la acest tratament.
- Nu tratați pacienții care au o boală infecțioasă, o tumoră în creștere, flebită, o rană sau o zonă infectată.
- Nu tratați pacienții care au cancer de piele, o tumoră vizibilă sau alte leziuni canceroase. Consultați un medic în cazurile în care pacientul are anamneză de tumori sau este în remisie.
- Nu tratați zonele inflamatoare sau cicatricile fără consultarea unui medic și fără instruire tehnică din partea LPG pentru zonele afectate.
- Nu tratați persoanele cu probleme circulatorii fără a consulta, în prealabil, medicul acestora și fără instruire tehnică din partea LPG pentru zonele afectate.
- Nu tratați un pacient care are o durere persistentă și inexplicabilă fără consultarea unui medic și fără instruire tehnică din partea LPG pentru zonele afectate.
- Nu tratați un pacient după un tratament medical invaziv fără consultarea unui medic sau a chirurgului care a efectuat tratamentul și fără instruire tehnică privind dispozitivul LPG pentru zonele afectate.
- Pentru a evita formarea unor vânătăi, aveți grijă atunci când stabiliți nivelul de sensibilitate al unui pacient și evitați utilizarea la pacienții cărora li se administrează medicamente anticoagulante.
- Opriti imediat tratamentul dacă pacientul simte durere și consultați un medic.
- Acest dispozitiv nu trebuie să fie folosit pe dermatoze, erupții cutanate, herpes, acnee inflamatorie sau infecțioasă sau vitiligo.
- Din cauza riscului de interferență, este important ca profesionistul să se asigure că pacientul nu este purtătorul unui dispozitiv medical personal, cum ar fi un stimulator cardiac. Într-un astfel de caz, profesionistul trebuie să obțină detalii despre dispozitivul respectiv pentru a se asigura că nu va interfera și nu va afecta utilizarea corectă a echipamentului.
- Întrucât această listă nu este exhaustivă, consultați un medic în cazul în care aveți îndoieli.
- Pentru o listă mai detaliată a indicațiilor și contraindicațiilor, consultați manualele de instruire.

⚠ ATENȚIE

Această unitate conține programe care să îl ajute pe operator să obțină cele mai bune rezultate așteptate pentru fiecare caz supus tratamentului. În niciun caz, aceste programe nu vor fi interpretate ca o garanție a unui tratament de succes, care variază, în funcție de morfologia, psihologia și comportamentul alimentar al fiecărui pacient.

→ COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ

- Dispozitivul dvs. CELLU M6 Alliance® Medical necesită o atenție deosebită în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică, trebuie instalat și reparat conform informațiilor furnizate în acest ghid de utilizare.
- Dispozitivele de comunicații prin radiofrecvență portabile și mobile nu trebuie să fie utilizate la mai puțin de 30 cm de dispozitivul dvs., întrucât pot provoca o funcționare nedorită.
- Utilizarea altor capete de tratament, în afara celor furnizate de LPG, poate duce la creșterea emisiilor sau la scăderea imunității dispozitivului.
- Dispozitivul dvs. CELLU M6 Alliance® Medical nu trebuie folosit în apropierea sau în combinație cu alte dispozitive medicale.
- Dispozitivul Cellu M6 Alliance® Lab Medical nu gestionează performanțe esențiale.
- În apropierea echipamentelor marcate cu următorul simbol pot apărea interferențe:



Pentru informații suplimentare privind compatibilitatea electromagnetică, consultați anexa „Compatibilitatea electromagnetică”

→ PLĂCUȚA DE IDENTIFICARE CU CARACTERISTICI TEHNICE

Unitatea dvs. este identificată printr-un număr de serie indicat pe plăcuța cu caracteristici tehnice. Plăcuța cu caracteristici tehnice indică, de asemenea, tensiunea de alimentare permisă pentru unitate. În cazul în care trebuie să contactați LPG Systems din cauza unei probleme tehnice, vă rugăm să indicați numărul de serie al dispozitivului dvs. Cellu M6 Alliance® Medical. Acest număr de serie furnizează informații despre anul și luna de fabricație a unității dvs.

Litera indică anul în care a fost fabricat dispozitivul. Z=2009, A=2010, B=2011 etc.

Cele două cifre indică luna de fabricație: 01=ianuarie; 02=februarie; 03=martie; etc.



Această pictogramă indică faptul că unitatea a fost vândută după data de 13 august 2006. În conformitate cu Directiva 2002/96/CE, aceasta nu poate fi aruncată împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie eliminată prin reciclare. Atunci când dispozitivul dvs. ajunge la sfârșitul duratei sale de funcționare, el trebuie să fie adus la un centru de reciclare corespunzător sau trebuie returnat distribuitorului dvs. În acest fel, ajutați mediul contribuind la conservarea resurselor naturale și la protejarea sănătății oamenilor.



Pictograma indică faptul că anumite avertismente sau precauții specifice, asociate cu acest dispozitiv nu sunt pe etichetă.



Acest simbol înseamnă că trebuie să consultați documentele însoțitoare înainte de utilizarea dispozitivului dvs.



Acest simbol indică numele și adresa producătorului.



Acest simbol arată că dispozitivul dvs. are piese aplicate de tip BF (Body floating) care intră în contact cu pacientul. Aceste piese sunt izolate din punct de vedere electric de toate celelalte piese ale dispozitivului. Aceste piese aplicate sunt capetele de tratament.



Acest simbol arată că dispozitivul trebuie depozitat într-un loc protejat de intemperii.



Acest simbol indică limitele de temperatură.



Acest simbol indică greutatea dispozitivului.



Acest simbol indică limitele de umiditate relativă.



Acest simbol înseamnă „Nu împingeți”



Acest simbol înseamnă „pericol: Tensiune înaltă”.



Acest simbol înseamnă „utilizare pe bază de rețetă” (numai în SUA).



Acest simbol indică anul de fabricație.



Acest simbol înseamnă „fragil, a se manipula cu atenție”



Acest simbol arată că dispozitivul trebuie ținut vertical.



Acest simbol arată că dispozitivul nu trebuie răsturnat.



Acest simbol indică limitele presiunii atmosferice.

⚠ ATENȚIE

Plăcuța cu caracteristici tehnice este amplasată în partea inferioară din spatele unității. Plăcuțele de identificare cu caracteristicile tehnice pot varia. Cea aprobată este cea de pe aparatul dvs.

→ CURĂȚAREA UNITĂȚII

Se recomandă să vă curățați unitatea cât mai des posibil, nu numai din motive de igienă și de estetică, ci și pentru că, prin curățare, unitatea este păstrată într-o stare bună, fără reparații și i se prelungește durata de funcționare.

Folosind un aspirator cu duză fină, curățați următoarele secțiuni:

- Interiorul sertarului de depozitare a capului.
- Interiorul tavei de depozitare a capului.
- Interiorul ușii de acces la filtru.

Folosind un burete umed, curățați următoarele secțiuni:

- Toate protecțiile externe.
- Furtunurile.
- Cablul de alimentare pentru curent electric.

Folosind o cârpă îmbibată cu o cantitate mică de produs de curățare pentru uz casnic, fără alcool, curățați următoarele secțiuni:

- Ecranul de comandă și tabloul de comandă.
- Interiorul sertarului de depozitare a capului.
- Interiorul tavei de depozitare a capului.
- Interiorul ușii de acces la filtru.

Folosind o cârpă antistatică înmuiată sau servetele, curățați:

- Ecranul tactil.

Întreținerea capetelor de tratament trebuie realizată înainte de prima utilizare, vezi capitolul „capete de tratament”.

ATENȚIE

Sunt interzise produsele agresive, cum ar fi acetona, tricloretilena sau alcoolul la 90°.

→ ÎNLOCUIREA CARTUȘELOR DE FILTRU ȘI A FILTRULUI DIN SPUMĂ

Dispozitivul dvs. conține două cartușe de filtru și un filtru din spumă. Aceste componente garantează eficiența unității dvs. și prelungesc durata de utilizare a acesteia.

Asigurați-vă că ele sunt schimbate imediat ce apare pe ecran iconograma care arată o schimbare de filtru (**fig. 1**).



FIG. 1



FIG. 2

Accesați meniul „schimbă filtru” după cum urmează:

Selecțați meniul „Întreținere”, apăsând iconograma indicată (**fig. 2**).

Selecțați meniul „filtru”, apăsând iconograma indicată (**fig. 3**).

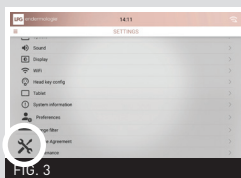


FIG. 3



FIG. 4

Ecranul „schimbare filtru” arată ce filtru trebuie să fie schimbat (**fig. 4**).

APĂSAȚI ACEASTĂ ICONOGRAMĂ

După ce cartușul de filtru este înlocuit, contorul filtrului trebuie resetat prin apăsarea iconogramei indicate (**fig. 5**).



FIG. 5



⚠ ATENȚIE

Dispozitivul nu trebuie utilizat niciodată fără filtru. Dacă nu este montat niciun filtru, dispozitivul trebuie să fie oprit.

→ ÎNLOCUIREA CARTUȘELOR DE FILTRU ȘI A FILTRULUI DIN SPUMĂ

Înlocuiți cartușele de filtru astfel:

1. Deschideți ușa de acces la filtru.
(fig. 1)

2-3. Deșurubați și scoateți cartușele de filtru și înlocuiți-le cu unele noi. **(fig. 2 și Fig. 3)**

4. Scoateți filtrul din spumă și înlocuiți-l cu unul nou.
(fig. 4 și Fig. 5)

Nu uitați să achiziționați cartușe de filtru noi de la Departamentul Asistență Clienți al LPG Systems, astfel încât să aveți întotdeauna o rezervă.



→ CONECTAREA/DECONECTAREA CAPETELOR DE TRATAMENT MOTORIZATE

Pentru a conecta capetele la furtun, respectați procedura de mai jos.

Poziționați inelul de blocare în poziția blocat (**fig. 1**).
Poziționați capătul furtunului astfel încât cheia furtunului să fie aliniată cu fanta cheii de pe conexiunea capului de tratament (**fig. 2**).

Împingeți furtunul în conexiunea capului de tratament până se fixează, cu un clic, în poziție.



POZIȚIA



BLOCAT

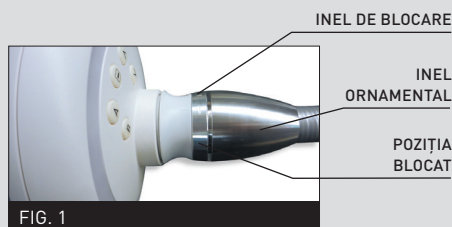


FIG. 1



FIG. 2

Pentru a deconecta capetele de la furtun, respectați procedura de mai jos.

Poziționați inelul de blocare în poziția deblocat (**fig. 3**).

Trageți inelul de blocare spre furtun (**fig. 4**).

Scoateți cu atenție furtunul, trăgându-l de inelul alb (**fig.5**).



FIG. 3

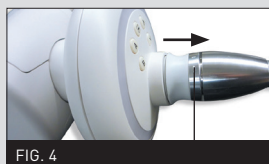


FIG. 4

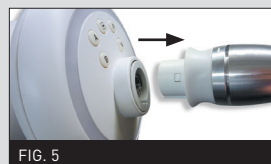



FIG. 5

POZIȚIA
DEBLOCAT

→ CONECTAREA/DECONECTAREA ADAPTORULUI

Pentru a conecta sau a deconecta adaptorul furtunului, urmați procedurile descrise în capitolul 4.4 „Conectarea/deconectarea capetelor de tratament motorizate”.

Conectarea se face printr-o simplă mișcare de apăsare/tragere.

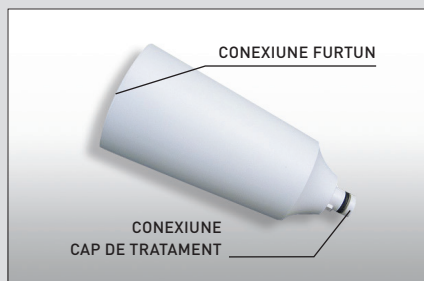

La adaptor pot fi conectate numai micro-capetele și micro-duzele. Coeziunea se face printr-o simplă mișcare de apăsare/tragere.



→ INSTRUȚIUNE PENTRU SCOATEREA CAPACULUI DE PROTECȚIE USB



Scoateți capacul de acces la portul USB folosind instrumentul adecvat.

→ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

În cazul în care cablul de alimentare al dispozitivului dvs. este deteriorat, vă rugăm să contactați Departamentul Asistență Clienți al LPG Systems pentru a-l înlocui.

Departamentul Asistență Clienți al LPG Systems:
+33(0)4 75 78 69 00

→ FIȘA JURNAL A OPERAȚIUNILOR DE ÎNȚREȚINERE

Înlocuirea cartușele de filtru: De efectuat la apariția mesajului de avertizare.

Înlocuirea clapetei de închidere ermetică: De efectuat atunci când clapetele nu mai tratează pielea adecvat. Acestea trebuie înlocuite la fiecare 100 de ore de utilizare.

DATA	NR. DE ORE	OPERAȚIUNE EFECTUATĂ

→ CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM O PROBLEMĂ?

Dacă unitatea dvs. nu funcționează corespunzător, efectuați următoarele verificări înainte de a contacta Departamentul Asistență Clienți:

- Unitatea este conectată corespunzător la o priză a rețelei de alimentare cu energie electrică?
- Priză rețelei de alimentare cu energie electrică este funcțională?
- Întrerupătorul ON (PORNIT) este aprins?
- Cartușele de filtru sunt curate și amplasate corect?
- Furtunurile sunt conectate corect?
- Capul de tratament este corect conectat?
- Capul de tratament conectat corespunde cu ceea ce este afișat pe ecran?

După efectuarea acestor verificări și dacă defecțiunea persistă, vă rugăm să contactați Departamentul Asistență Clienți sau cel mai apropiat distribuitor, indicând modelul unității dvs. și nr. de serie.

Departamentul Asistență Clienți al LPG Systems:

+33 (0)4 75 78 69 00

→ SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni L x l x h: 61 x 70 x 140 cm
Greutate netă: 80,5 kg
Depresiune maximă setată: 69 kPa (690 mbar)
Răcire: prin ventilație mecanică încorporată în pompă
Indice de protecție: IP 20
Clasa de protecție electrică: 1
Wi-Fi: 5 GHz b/g/n
Caracteristici electrice: 100-240 V 50 Hz 730 W
..... 100-230 V 60 Hz 730 W

Putere de radiație:
Canalul b: 12,46 dBm
Canalul g: 9,33 dBm
Canalul n: 9,48 dBm
BT 3,25 dBm

Caracteristicile mediului de operare:

Temperatură ambientală: +10 °C - +30 °C pentru utilizare normală.
Umiditate relativă ambientală: 30% - 75% fără condensare.
Presiune atmosferică: 800 - 1.050 hPa (Pentru utilizare într-o cameră cu ventilație normală)
Altitudine maximă: 2.500 m

Caracteristicile mediului pentru transport și depozitare:

Temperatură: -20 °C - +70 °C
Umiditate relativă ambientală: 10% - 90% fără condensare
Presiune atmosferică: 800 - 1.050 hPa (Pentru utilizare într-o cameră cu ventilație normală)

Dispozitivul dvs. este prevăzut cu capete de tratament brevetate (piese aplicate tip BF).

Dispozitivul CELLU M6 Alliance® Medical este marcat  ca dispozitiv medical în baza
Anexei II din Regulamentul 93/42/CEE (standardul aplicabil IEC 60601-1 Ed. 3 și
standardele asociate).

CAPETE DE TRATAMENT

CELLU M6 Alliance® Medical



Concept înregistrat

→ INDEX

DESCRIEREA CAPULUI ALLIANCE 80	26
DESCRIEREA CAPULUI ALLIANCE 50	28
DESCRIEREA CAPULUI TR30	30
DESCRIEREA CAPULUI ERGOLIFT.....	31
DESCRIEREA MICRO-CAPETELOR ȘI MICRO-DUZELOR	32
ÎNȚREȚINERE	33

→ DESCRIEREA CAPULUI ALLIANCE 80

BUTON START/STOP (PORNIRE/OPRIRE)

BUTOANE PENTRU SETAREA
PARAMETRILOR

Capul Alliance 80 poate fi folosit în
tratamentul corporal endermologie®.

BUTOANE DE NAVIGARE

LEDURI LUMINOASE

GLISOR DE RE-
GLARE
POZIȚIE
ROLĂ ȘI CLAPETĂ

CLAPETĂ DECORATIVĂ

CLAPETĂ DECORATIVĂ

CLAPETĂ MOTORIZATĂ

ROLĂ MOTORIZATĂ


→ DESCRIEREA CAPULUI ALLIANCE 80

REGLAREA POZIȚIEI ROLEI ȘI CLAPETEI

Capul Alliance 80 are o extremitate ajustabilă cu 2 poziții pentru reglarea distanței dintre rola motorizată și atenuator.

Atunci când cursorul este în poziție orizontală, este asigurată mobilitatea maximă a roletelor.

Atunci când cursorul este în poziție verticală, este asigurată mobilitatea minimă a roletelor.

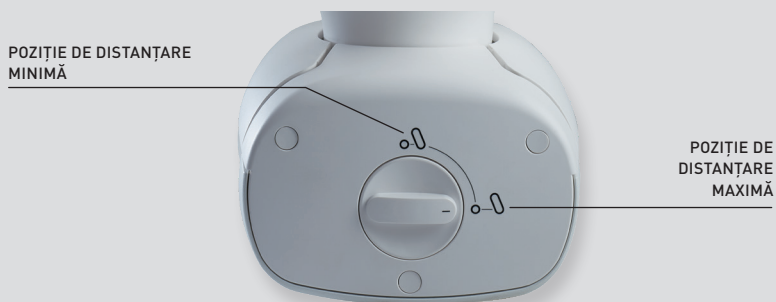

Pentru a schimba glisorul de reglare, rotiți-l, în timp ce îl apăsați, în poziția dorită, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos:



→ DESCRIEREA CAPULUI ALLIANCE 50

Capul Alliance 50 poate fi folosit în tratamentul terapeutic (fibroză, edemă, inflamație...).

BUTOANE PENTRU SETAREA
PARAMETRILOR

BUTOANE DE NAVIGARE

BUTON START/STOP
(PORNIRE/OPRIRE)

GLISOR DE REGLARE
POZIȚIE ROLĂ
ȘI CLAPETĂ

CLAPETĂ DECORATIVĂ

CLAPETĂ MOTORIZATĂ

CLAPETĂ MOTORIZATĂ

CAMERĂ DE TRATAMENT

ROLĂ MOTORIZATĂ


→ DESCRIEREA CAPULUI ALLIANCE 50

REGLAREA POZIȚIEI ROLEI ȘI CLAPETEI

Capul Alliance 80 are o extremitate ajustabilă cu 2 poziții pentru reglarea distanței dintre rola motorizată și atenuator.

Atunci când cursorul este în poziție orizontală, este asigurată mobilitatea maximă a roletelor.

Atunci când cursorul este în poziție verticală, este asigurată mobilitatea minimă a roletelor.

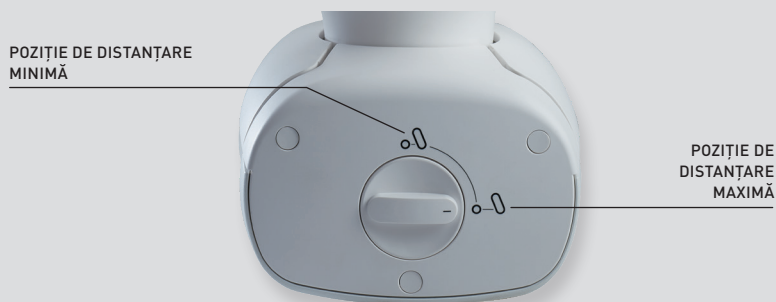

Pentru a schimba glisorul de reglare, rotiți-l, în timp ce îl apăsați, în poziția dorită, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos:



→ DESCRIEREA CAPULUI TR30


BUTON START/STOP (PORNIRE/OPRIRE)

BUTOANE PENTRU
SETAREA PARAMETRILOR


CLAPETĂ DE ÎNCHIDERE
ERMETICĂ

ROLE MOTORIZATE

MECANISM DE BLOCARE A ROȚILOR

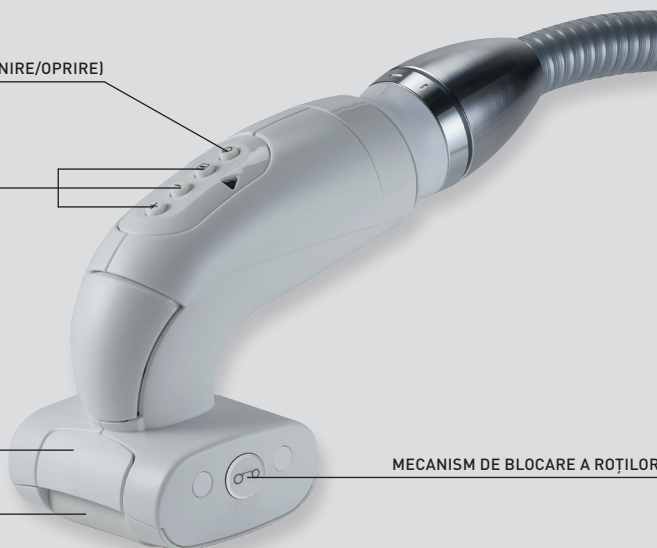

→ DESCRIEREA CAPULUI ERGOLIFT

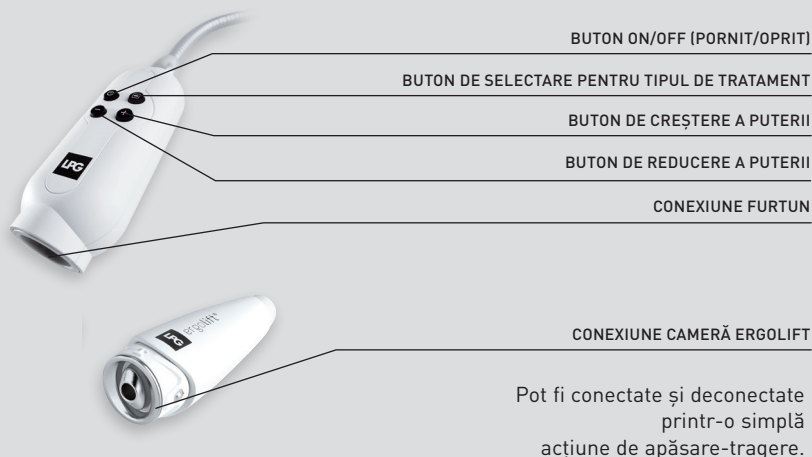


→ DESCRIEREA CAMERELOR ERGOLIFT

Camera Ergolift Lift 20 poate fi utilizată pentru tratamentul zonelor mari, cu țesuturi fine și al zonelor sensibile. Camera Ergolift Lift 10 poate fi utilizată pentru tratamentul zonelor înguste, conturului ochilor și al buzelor, mâinilor și degetelor.




Lift 20
Cameră de
tratament
cu clapetă
detașabilă

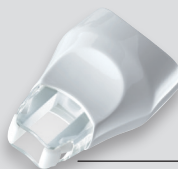

Lift 10
Cameră de
tratament cu
clapetă detașabilă

Numai LIFT 20 și LIFT 10 pot fi conectate la capul Ergolift. Pot fi conectate și deconectate printr-o simplă acțiune de apăsare-tragere.

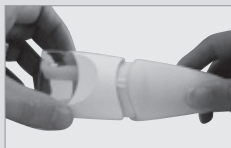

→ DESCRIEREA MICRO-CAPETELOR ȘI MICRO-DUZELOR



→ ÎNTREȚINERE

Din motive de igienă, întreținerea capetelor de tratament trebuie realizată după fiecare utilizare, folosind șervețele antiseptice, îmbibate cu o soluție bactericidă și fungică. O atenție deosebită trebuie acordată întreținerii pieselor care intră în contact cu pacientul.

CAPUL ALLIANCE 80

1. Scoateți clapetele de închidere ermetică (2 clapete în sus și 1 clapetă în jos), așa cum este prezentat în imaginile de mai jos (**fig. 1-4**).
2. Frecați bine cu șervețele, cel puțin un minut, așa cum este descris mai jos:
 - a) Clapetele și carcasa lor (**fig. 5-7**).
 - b) Cadrul de pe ambele părți ale roletelor (întoarceți capul, rotiți manual roletele pentru a curăța întreaga suprafață) (**fig. 8**).
 - c) Clapeta motorizată (nu mobilizați clapeta motorizată) (**fig. 9 și 10**).
 - d) Sabotul
3. Atașați din nou clapetele de închidere ermetică
4. Curățați sertarul de depozitare, folosind șervețele LPG, apoi așezați capul în el.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

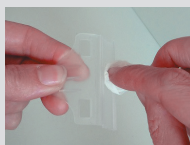


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Fig. 9



Fig. 10

→ ÎNTREȚINERE

CAPUL ALLIANCE 50

1. Scoateți clapetele de închidere ermetică (2 clapete în sus și 1 clapetă în jos), așa cum este prezentat în imaginile de mai jos **(fig. 1-4)**.
2. Frecați bine cu șervețele, cel puțin un minut, așa cum este descris mai jos:
 - a) Clapetele și carcasa lor **(fig. 5-7)**.
 - b) Cadrul de pe ambele părți ale roletelor (întoarceți capul, rotiți manual rolele pentru a curăța întreaga suprafață) **(fig. 8)**
 - c) Clapeta motorizată (nu mobilizați clapeta motorizată) **(fig. 9 și 10)**.
 - d) Sabotul
3. Atașați din nou clapetele de închidere ermetică
4. Curățați sertarul de depozitare, folosind șervețele LPG, apoi așezați capul în el.



Fig. 1



Fig. 2

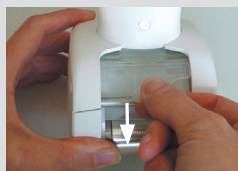


Fig. 3



Fig. 4

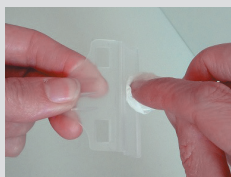


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

→ ÎNTREȚINERE

CAPUL TR30

1. Scoateți clapetele de închidere ermetică, așa cum este prezentat în imaginile de mai jos (**fig. 1**).
2. Frecați bine cu șervețele, cel puțin un minut, așa cum este descris mai jos:
 - a) Clapetele și carcasa lor (**fig. 2 și 3**).
 - b) Cadrul de pe ambele părți ale rolelor (întoarceți capul, rotiți manual rolele pentru a curăța întreaga suprafață) (**fig. 4**)
 - c) Sabotul
3. Atașați din nou clapetele de închidere ermetică
4. Curățați sertarul de depozitare, folosind șervețele LPG, apoi așezați capul în el.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

→ ÎNTREȚINERE

MICRO-CAPETE ȘI MICRO-DUZE

1. Deconectați micro-capetele sau micro-duzele de la adaptor.
2. Pentru micro-capete, utilizați instrumentul special furnizat în acest scop (**fig. 1 și 2**).
3. Frecați, cel puțin 1 minut, rolele, garnitura, camera de tratament, instrumentul pentru dezasambarea micro-capetelor și micro-duzele cu șervețele LPG® îmbibate cu o soluție bactericidă și fungică (**fig. 3**).
4. Fixați la locul lor rolele și verificați dacă se rotesc liber.
5. Pentru curățarea micro-duzelor, utilizați o cârpă de bumbac îmbibată cu aceeași soluție.
6. Curățați sertarul de depozitare folosind șervețele LPG®, apoi așezați capetele în el.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

→ ÎNTREȚINERE

DEZINFECTAREA MICRO-CAPETELOR ȘI MICRO-DUZELOR

Capetele de tratament motorizate (Alliance 80, Alliance 50 și TR30) trebuie să fie utilizate cu un costum Endermowear. Capetele de tratament nemotorizate (micro-duze și micro-capete) pot fi folosite, în anumite cazuri, direct pe piele.

În aceste cazuri, capetele trebuie dezinfectate după fiecare utilizare:

1. Folosiți procedura de întreținere descrisă mai sus.
2. Înmuiăți rolele, micro-capetele, instrumentul de dezasamblare și micro-duzele într-un dezinfectant, timp de 12 minute, la 20 °C, așa cum se recomandă pe ambalajul dezinfectantului.
3. Clătiți cu atenție clapeta și camera de tratament cu apă potabilă sau sterilă, timp de cel puțin 1 minut, folosind o cantitate mare de apă (aproximativ 8 litri). Repetați de două ori pentru 3 clătiri în total.
4. Uscați piesele.
5. Curățați în prealabil sertarul de depozitare, folosind șervețele LPG®, apoi așezați capul în el.

ATENȚIE

Utilizați un dezinfectant al cărui ingredient activ este orto-ftalaldehida (OFA). Înainte de a utiliza dezinfectantul, citiți și respectați recomandările, contraindicațiile și avertismentele asociate acestui produs. Consultați instrucțiunile pentru utilizarea acestei soluții. Toate procedurile descrise în această secțiune trebuie să fie realizate cu echipamentul oprit și cu cablul de alimentare scos din priză. - Nu utilizați produse corozive, cum ar fi acetona, tricloretilena sau alcoolul sanitar și nici bureți abrazivi.

→ ÎNTREȚINERE

CAPUL ERGOLIFT ȘI CAMERELE ERGOLIFT

Din motive de igienă, întreținerea capetelor de tratament trebuie realizată după fiecare utilizare, folosind șervețele antiseptice, îmbibate cu o soluție bactericidă și fungică. O atenție deosebită trebuie acordată frecării pieselor care intră în contact cu pacientul.

1. Deconectați camera de la capul de tratament Ergolift. **(fig. 1)**
2. Scoateți clapeta cu ajutorul instrumentului special. **(fig. 2)**
3. Frecați bine camera Ergolift, clapeta și instrumentul cu șervețele, cel puțin un minut, așa cum este descris mai jos. **(fig. 3)**
4. Puneți la loc clapeta în camera Ergolift, urmând aceiași pași în ordine inversă **(fig. 4)**



FIG. 1

DECONECTARE DE

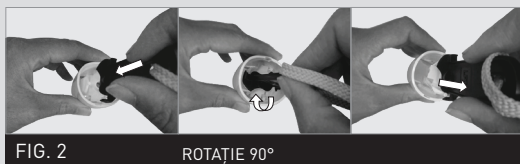


FIG. 2

ROTAȚIE 90°



FIG. 3

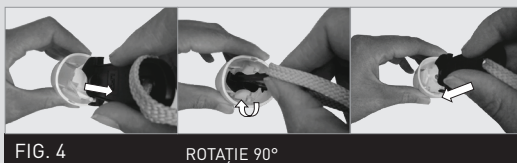


FIG. 4

ROTAȚIE 90°

→ ÎNTREȚINERE

DEZINFECTAREA CAMERELOR ERGOLIFT

Capul Ergolift este în contact direct cu pielea pacientului. În cazul unor aplicații specifice, el trebuie dezinfectat după fiecare utilizare:

1. Respectați procedura de întreținere descrisă mai sus.
2. Înmuiați clapeta și camera Ergolift într-un dezinfectant OFA, timp de 12 minute, la 20 °C, așa cum se recomandă pe ambalajul dezinfectantului.
3. Clătiți cu atenție clapeta și camera Ergolift cu apă potabilă sau sterilă, timp de cel puțin 1 minut, folosind o cantitate mare de apă (aproximativ 8 litri). Repetați de două ori pentru 3 clătiri în total.
4. Uscați camera Ergolift și clapeta.
5. Curățați sertarul de depozitare cu șervețele antiseptice, apoi așezați în el camera Ergolift și clapeta.

→ ENDERMOWEAR™

Costumul LPG Endermowear's™ este disponibil în mai multe mărimi, pentru femei și bărbați și a fost conceput special pentru tratamente corporale. El este destinat uzului personal, garantează igiena, iar zonele sale opace acoperă zonele intime ale pacientului în timpul tratamentului. Materialul unic al costumului Endermowear™ garantează o aderență excelentă pe piele, care facilitează deplasarea capului de tratament.

Produsele sunt livrate într-o pungă pe care clientul o poate personaliza punându-și numele pe etichetă. Acesta devine proprietatea clientului și poate fi folosit pentru mai multe ședințe. Din motive de igienă, costumul trebuie spălat după fiecare utilizare. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de spălare de pe eticheta pungii.

⚠ ATENȚIE

Este strict interzisă utilizarea unor produse agresive, cum ar fi acetona, tricloretilena sau alcoolul de 90°, precum și bureții abrazivi, ultrasunetele și lămpile UV. Toate capetele curățate și/sau dezinfectate trebuie așezate în sertarul de depozitare pentru a evita orice confuzie. Utilizați un dezinfectant al cărui ingredient activ este orto-ftalaldehida (OFA). Înainte de a utiliza dezinfectantul, citiți și respectați recomandările, contraindicațiile și avertismentele asociate acestui produs. Consultați instrucțiunile pentru utilizarea acestei soluții. Toate procedurile descrise în această secțiune trebuie să fie realizate cu echipamentul oprit și cu cablul de alimentare scos din priză.

→ CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Ați achiziționat de curând un dispozitiv distribuit de LPG Systems sau de un distribuitor autorizat LPG Systems. Este responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului să afle de la autoritățile locale condițiile și calificările profesionale necesare înainte de utilizarea aparatului.

Achiziționarea acestui echipament implică acceptarea juridică de către cumpărător/utilizator profesional a acestor condiții generale de garanție. În cazul în care aparatul v-a fost vândut de un distribuitor autorizat LPG Systems, cumpărătorul/utilizatorul trebuie să consulte condițiile de garanție ale furnizorului. Acestea nu pot crește în niciun fel angajamentele asumate de LPG System prin aceste condiții de garanție.

Garanția poate fi pusă în aplicare și este valabilă doar dacă formularul de garanție a fost completat corect și trimis la LPG Systems în termen de două săptămâni de la livrare, indiferent de țară. Formularele de garanție care sunt completate doar parțial vor fi respinse. Aparatul este garantat împotriva defectelor de fabricație și defectelor materiilor prime.

Perioada de garanție este perioada cea mai scurtă dintre următoarele două: 2 (doi) ani

SAU 2.000 (două mii) de ore de utilizare de la data facturii. În această perioadă, LPG Systems se angajează să schimbe sau să repare gratuit, cât mai repede posibil, orice piesă pe care LPG Systems o recunoaște a fi defectă, dar, cu toate acestea, LPG Systems nu se angajează să înlocuiască întregul aparat.

Cheltuielile de călătorie și de cazare pentru tehnicienii noștri și costurile de transport pentru aparat sau pentru piese, de la și către atelierul de service post-vânzare, nu sunt acoperite de această garanție. Înlocuirile și reparațiile efectuate în baza acestei garanții, cu sau fără imobilizarea echipamentului, nu vor avea ca efect prelungirea perioadei de garanție.

Piese înlocuite devin proprietatea LPG Systems sau a distribuitorului autorizat. Nu va fi plătită nicio compensație pentru daune din cauza neutilizării. Sub rezerva altor condiții de mai jos, garanția se aplică în cazul în care cumpărătorul/utilizatorul profesionist i-a permis lui LPG Systems să realizeze lucrările de reparații necesare.

→ CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Excluderea garanției:

- Deteriorări care apar în timpul transportului. Transportul acestui echipament și/sau al pieselor de schimb este pe riscul destinatarului. Înainte de a accepta livrarea, este responsabilitatea destinatarului să verifice starea mărfurilor și să facă o reclamație împotriva companiei de transport, conform procedurii specifice în țara de livrare.
- Nerespectarea instrucțiunilor de instalare și de funcționare, nerealizarea întreținerii și/sau neglijența în întreținerea aparatului și/sau a cartușelor sale de filtru, conectarea la o sursă de energie electrică defectă sau la o sursă de energie electrică fără împământare sau la o sursă de energie electrică a cărei tensiune este diferită de cea indicată pe aparat.
- În cazul în care un aparat este vândut înainte de sfârșitul perioadei de garanție, garanția este transferată cumpărătorului pentru perioada rămasă de garanție, cu condiția ca:
 - I Factura originală să fie furnizată.
 - II Vânzătorul inițial să fie informat despre vânzare.
- Modificarea, montarea accesoriilor sau demontarea echipamentului.
- Orice operațiune și/sau intervenție care nu este specificată în Instrucțiunile de funcționare ale LPG Systems și care sunt efectuate de către cumpărător/utilizator și/sau orice parte neautorizată de LPG Systems.
- Utilizarea unor consumabile, piese de schimb, componente sau piese neadecvate care nu sunt furnizate de LPG Systems.
- Blocarea aparatului prin aspirarea unui corp străin.
- Uzura normală a oricăror piese ale echipamentului care rezultă în urma utilizării normale.
- Deteriorări sau defecțiuni care rezultă în urma unor evenimente accidentale (căderi, loviri...)
Deteriorări sau defecțiuni care rezultă în urma unor calamități naturale (fulgere, daune cauzate de apă...)
Incendiu, neglijență sau abuzuri.

→ CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Garanția este limitată la înlocuirea componentelor dispozitivului, care respectă condițiile de mai sus. În niciun caz, LPG Systems nu va fi considerat răspunzător de nicio pierdere sau daună care rezultă din sau în legătură cu dispozitivul și/sau utilizarea acestuia, inclusiv daune financiare, pierderi de marjă, daune din cauza neutilizării etc. Această clauză se aplică în temeiul tuturor prevederilor legale. Ori ce câte ori restricția de mai sus nu poate fi aplicată sau nu este realizabilă, răspunderea LPG Systems se limitează la prețul dispozitivului și/sau serviciului.

Nerespectarea condițiilor generale de garanție în perioadei de garanție și după expirarea acesteia poate reprezenta o cauză de exonerare a răspunderii LPG Systems în caz de daune imputabile produselor livrate.

Cumpărătorul/utilizatorul este responsabil de utilizarea dispozitivului și își va asuma întreaga răspundere pentru orice daune, inclusiv daune cauzate terțelor părți, care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a dispozitivului și/sau dintr-o utilizare necorespunzătoare.

În niciun caz, LPG SYSTEMS nu va fi considerat responsabil pentru orice daune directe sau indirecte, inclusiv orice pierderi comerciale sau financiare, pierderi de profit, pierderi de venituri și deteriorarea imaginii mărcii comerciale.

Răspunderea LPG SYSTEMS pentru toate cauzele (cu excepția vătămarilor corporale) este limitată la valoarea prețului pentru dispozitivul defect.

Cumpărătorul/utilizatorul este singurul responsabil pentru recomandările, îngrijirea și informațiile pe care le transmite clienților/pacienților săi. Responsabilitatea asigurării îngrijirii de către cumpărător/utilizator în cadrul structurii sale îi aparține acestuia și este supusă exclusiv alegerii sale.

În consecință, LPG Systems nu va fi, în niciun caz, responsabil în caz de:

- 1- Utilizare necorespunzătoare a dispozitivului
- 2- Prescripție necorespunzătoare
- 3- Protocol necorespunzător
- 4- Îngrijire necorespunzătoare și orice contraindicații care nu sunt respectate

→ ACTIVAREA GARANȚIEI

Puteți activa garanția online, accesând site-ul nostru pentru garanție:

<http://warranty.lpgsystems.com>

→ ANEXĂ: COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ

TABELUL 1: DIRECTIVE ȘI DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI – EMISII ELECTROMAGNETICE

Dispozitivul CELLU M6 ALLIANCE® MEDICAL este conceput pentru a fi utilizat în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau pacientul CELLU M6® ALLIANCE MEDICAL trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de emisii	Conformitate	Mediu electromagnetic - Directive
Emisii RF CISPR 11	Grupul 1	Dispozitivul CELLU M6 ALLIANCE® MEDICAL utilizează energie prin radiofrecvență numai pentru funcțiile sale interne. Prin urmare, emisiile sale de radiofrecvență sunt foarte reduse și este puțin probabil să provoace interferențe în dispozitivele electronice din apropiere.
Emisii RF CISPR 11	Clasa B	Dispozitivul CELLU M6 ALLIANCE® MEDICAL poate fi utilizat în toate clădirile, inclusiv locații de familie și locații care sunt conectate direct la rețeaua electrică de joasă tensiune, care alimentează clădirile de locuințe.
Emisii armonice IEC 61000-3-2	Clasa A	
Fluctuații de tensiune și flicker IEC 61000-3-3	Conform	

TABELUL 2: IMUNITATE

Test	Cerințe		Nivel de conformitate	
Descărcare electrică (DES) IEC 61000-4-2	± 8 kV la contact ± 2/4/8/15 kV în aer		± 8 kV la contact ± 2/4/8/15 kV în aer	
Câmpuri electromagnetice cu radiofrecvență de radiație IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM la 1kHz		10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM la 1kHz	
Câmpuri de proximitate emise de dispozitive de comunicații wireless prin radiofrecvență IEC 61000-4-3	Frecvență [MHz]	Modulație	Cerințe [V/m]	Conformitate [V/m]
	385	Modulație pulsată: 18 Hz	27	27
	450	Modulație pulsată: 18 Hz	28	28
	710 – 745 - 780	Modulație pulsată: 217 Hz	9	9
	810 – 870 - 930	Modulație pulsată: 18 Hz	28	28
	1720 – 1845 - 1970	Modulație pulsată: 217 Hz	28	28
	2450	Modulație pulsată: 217 Hz	28	28
	5240 – 5500 - 5785	Modulație pulsată: 217 Hz	9	9
Impulsuri electrice tranzitorii rapide/ în rafale IEC 61000-4-4	Linii energetice: ± 2 kV Linii intrare/ieșire: ± 1 kV Frecvență de repetare: 100 kHz		Linii energetice: ± 2 kV Linii intrare/ieșire: ± 1 kV Frecvență de repetare: 100 kHz	
Supratensiuni tranzitorii IEC 61000-4-5	Între faze: ± 0,5 kV, ± 1 kV Între faze și împământare ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV		Între faze ± 0,5 kV, ± 1 kV Între faze și împământare ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV	

→ ANEXĂ: COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ

Perturbații de radiofrecvență condusă IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V la benzi ISM și benzi pentru radio amatori între 0,15 MHz și 80 MHz 80% AM la 1 kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V la benzi ISM și benzi pentru radio amatori între 0,15 MHz și 80 MHz 80% AM la 1 kHz
Câmp magnetic al frecvenței de rețea IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
Căderi și întreruperi de tensiune: IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 ciclu A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315° 0% UT; 1 ciclu la 0° 70% UT; 25/30 cicluri la 0° 0% UT; 250/300 cicluri	0% UT; 0,5 ciclu A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315° 0% UT; 1 ciclu la 0° 70% UT; 25/30 cicluri la 0° 0% UT; 250/300 cicluri



SEDIU SOCIAL: LPG SYSTEMS S.A.S.
TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANȚA
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNAȚIONAL/MARKETING
ECOLUCIOLES - BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANȚA
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

