



Gedeponeerd model

GEBRUIKERSGIDS HUBER® 360 i

**Gelieve deze volledige handleiding aandachtig
te lezen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.**

**Bewaar deze handleiding en de afzonderlijke
installatienota voor later gebruik.**

© LPG Systems 2024. LPG en HUBER zijn gedeponeerde merken.
Elke reproductie, zelfs gedeeltelijke, is verboden.

GU1401 - NL
Uitgave A2 van 01/24



Proficiat met uw aankoop van het apparaat HUBER 360 i.

Dit model is het resultaat van vele jaren onderzoek en combineert de nieuwste technologieën met de knowhow van LPG.

U kunt ten volle genieten van de technische prestaties en de betrouwbaarheid, die van LPG Systems een leider hebben gemaakt op dit gebied.

Deze handleiding bevat de beschrijving van de werking, de instructies voor het periodieke basisonderhoud en de veiligheidsvoorschriften. Wij herinneren u er aan dat uw product enkel mag worden gebruikt door een professional die in eerste instantie heeft deelgenomen aan de training die door LPG Systems of, indien u buiten Frankrijk woont, door een erkende dealer is gegeven. Aarzel niet om contact op te nemen met de Klantenservice van LPG Systems indien u twijfelt over de werking of het onderhoud van uw apparaat:

LPG BENELUX

Tel: + 32 (0)2 332 25 85

OPGELET

Om betere aan de behoeften en verwachtingen van haar klanten te beantwoorden is LPG Systems continu op zoek naar verbeteringen in het ontwerp en de kwaliteit van haar producten. Daarom kan het voorkomen dat er kleine verschillen zijn tussen uw apparaat en het apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven.

→ INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Een (1) apparaat **HUBER® 360 i**
- Een (1) leuningset
- Een (1) blokkering-stabiliteitstest
- Een (1) scharnierend krukje
- Twee (2) pads
- Een (1) hartslagfrequentiemeter
- Een (1) tablet
- Een (1) gebruiksaanwijzing
- Een (1) netsnoer
- Een (1) uitpaknotitie en een snelle installatiegids
- Een PLV-omgeving

Afhankelijk van de aangekochte versie (de basisversie of de volledige versie - zie serienummer op het identificatieplaatje), zijn sommige protocollen mogelijk niet activeerbaar en zijn de accessoires niet meegeleverd. Als gevolg hiervan gelden de paragrafen die deze protocollen beschrijven niet voor de basisversie (zie tabel hieronder).

Als u twijfelt over de werking van uw apparaat of om door te groeien naar een volledig model, kunt u contact opnemen met de Klantenservice van LPG Systems of met uw distributeur.

	Volledige
Leuning	✓
Blokkring-stabiliteitstest	✓
Scharnierend krukje	✓
Pads	✓
Hartslagfrequentiemeter	✓
Tablet	✓

OPGELET

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van het apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijke, is verboden. De afbeeldingen van deze gebruikshandleiding hebben geen bindende waarde.

→ INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	6
1. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	7
2. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN EN DE TOEBEHOREN	9
2.1 Bedieningsscherm	9
2.2 Grepen	10
2.3 Platform	10
2.4 Pads	11
2.5 Scharnierend krukje (Hu-seat)	14
2.6 Hartslagfrequentiemeter	17
2.7 Tablet	18
2.8 Leuningen	19
2.9 Blokkering-stabiliteitstest	20
3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES	22
3.1 Waarschuwing	22
3.2 Gebruiksvoorzorgen	24
3.3 Vrije zone	25
3.4 Contra-indicaties	25
4. ONDERHOUD	26
4.1 Reinigen van het apparaat	26
4.2 Identificatieplaatje	26
4.3 Netsnoer	28
5. EEN KLEIN PROBLEEM? WAT MOET IK DOEN ?	29
6. TECHNISCHE SPECIFICATIES	30
7. GARANTIE	32
ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN	32
BEPERKING EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID	34
GARANTIEFORMULIER	34

→ BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT




⚠ OPGELET

Het apparaat werkt alleen als het is aangesloten op het net via de voedingskabel en indien de schakelaar in de werkingpositie staat.

→ BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

STROOMINDICATOR

SCHAKELAAR
SPANNING 1
INSCHAKELEN
ALS EERSTE

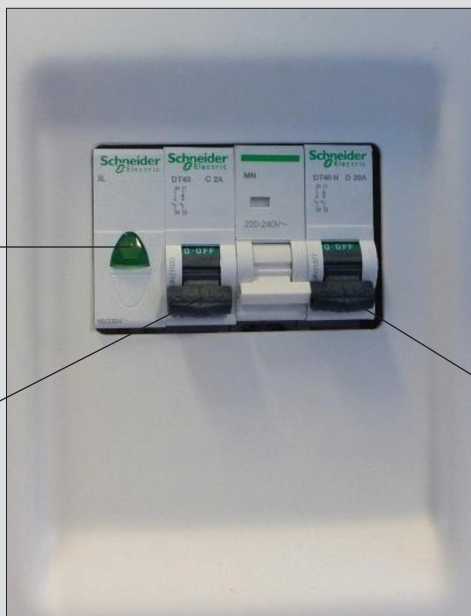


SCHAKELAAR
SPANNING 2
INSCHAKELEN
ALS TWEEDE

→ BEDIENINGSSCHERM

ETHERNET STEKKER

USB STEKKER

AUDIO STEKKER

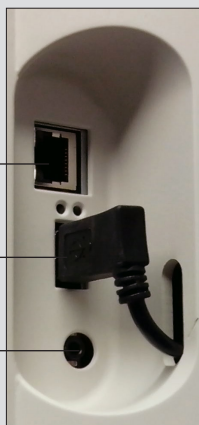

STROOMINDICATOR


TOUCHSCREEN



→ GREPEN



→ PLATFORM

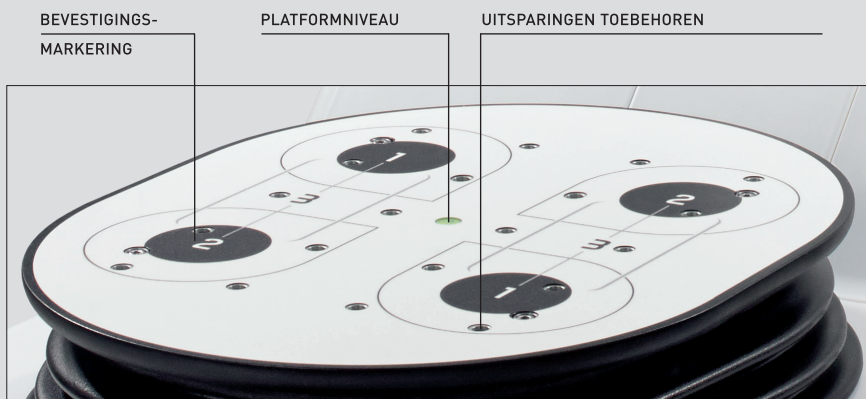

→ PADS

Het apparaat HUBER 360 i kan worden uitgerust met twee pads die op het platform kunnen worden bevestigd.

Uitzicht van het geheel

MARKERING VAN DE
ORIËNTATIEHOEK VAN
DE VOETEN

ORIËNTATIEMARKERING
OP HET BOVENSTE MOBILE
GEDEELTE



MARKERING VAN DE
ROTATIEHOEK VAN DE PAD

Uitzicht van de onderkant

BEVESTIGINGSPLAATJES



→ PADS (VERLOG)

BEVESTIGING VAN DE PADS :

De pads kunnen op het platform worden geplaatst in de schacht voor de plaatsing van toebehoren.



UITSPARINGEN TOEBEHOREN

Om de pads op het platform te bevestigen moet u deze in de uitsparingen die zijn voorzien voor toebehoren plaatsen.

Alle handelingen die in dit deel zijn verricht, moeten worden uitgevoerd als het apparaat uit staat.

→ PADS (VERLOG)

ORIËNTATIE VAN DE VOETEN OP DE PADS:

De oriëntatie van de voeten kan variëren tussen 0 en 90°, in verhouding met de hellingsgraad van de pad. Het volstaat op uw voet op de gewenste hoek te plaatsen.


ORIËNTATIE VAN
DE VOETEN**ORIËNTATIE VAN DE PADS:**

De oriëntatie van de pads, in verhouding tot het platform, kan om de 15° variëren. Hiervoor volstaat het om de vergrendelingsring te ontgrendelen door deze naar onder te drukken (foto 1), en het bovendee van de pads te kantelen zodat ze ne tvoor de oriëntatiemarkering wordt gepositioneerd op de gewenste hellingsgraad (foto 2).

ROTATIEHOEK VAN DE PAD



→ FOTO 1

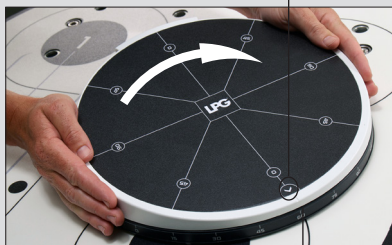


→ FOTO 2

ORIËNTATIEMARKERING OP HET
BOVENSTE MOBIELE GEDEELTE


→ SCHARNIEREND KRUKJE

Uw HUBER 360 i kan worden uitgerust met een scharnierend krugje dat op het platform kan worden gemonteerd.

Uitzicht van het geheel

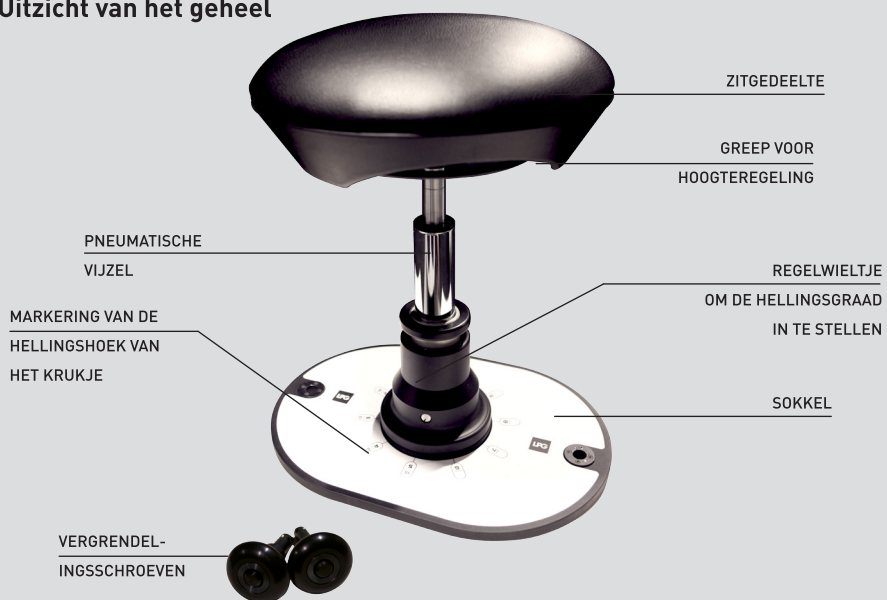

Uitzicht van de onderkant

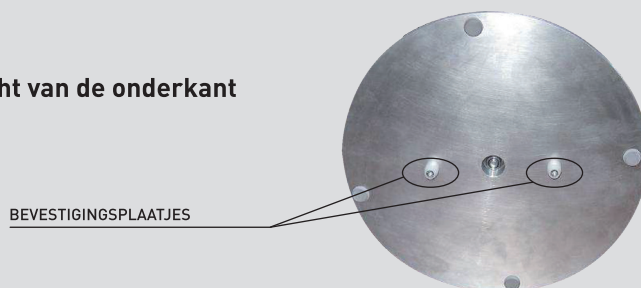

→ SCHARNIEREND KRUKJE (VERLOG)

POSITIONERING VAN HET SCHARNIEREND KRUKJE



Om het scharnierend krukje op het platform te bevestigen moet u deze in de uitsparingen die zijn voorzien voor toebehoren plaatsen.

→ SCHARNIEREND KRUKJE (VERLOG)

VERGRENDING VAN HET SCHARNIEREND KRUKJE OP HET PLATFORM

Alvorens het scharnierend krukje wordt gebruikt, moet het op het platform worden vastgeschroefd. Hiervoor moet u de centrale knop ingedrukt houden tot het apparaat in de schacht is geplaatst, zoals weergegeven op onderstaande afbeeldingen.



HELLINGSGRAAD

De helling van het scharnierend krukje is verstelbaar van 0 tot 15°.

Het volstaat om aan het instelwiel van het scharnierend krukje zo te draaien dat de marking op gelijke hoogte komt met de gewenste hellingsgraad.



HELLINGSGRAAD

ITEM
HELLING

OPGELET

Controleer de vergrendeling van het scharnierend krukje voor u het in gebruik neemt.
Alle handelingen die in dit deel zijn verricht, moeten worden uitgevoerd als het apparaat uit staat.

→ HARTSLAGFREQUENTIEMETER

Uw apparaat HUBER 360 i kan worden uitgerust met een hartslagfrequentiemeter die op elk moment uw hartslagfrequentie weergeeft. Activeer de hartslagfrequentiemeter door deze op uw borst te centreren. Bevochtig de zones die met de meter in contact komen met water of gel. Voer vervolgens de instructies uit die worden weergegeven op het scherm. Uw hartslagfrequentie zal dan zichtbaar zijn in de rechterbenedenhoek van het scherm.

HARTSLAGRIEM
OP DE BORST TE
PLAATSEN



Hartslagfrequentie

- Weergave: 30 tot 240 slagen per minuut
- Limiet: 30 tot 230 slagen per minuut
- Maximum voor percentageweergave: 240 slagen per minuut

⚠ OPGELET

De hartslagfrequentiemeter is enkel geschikt voor vrijetijdsgebruik. Hij mag niet worden gebruikt voor metingen die een professionele nauwkeurigheid of laboratoriumkwaliteit vereisen.

Het serienummer van de hartslagfrequentiemeter staat op de rugzijde van de riem.

De hartslagfrequentiemeter heeft een batterij die niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. De batterij moet afzonderlijk worden opgehaald. Leg de lege batterij in een collectebus zodat ze kan worden gerecycled.

→ TABLET

Uw HUBER 360i apparaat kan worden uitgerust met een tablet die u toelaat de HUBER 360 applicatie te downloaden.

De HUBER 360 applicatie kunt u downloaden vanaf de Play Store.

Met deze applicatie kunt u gebruikersdossiers beheren en oefeningen downloaden op het apparaat. Bovendien kunnen sommige parameters op afstand worden ingesteld.

De gebruiksinformatie verschijnt bij het openen van de applicatie.

Om de applicatie te downloaden gaat u naar de Play Store.



→ LEUNINGEN

Het apparaat HUBER 360 i kan worden uitgerust met twee pads die op het platform kunnen worden bevestigd. Deze leuningen zijn bedoeld om de toegang tot het apparaat te vergemakkelijken:

Uitzicht van het geheel



→ BLOKKERING-STABILITEITSTEST

Het apparaat HUBER 360 i is voorzien van een blokkering-stabiliteitstest die op het platform kan worden gemonteerd:

Uitzicht van het geheel:



Uitzicht van de onderkant:



→ BLOKKERING-STABILITEITSTEST (VERLOG)

PLAATSING VAN DE BLOKKERING-STABILITEITSTEST

De blokkering-stabiliteitstest kan op het platform in de bevestigingsschachten worden geplaatst, zoals getoond op onderstaande foto:



UITSPARINGEN TOEBEHOREN

Om de blokkering-stabiliteitstest te positioneren moeten de pinnen in de uitsparingen van het platform worden geplaatst.



→ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het is aangeraden om altijd eerst kennis te nemen van de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van een elektrisch apparaat.

GEVAAR – OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE MINIMALISEREN:

Trek de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik en voor het reinigen.

Ga na of de spanning van het apparaat, vermeld op het naamplaatje, overeenkomt met de nominale spanning van het stopcontact.

Het apparaat moet met het meegeleverde netsnoer, verplicht worden aangesloten op¹ een geaard wandstopcontact dat voldoet aan de geldende elektrische normen. Met dit apparaat mag geen enkel andere netstroomadapter worden gebruikt.

Trek na of een differentieel van het type SI is aangesloten voor het apparaat. Deze aansluiting dient te beantwoorden aan de veiligheidsnormen, ter bescherming van personen, voorgeschreven in het land van gebruik.

Trek na of de zekeringen van uw elektrische installatie krachtiger is dan de zekeringen van het apparaat.

Het apparaat dient te worden aangesloten aan een stopcontact dat exclusief is voorbehouden voor het toestel.

→ WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE BEPERKEN:

Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het op de stroom is aangesloten.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor een lange periode niet wordt gebruikt of alvorens er onderdelen worden verwisseld.

Houd zorgvuldig toezicht wanneer het apparaat wordt gebruikt door, bij of in de nabijheid van kinderen of gehandicapte personen.

Gebruik het apparaat nooit wanneer het netsnoer¹ of het stopcontact beschadigd is, als het apparaat niet correct werkt, als het gevallen of beschadigd is of als het apparaat overvloedig is blootgesteld aan vocht.

Bezorg het apparaat terug naar het dienstencentrum van LPG Systems om het te laten controleren en herstellen.

Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken.

Gebruik het apparaat nooit wanneer de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd. Houdt de openingen vrij van stof en dergelijke.

Laat nooit een voorwerp in een opening vallen en plaats nooit een voorwerp in een opening. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

Gebruik het apparaat niet op een stoffige of hellende ondergrond, in een vochtige of zilte omgeving en stel het apparaat niet op een vervuilde omgeving.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van aerosolproducten (verstuivers) of zuurstofproducten.

Raak nooit tegelijk de patiënt en een onbeschermd verbindingskabel van het apparaat aan.

Om het apparaat uit te schakelen, zet u alle knoppen in de "uit"-positie en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

→ **VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK****OPGELET: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

Zoals bij elke fysieke training, is het gebruik van dit apparaat onderworpen aan een voorafgaand medisch onderzoek.

De professional moet ervoor zorgen dat de parameters (de snelheid van de beweging van het platform, de amplitude, de actie- en rustduur) zijn aangepast aan de morfologie en de fysieke conditie van de gebruiker.

Het is noodzakelijk dat het apparaat wordt gebruikt onder toezicht van een ervaren professional.

Voor elk gebruik van het apparaat moet de gebruiker zich opwarmen, alvorens de inspanningsoefeningen uit te voeren.

De oefeningen moeten niet met ingehouden adem worden uitgevoerd.

Het is niet aangeraden om het apparaat met een maximale inspanning te gebruiken wanneer het platform in beweging is.

Wanneer u zich oncomfortabel voelt tijdens een oefening moet u de oefening onmiddellijk stopzetten.

Laat het apparaat niet werken buiten de vastgelegd omgevingsomstandigheden (zie technische specificaties).

Geen zwaardere gewichten plaatsen dan aangegeven (zie technische specificaties).

Verplaats het apparaat niet zonder de aanwezigheid van een LPG-technicus.

Bij het gebruik van het scharnierend krukje moeten de voeten van de gebruiker op het houten platform rusten, en niet op sokkel van het scharnierend krukje.

De noodstopknop mag, zoals de naam aangeeft, enkel in noodsituaties worden gebruikt.

De afstandsbediening mag enkel door een ervaren professional die in de buurt van het apparaat staat, worden gebruikt.

Gebruik de afstandsbediening en de gebruikersinterface niet gelijktijdig om het apparaat te bedienen.

Dit symbool betekent  "Gevaarlijke spanning".

 OPGELET

Het is absoluut verboden om het apparaat aan te passen zonder toelating van LPG.

→ VRIJE ZONE

Voorzie een vrije zone van 1 meter rond het toestel, waar zich geen voorwerpen of personen bevinden.



→ CONTRA-INDICATIES

Het toestel mag niet worden gebruikt door een persoon met cardiologische, rhumatologische, neurologische aandoeningen of ademhalingsstoornis waardoor die persoon geen fysieke activiteit kan uitvoeren.

In het geval van gebruik voor niet medische aandoeningen (preventive, sportgezondheid...) dient de patiënt te beschikken over een medisch attest van niet contra indicatie voor fysieke activiteiten.

Omwille van mogelijke interferentie is het belangrijk dat de professional zich ervan verzekert dat de gebruiker geen persoonlijk medisch instrument draagt zoals een pacemaker.

Als dit wel het geval is, moet men navraag doen naar het desbetreffende instrument om te controleren of de eventuele interferentie het gebruik van dat apparaat niet zal verstoren.

Het apparaat mag niet gebruikt worden voor personen met een medische aandoening zonder toezicht van een gezondheidsprofessional die bevoegd is in het betrokken land van gebruik en onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid.

OPGELET

Dit apparaat bevat programma's om de gebruiker te helpen om zo optimale mogelijke resultaten te behalen in functie van elk geval. In geen enkel geval bevat dit een garantie tot slagen. De resultaten zijn afhankelijk van de morfologie en de fysiologie van elke gebruiker. Het is strikt verboden om wijzigingen aan te brengen aan het apparaat zonder toelating van LPG.

→ SCHOONMAAK VAN UW APPARAAT

Het is aanbevolen om uw toestel zo vaak mogelijk te reinigen, niet alleen om hygiënische en esthetische redenen maar ook omdat de schoonmaak ertoe bijdraagt het toestel in goede staat te houden en zijn levensduur te verlengen:

Reinig de buitenste kleppen met een vochtige spons.

Reinig de grepen met een vochtig en ontsmettend doekje.

Reinig het bedieningspaneel met schermdoekjes gedrenkt in een bacteriëndodende en antistatische oplossing.

Maak het platform en de basis proper met reinigend schuim.

Vervang de batterijen van de hartslagfrequentiemeter van zodra dit nodig is. Bij technische problemen, raadpleegt u hoofdstuk 5 "Een probleempje! Wat nu?".

Met behulp van een stofzuiger en een klein opzetstuk kunt u het plateau en de binnenkant van de hulpstukken proper maken.

→ IDENTIFICATIEPLAATJE

SERIENUMMER	LPGsystems FABRIQUE EN FRANCE MADE IN FRANCE		TECHNOPARC DE LA PLAINE BP35, 30 RUE DU Dr ABEL 26902 VALENCE CEDEX 09			
	TYPE: HUBER 360 i			IP 20	   	
	N° SERIE: HUBA111249 SERIAL NUMBER:					
200-230V 50/60Hz 2 Kw						
VOEDINGSSPANNING EN FREQUENTIE						

OPGELET

Voor dat u reinigend schuim gebruikt dient u na te gaan of indicaties of contra-indicaties vermeld staan op de bijsluiters van dit product.

→ IDENTIFICATIEPLAATJE (VERLOG)

Het identificatienaamplaatje bevindt zich op de achterkant van uw toestel.

Dit plaatje vermeldt de voedingsspanning van het apparaat en het serienummer dat dient ter identificatie van uw apparaat. Wanneer u de Klantenservice van LPG Systems contacteert in verband met een technisch probleem, moet u het serienummer van uw HUBER 360 i meedelen.

Dit serienummer bevat informatie over het jaar en de maand waarin uw apparaat is gefabriceerd. De letter geeft het productiejaar aan: A=2010, B=2011..., E=2014,...

De twee cijfers geven de productiemaand weer: 01 = januari; 02 = februari; 03 = maart,...

 Dit pictogram geeft aan dat dit apparaat na 13 augustus 2006 op de markt werd gebracht. In overeenstemming met de Richtlijn 2002/96/EG mag het niet als ongescheiden huisvuil worden afgevoerd. Maak om dit product af te voeren gebruik van een inzamelpunt bij u in de buurt. Wanneer uw apparaat einde leven is, moet u het naar een geschikt afvalverzamel punt brengen of moet u het terugbrengen naar uw distributeur. U draagt op deze wijze bij tot de bescherming van het milieu, tot het behoud van de natuurlijke bronnen en tot de bescherming van de volksgezondheid.

 Dit pictogram toont aan dat bepaalde waarschuwingen of specifieke voorzorgsmaatregelen in verband met dit apparaat, zich niet op het etiket bevinden.

 Dit pictogram betekent «raadpleeg de gebruikershandleiding».

 Dit pictogram betekent dat het maximaal toegelaten gewicht op dit apparaat 140 kg is.

 Dit pictogram betekent dat het apparaat beschermt tegen de weersomstandigheden moet worden bewaard.

 Dit pictogram geeft aan wat de temperatuurgrenzen zijn.

 Dit pictogram geeft aan wat de grenzen zijn met betrekking tot de relatieve vochtigheidsgraad.

 Dit symbool betekent "Gevaarlijke spanning".

OPGELET

Het identificatieplaatje van uw apparaat kan veranderen. Het goedgekeurde plaatje is het plaatje dat op uw apparaat is bevestigd.

→ **NETSNOER**

Indien het netsnoer van uw apparaat is beschadigd, moet u contact opnemen met:
De Klantenservice van LPG Systems. Het wordt vervangen.

LPG BENELUX

Tel: + 32 (0)2 332 25 85

AANTEKENINGEN

[illegible]

→ EEN KLEIN PROBLEEM?! WAT MOET IK DOEN?

Indien het apparaat niet goed werkt, verdient het aanbeveling om eerst het volgende te controleren, voordat u contact opneemt met de klantendienst van LPG Systems :

Is het toestel aangesloten op een stopcontact?

Staat er spanning op het stopcontact?

Staat de schakelaar aan?

Is de noodstopknop ingedrukt?

Als dit het geval is, trekt u de stekker uit het stopcontact, ontgrendelt u de noodstopknop en zet u het apparaat weer aan.

Bij de onderstaande oorzaken, schakelt u het toestel uit en wacht u gedurende 60 seconden alvorens u het toestel weer aan zet:

- foutmelding op het scherm ;
- het scherm werkt niet meer ;
- het platform is overbelast tijdens de oefening ;
- de sensor vertoont een gebrek.

Als na al deze controles te hebben uitgevoerd het probleem nog steeds aanwezig is, doet u een beroep op de Klantenservice van LPG Systems® of de dichtstbijzijnde erkende distributeur onder vermelding van het model en serienummer van uw apparaat.

LPG BENELUX

Tel: + 32 (0)2 332 25 85

→ TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene kenmerken

Afmetingen L x b x h	180 cm x 105 cm x 210 cm (133 cm met leuningen)
Nettogewicht	285 kg
Maximaal toegelaten gewicht op het platform	140 kg

Elektrische kenmerken

Voedingspanning	200 - 230V
Nominale frequentie	50 Hz / 60 Hz
Geabsorbeerd vermogen	2 Kw

Beweging van het platform

Maximale schommelsnelheid	1 tr/sec
Max. amplitude	10°

Meting van de inspanningen

Meetschaal greep	0 tot 85 kg
------------------	-------------

Gewichtsmeting

Meetschaal	0 tot 165 kg
------------	--------------

Batterijen te vervangen door de gebruiker

Hartslagfrequentiemeter	1 3V-batterij CR2032
-------------------------	----------------------

Omgevingsgrenzen

Werkingstemperatuur	+ 15°C tot + 40°C
Opslagtemperatuur	- 20°C tot + 70°C

Relatieve vochtigheidsgraad omgeving	30 tot 75% condensvrij
Atmosferische druk	geen merkbare invloed van de omgevingsomstandigheden
Max. hoogte	2500 m

→ TECHNISCHE SPECIFICATIES (VERLOG)

Apparaat getest in continue werking.

HUBER 360 i is gemarkeerd  conform de geldende normen en teksten in het kader van de richtlijnen CEM 2004/108/EEG, Lage Spanning 2006/95/EEG en Machine 2006/42/EEG.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

HUBER 360 i gebruik alleen RF-energie voor interne functies. Bijgevolg is de RF-transmissie bijzonder zwak en wordt niet verwacht dat ze elektromagnetische storingen veroorzaken in naburige apparaten.

HUBER 360 i mag worden gebruikt in elke instelling, ook in gezinswoningen en op plaatsen waar directe verbinding is met het elektrische laagspanningsnet dat elektriciteit levert aan woningen.

HUBER 360 i moet worden geplaatst op een houten vloer, een betonnen vloer of een tegelvloer. Indien de vloer is bekleed met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheidsgraad minstens 30 % bedragen.

HUBER 360 i moet worden gekoppeld aan een elektrische stroomnet dat gelijkwaardig is aan een commercieel net of een ziekenhuisnet.

Indien de gebruiker van HUBER 360 i een continu gebruik eist ook tijdens stroomonderbrekingen, dan is aangewezen om een UPS te installeren of een accu te voorzien.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mogen niet te dicht in de buurt van HUBER 360 i worden gebruikt, met inbegrip van de bekabeling.

Er kunnen interferenties gebeuren in de buurt van een apparaat voorzien van het volgende symbool



→ ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

U hebt zojuist een toestel gekocht dat wordt verdeeld door LPG Systems of door een erkende distributeur van LPG Systems. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om zich bij de plaatselijke autoriteiten te informeren over de voorwaarden en de vakbekwaamheden die vereist zijn om dit apparaat te gebruiken.

Door de aanschaf van dit apparaat accepteert de koper/gebruiker ten volle deze algemene garantievoorwaarden.

Indien het apparaat werd verkocht door een door LPG Systems erkende distributeur, zal de koper/gebruiker zich kunnen beroepen op de algemene garantievoorwaarden van de leverancier. Deze voorwaarden mogen onder geen enkel beding de verplichtingen krachtens de onderhavige garantie vergroten. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om het correct ingevulde garantiebewijs terug te sturen. Dit vergemakkelijkt een snelle interventie door LPG SYSTEMS. Onvolledig ingevulde garantiebewijzen zullen door LPG SYSTEM worden geretourneerd.

Dit apparaat is tegen elke fabricatiefout gegarandeerd. De garantieduur is gelijk aan de kortste van de volgende twee termijnen: één (1) jaar OF tweeduizend (2.000) gebruiksuren te rekenen vanaf de factuurdatum.

Tijdens deze periode verplichten wij ons om elk door ons als defect erkend onderdeel, gratis en zo snel mogelijk te vervangen of repareren. De koper kan echter niet de vervanging van het volledige apparaat eisen.

Vervangingen en reparaties die door de garantie worden gedekt en die mogelijk al dan niet een immobilisatie van het apparaat veroorzaken, hebben voor gevolg dat de garantie wordt verlengd voor de duur van de immobilisatieperiode. De vervangen onderdelen worden eigendom van LPG Systems of de erkende distributeur. Er zal geen schadevergoeding worden toegekend voor het niet kunnen beschikken over het apparaat tijdens reparatie.

De koper/gebruiker verplicht zich om ons de nodige tijd en middelen te geven voor het repareren en leveren van reserveonderdelen. Indien hij zich hier niet aan houdt, zullen wij niet langer verplicht zijn hem garantie te verstrekken. De rechtbanken binnen het ressort van de maatschappelijke zetel van LPG Systems zijn de enige met bevoegdheid in geval van geschillen en dit in weerwil van enige clausule van toewijzing van een andere jurisdictie vermeld op enig document dat het tegendeel bepaalt.

De garantie is bovendien uitgesloten indien:

Het apparaat wordt beschadigd bij het transport. Het apparaat en/of de reserveonderdelen worden vervoerd voor risico van de ontvanger. Deze dient te controleren of het apparaat in goede staat verkeert alvorens de levering in ontvangst te nemen en zonodig zijn voorbehoud te maken bij de vervoerder in de vorm en binnen de termijnen die gelden in het land van levering.

De regels voor installatie en gebruik niet worden toegepast en/of het apparaat niet (goed) wordt onderhouden en/of het apparaat op een defecte elektrische lijn wordt aangesloten of indien er geen aarding wordt gebruikt of indien er een andere spanning wordt gebruikt dan de spanning aangegeven op het apparaat.

Als een apparaat binnen de garantietermijn wordt doorverkocht, gaat de garantie voor de overblijvende duur over op de nieuwe eigenaar op voorwaarde:

1. dat hem de originele factuur wordt overgedragen.
2. dat de oorspronkelijke verkoper op de hoogte wordt gesteld van de doorverkoop.

Het apparaat, de gemonteerde of gedemonteerde toebehoren van het apparaat worden gewijzigd.

Er gebruik wordt gemaakt van of er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het apparaat die niet zijn vermeld in deze gebruikshandleiding van LPG Systems, door de koper/gebruiker zelf of door een niet door LPG Systems erkende derde partij.

Er ongeschikte verbruiksartikelen, reserveonderdelen of componenten of niet door LPG Systems® geleverde onderdelen worden gebruikt.

Er sprake is van normale slijtage van een of meerdere onderdelen van het apparaat die het resultaat is van gewoon gebruik.

Het apparaat wordt beschadigd door vallen, stoten, blikseminslag, brand, overmacht, waterschade of natuurrampen.

→ BEPERKING EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien de algemene garantievoorzwaarden tijdens de garantieperiode en na de vervaldatum niet worden nageleefd, is dit mogelijk een reden voor vrijstelling van de aansprakelijkheid van LPG Systems in geval van schade die te wijten is aan de geleverde producten.

LPG Systems kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade, ongeacht de aard, en voor geleden verliezen, ongeacht de aard (financieel, commercieel, imago, enz.), die met name het directe of indirecte gevolg zouden zijn van de onjuiste werking en/of een niet-conform gebruik van het apparaat.

In ieder geval, indien wordt vastgesteld dat LPG Systems wegens het verkochte apparaat en/of de geleverde prestaties verantwoordelijkheid draagt, kan het maximumbedrag van de schadevergoeding en de interesten waartoe zij zou kunnen worden veroordeeld niet hoger zijn dan de prijs die de koper heeft betaald voor het apparaat en/of de geleverde prestatie.

→ GARANTIEFORMULIER

U KUNT UW GARANTIE RECHTSTREEKS ONLINE ACTIVEREN OP :

<http://warranty.lpgsystems.com>

D → OF INVULLEN EN OPSTUREN NAAR LPG SYSTEMS®



Naam* :

Adres* :

Land* :

Tel* :

E-mail :

Vestigingstype :

Beroep :

Type toestel :

Serienummer HUBER 360 i* :

Datum :

De persoonlijke gegevens door die door dit formulier worden verzameld zijn uitsluitend bedoeld voor LPG Systems die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het klantenbeheer met name voor de dienst na verkoop en de garantie.

Het verstrekken van de gegevens voorzien van een sterretje is noodzakelijk.

In overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd betreffende de informatica, bestanden en vrijheden, ook wel «Informaticawet en wet op de vrijheden» genoemd, hebt u een toegangsrecht, een wijzigingsrecht en een verwijderingsrecht van de persoonlijke gegevens betreffende uw persoon. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met LPG Systems door een brief te sturen naar het volgende postadres : LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel -Technoparc de la Plaine - 26000 VALENCE (FRANKRIJK).



HEADQUARTERS LPG SYSTEMS S.A.S.

TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANKRIJK
TEL...: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAAL/MARKETING

ECOLUCIOLES - BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANKRIJK
TEL...: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

