



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



Application pour tablette

GUIDE DE L'UTILISATEUR



SOMMAIRE

1. UTILISER L'APPLICATION HUBER 360	p 03		
1.a MENU GÉNÉRAL	p 04		
1.b THÉRAPEUTES	p 05		
1.b.1 Créer un profil de thérapeute	p 06		
1.c PATIENTS	p 07		
1.c.1 Créer un profil de patient	p 08		
1.c.2 Modifier et archiver un profil de patient	p 09		
1.c.3 Accès aux informations générales	p 10		
1.c.4 Questionnaire, antécédents médicaux, données personnelles	p 12		
1.d PROGRAMMES DE SOINS	p 16		
1.d.1 Créer un programme de soins	p 17		
1.d.2 Lancement de la séance	p 19		
1.d.3 Visualiser les séances	p 20		
1.d.4 Modifier les séances	p 21		
1.d.5 Visualiser les programmes de soins	p 22		
1.d.6 Visualiser la progression	p 23		
1.d.7 Séances libres	p 24		
1.d.8 Séances orphelines	p 25		
		1.e BILANS	p 26
		1.e.1 Réaliser un bilan médical	p 26
		1.e.2 Effectuer bilan fitness	p 32
		1.e.3 Visualiser les bilans	p 34
		1.e.4 Envoyer un bilan	p 37
		1.e.5 Bilan orphelin	p 38
		1.f EXERCICES PERSONNALISÉS	p 39
		1.f.1 Menu général	p 40
		1.f.2 Créer un exercice personnalisé	p 41
		1.f.3 Récupérer un exercice modifié	p 45
		1.f.4 Exporter un exercice personnalisé	p 49
		1.f.5 Importer un exercice personnalisé	p 50
		2. LANCER UN PROGRAMME DE SOI	p 50
		3. IMPORTATION DES DONNÉES	p 55
		3.a Sauvegarde des données	p 56
		3.b Récupération des données	p 59
		4. EXPORTATION DES DONNÉES	p 66



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1. UTILISER L'APPLICATION HUBER 360[®] EVOLUTION



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.a MENU GÉNÉRAL


CONFIGURATIONS : Pour accéder à différentes fonctionnalités (choix de la langue, maintenance, version du logiciel...)

La « **Clause de non-responsabilité** » attire votre attention sur la confidentialité et l'intégrité des données si vous décidez d'exporter nos données clients.

THÉRAPEUTES : Pour créer un profil de thérapeute.

EXERCICE PERSONNALISÉ : Pour créer vos propres exercices.

ARCHIVE PATIENT): Pour accéder aux patients qui ont terminé leur programme de traitement.

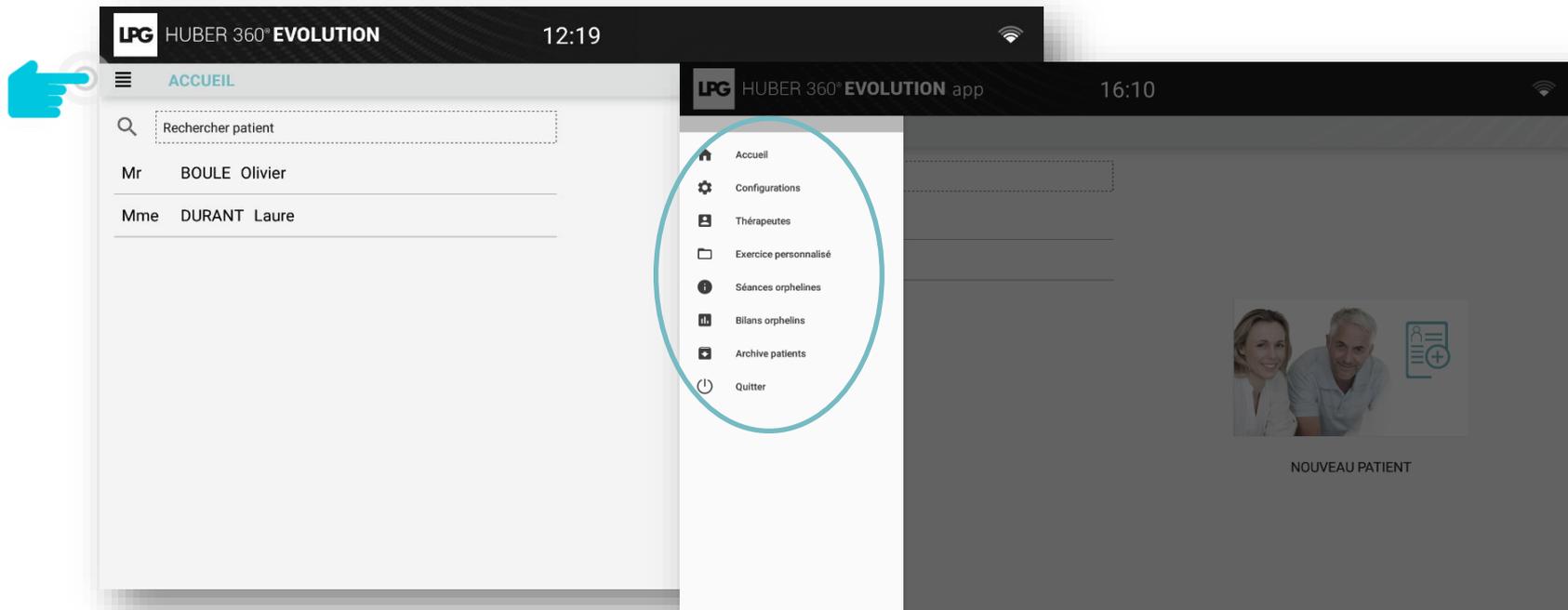





HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.b THÉRAPEUTES

1.b.1 CRÉER UN COMPTE THÉRAPEUTE

Cliquez sur  et sélectionnez **THÉRAPEUTES**.

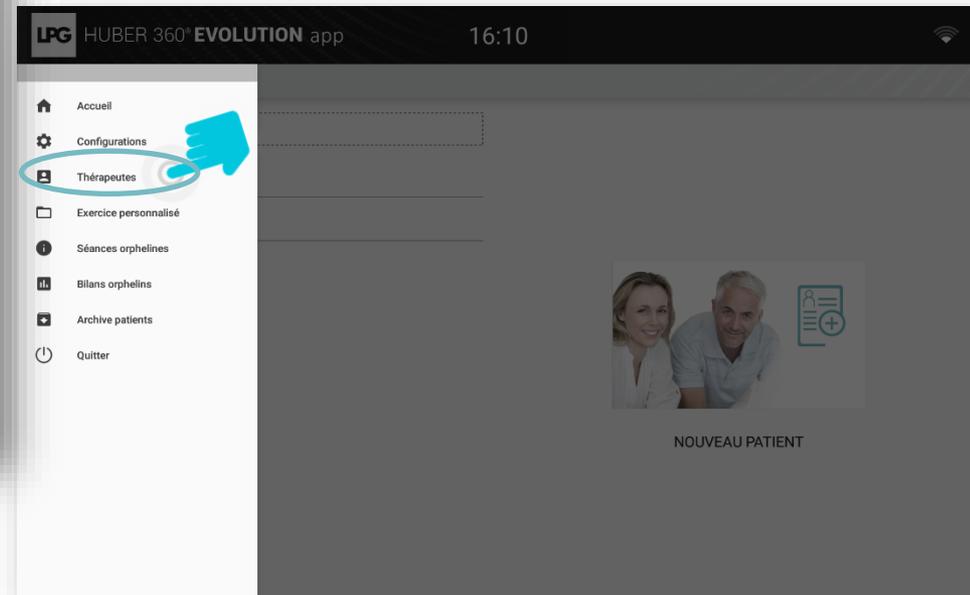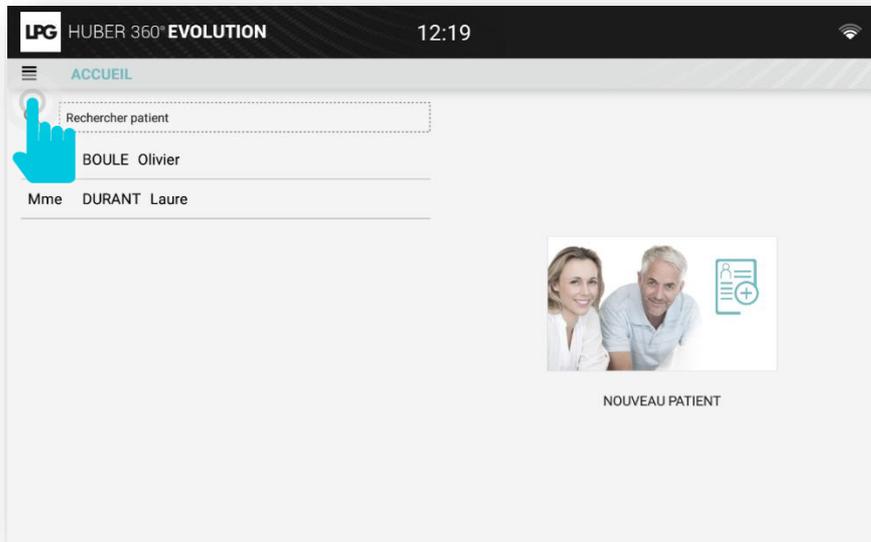




1.b THÉRAPEUTES

1.b.1 CRÉER UN COMPTE THÉRAPEUTE

Cliquez sur NOUVEAU THÉRAPEUTE.
Remplissez les informations. Vous pouvez ajouter une photo.
Ensuite, cliquez sur CONFIRMER pour valider le profil.

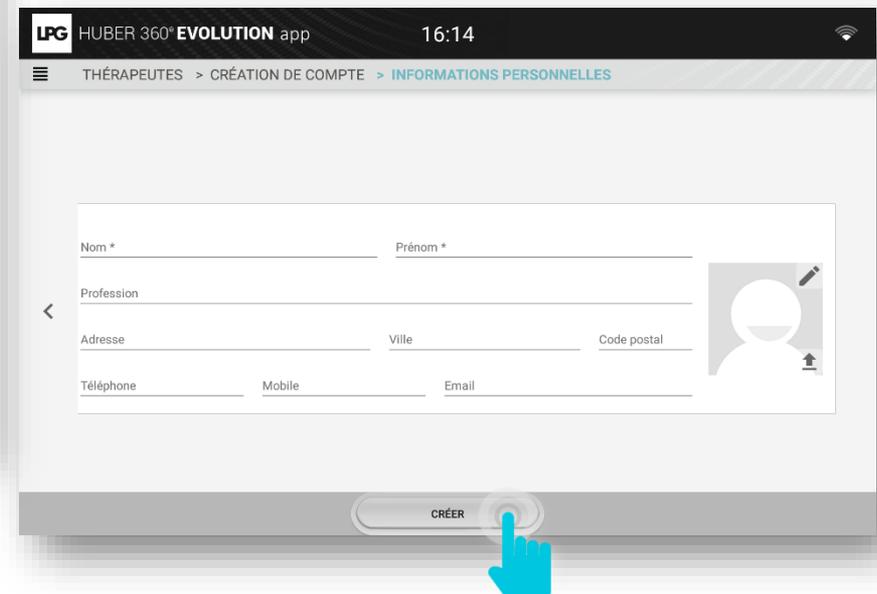




1.c PATIENTS

1.c.1 CRÉER UN COMPTE DE PATIENT

Sélectionnez NOUVEAU PATIENT sur l'écran d'accueil.

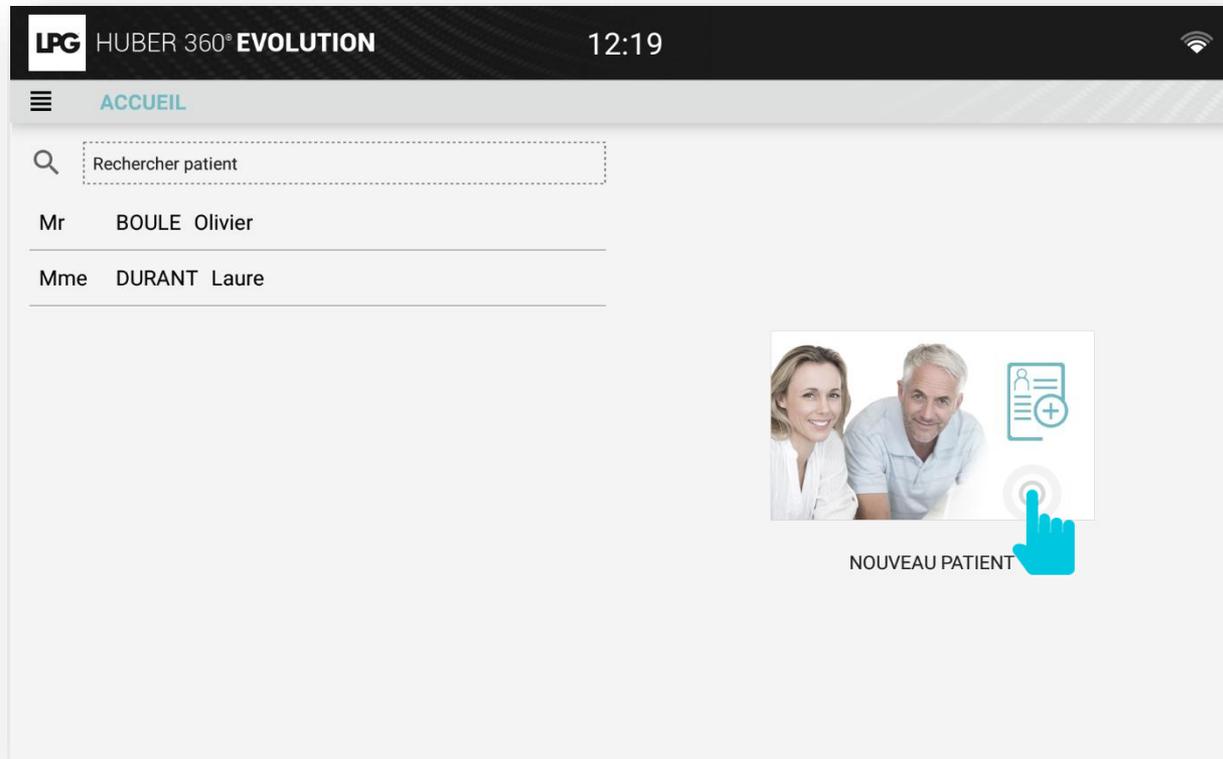



1.c PATIENTS

1.c.1 CRÉER UN COMPTE DE PATIENT

Remplissez les informations sur le patient.

Vous pouvez ajouter une photo et choisir un thérapeute (après avoir créé le compte).

L'IMC est calculé automatiquement après avoir renseigné la taille et le poids.

Cliquez sur CRÉER LE PROFIL DU PATIENT.

LPG HUBER 360[®] EVOLUTION 14:21

ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > **INFORMATIONS PERSONNELLES**

Femme Homme Login * Mot de passe *

Nom * Prénom *

Date de naissance Profession

Adresse Ville Code postal

Téléphone Mobile Email

Taille (en cm) Poids (en kg) Latéralité : Droite Gauche

Thérapeute : ▼

Médecin Email NIR

Suivi médical

CRÉER CETTE FICHE PATIENT

Veillez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chacun de vos patients, afin de les identifier sur votre appareil et d'accéder à leurs programmes de traitement personnalisés.



1.c PATIENTS

1.c.2 MODIFIER ET ARCHIVER UN PROFIL DE PATIENT

- Pour modifier le profil d'un patient, sélectionnez le nom de votre patient et cliquez sur  N'oubliez pas de cliquer sur **CONFIRMER** pour enregistrer vos modifications.
- Pour archiver le profil d'un patient, cliquez sur 

ACCUEIL

Rechercher patient

Mr BOULE Olivier

Mme DURANT Laure

NOUVEAU PATIENT

Civilité: Mr
Nom: BOULE
Prénom: Olivier
Date de naissance: 30 juillet 1970

Archiver Modifier

ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > INFORMATIONS PERSONNELLES

14:30

Femme Homme

Nom * BOULE

Prénom * Olivier

Date de naissance 30 juillet 1970 (48)

Profession kine

Adresse 222

Ville marseille

Code postal 13008

Téléphone 123456789

Mobile 8563256

Email

Taille (en cm) 180

Poids (en kg) 72

IMC : 22.2

Latéralité : Droite Gauche

Thérapeute :

Médecin

Email

NIR

Suivi médical


CONFIRMER



1.c PATIENTS

1.c.3 ACCÈS AUX INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le patient concerné et cliquez sur la flèche ci-dessous.

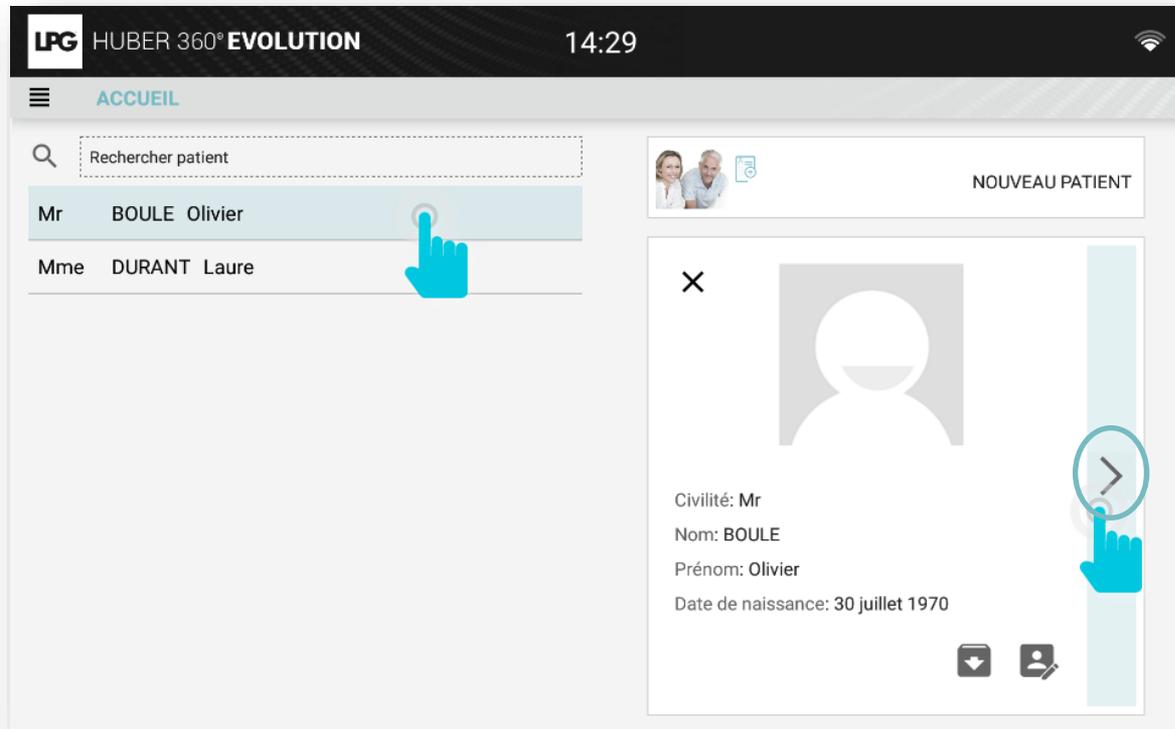




1.c PATIENTS

1.c.3 ACCÈS AUX INFORMATIONS GÉNÉRALES

MES PROGRAMMES : Programmes en cours de votre patient

MES ÉVALUATIONS : Évaluations des patients

MON PROFIL : Informations sur le patient → Questionnaire sur la qualité de vie, antécédents médicaux, données personnelles

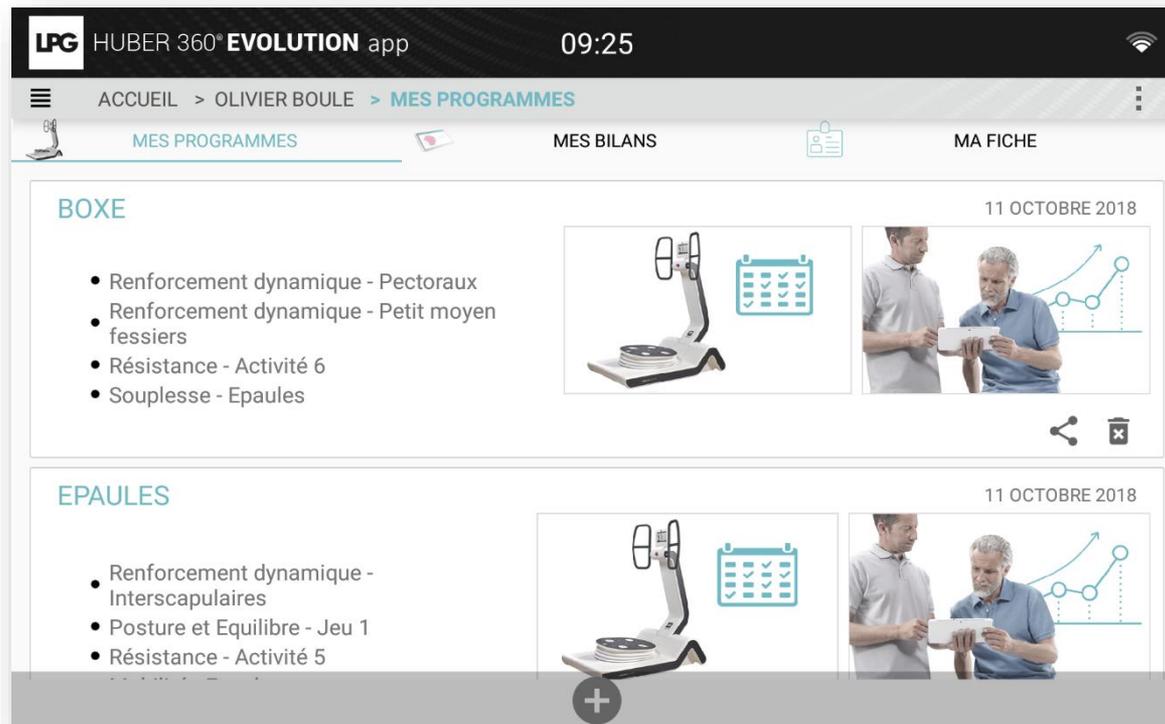




1.c PATIENTS

1.c.4 Questionnaire, antécédents médicaux, données personnelles

Pour compléter les informations sur le patient, cliquez sur MY PROFILE (MON PROFIL).

- **QUESTIONNAIRE** : Accès au questionnaire qualité de vie de votre patient(e).
- **ANAMNÈSE** : Accès à l'historique de votre patient(e) (antécédents médicaux).
- **INFORMATIONS PERSONNELLES** : Accès aux coordonnées de votre patient(e).

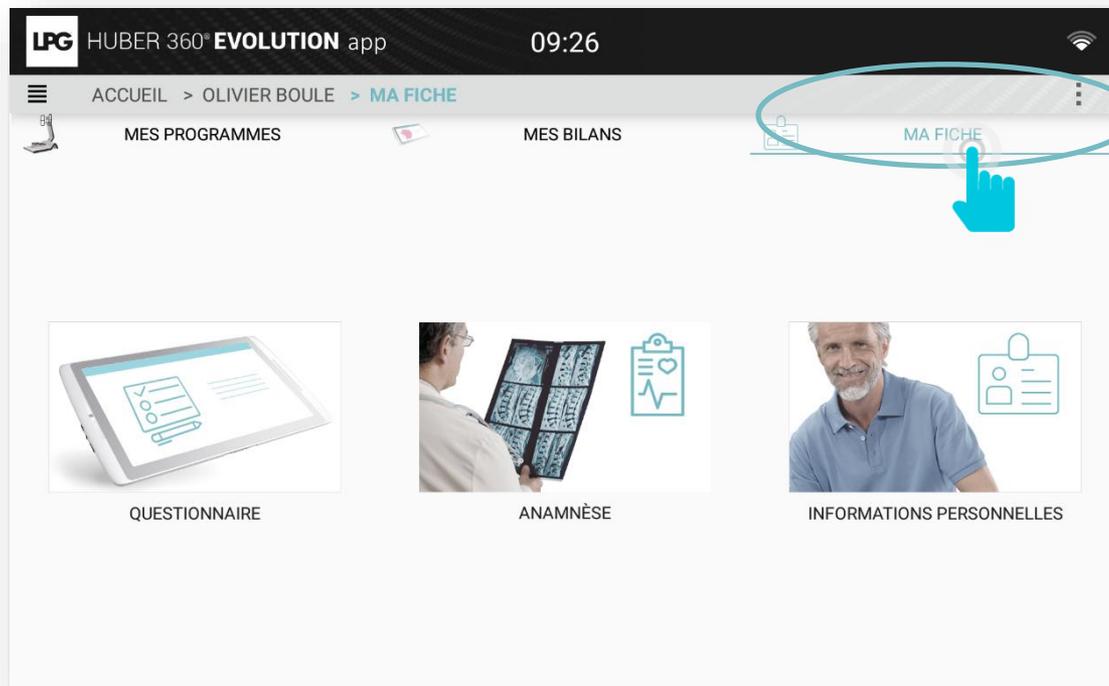




1.c PATIENTS

1.c.4 Questionnaire, antécédents médicaux, données personnelles



Pour réaliser le questionnaire sur la qualité de vie de votre patient, cliquez sur  Sélectionnez les réponses et cliquez sur OK pour enregistrer le questionnaire.

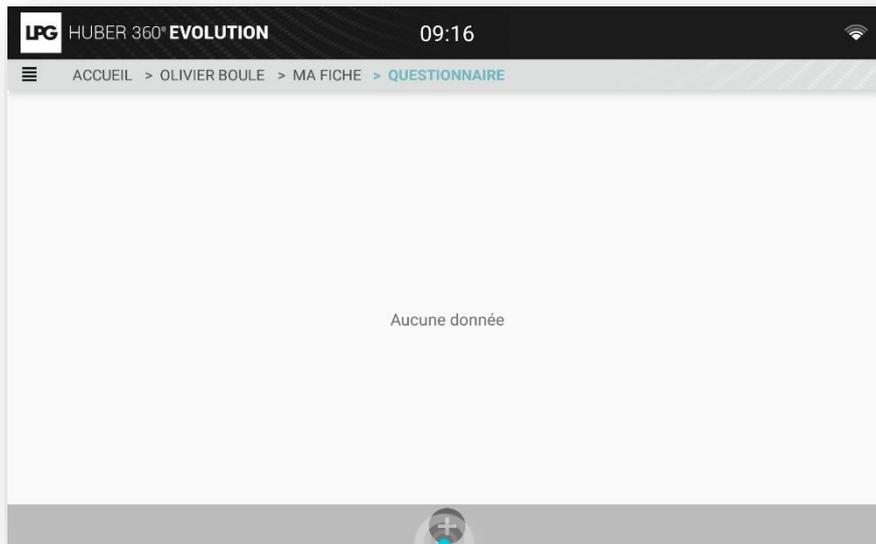

Nouveau questionnaire

Vous dormez:
 Très bien Bien Mal Très mal

Vous êtes fatigué(e) au réveil:
 Jamais Rarement Souvent Très souvent

Votre travail vous génère des douleurs:
 Pas du tout Un peu Assez Beaucoup

Vous êtes stressé(e):
 Pas du tout Un peu Assez Beaucoup

Vous faites de l'exercice:
 Très souvent Souvent Rarement Jamais

Vous buvez de l'eau:
 Très souvent Souvent Rarement Jamais

Vous fumez par jour:
 0 cigarette 2-5 cigarettes 5-10 cigarettes Plus de 10 cigarettes

Votre alimentation est équilibrée:
 Très souvent Souvent Rarement Jamais

Vous sentez-vous limité(e) physiquement:
 Pas du tout Un peu Assez Beaucoup

ANNULER **OK**




1.c PATIENTS


1.c.4 Questionnaire, *antécédents médicaux*, données person



Pour réaliser l'anamnèse de votre patient(e), cliquez sur **+** en bas de l'écran.
Après avoir renseigné toutes les informations souhaitées, cliquez sur **SAUVEGARDER**.

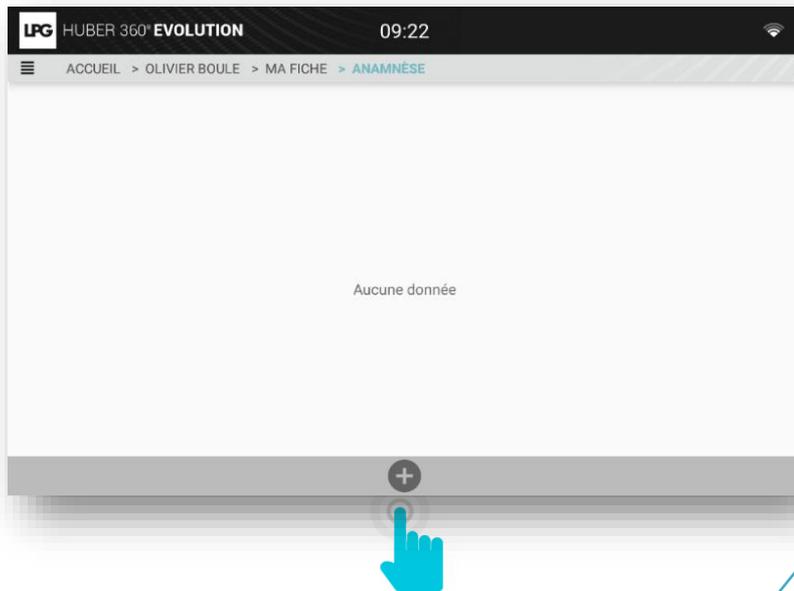

Ajout de commentaires

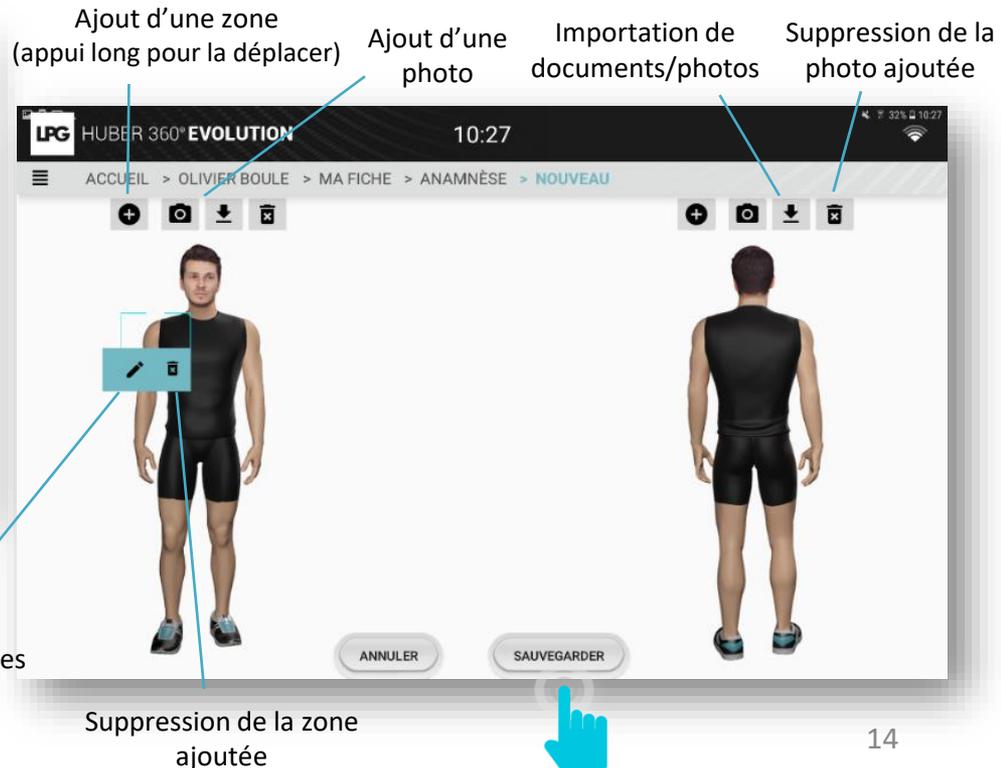




1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.1 CRÉER UN NOUVEAU PROGRAMME DE SOINS

Cliquez sur la rubrique **MES PROGRAMMES** puis sur  en bas de l'écran

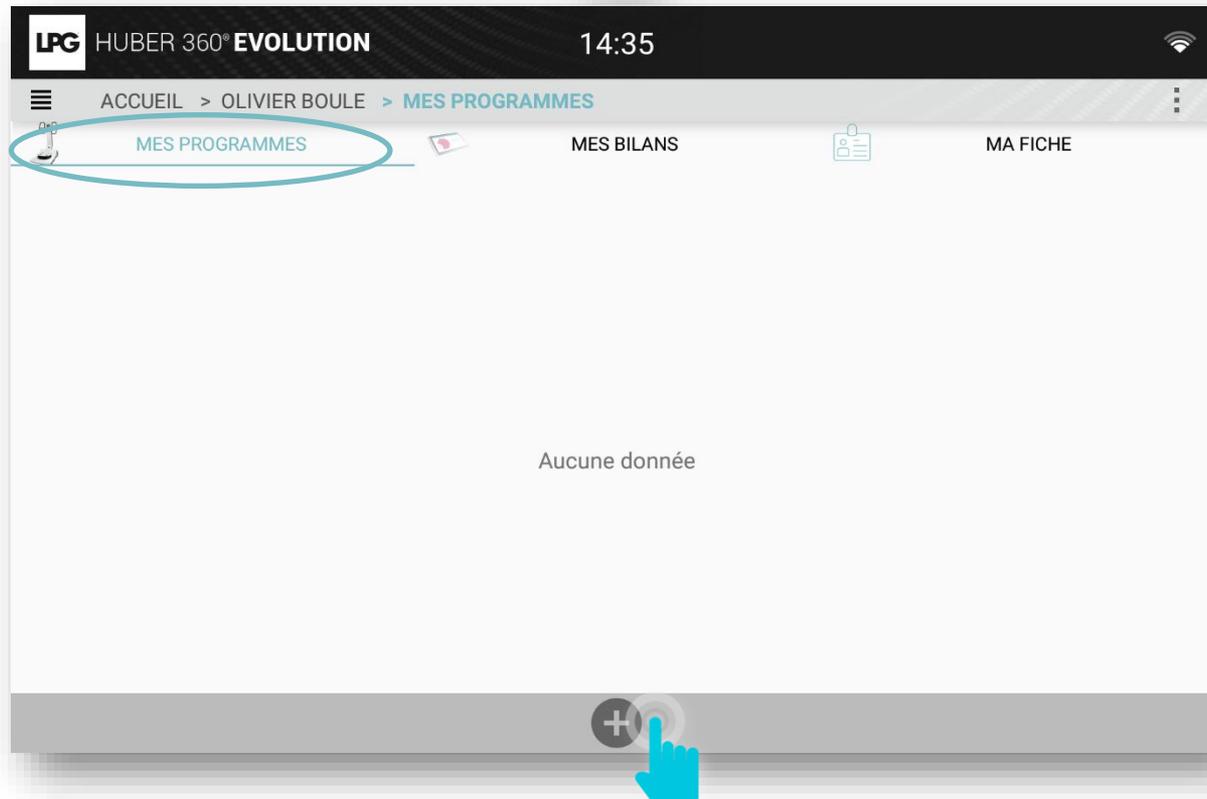




1.d PROGRAMMES DE TRAITEMENT

1.d.1 CRÉER UN NOUVEAU PROGRAMME DE SOINS

Ensuite, sélectionnez le thème souhaité.

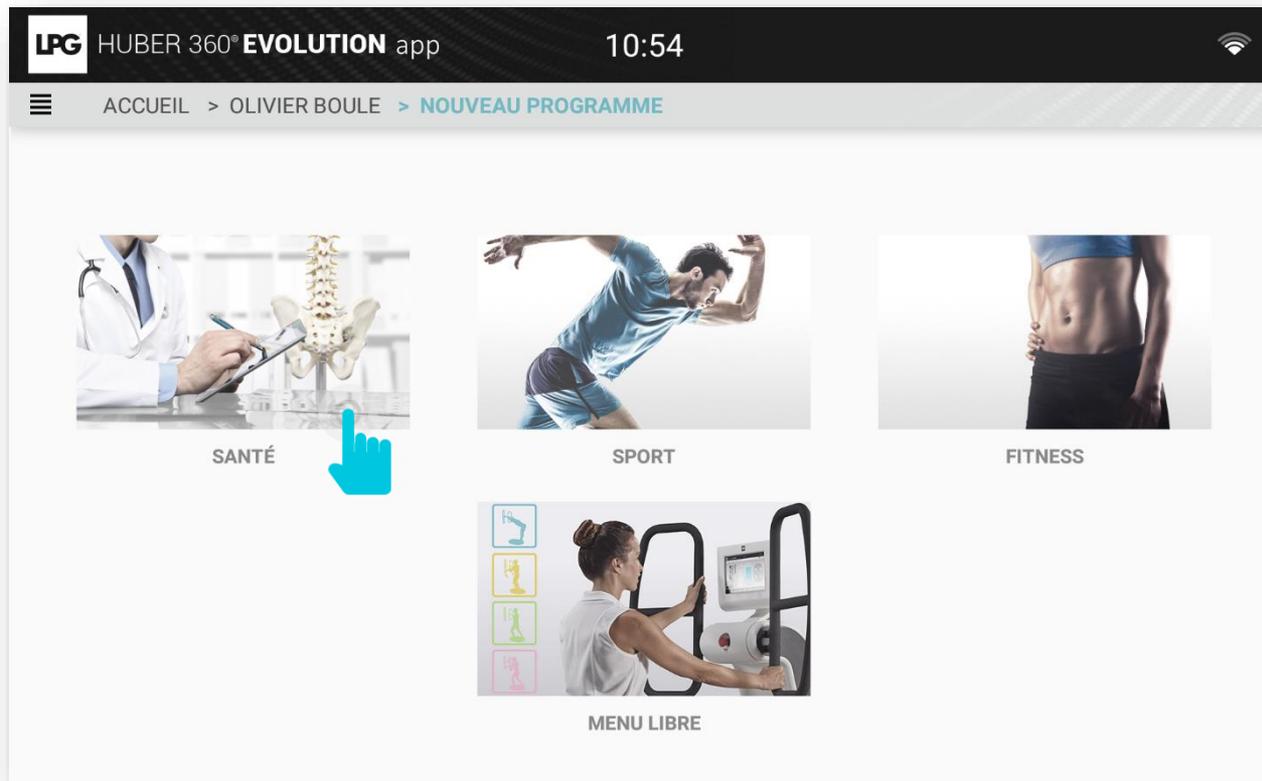




1.d GESTION DES PROGRAMMES DE SOINS

1.d.1 CRÉER UN PROGRAMME DE SOINS

Sélectionnez la thématique souhaitée parmi les 3 proposées.

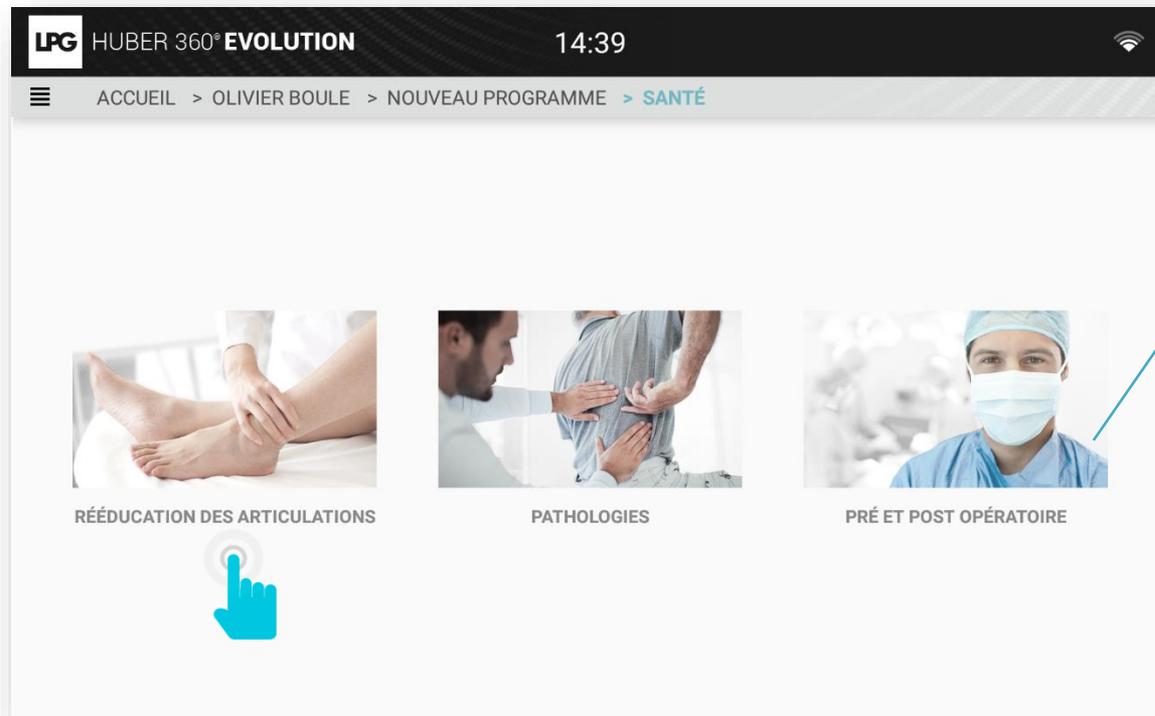

MODE EXPERT


Les protocoles PRÉ ET POST OPÉRATOIRE sont activés après avoir suivi la formation expert ACTIVE LIFE.



1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.1 CRÉER UN NOUVEAU PROGRAMME DE SOINS

Après avoir sélectionné la zone, sélectionnez le niveau, le nombre de séances et cliquez sur OK pour valider la création du programme de traitement.

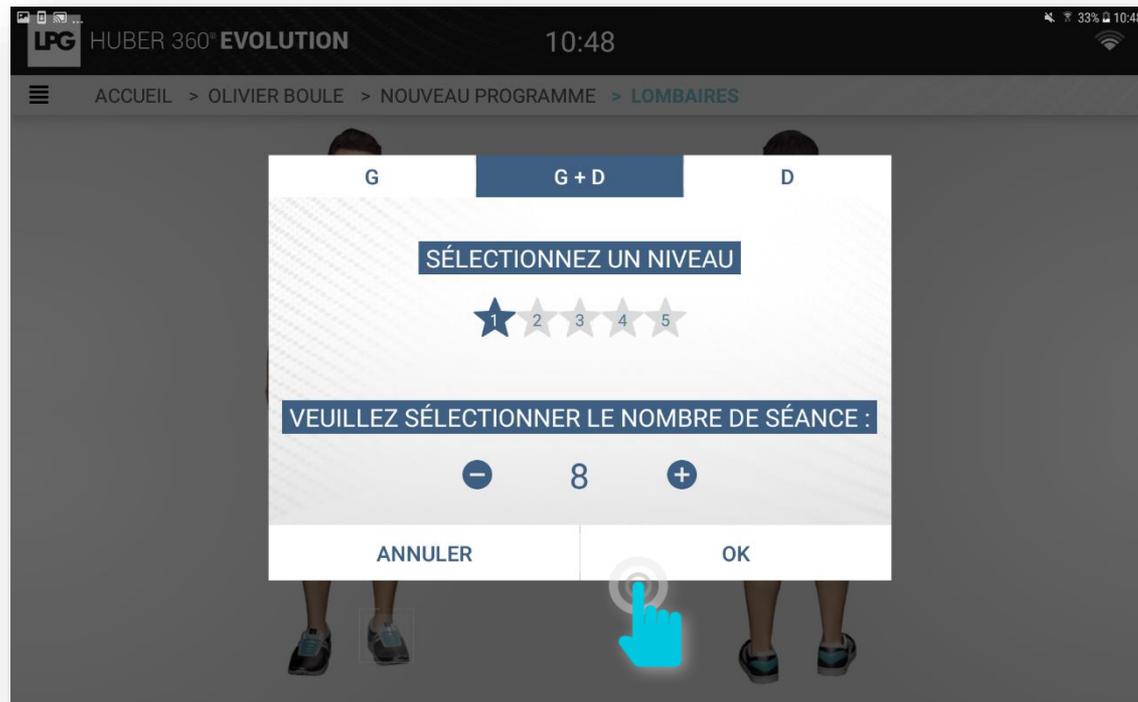





HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.2 LANCEMENT DE LA SÉANCE

Cliquez sur DÉMARRER, sélectionnez l'appareil à associer et cliquez sur OK.
La séance peut commencer !

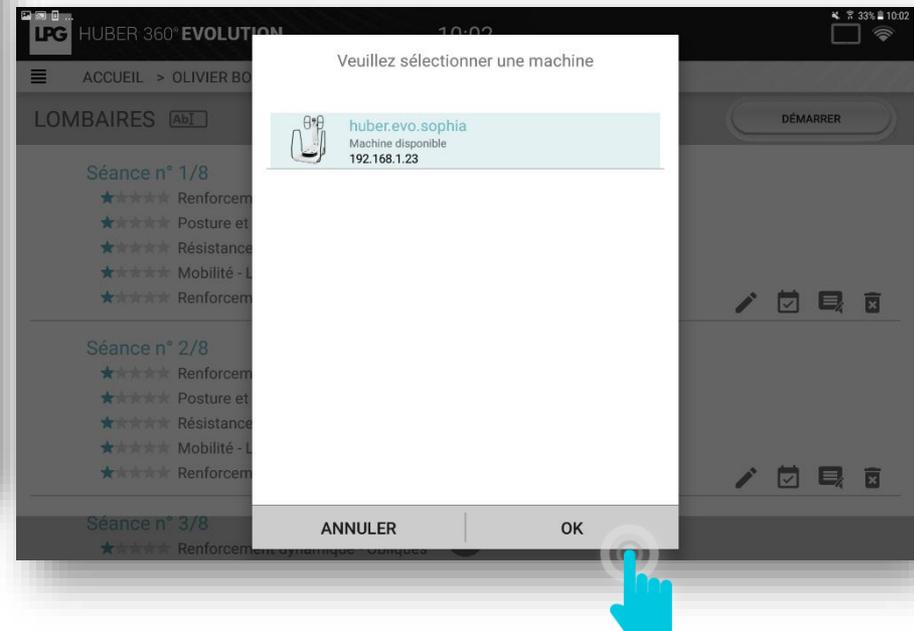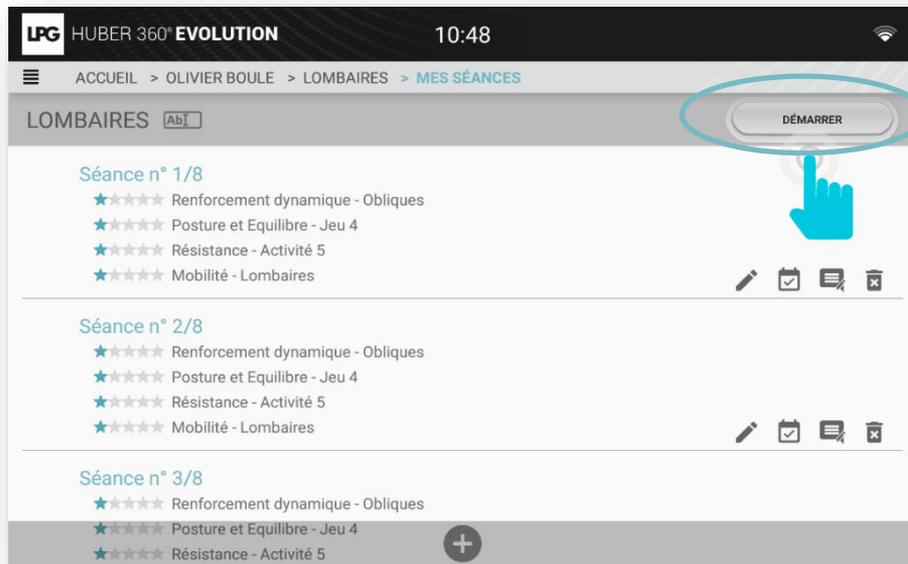



1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.3 VISUALISER LES SÉANCES



: Pour modifier une séance.



: Pour confirmer une séance en cas de perte de connexion avec votre HUBER 360[®] EVOLUTION.



: Pour commenter une séance (paramètres utilisés...)




: Pour supprimer une séance.



: Pour ajouter une séance.



: Pour modifier le nom du programme de traitement.

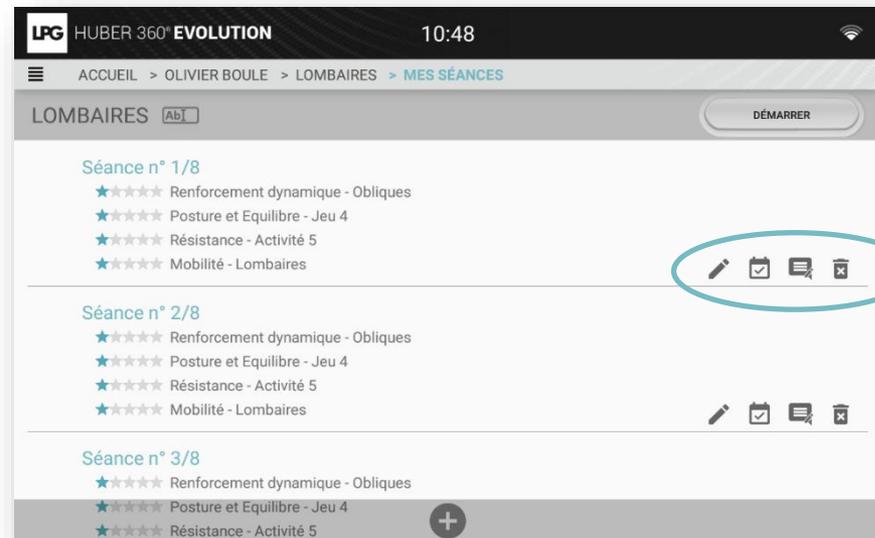



1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.4 MODIFIER LES SÉANCES

Vous pouvez choisir de modifier les exercices prédéfinis, de les supprimer ou d'en ajouter de nouveaux. Cliquez ensuite sur MODIFIER pour que votre demande soit prise en compte.



: Pour modifier l'ordre des exercices.



: Pour supprimer un exercice.



: Pour modifier le niveau.



: Pour ajouter vos exercices personnalisés.

ATTENTION !

La modification s'applique à toutes les séances du programme.

The screenshot shows the app interface for 'MES SÉANCES' (My Sessions). At the top, there's a navigation bar with 'ACCUEIL > OLIVIER BOULE > LOMBAIRES > MES SÉANCES'. Below this is a list of exercises with their durations and a star rating system. A 3D model of a male bodybuilder is shown from the front and back, with several white boxes overlaid on the body to indicate where exercises can be assigned. At the bottom, there is a 'MODIFIER' button with a hand icon pointing to it.

Exercice	Niveau	Durée
Renforcement dynamique - Obliques	★★★★★	5'00"
Posture et Equilibre - Jeu 4	★★★★★	5'48"
Résistance - Activité 5	★★★★★	6'15"
Mobilité - Lomaires	★★★★★	4'00"



1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.5 VISUALISER LES PROGRAMMES


MES SÉANCES

Cette rubrique vous permet de visualiser les séances HUBER[®] réalisées (exercices effectués, date). Vous pouvez ainsi suivre précisément le programme de soins de votre patient(e).

PROGRESSION

Cette rubrique vous permet de visualiser la progression de votre patient(e).

Liste des exercices

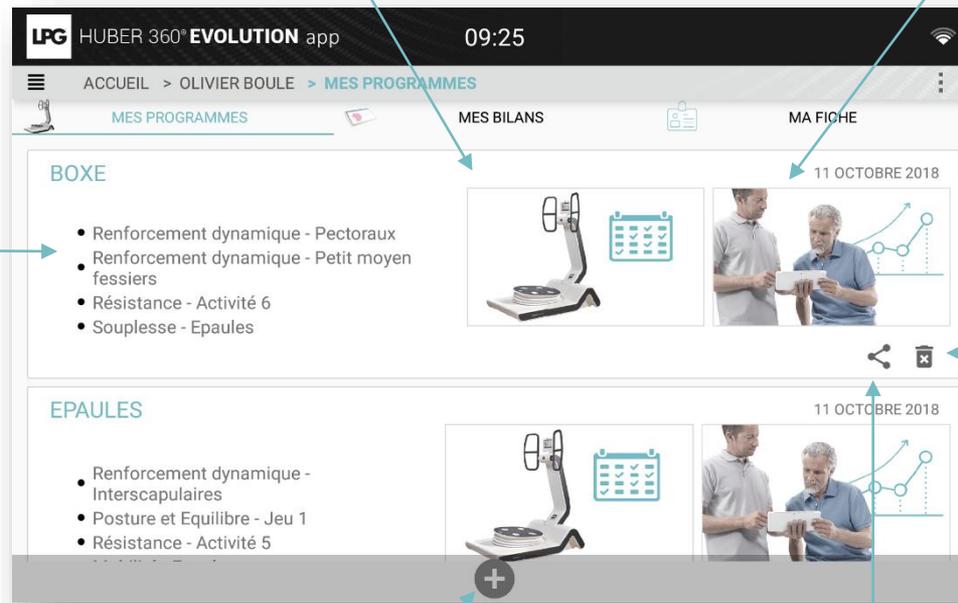

Suppression du programme de votre patient(e)

Création d'un nouveau programme de soins

Envoi du programme par email à votre patient(e) ou sauvegarde sur votre tablette





1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.6 VISUALISER LA PROGRESSION



Après avoir cliqué sur la vignette correspondante, vous pouvez visualiser la progression de votre patient(e) séance après séance.

Lors de l'envoi par email ou de la sauvegarde sur votre tablette, vous pouvez choisir de joindre cette information dans le rapport PDF.

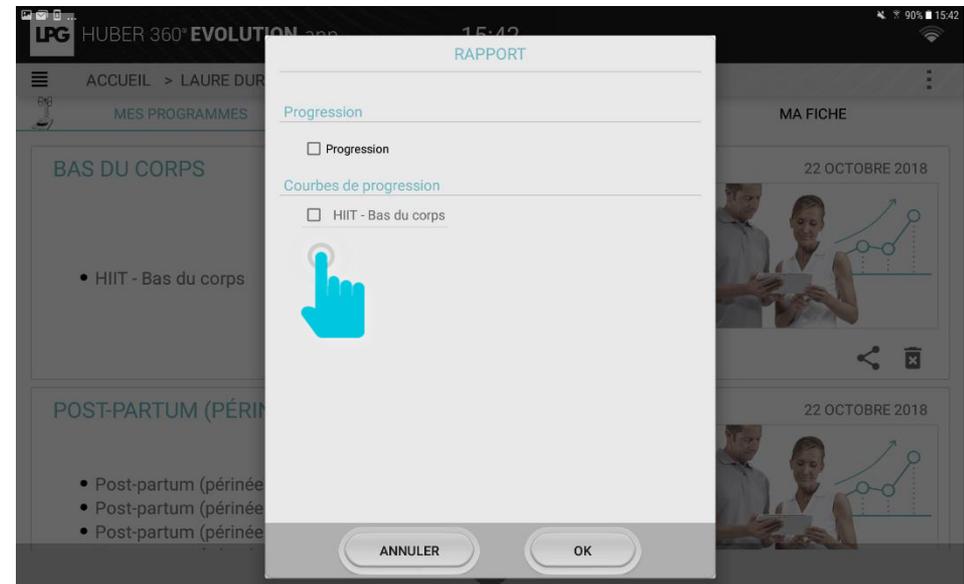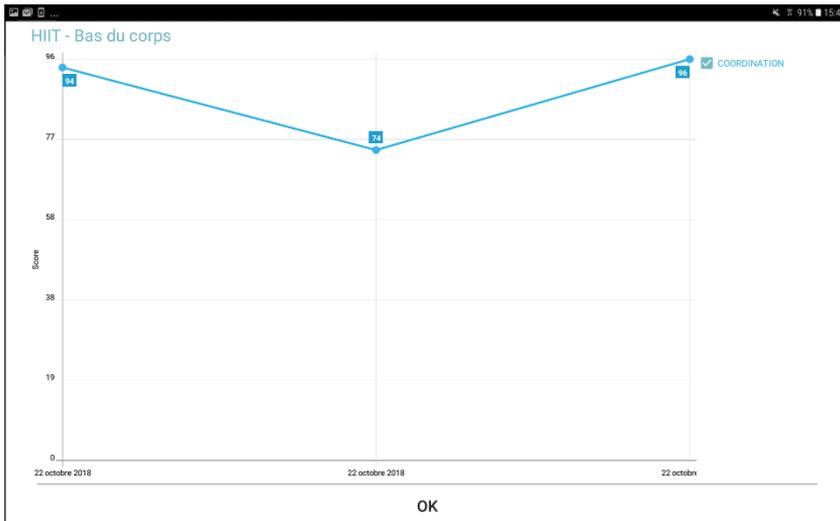



HUBER 360[®] EVOLUTION APP





1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.7 SÉANCES LIBRES



Pour accéder aux séances libres de vos patients (séances réalisées en dehors d'un programme de soins), cliquez sur  puis sur mes « **Mes séances libres** ».

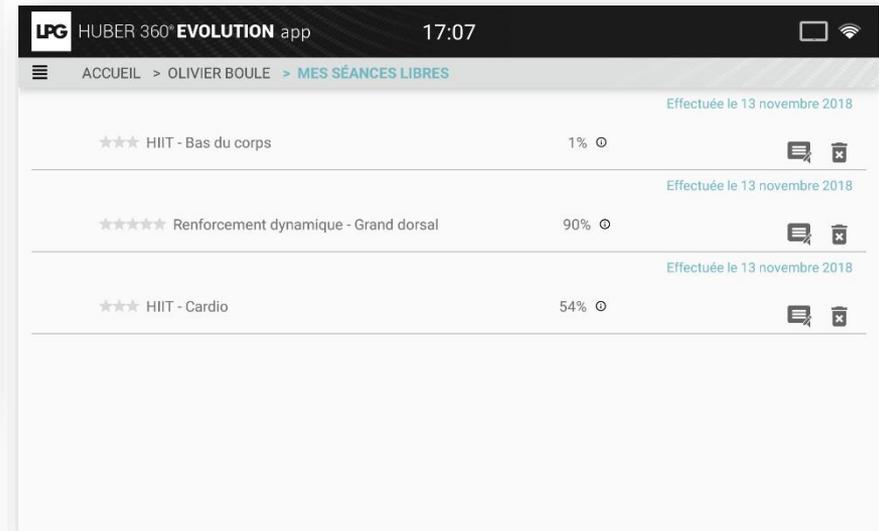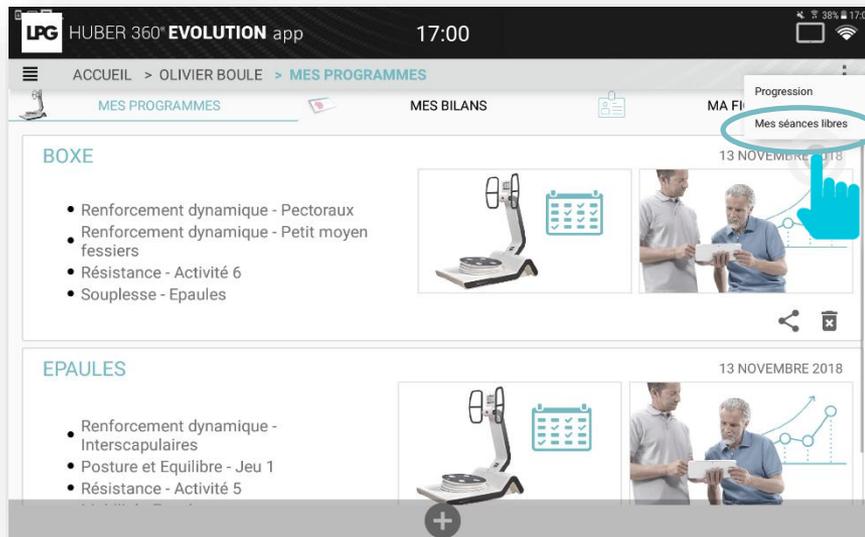




1.d PROGRAMMES DE SOINS

1.d.8 SÉANCES ORPHELINES

Pour affecter une séance orpheline* à un de vos patients, allez dans les paramètres de l'application puis cliquez sur **SÉANCES ORPHELINES**.

Cliquez ensuite sur le picto suivant  et sélectionnez le patient concerné.

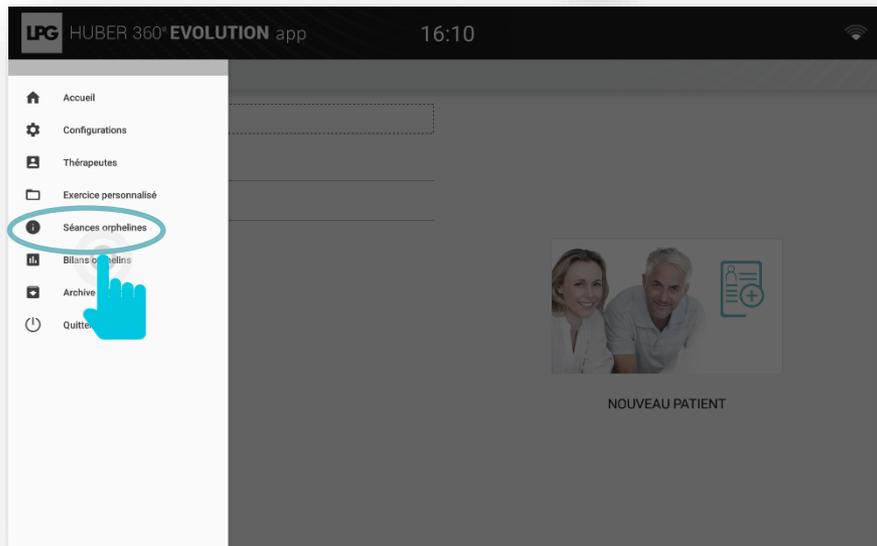

*Séance réalisée directement sur l'appareil, sans connectivité tablette.



1.e BILANS

1.e.1 RÉALISER UN BILAN

Cliquez sur la rubrique **MES BILANS**.

Vous avez le choix de réaliser un bilan santé ou un bilan fitness.

Cliquez sur le picto concerné en bas de l'écran.






1.e BILANS

1.e.1 RÉALISER UN BILAN MÉDICAL

Cliquez sur  pour l'évaluation médicale

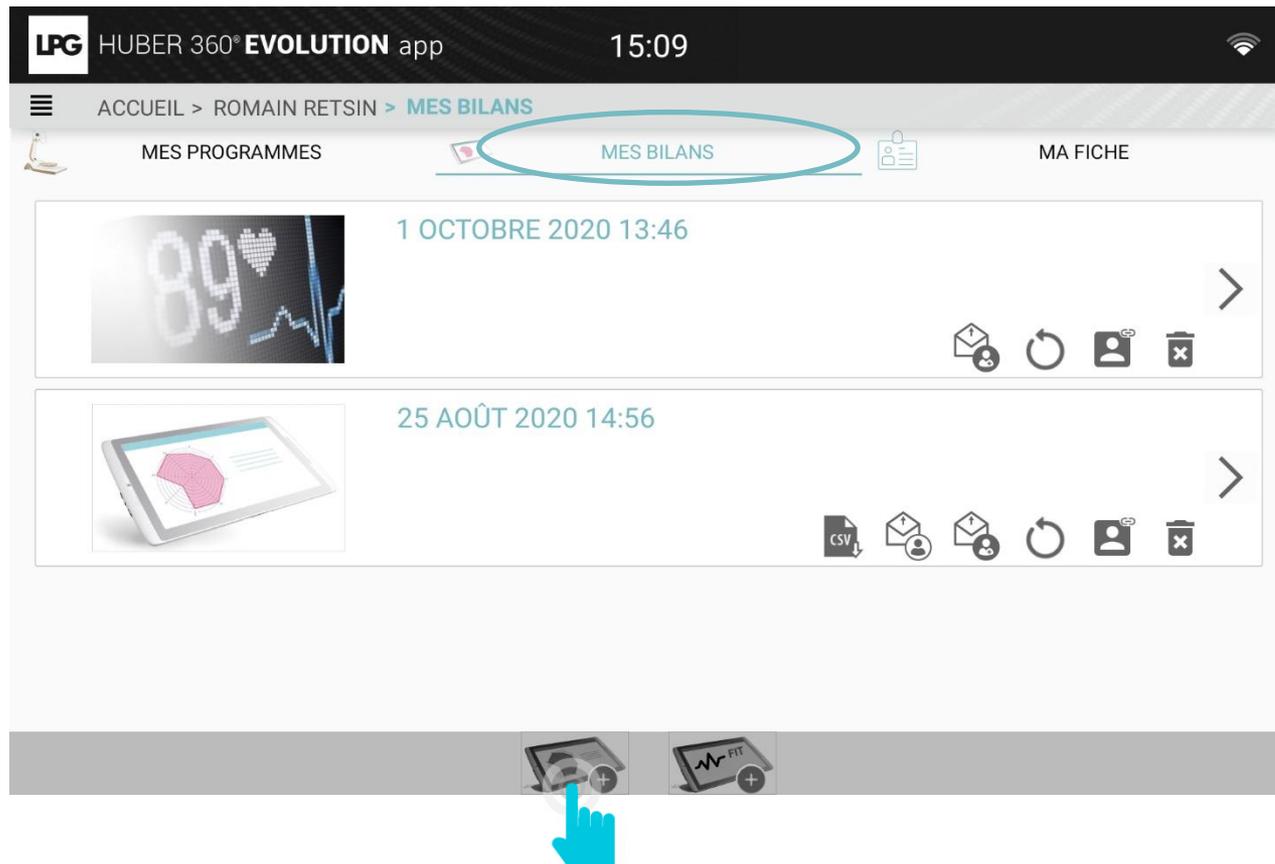

LPG HUBER 360[®] EVOLUTION app 15:09

ACCUEIL > ROMAIN RETSIN > MES BILANS

MES PROGRAMMES MES BILANS MA FICHE

1 OCTOBRE 2020 13:46

25 AOÛT 2020 14:56

CSV




1.e BILANS

1.e.1 RÉALISER UN BILAN MÉDICAL

Sélectionnez l'appareil à associer et cliquez sur OK. L'évaluation peut commencer !

Vous pouvez choisir de ne pas faire tous les tests.

Le test de résistance est nécessaire pour effectuer le test de coordination. Vous devez respecter cet ordre.

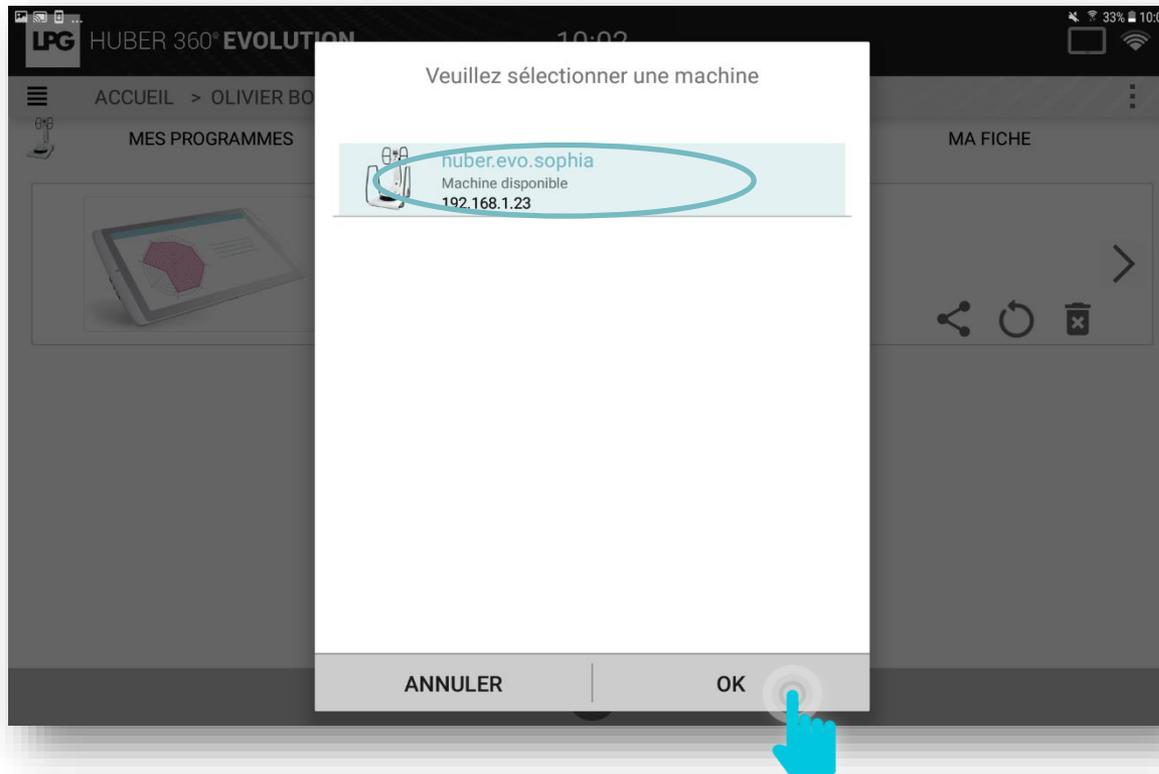



1.e BILANS

1.e.1 RÉALISER UN BILAN MÉDICAL

Test de stabilité

Il y a 2 étapes.

- Étape 1 : les yeux ouverts (50 s)
Au cours de cette étape, une mesure du poids est effectuée.
Désélectionnez le bouton REPOSITIONNEMENT BLOC PRÉSENCE si vous le retirez pendant l'évaluation.
Au cours de cette étape, une mesure du rythme cardiaque est effectuée.
- Étape 2 : les yeux fermés (50 s)

Pour chaque étape, lancez le test en utilisant le bouton PLAY de la tablette.

Test unipodal

Il y a 2 étapes.

- Étape 1 : se tenir sur la jambe gauche (arrêt automatique au bout de 30 secondes)
- Étape 2 : se tenir sur la jambe droite (arrêt automatique au bout de 30 secondes)

Pour chaque étape, lancez le test en utilisant le bouton PLAY de la tablette.



1.e BILANS

1.e.1 RÉALISER UN BILAN MÉDICAL

Test de marche

Il y a une seule étape : Prenez la position indiquée et marchez à un rythme régulier.
La fréquence attendue est d'environ 96 pas en 50 secondes.

Test de limites de stabilité

Le test de limites de stabilité comprend 8 étapes : pour chacun des 8 angles (0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270°; 315°), le patient doit pousser le curseur le plus loin possible dans la direction indiquée.

Demandez au patient de se placer lui-même au centre avant de commencer.

Pour chaque étape, lancez le test en utilisant le bouton PLAY de la tablette.

Test de restriction de mobilité

Le test de restriction de mobilité se compose de 8 étapes.

- La plateforme s'incline selon 8 angles spécifiques (0° ; 45° ; 90° ; 135° ; 180° ; 225° ; 270° ; 315°).
- Le patient commence à ressentir de la douleur, si douleur il y a.
- Arrêtez la plateforme en appuyant sur le bouton STOP chaque fois que le patient ressent une douleur.
- S'il n'y a pas de douleur à une inclinaison de 0 à 10°, appuyez sur le bouton STOP pour lancer la nouvelle étape



1.e BILANS

1.e.1 RÉALISER UN BILAN MÉDICAL

Test de force max

Le test de force max est composé de deux étapes.

- La première étape est un test en poussée
- La deuxième étape est un test en tirée

Ces valeurs de test sont utilisées pour le test de coordination.
Ces deux tests doivent être effectués dans cet ordre.

Test de coordination

Le test de coordination est composé d'une seule étape.

Elle consiste à valider chaque niveau en restant 3 secondes simultanément avec les cibles GAUCHE et DROITE.

Le test comprend 30 niveaux ayant une difficulté croissante.

Le temps nécessaire pour atteindre le dernier niveau est enregistré.

Le test s'arrête si le niveau en cours n'est pas atteint en 30 secondes.



1.e BILANS

1.e.2 RÉALISER UN BILAN FITNESS

Cliquez sur  pour le bilan Fitness

LPG HUBER 360[®] EVOLUTION app 15:09

ACCUEIL > ROMAIN RETSIN > MES BILANS

MES PROGRAMMES MES BILANS MA FICHE

1 OCTOBRE 2020 13:46

89

25 AOÛT 2020 14:56

CSV




1.e BILANS

1.e.2 RÉALISER UN BILAN FITNESS

Sélectionnez l'appareil à associer et cliquez sur OK. L'évaluation peut commencer !

Vous pouvez choisir de ne pas faire tous les tests.

Le test de force est nécessaire pour effectuer le test de coordination. Vous devez respecter cet ordre.

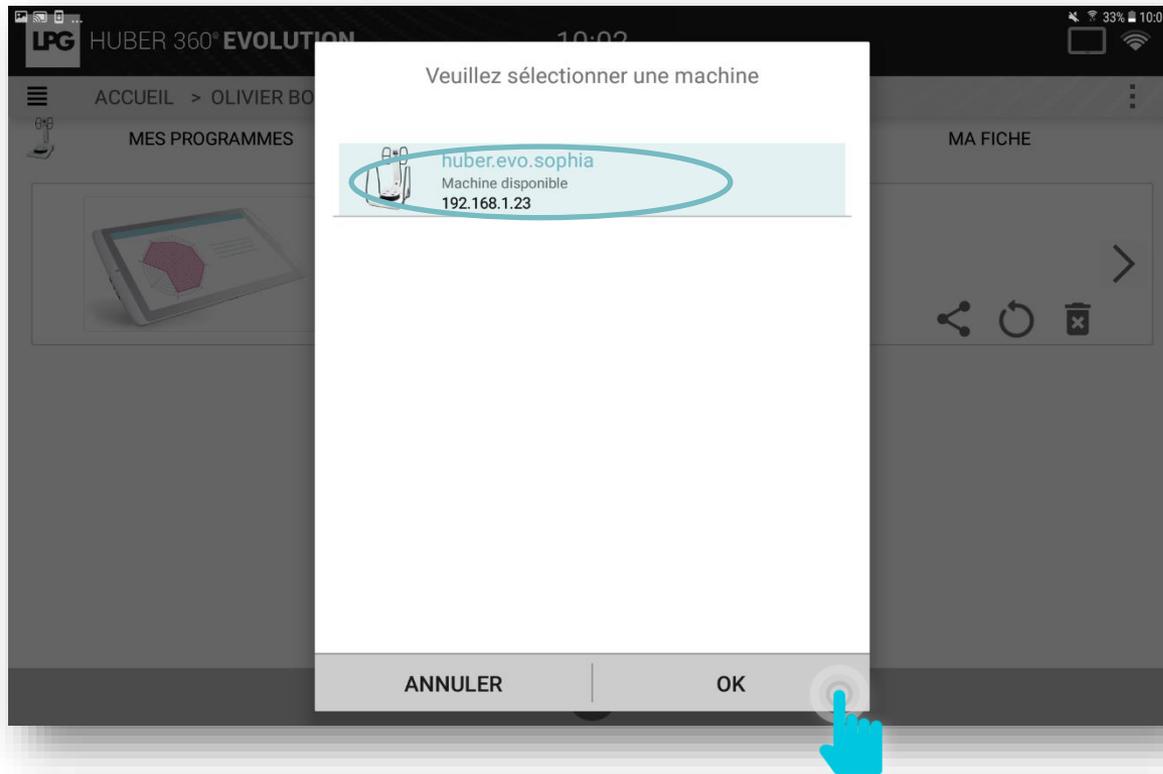



1.e BILANS

1.e.3 VISUALISER L'ÉVALUATION

Cliquez sur la flèche pour afficher les résultats de votre patient pour chaque test.

ACCUEIL > ROMAIN RETSIN > MES BILANS

MES PROGRAMMES MES BILANS MA FICHE

25 AOÛT 2020 14:56

Pour créer un fichier Excel

Pour créer et envoyer un rapport PDF simplifié au patient

Pour créer et envoyer un rapport complet au format PDF pour les prescripteurs

Pour revoir tests

Pour supprimer l'évaluation de votre patient

Pour lier cette évaluation à un patient existant ou à un autre




HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.e BILANS

1.e.3 VISUALISER UN BILAN MÉDICAL

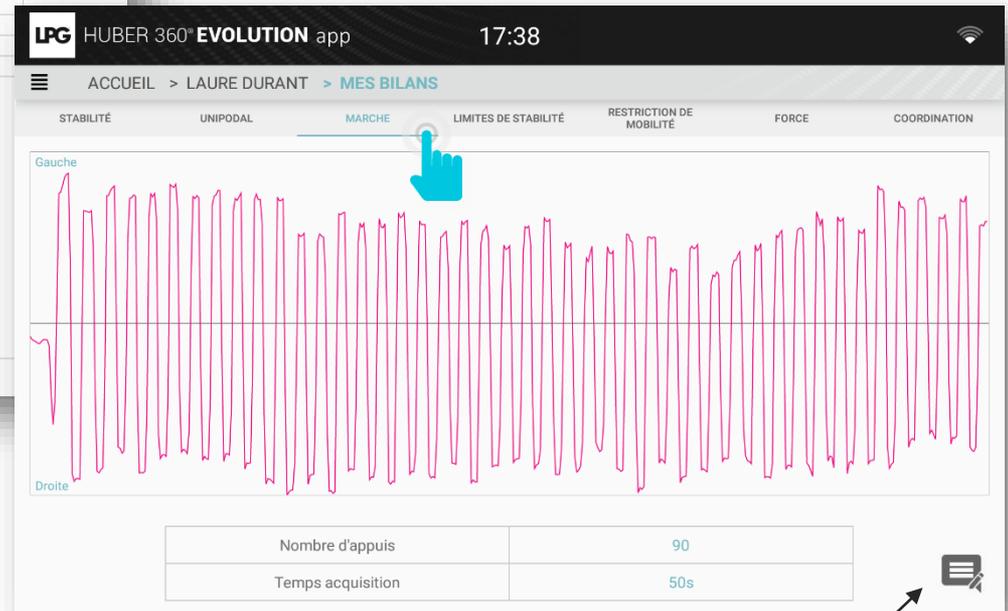




1.e BILANS

1.e.4 ENVOYER UN BILAN

Cliquez sur le picto ci-dessous.

Vous avez la possibilité d'ajouter le questionnaire qualité de vie de votre patient(e) dans le rapport PDF.

Cliquez ensuite sur **OK** puis sur **ENVOYER**.

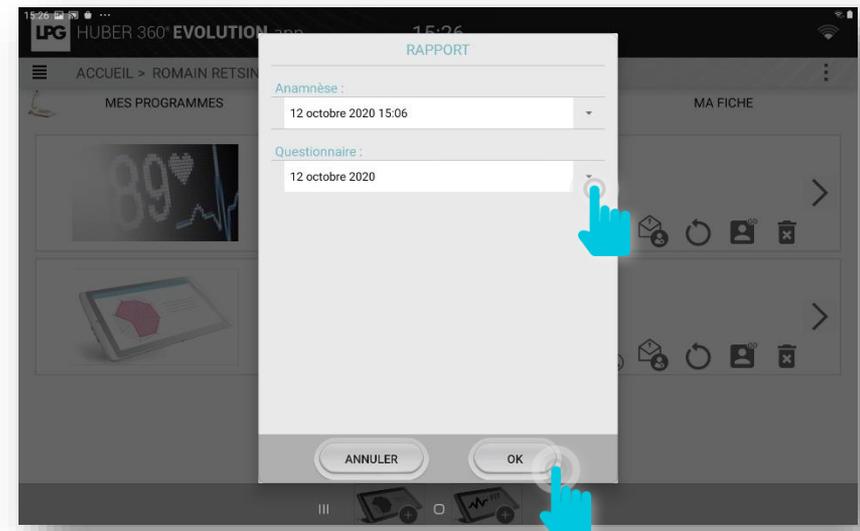



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.e BILANS



1.e.4 ENVOYER UN BILAN

Vous pouvez personnaliser le message destiné à votre patient(e).

Le bilan (document PDF) est automatiquement attaché à votre email.

Si un thérapeute est affecté à ce patient, ses coordonnées sont automatiquement ajoutées dans le rapport.

Cliquez ensuite sur **ENVOYER**.

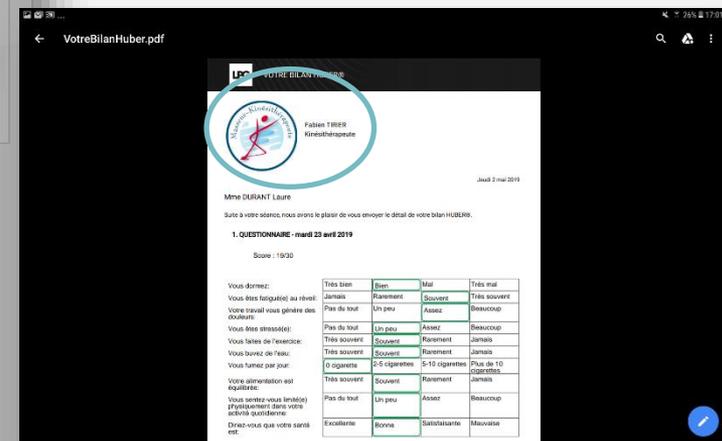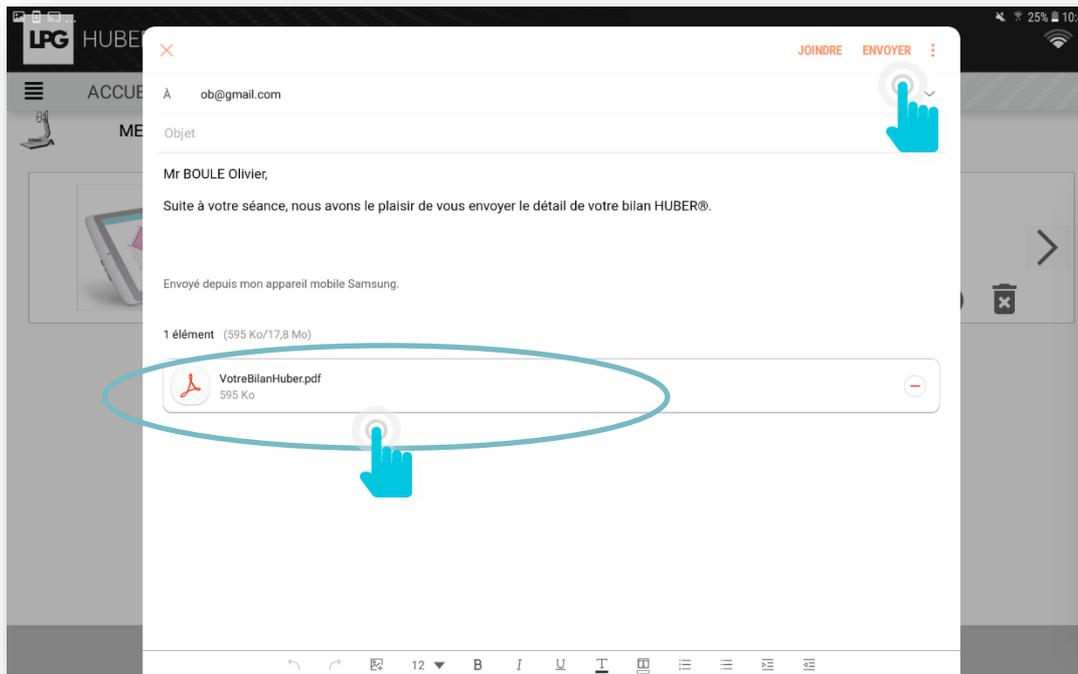



HUBER 360[®] EVOLUTION APP





1.e BILANS

1.e.5 BILANS ORPHELINS

Pour affecter à un patient un bilan réalisé en mode invité*, allez dans les paramètres de l'application puis cliquez sur **BILANS ORPHELINS**.

Cliquez ensuite sur le picto suivant  et sélectionnez le patient concerné.

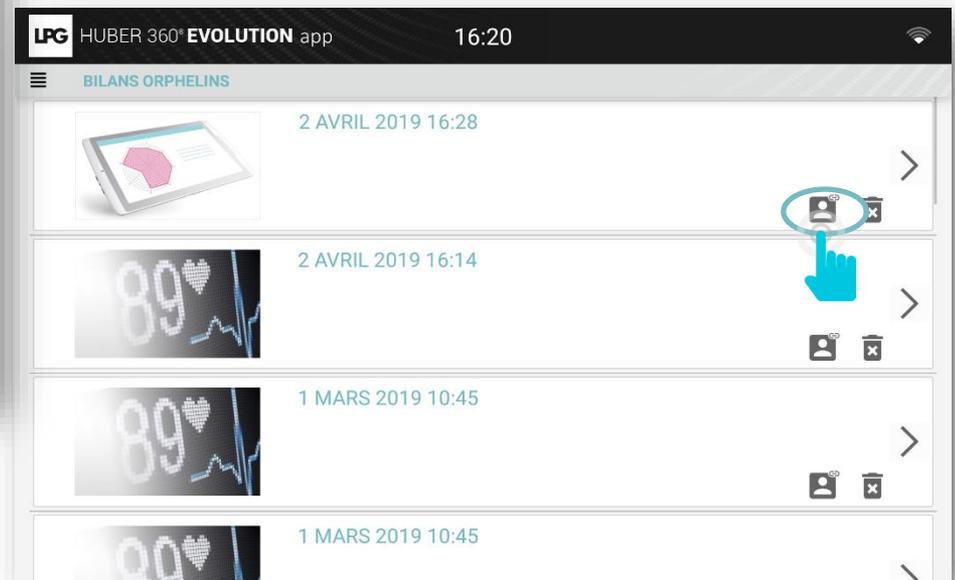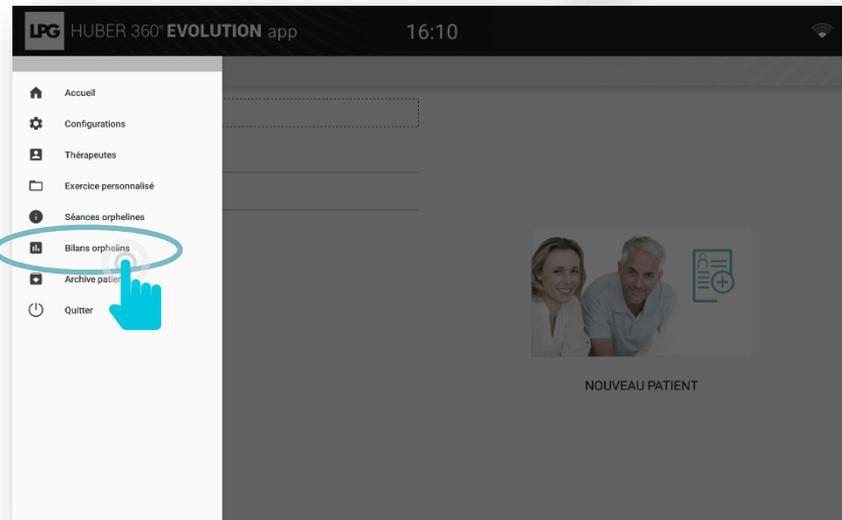

*Bilan réalisé directement sur l'appareil, sans connectivité tablette.



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

Pour créer vos propres exercices, cliquez sur  puis sur **EXERCICE PERSONNALISÉ**.

The screenshot displays the app's main interface. At the top, the status bar shows 'LPG HUBER 360[®] EVOLUTION' and the time '12:19'. Below this, a navigation bar contains the title 'ACCUEIL' and a search icon. A search bar with the placeholder text 'Rechercher patient' is present. Below the search bar, a list of patients is shown: 'Mr BOULE Olivier' and 'Mme DURANT Laure'. A blue hand icon points to the menu icon in the top left corner. A second screenshot is overlaid on the right, showing the app's main screen at '16:10'. This screen features a navigation menu on the left with the following items: 'Accueil', 'Configurations', 'Thérapeutes', 'Exercice personnalisé' (circled in red), 'Séances orphelines', 'Bilans orphelins', 'Archive patients', and 'Quitter'. The main content area of the second screenshot shows a blurred background with a photo of a man and a woman and the text 'NOUVEAU PATIENT'.



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.1 MENU GÉNÉRAL

-  : Pour créer un dossier.
-  : Pour consulter les dossiers.
-  : Pour télécharger les exercices enregistrés sur votre appareil.
-  : Pour modifier le nom des exercices.
-  : Pour supprimer un exercice.
-  : Pour modifier un exercice.
-  : Pour ajouter un exercice.






1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.2 CRÉER UN EXERCICE PERSONNALISÉ

Après avoir cliqué , renseignez un nom d'exercice et associez-le au répertoire préalablement créé. Cliquez sur **SAUVEGARDER**. Vous pouvez commencer à créer votre exercice.

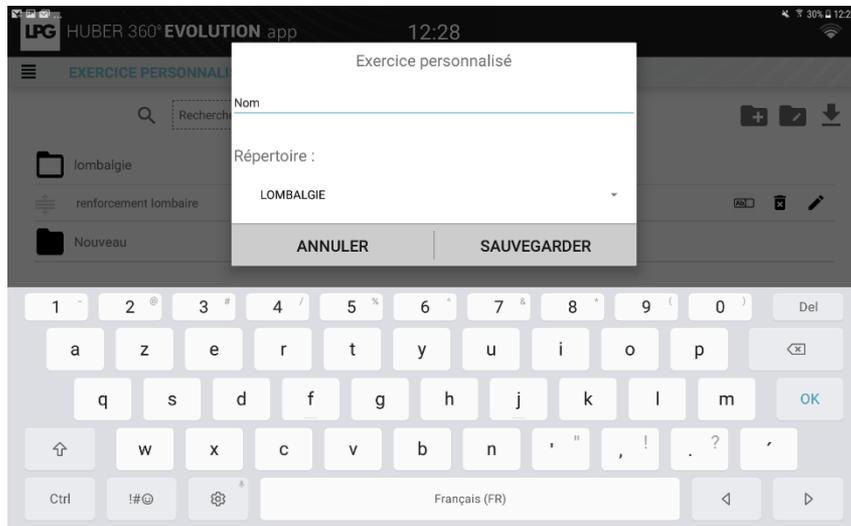



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.2 CRÉER UN EXERCICE PERSONNALISÉ

Cible poignées Cible plateau Trajectoire plateau Bibliothèque avatar

Durée de la séance

Suppression étape

Ajout exercice

Choix : répétition de positions ou enchainement de positions différentes

	-	-10 daN	+
	-	-10 daN	+
%Fmax	-	30 %	+
	-	40 %	+

SAUVEGARDER

Modification de la durée de la séance



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.2 CRÉER UN EXERCICE PERSONNALISÉ

Cible plateau

The screenshot shows the app interface for creating a personalized exercise. The top bar displays the LPG logo, the app name 'HUBER 360[®] EVOLUTION app', and the time '16:14'. Below the top bar, the exercise is titled 'EXERCICE PERSONNALISÉ > RENFORCEMENT LOMBAIRE'. The main interface is divided into three columns. The left column shows a list of steps: 'ETAPE 1', 'ETAPE 2', and 'ETAPE 3', each with a trash icon and a small illustration of a person performing the exercise. The middle column contains settings for each step, including a distance of '250 mm' for Step 1 and '0 mm' for Steps 2 and 3. The right column shows a large circular diagram representing the exercise target area, with four numbered zones (1, 2, 3, 3) and a central pink crosshair. A 'SAUVEGARDER' button is at the bottom left, and '1/8' is at the bottom right.



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.2 CRÉER UN EXERCICE PERSONNALISÉ

Trajectoire plateau

The screenshot shows the app interface for creating a personalized exercise. The top bar displays the LPG logo, the app name "HUBER 360[®] EVOLUTION app", and the time "16:14". Below the top bar, the exercise name "EXERCICE PERSONNALISÉ" and the category "RENFORCEMENT LOMBAIRE" are visible. The main interface is divided into several sections:

- Left Panel:** A list of exercise steps. The first step, "ETAPE 1", is selected and highlighted. It features an icon of a person performing a back exercise. Below the list are icons for a plus sign, a waveform, and a refresh symbol.
- Center Panel:** A grid of control options for the exercise. The selected step "ETAPE 1" is highlighted in blue. The grid includes various icons and numerical values for adjustment:
 - 0°
 - 270°
 - 2°
 - 6°
 - 0°
 - 30
 - 2
- Right Panel:** A large circular grid representing the exercise path. A blue oval is drawn on the grid, indicating the trajectory of the exercise. A small blue dot labeled "A" is positioned at the center of the oval.

At the bottom of the screen, a prominent black button with white text reads "SAUVEGARDER" (Save).



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.2 CRÉER UN EXERCICE PERSONNALISÉ

Positions

The screenshot displays the 'EXERCICE PERSONNALISÉ' (Personalized Exercise) screen in the Huber 360 Evolution app. The interface is dark-themed with white and teal accents. At the top, the app name 'HUBER 360[®] EVOLUTION app' and the time '16:15' are visible. The main title is 'EXERCICE PERSONNALISÉ > RENFORCEMENT LOMBAIRE' (Personalized Exercise > Lumbar Strengthening). On the left, a vertical list shows three stages: 'ETAPE 1', 'ETAPE 2', and 'ETAPE 3', each with a small illustration of the exercise and a trash icon. Below this is a '+' sign and a 'SAUVEGARDER' (Save) button. The central area features a large 3D illustration of a person from behind, holding a black frame with teal arrows pointing outwards, labeled 'Instruction15'. To the right, a grid of 20 smaller 3D illustrations shows various angles and movements of the exercise, with teal arrows indicating the direction of movement.




1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.3 RÉCUPÉRER UN EXERCICE MODIFIÉ

Pour récupérer un exercice modifié sur votre appareil, cliquez sur



Vous devez d'abord enregistrer le protocole via le bouton « disquette » sur l'écran de votre appareil :

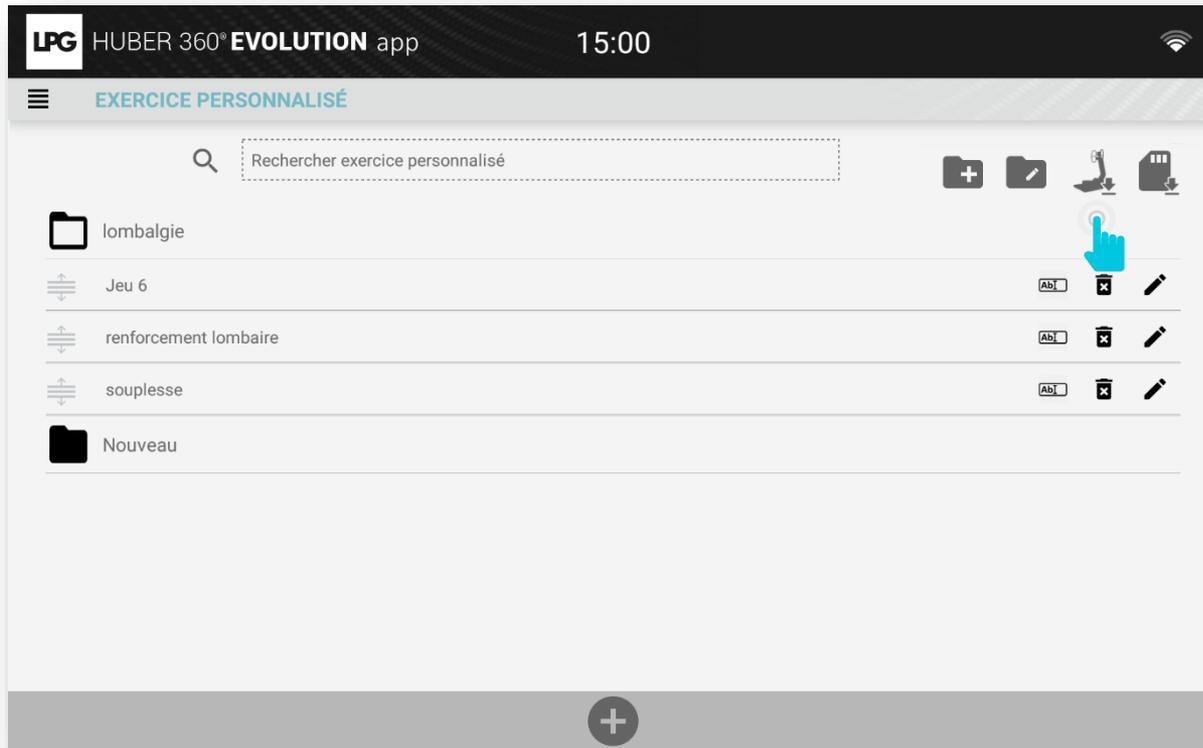



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.3 RÉCUPÉRER UN EXERCICE MODIFIÉ

Sélectionnez un appareil et choisissez les exercices que vous souhaitez récupérer.

The image displays three sequential screenshots of the Huber 360 Evolution app interface. The first screenshot shows a dialog box titled "Veuillez sélectionner une machine" (Please select a machine) with a list of available machines. The second screenshot shows the same dialog box with the machine "huber.evo.sophia" selected. The third screenshot shows a dialog box titled "Téléchargement exercices" (Download exercises) with a list of exercises to be downloaded.

Screenshot 1: Selection of machine
Title: Veuillez sélectionner une machine
List item: huber.evo.sophia (Machine disponible, 192.168.1.23)
Buttons: ANNULER, OK


Screenshot 2: Selection of exercises
Title: Téléchargement exercices
List items: Activité 5, Jeu 6
Button: ANNULER



1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.3 RÉCUPÉRER UN EXERCICE MODIFIÉ

Sélectionnez le dossier à associer en utilisant

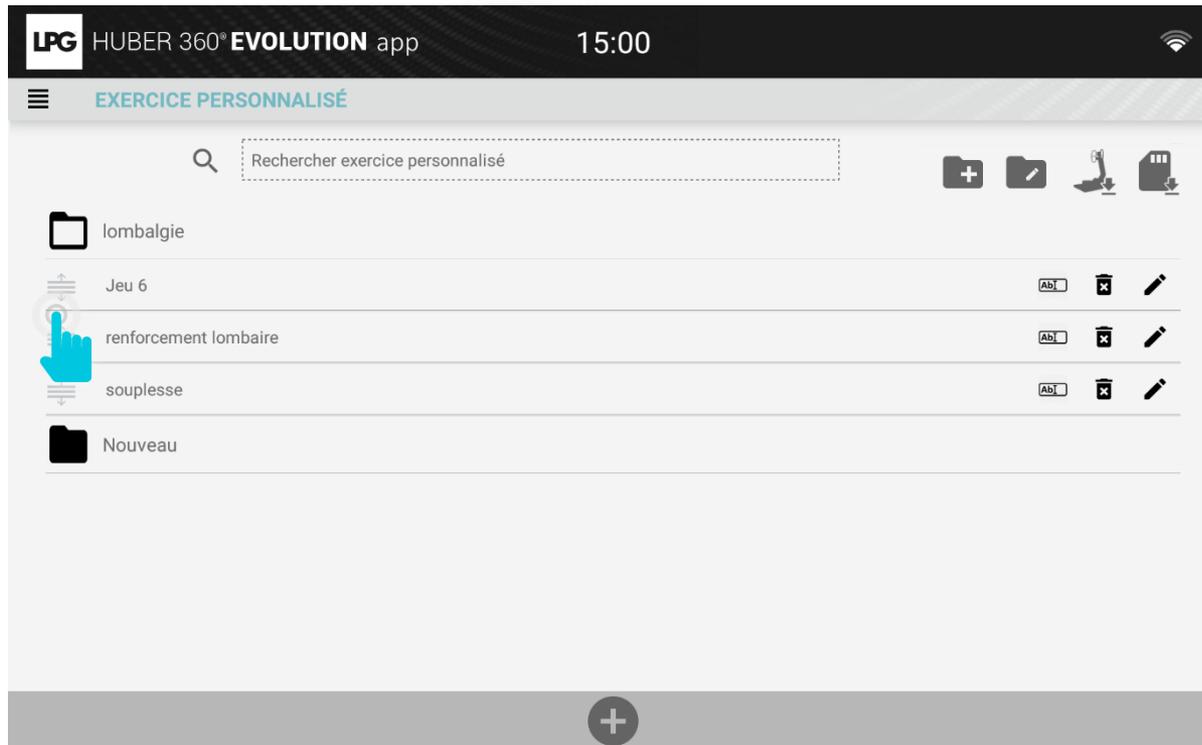




1.f EXERCICES PERSONNALISÉS

1.f.4 EXPORTER UN EXERCICE PERSONNALISÉ

Pour exporter un exercice personnalisé sur votre appareil, cliquez sur

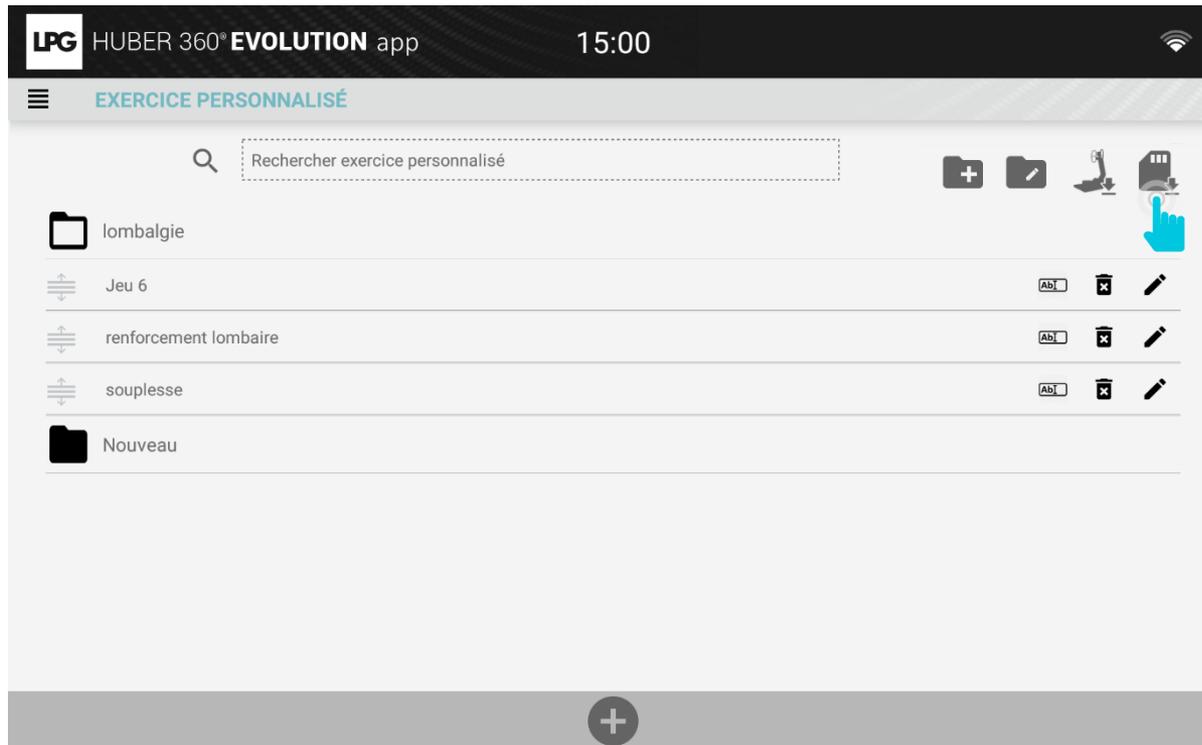



HUBER 360[®] EVOLUTION APP



2. LANCER UN PROGRAMME DE SOINS



2. LANCER UN PROGRAMME DE SOINS

Après avoir connecté votre tablette à votre appareil, votre patient(e) renseigne son identifiant et mot de passe.
L'identifiant et le mot de passe ont été choisis lors de la création de la fiche.

The screenshot shows the app's login interface. At the top, there is a black header with the LPG logo, the text 'HUBER 360[®] EVOLUTION', the time '09:58', and icons for a tablet and Wi-Fi. Below the header is a white bar containing a hamburger menu icon on the left and a timer '00:00' with a refresh icon on the right. The main area is a light gray background with a white login form. The form has two input fields: 'IDENTIFIANT' and 'MOT DE PASSE'. Below these fields is a white button labeled 'OK'.




HUBER 360[®] EVOLUTION APP



2. LANCER UN PROGRAMME DE SOINS

Votre patient(e) clique sur **MES PROGRAMMES**.

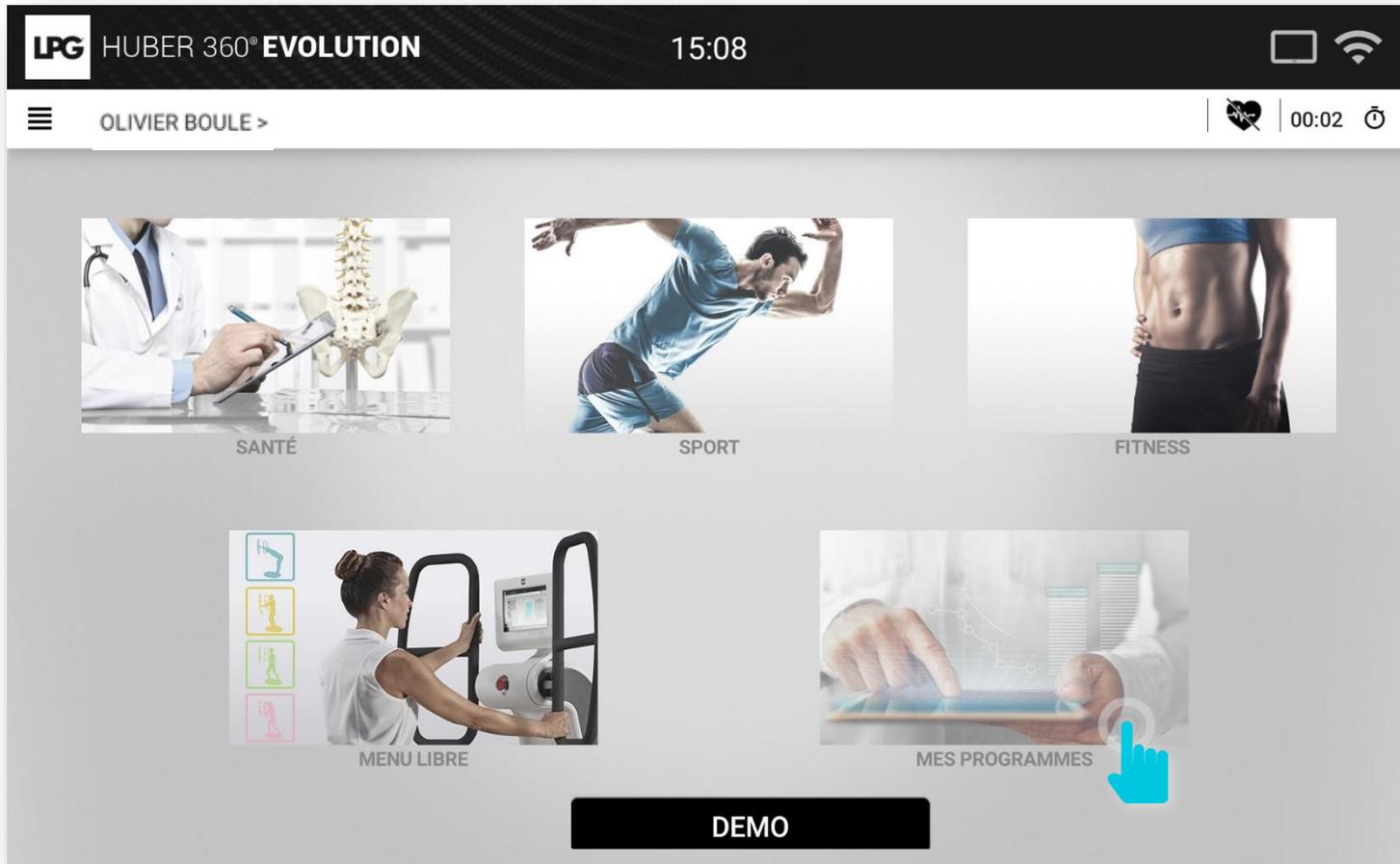



2. LANCER UN PROGRAMME DE SOINS

Cliquez sur le programme de soins souhaité.

En cas de perte de connexion, validez manuellement sur votre tablette



la séance réalisée et cliquez sur



pour mettre à jour votre HUBER 360[®] EVOLUTION.






HUBER 360[®] EVOLUTION APP



2. LANCER UN PROGRAMME DE SOINS

La séance peut commencer !

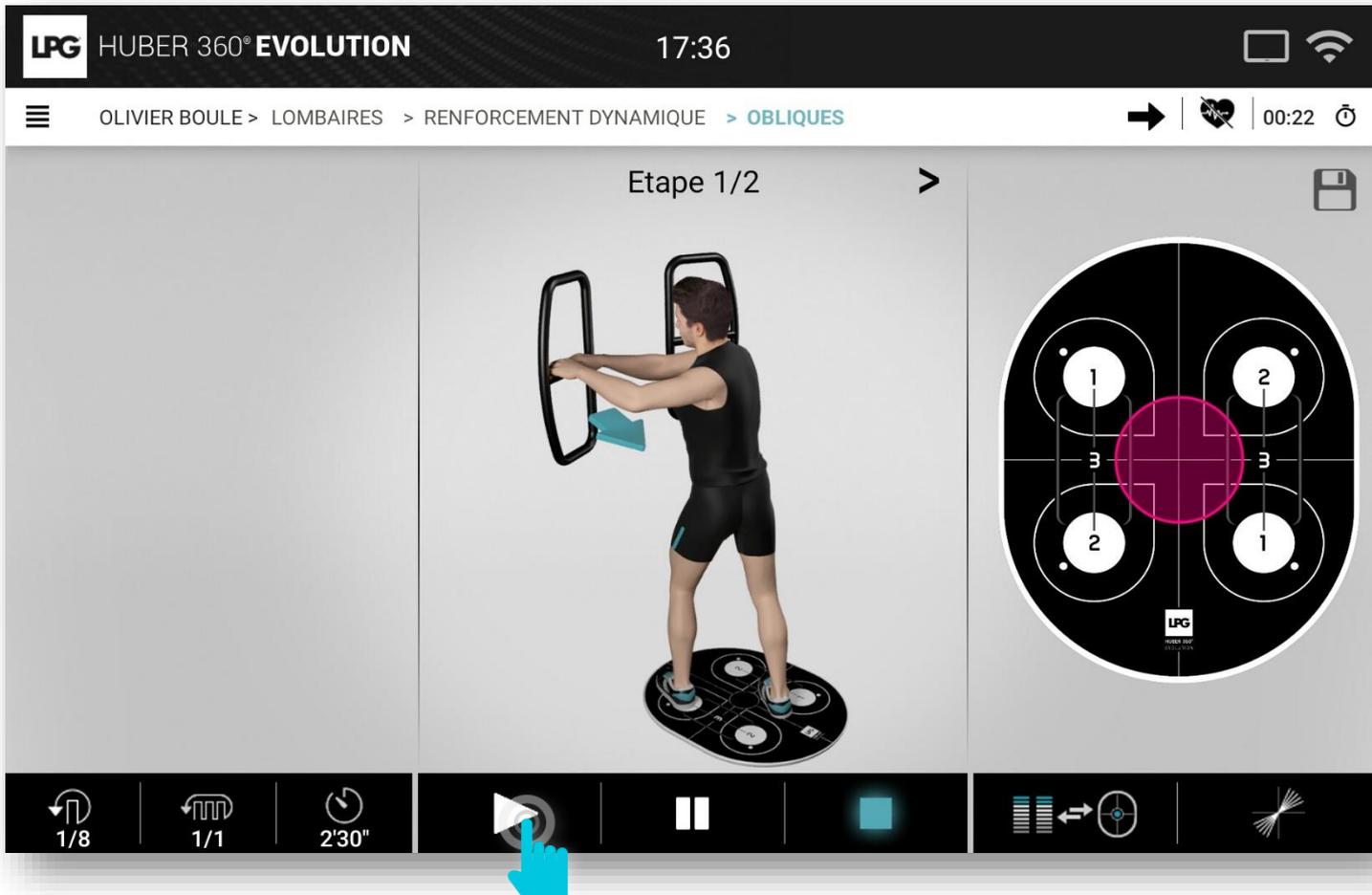




3. IMPORTATION DES DONNÉES (de l'ancienne tablette à la nouvelle)




3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.a SAUVEGARDE DES DONNÉES

1. Dans l'ancienne application HUBER 360[®], sélectionnez le menu **SETTINGS** ou **PARAMÈTRES**.

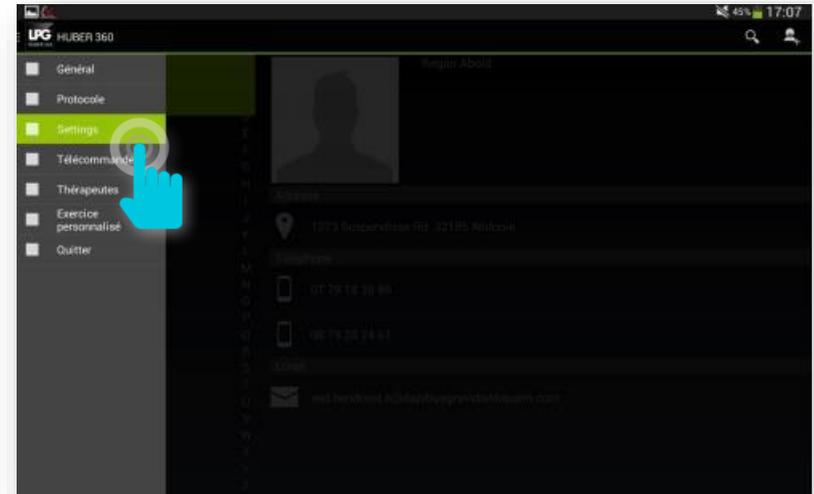

2. Cliquez sur l'onglet **BASE DE DONNÉES** puis **EXPORT**.

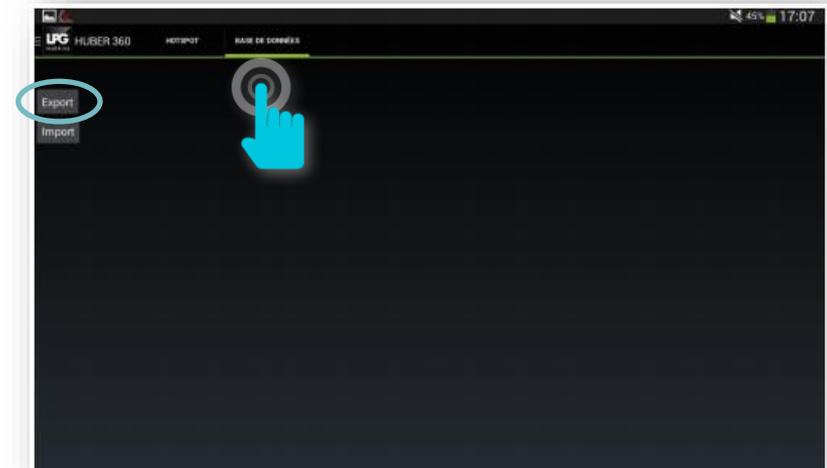




3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.a SAUVEGARDE DES DONNÉES

3. Cliquer sur le bouton STOCKAGE DE L'APPAREIL.
4. Sélectionnez **Huber360.zip**.
5. Cliquez sur l'icône COPIER.

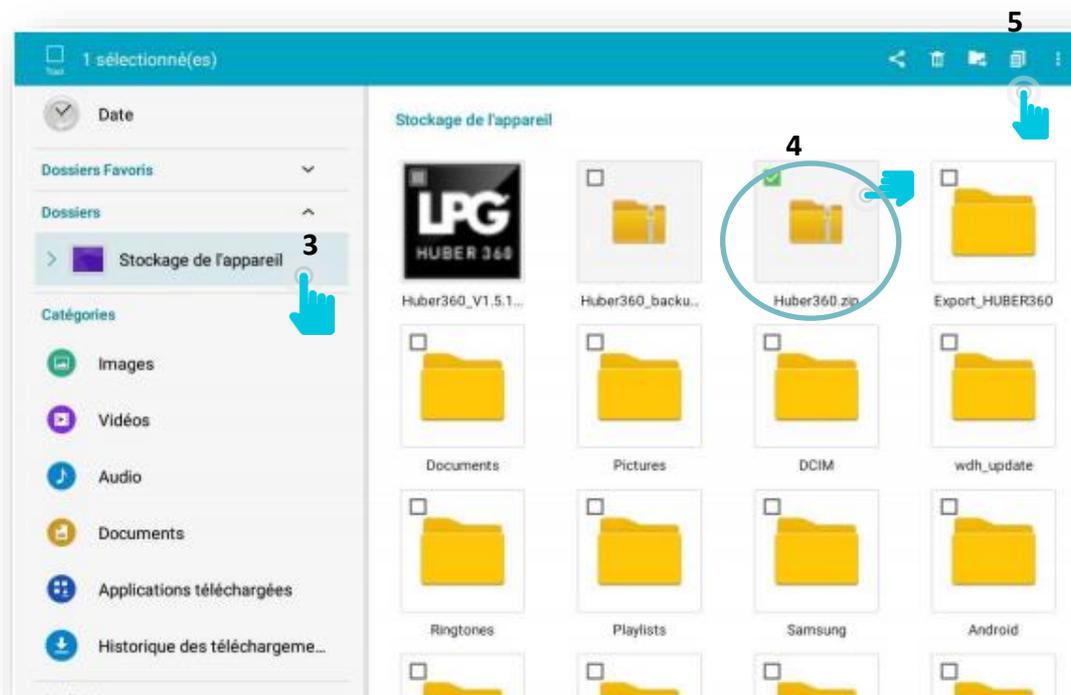




3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.a SAUVEGARDE DES DONNÉES

6. Sélectionnez **CARTE SD**.

7. Cliquez sur **COLLER ICI**.

Vous pouvez aussi copier ce dossier sur tout autre support (PC, Disque dur externe, ...) .

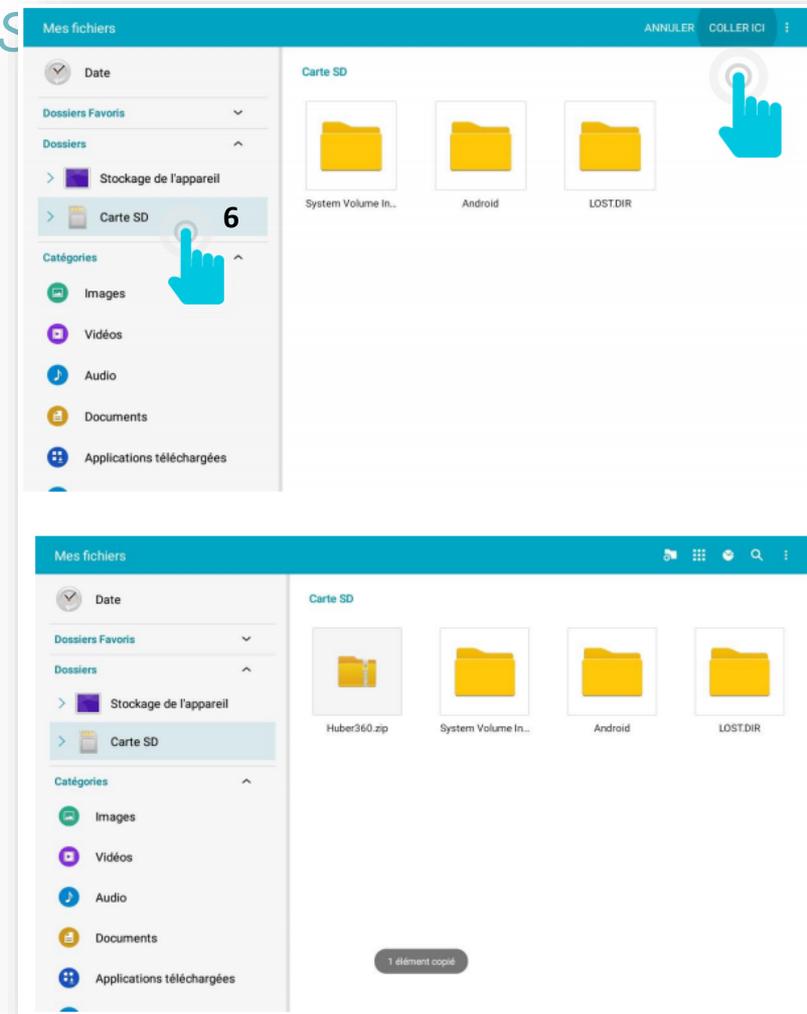

7




3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.b RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Avant l'import, veuillez au préalable **sauvegarder votre base de données**.

Pour importer les données de votre ancienne tablette, veuillez insérer la **carte micro SD utilisée dans l'emplacement adapté sur la nouvelle tablette**.

Ensuite, veuillez-vous rendre sur l'application **HUBER 360 App**.

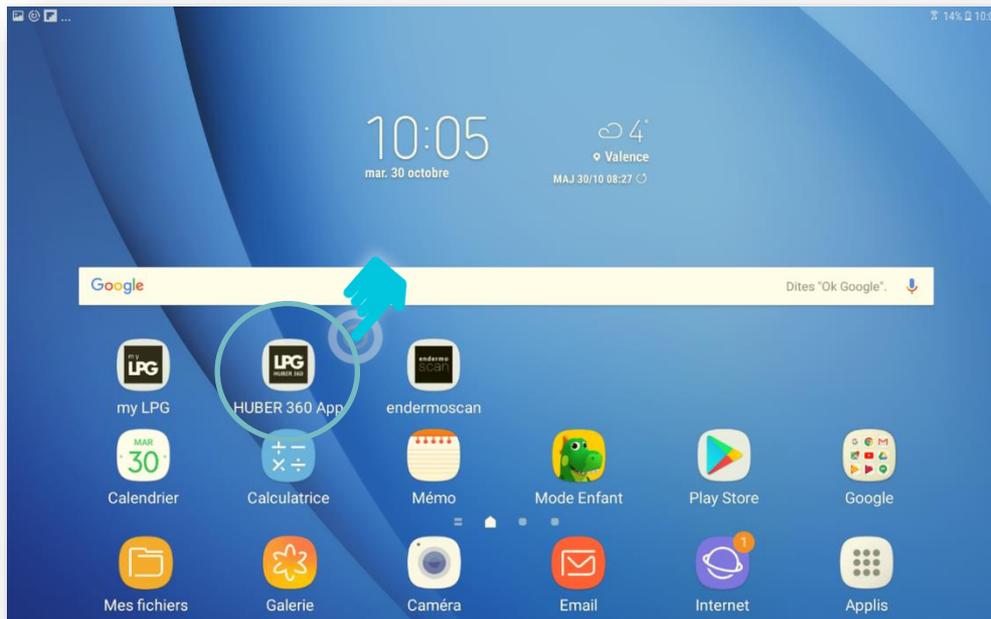

Bien vérifier que les applications « HUBER 360 App » soient à jour afin que cela fonctionne.




3. IMPORTATION DES DONNÉES

5.b Récupération des données

Après avoir démarré l'application HUBER 360[®] APP, cliquez sur l'icône  en haut à gauche.

Cliquez ensuite sur **CONFIGURATIONS**.

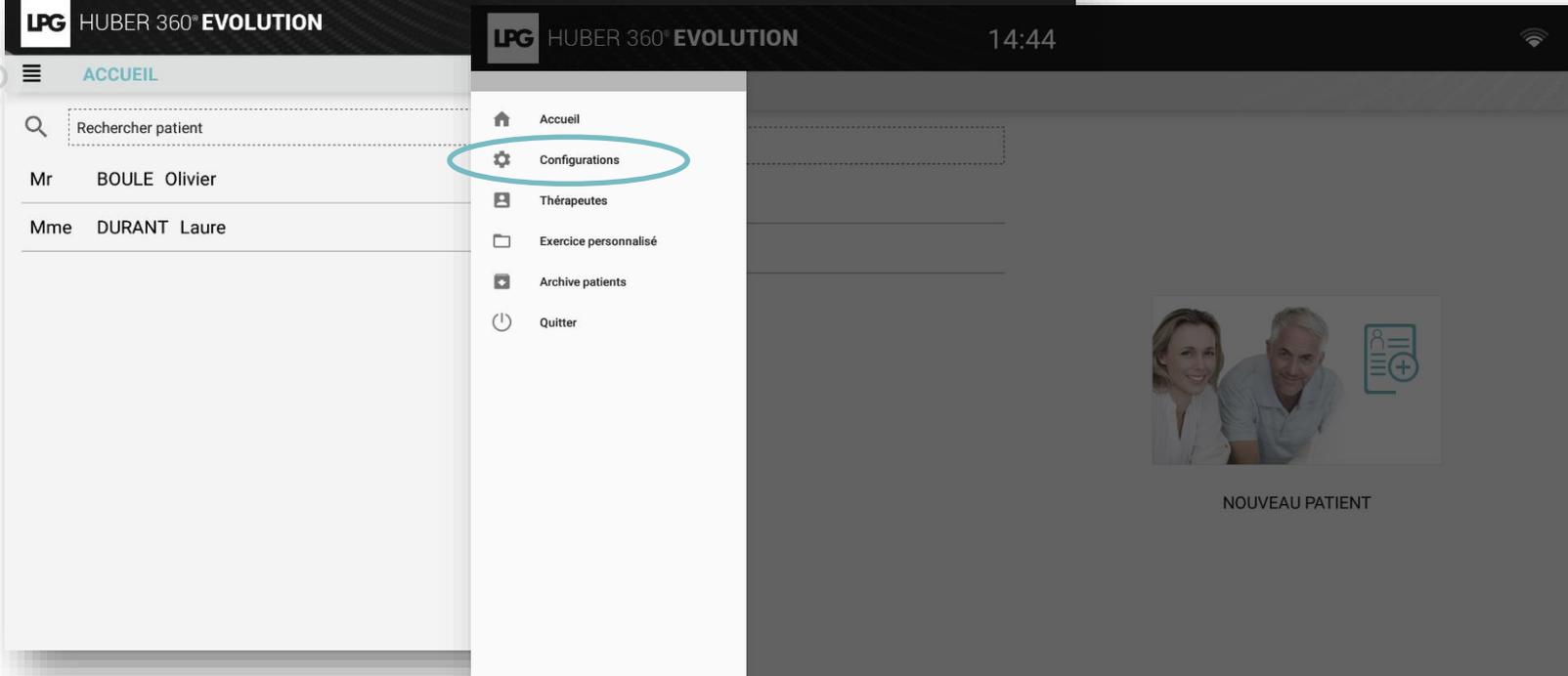

The screenshot displays the application interface. At the top, the header shows 'LPG HUBER 360[®] EVOLUTION' and the time '14:44'. A blue hand icon points to the menu icon (three horizontal lines) in the top left corner. The menu is open, showing a list of options: 'Accueil', 'Configurations', 'Thérapeutes', 'Exercice personnalisé', 'Archive patients', and 'Quitter'. The 'Configurations' option is circled in red. The main content area shows a search bar labeled 'Rechercher patient' and a list of patients: 'Mr BOULE Olivier' and 'Mme DURANT Laure'. At the bottom right, there is a section titled 'NOUVEAU PATIENT' with a photo of a man and a woman and a plus sign icon.



3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.b RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Cliquez sur **BASE DE DONNÉES**.






3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.b RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Sélectionnez le conteneur de votre sauvegarde de données (carte SD, clé USB ou autre)

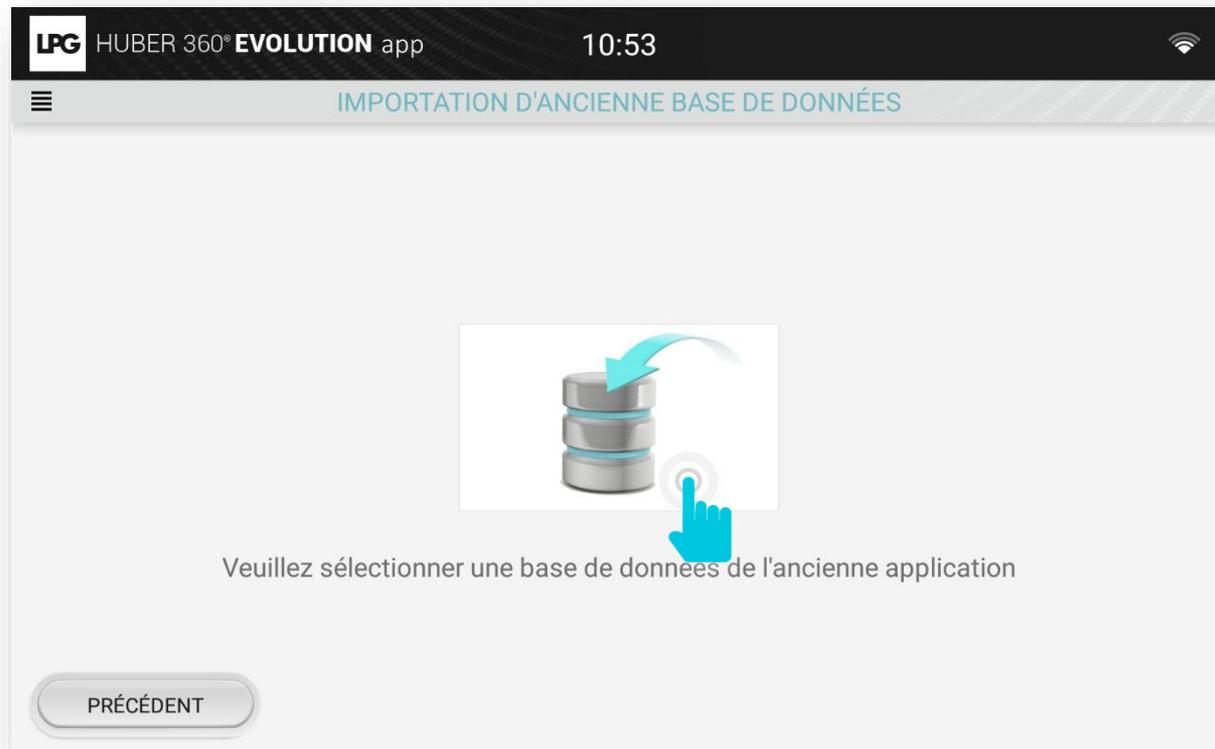




3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.b RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Sélectionnez le fichier qui correspond à votre sauvegarde « **Huber360.....zip** » en faisant un appui long. Cliquez sur **OUVRIR**.

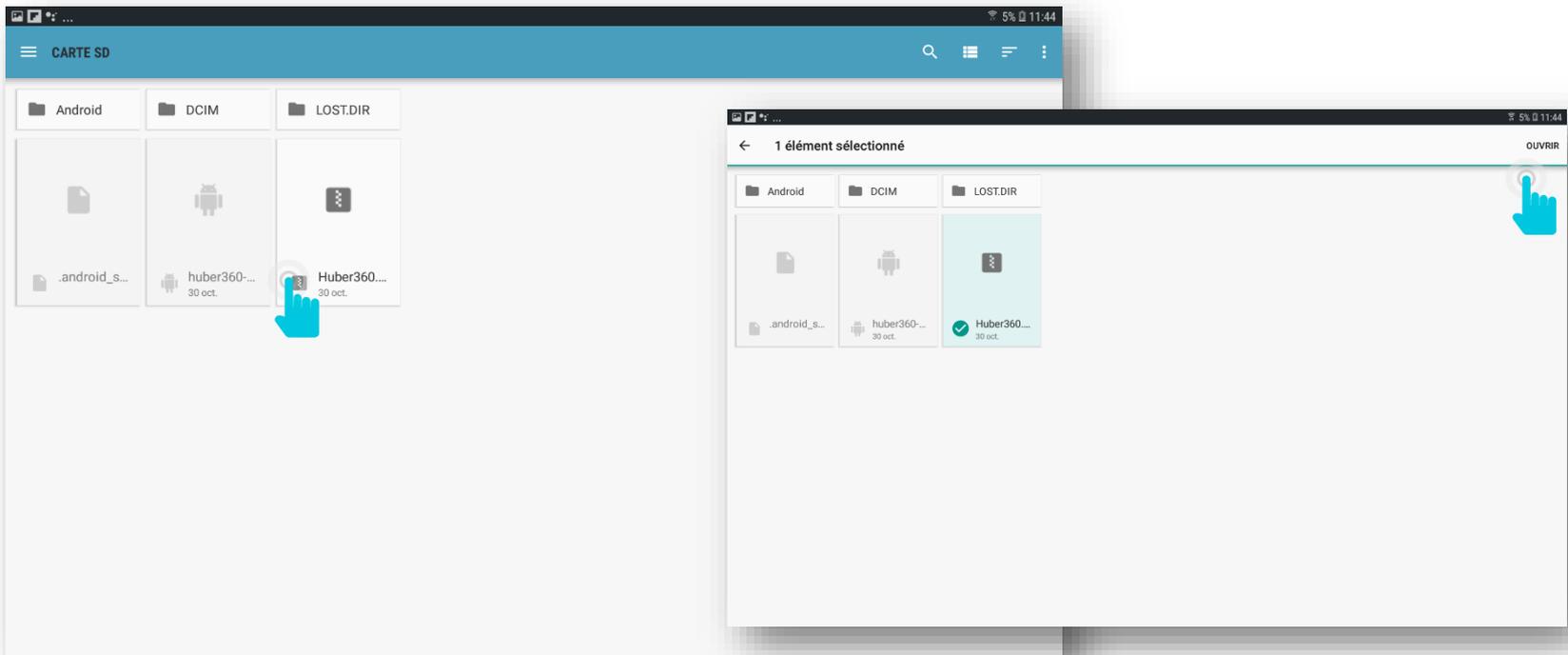




3. IMPORTATION DES DONNÉES

3.b RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

L'importation des données est faite.

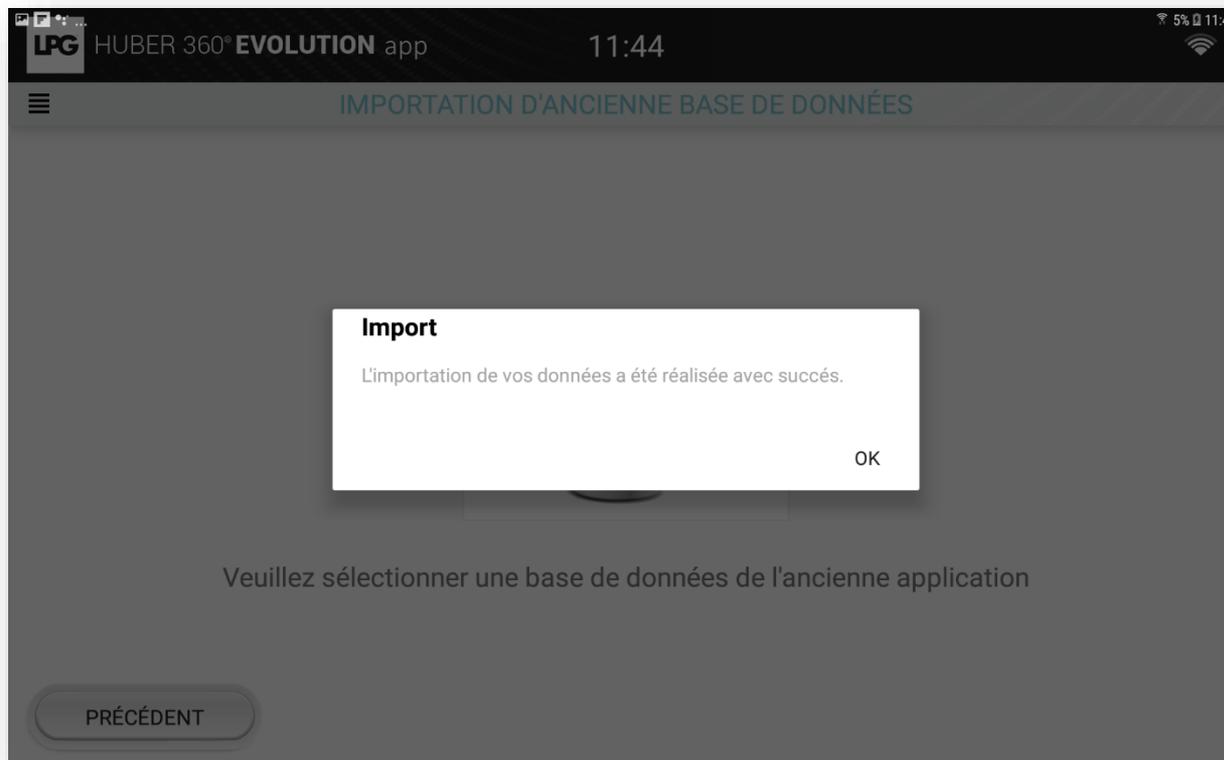



4. EXPORTATION DES DONNÉES





4. EXPORTATION DES DONNÉES

Pour accéder aux paramètres de votre tablette, cliquez sur  puis sur **Configurations**.

La rubrique « **Limitation de responsabilité** » vous sensibilise sur la protection et la sécurité des données clients qui peut être remise en question si vous faites le choix d'exporter ces informations.

Si vous souhaitez exporter ces données, veuillez cocher la fonction « exportation des données clients ».

