



Modèle déposé



GUIDE D'UTILISATION

Mobilift M6[®] CONNECT

**Veillez lire attentivement l'intégralité
de ce guide avant d'utiliser votre appareil.**

Félicitations pour l'achat de votre Mobilift M6[®] Connect. Ce modèle représente le fruit de nombreuses années d'expérience dans la conception et la production d'appareils de soin des tissus cutanés. Vous pourrez en apprécier pleinement la perfection technique et la fiabilité qui ont fait de LPG Systems le leader dans ce domaine. Ce guide d'utilisation contient la description du fonctionnement, les instructions pour l'entretien de base à effectuer périodiquement et les consignes de sécurité. Dans le but de vous satisfaire de façon permanente, LPG Systems a équipé votre appareil d'un logiciel assurant sa connexion avec le serveur LPG[®] dédié. Les informations collectées grâce à ce logiciel vont notamment permettre à LPG Systems d'améliorer davantage le suivi technique et la maintenance de votre appareil. Nous vous rappelons que votre appareil est destiné au soin du tissu conjonctif. Il doit être utilisé uniquement par un professionnel qui aura préalablement assisté à la formation constructeur dispensée par LPG Systems ou un distributeur agréé si vous résidez hors de France. Il n'est pas adapté pour un usage domestique. Dans le moindre doute concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre appareil, n'hésitez pas à contacter LPG Systems par l'intermédiaire du Service Client ou de votre distributeur :

Service Client LPG[®] Systems

N° Azur 0810 786 900

(Prix d'appel local, France uniquement)

Ou le +33 (0)4 75 78 69 89

© LPG Systems 2024. LPG[®], endermologie[®] et Mobilift M6[®] Connect sont des marques exploitées et/ou enregistrées et/ou déposées par LPG Systems. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite

GU1303-FR_ind D1
Edition du 01/24

ATTENTION

Pour mieux répondre aux besoins et attentes de ses clients, LPG Systems est continuellement à la recherche d'améliorations dans la conception et la qualité de ses produits. C'est pourquoi, il se peut qu'il y ait quelques différences minimes entre votre appareil et celui décrit dans le guide.

→ CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Un appareil Mobilift M6® Connect
- Une tête Ergolift
- Deux chambres Ergolift (Ergolift 10 et Ergolift 20)
- Un cordon d'alimentation
- Un guide d'utilisation
- Un environnement PLV

→ SOMMAIRE

1. DESCRIPTIF DE L'APPAREIL	4
2. DESCRIPTIF DES COMMANDES	6
3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	7
4. ENTRETIEN	10
5. TÊTE ERGOLIFT	16
6. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	19
7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	20
8. GARANTIE	21
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE	22
ACTIVATION DE GARANTIE	24

ATTENTION

Notice de déballage à conserver
Le constructeur se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans notification préalable. Toute reproduction, même partielle, est interdite. Toutes les illustrations de ce guide d'utilisation sont non contractuelles.

→ LE MOBILIFT M6® CONNECT



→ LE MOBILIFT M6® CONNECT (SUITE)



⚠ ATTENTION

L'appareil ne peut fonctionner que s'il est relié au secteur par son cordon d'alimentation et que l'interrupteur de mise sous tension est allumé en vert. Au démarrage de votre appareil, veuillez patienter plusieurs secondes avant l'apparition des premières informations sur votre écran.

→ ÉCRAN DE COMMANDES



DALLE TACTILE

→ TÊTE ERGOLIFT

TÊTE ERGOLIFT

CHAMBRE ERGOLIFT

CLAPETS



→ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il convient de toujours observer les précautions d'usage lors de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris les suivantes : lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

DANGER - POUR MINIMISER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Toujours débrancher l'appareil de la prise secteur après utilisation et avant son nettoyage.
- Vérifier que la tension de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique correspond à la tension nominale de la prise secteur.
- L'appareil doit être impérativement relié par l'intermédiaire du cordon secteur fourni à une prise murale avec terre et normes électriques en vigueur. Aucun adaptateur secteur ne doit être utilisé avec cet appareil.

→ AVERTISSEMENT

• POUR MINIMISER LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE LÉSIONS SUR LA PERSONNE :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période ou avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions pour utiliser l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles préconisées par LPG Systems. Ne pas utiliser de pièces non recommandées par LPG Systems.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon secteur ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a pris une humidité excessive. Retourner l'appareil au Service client de LPG Systems pour examen et réparations.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le cordon secteur, ni sur le flexible.
- Ne pas transporter l'appareil en utilisant le support accessoire. Il est recommandé de l'enlever à chaque déplacement et d'utiliser la poignée prévue à cet effet.
- Dérouler entièrement le cordon secteur et le maintenir à l'écart de surfaces chaudes.
- Ne jamais utiliser l'appareil si les aérations sont obstruées. Veiller à garder les ouvertures exemptes de poussière et assimilés.
- Ne jamais faire tomber ni insérer un objet dans une ouverture, ne pas aspirer de corps solides ou liquides, ce qui endommagerait l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil sur un support poussiéreux, incliné, dans un environnement humide ou exposé aux intempéries.
- L'appareil doit être posé sur une surface plane et rigide.
- Ne pas utiliser en présence de produits aérosols (vaporisateurs) ou d'oxygène.
- Pour débrancher l'appareil, mettre toutes les commandes en position arrêt puis débrancher l'appareil en suivant les instructions affichées sur l'écran.

⚠ ATTENTION

¹ Europe VIIG-H05VVF3G0,75-C13; Italy I/3/16-H05VVF3G0,75-C13; Switzerland 12G-H05VVF3G0,75-C13; UK BS13/13-H05VVF3G0,75-C13; Japan 498GJ-VCTF3X1,25-C13; USA, Canada, Mexico N5/15-SJT3X18AWG-C13

→ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

ATTENTION : CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Votre appareil est destiné à être utilisé sur peau saine, et en bonne santé. Il est important de lire et de suivre toutes les précautions d'utilisation et contre-indications qui vont suivre avant l'utilisation de votre appareil.

- Ne jamais toucher simultanément le client et des câbles ou connexions non protégés de l'appareil.
- Ne pas utiliser les têtes Ergolift pour un soin du cuir chevelu.
- Utiliser uniquement les têtes Ergolift fournies avec votre appareil ou préconisées par LPG Systems.
- LPG Systems se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée.
- L'utilisateur devra être particulièrement attentif aux sensations de la personne soignée.
- L'utilisateur doit s'assurer que les paramètres (intensité, séquentialité, ...) sont toujours adaptés aux tissus cutanés à soigner.
- Ne pas utiliser la prise USB pendant le soin.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil en dehors de limites environnementales spécifiées (voir spécifications techniques).

→ COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Le Mobilift M6® Connect utilise de l'énergie RF uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareil électronique voisin.
- Le Mobilift M6® Connect peut être utilisé dans tous les établissements, y compris dans les locaux domestiques et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation électrique basse tension, alimentant des bâtiments à usage domestique.
- Le Mobilift M6® Connect doit être installé sur un sol en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, il convient que l'humidité relative soit d'au moins 30%.
- Le Mobilift M6® Connect doit être relié à un réseau d'alimentation électrique dont la qualité est équivalente à celle d'un environnement typique commercial ou hospitalier.
- Si l'utilisateur du Mobilift M6® Connect exige le fonctionnement continu pendant les coupures du réseau d'alimentation électrique, il est recommandé de l'alimenter à partir d'une alimentation en énergie sans coupure ou d'une batterie.
- Les appareils portatifs et mobiles de communications RF ne doivent pas être utilisés trop près de toute partie du Mobilift M6® Connect, y compris des câbles.
- Des interférences peuvent se produire à proximité d'appareil marqué du symbole suivant.



→ CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas soigner les plaies ouvertes, les yeux, les zones intra-cavitaires, les muqueuses, les parties génitales, les mamelons.
- Ne pas soigner un client présentant une pathologie infectieuse, une tumeur évolutive, une phlébite, une plaie, une zone infectée.
- Ne pas soigner un client atteint d'un cancer de la peau, présentant une tumeur ou autre lésions cancéreuses. En cas d'antécédent de tumeur et de réémission, demander l'avis du médecin traitant.
- Ne pas soigner des zones enflammées ou enflées, ou des cicatrices suite à une chirurgie récente sans avis médical et sans formation à la technique LPG Systems dans le domaine concerné.
- Ne pas soigner les personnes présentant des troubles circulatoires, sans préalablement demander l'avis du médecin traitant.
- Ne pas soigner un client qui présente une douleur inexplicite et persistante sans avis médical et sans formation à la technique LPG Systems dans le domaine concerné.
- Cette liste n'étant pas exhaustive, demander systématiquement l'avis du médecin traitant en cas de doute.
- Arrêtez immédiatement le soin si le client éprouve des douleurs et consulter un médecin.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des éruptions cutanées, de l'herpès, de l'acné enflammé ou infecté, du vitiligo.
- En raison des risques d'interférences possibles, il est important que le professionnel s'assure que le client n'est pas doté d'un dispositif médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque. Dans l'affirmative, il convient de se renseigner sur le dispositif en question pour s'assurer que des interférences éventuelles ne viennent pas perturber l'utilisation de l'appareil.
- Pour éviter tout risque de contusions, faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de déterminer le niveau de sensibilité du client et exclure les clients prenant des médicaments anticoagulants.
- Pour une liste plus détaillée des indications et des contre-indications de la technique endermologie® visage, se référer aux manuels de formation.

⚠ ATTENTION

Il est strictement interdit de modifier votre appareil sans l'autorisation de LPG Systems.

⚠ ATTENTION

Cet appareil contient des programmes destinés à guider l'utilisateur en vue de l'obtention des meilleurs résultats escomptés en fonction de chaque cas traité. En aucun cas, ils ne constituent une garantie de réussite du soin, laquelle varie selon la physiologie de chaque client.

→ REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

Votre appareil comporte une cartouche filtrante. Elle garantit l'efficacité de votre appareil et prolonge sa durée de vie.

Vous devez remplacer votre cartouche filtrante dès que l'icône apparaît  (fig. 1).



FIG. 1

Vous devez alors accéder au menu «changement de filtre» comme indiqué ci-après :

Sélectionner le menu «configuration» en appuyant sur cette touche  (fig. 2).

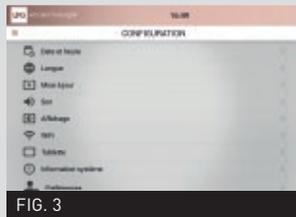


FIG. 3

Sélectionner le menu «changement de filtre» en appuyant sur cette touche  (fig. 3).



FIG. 2



FIG. 4

→ REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE (SUITE)

Remplacer la cartouche filtrante par une neuve. (Fig.6)

Lorsque votre cartouche filtrante est remplacée, vous devez initialiser son compteur filtre en appuyant quelques secondes sur le bouton correspondant (fig.7).



FIG. 6

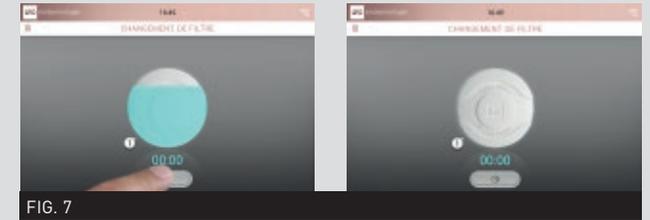


FIG. 7

→ INSTRUCTION POUR CONNECTER LE FLEXIBLE

Pour connecter le flexible, procéder comme indiqué ci-dessous :

- Verrouiller le flexible (fig.1).
- Positionner le flexible de façon à ce que la clavette du flexible vienne se loger dans son logement (fig.2).
- Poussez le flexible jusqu'à l'obtention d'un «clic».

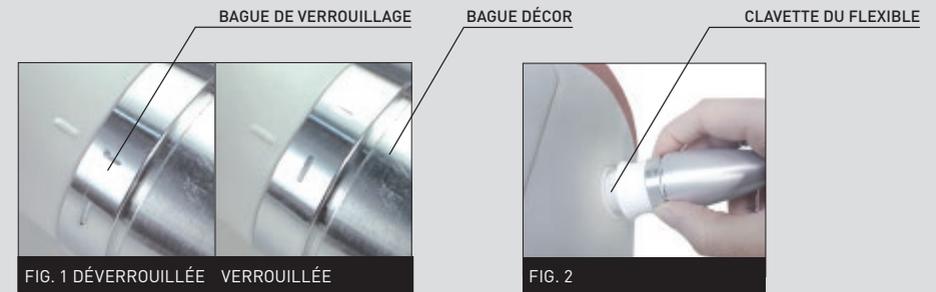


FIG. 1 DÉVERROUILLÉE VERROUILLÉE

FIG. 2

➤ ATTENTION


Ne jamais utiliser votre appareil sans cartouche filtrante.

Mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer le remplacement de votre cartouche filtrante

→ INSTRUCTION POUR DÉCONNECTER LE FLEXIBLE

Pour **déconnecter le flexible**, procéder à l'opération inverse :


- Déverrouiller la connexion en tournant la bague de verrouillage (fig.3).
- Soulever la bague de verrouillage, puis retirer le flexible délicatement en tirant sur la bague blanche (fig.4).

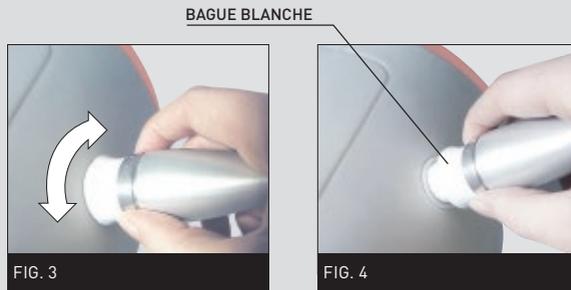

→ TRANSPORT/DÉPLACEMENT

Lors du transport de votre Mobilift M6® Connect, il est recommandé :

- D'enlever le support accessoire (fig. 1).
- De le porter par la poignée de préhension prévue à cet effet (fig. 2).

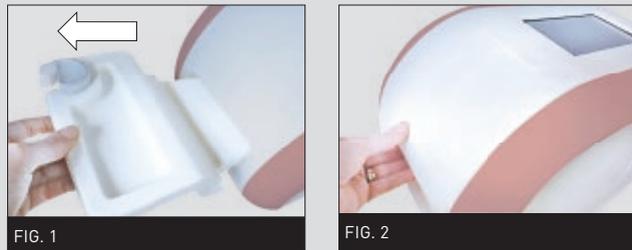

→ REMPLACEMENT DU CORDON SECTEUR

Si le cordon d'alimentation de votre appareil est endommagé, veuillez contacter le Service Client de LPG Systems qui vous le remplacera.

Service Client de LPG Systems :
N° Azur 0810 786 900
(France uniquement)
ou le +33 (0)4 75 78 69 89

→ MAINTENANCE


- Remplacement des clapets : lorsque les clapets ne permettent plus un soin correct de la peau, ils doivent être remplacés. Ils doivent être remplacés toutes les 20 séances environ.
- À usage personnel du client, un **Kit endermologie® visage** est proposé à la vente.

DATE	NOMBRE D'HEURES	OPÉRATIONS EFFECTUÉES

⚠ ATTENTION

Ne jamais porter l'appareil par son support accessoires

→ DESCRIPTIF DE LA TÊTE ERGOLIFT

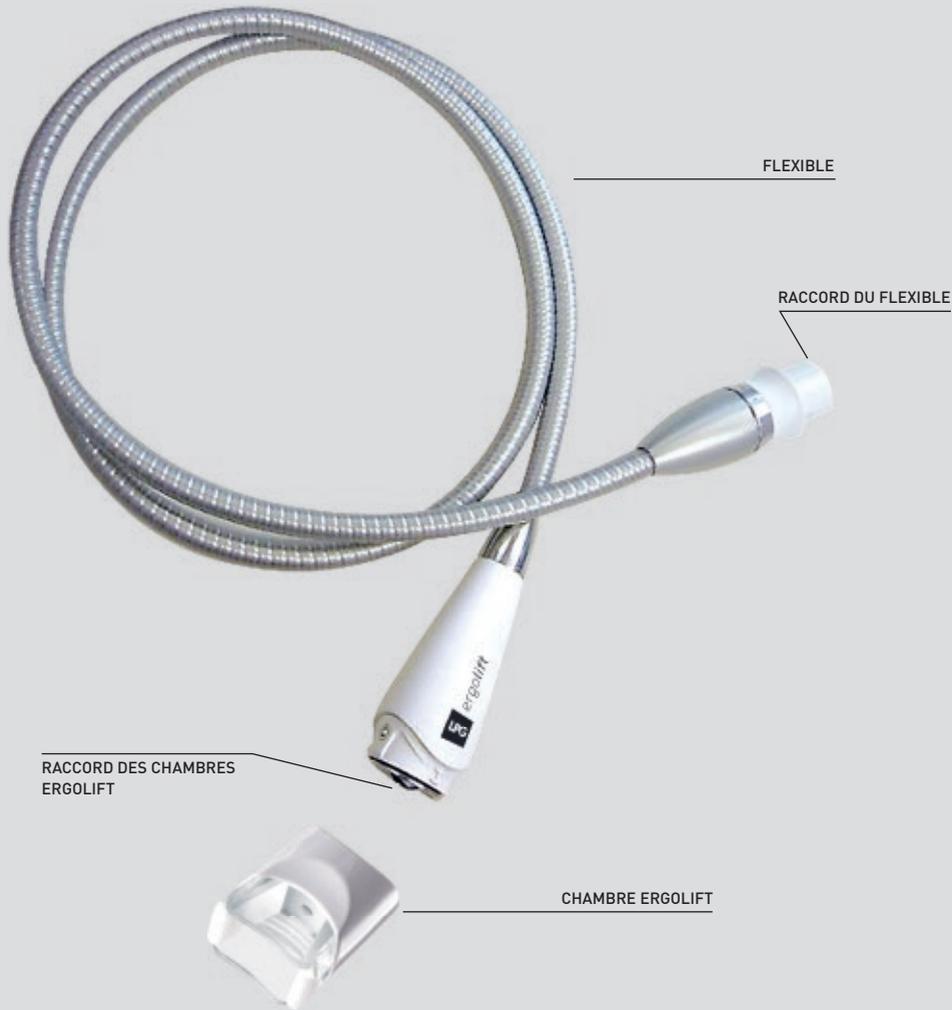

→ CHAMBRES ERGOLIFT



Chambre Ergolift 20 à clapet démontable **Ergolift 20**



Chambre Ergolift 10 à clapet démontable **Ergolift 10**

Seules les chambres Ergolift 20 et 10 peuvent être connectées à la tête Ergolift. La connexion/déconnexion se fait par un simple push pull.




→ NETTOYAGE DE LA TÊTE ERGOLIFT ET DES CHAMBRES ERGOLIFT


Pour des raisons d'hygiène, le nettoyage des têtes Ergolift est à effectuer avant et après chaque utilisation, têtes déconnectées de l'appareil, à l'aide de lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide. Une attention particulière doit être portée sur la propreté des parties en contact avec le client.

Avant chaque utilisation, nettoyer le clapet et la chambre Ergolift.
Après chaque utilisation :

1. Déconnecter la chambre Ergolift de la tête Ergolift (fig.1).
2. Sortir les clapets à l'aide de l'outil de démontage prévu à cet effet (fig.2).
3. Nettoyer méticuleusement la chambre Ergolift, le clapet et l'outil de démontage pendant au moins 1 minute avec les lingettes décrites ci-dessus (fig.3).
4. Remonter le clapet dans la chambre Ergolift à l'aide de l'outil de démontage en suivant l'opération inverse (fig.4).

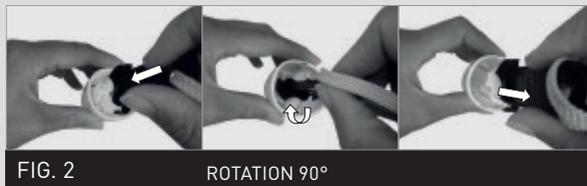

→ NETTOYAGE DE LA TÊTE ERGOLIFT ET DES CHAMBRES ERGOLIFT (SUITE)

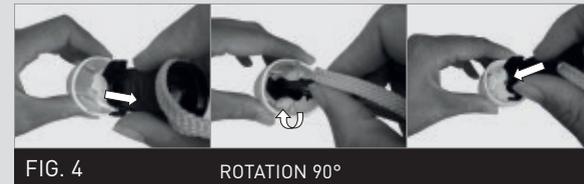

⚠ ATTENTION

Proscrire les produits agressifs tels que l'acétone, le trichloroéthylène ou l'alcool à 90°, les éponges abrasives ainsi que l'utilisation d'ultra sons ou de lampe à UV. Toutes têtes nettoyées devraient être déposées sur le support accessoire pour éviter toutes confusions.

→ UN PETIT PROBLÈME ! QUE FAIRE ?

En cas de fonctionnement anormal de votre appareil, avant de faire appel au Service Client de LPG Systems ; il est conseillé d'effectuer les contrôles suivants :

- L'appareil est-il raccordé à une prise secteur ?
- La prise secteur est-elle alimentée ?
- L'interrupteur de mise sous tension est-il allumé ?
- La cartouche filtrante est-elle propre et bien en place ?
- Le flexible est-il correctement raccordé ?
- Le flexible n'est pas obturé ?
- La chambre Ergolift et les clapets sont-ils correctement montés ?

Une fois ces contrôles effectués, si le dysfonctionnement persiste, faire appel au service Client de LPG Systems ou au distributeur agréé le plus proche de chez vous en indiquant le modèle de votre appareil et son numéro de série.

Service Client de LPG Systems :
N° Azur 0810 786 900
(France uniquement)
ou le +33 (0)4 75 78 69 89

→ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : L x l x h : 65 x 26 x 31 cm
Poids net : 10,5 kg
Dépression maximum réglée: 35 kPa (350 mbar)
Refroidissement : par ventilation mécanique intégrée à la pompe
Indice de protection : IP 20
Classe de protection électrique : 1
Température de fonctionnement: +10°C à +30°C
Température de stockage : -20°C à +70°C
Caractéristiques électriques : 100-240V 50/60Hz 80W
Wifi : 2,4Ghz b/g/n
EIRP : 100mW

Caractéristiques environnementales :

Température ambiante : + 10 à + 30°C en fonctionnement normal.
Humidité relative ambiante : 30 à 75% sans condensation.
Pression atmosphérique : pas d'influence notable des conditions ambiantes en fonctionnement.
Altitude max : 2500m.

Caractéristiques environnementales de transport et de stockage :

Température ambiante : - 20 à + 70°C en fonctionnement normal.
Humidité relative ambiante : 10 à 90% sans condensation.
Pression atmosphérique : pas d'influence notable des conditions ambiantes en fonctionnement.

Appareil équipé d'une tête Ergolift brevetée.

Appareil destiné au travail continu

Le Mobilift M6® Connect est marqué  conformément aux normes et textes applicables dans le cadre des directives CEM 2004/108/CEE et basse tension 2006/95/CEE

→ CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Vous venez d'acquérir un appareil distribué par LPG Systems ou un distributeur agréé LPG Systems.

Il appartient à l'acheteur / utilisateur de s'informer auprès des autorités locales des conditions et des qualifications professionnelles requises pour utiliser cet appareil. L'acquisition de cet appareil emporte l'acceptation de plein droit par l'acheteur / utilisateur des présentes conditions générales de garantie.

Dans le cas où l'appareil est vendu par un distributeur agréé LPG Systems, l'acheteur se réfèrera aux conditions générales de garantie de son fournisseur, lesquelles ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter l'engagement pris par LPG Systems au titre de la présente garantie. Cette garantie ne peut être mise en oeuvre et n'est valable que si le volet de garantie dûment rempli a été retourné à LPG Systems dans les 15 jours de la livraison et ce pour quelque pays que ce soit. Tout volet de garantie incomplètement rempli ne pourra pas être traité.

Cet appareil est garanti contre tout vice de construction ou défaut de matière première. La durée de la garantie est égale à la plus courte des deux périodes suivantes : un (1) an OU deux mille (2 000) heures d'utilisation à compter de la date de facturation. Pendant cette période, nous nous engageons à échanger ou à réparer

gratuitement, dans les meilleurs délais, toute pièce reconnue par nous défectueuse, sans que toutefois l'échange complet de l'appareil puisse être exigé. Les frais de déplacement et de séjour des techniciens ainsi que les coûts de transport éventuels pour le transport de l'appareil et / ou des pièces détachées dans l'atelier du service après vente, sont exclus de cette garantie.

Les échanges et les réparations au titre de la garantie causant ou non une immobilisation de l'appareil ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'en prolonger la durée. Les pièces remplacées deviennent la propriété de LPG Systems ou du distributeur agréé. Aucune indemnité ne pourra être accordée pour privation de jouissance.

Pour l'exercice de la garantie, l'acheteur/ utilisateur doit permettre à LPG Systems de procéder aux interventions de réparation nécessaires.

→ CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE (SUITE)

La garantie est en outre exclue en cas :

- De dommages survenus au cours du transport. L'appareil et / ou les pièces détachées sont transportés aux risques et périls du destinataire. Il appartient à celui-ci avant d'en prendre livraison, d'en vérifier l'état et le cas échéant procéder auprès du transporteur aux réclamations dans les formes et délais en vigueur dans le pays de livraison.
- De non-observation des règles d'installation et d'utilisation, de défaut d'entretien et / ou de négligence dans la maintenance de l'appareil et / ou des cartouches filtrantes, du branchement sur une ligne électrique défectueuse ou ne possédant pas de raccordement à la prise de terre ou d'une tension autre que celle indiquée sur l'appareil.
- Si un appareil devait être revendu avant le terme de la garantie, celle-ci sera transférée pour la durée restant à courir au nouvel acquéreur à condition :
 - I Que la facture originale lui soit communiquée.
 - II Que le vendeur initial soit informé de la cession.
- De modification, de montage d'accessoires ou démontage de l'appareil.
- De toute utilisation et / ou intervention non prévue au présent guide d'utilisation LPG Systems et effectuée sur l'appareil par l'acheteur/utilisateur et/ou un tiers non-agréé par LPG Systems.
- D'utilisation de consommables, de pièces détachées, composants inappropriés ou de pièces non fournies par LPG Systems.
- D'obturation de l'appareil par l'aspiration d'un corps étranger.
- D'usure normale d'une ou plusieurs pièces de l'appareil résultant d'une utilisation normale.
- De dommages ou défauts résultant de tout événement accidentel (choc, chute, etc). De dommages dûs à des catastrophes naturelles (foudre, dégâts des eaux, etc), d'incendie, de négligence ou d'abus.

→ LIMITATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Dans le cadre de la présente garantie, LPG Systems a pour seule obligation de remplacer les composants de l'appareil qui répondent aux conditions de cette garantie. LPG Systems n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou dommage lié au produit et/ou à son utilisation, y compris de perte financière, de perte de bénéfices, de jouissance, etc.

Ceci s'applique aux pertes et dommages dans tout contexte juridique.

Lorsque la réglementation en vigueur interdit ou limite ces exclusions de responsabilité, LPG Systems exclut ou limite sa responsabilité uniquement au prix payé par l'acheteur pour l'appareil et/ou la prestation réalisée.

→ ACTIVATION DE GARANTIE

Vous pouvez activer votre garantie directement en ligne en vous connectant sur :
<http://garantie.lpgsystems.fr>

→ OU REMPLIR ET RENVOYER À LPG SYSTEMS

Nom* :

Adresse* :

Pays* :

Tél.* :

Email :

Type d'établissement :

Profession :

Type d'appareil : **Mobilift M6® Connect**

Numéro de série* :

Date :

Les données à caractère personnel recueillies par le présent formulaire sont destinées à la société LPG Systems, qui est le responsable du soin, afin d'effectuer les opérations relatives à la gestion des clients, et notamment le service après-vente et la garantie. La transmission des informations accompagnées d'un astérisque est nécessaire pour la prise en compte de ce formulaire. Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « Informatique et Libertés », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant, que vous pouvez exercer en contactant LPG Systems en écrivant à l'adresse postale suivante : LPG SYSTEMS - 30, rue Dr Abel - Technoparc de la Plaine - CS 90035 - 26000 VALENCE Cedex 9 - FRANCE.

ATTENTION

2^e partie du volet à détacher pour bénéficier de la garantie et à retourner impérativement dans les 15 jours suivant la mise en service à :

LPG SYSTEMS SAS - Technoparc de la Plaine
30, rue du docteur Abel - CS 90035 - 26902 VALENCE Cedex 9 - France



SIÈGE SOCIAL LPG SYSTEMS S.A.S
TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 900 35 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE
TÉL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING
ECOLUCIOLES – BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

