



Vous venez d'acquérir votre appareil Mobilift M6 Limited Edition.
Cet appareil a la particularité d'être équipé de la tête de soin TR30. Vous en trouverez la description dans ce document.

Avant toute installation et utilisation de votre appareil, vous devez prendre connaissance du guide d'utilisation de l'appareil Mobilift M6 Limited Edition.

Dans le moindre doute concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre appareil, n'hésitez pas à contacter LPG Systems par l'intermédiaire du Service Client ou de votre distributeur :

GUIDE D'UTILISATION

Mobilift M6[®] *Limited Edition*

© LPG Systems 2024. LPG, Endermologie[®] Visage et Mobilift M6[®] sont des marques exploitées et/ou enregistrées et/ou déposées par LPG Systems. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite.

Service Client LPG Systems

N° Azur 0810 786 900

(Prix d'appel local, France uniquement)


Ou le +33 (0)4 75 78 69 89

→ FLEXIBLE TÊTE À ROULEAUX

FLEXIBLE Ø 14 mm



TÊTE AUXILIAIRE TR30

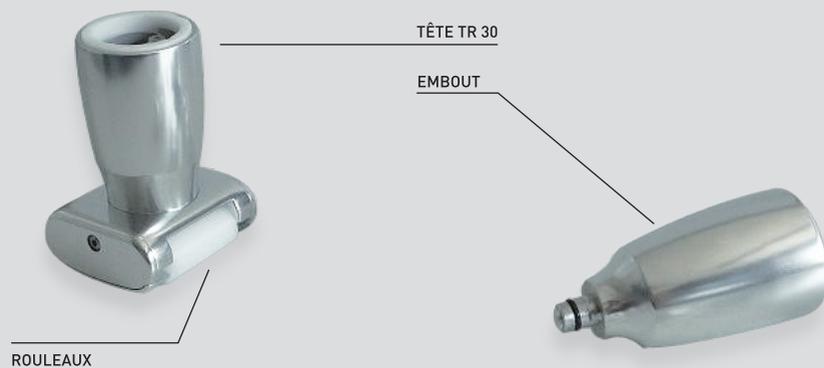

→ NETTOYAGE DES TÊTES AUXILIAIRES

1. Déconnecter la tête TR30 du flexible pour l'opération de nettoyage.
2. Sortir les deux rouleaux et le joint (fig. 1 à 2).
3. Nettoyer méticuleusement pendant au moins 1 minute, les rouleaux et la chambre de soin à l'aide de la lingette LPG imprégnée d'une solution bactéricide et fongicide (fig. 3 à 4).
4. Réenclencher les rouleaux et contrôler qu'ils tournent librement.





⚠ ATTENTION

Proscrire les produits agressifs tels que l'acétone, le trichloroéthylène ou l'alcool à 90°, les éponges abrasives ainsi que l'utilisation d'ultra sons ou de lampe à UV. Toutes têtes nettoyées devraient être déposées sur le support accessoires pour éviter toutes confusions.

→ INSTRUCTION POUR CONNECTER / DÉCONNECTER LE FLEXIBLE

- Pour connecter les têtes au flexible, procéder comme indiqué ci-dessous :
- Verrouiller le flexible (fig.1).
- Positionner le flexible de façon à ce que la clavette du flexible vienne se loger dans son logement (fig.2).
- Poussez le flexible jusqu'à l'obtention d'un « clic ». (fig.3).

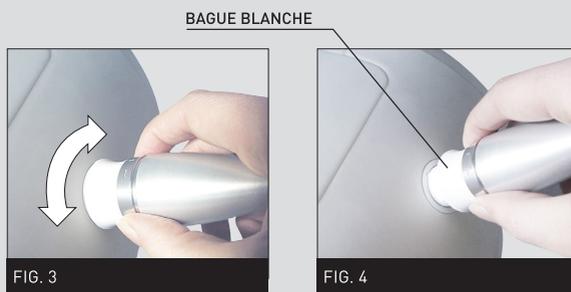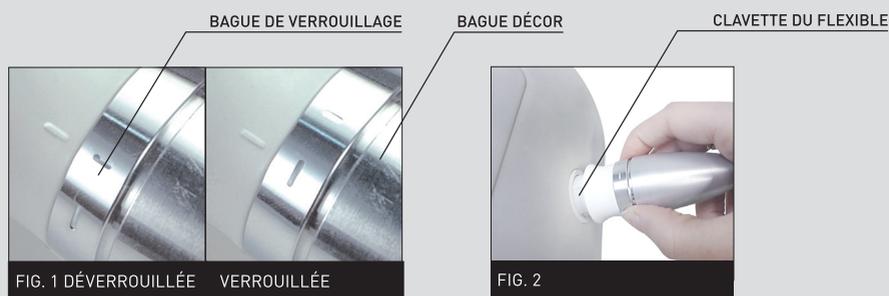

Pour déconnecter le flexible, procéder à l'opération inverse :

- Déverrouiller la connexion en tournant la bague de verrouillage (fig.3).
- Soulever la bague de verrouillage, puis retirer le flexible délicatement en tirant sur la bague blanche (fig.4).



SIÈGE SOCIAL LPG SYSTEMS S.A.S.
TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING
ECOLUCIOLES - BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

