



Modello depositato

## MANUALE D'USO

# mobilift® M6 S

**Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio,  
leggere attentamente l'intero manuale.**

© LPG Systems 2024. LPG, Cellu M6, Integral e Keymodule sono marchi depositati di LPG.  
Eventuali riproduzioni, anche parziali, sono strettamente proibite.

GU 1301-IT\_ind A2  
Edizione A2 del 01/24



Ci congratuliamo con voi per l'acquisto del Cellu M6 Mobilift S. Questo modello è il frutto di numerosi anni di esperienza nella concezione e nella produzione di apparecchi per il trattamento di tessuti cutanei. Ne apprezzerete pienamente la perfezione tecnica e l'affidabilità che hanno fatto di LPG Systems il leader in questo campo. Il presente manuale d'uso contiene una descrizione del funzionamento, le istruzioni per la manutenzione di base da effettuare periodicamente e le norme di sicurezza.

Le ricordiamo che il suo apparecchio è destinato al trattamento del tessuto connettivo e deve essere utilizzato esclusivamente da un professionista che abbia seguito la formazione costruttore impartita da LPG Systems o da un distributore autorizzato qualora lei risieda al di fuori della Francia.

Nel caso in cui sorgano dei dubbi relativi al funzionamento o alla manutenzione dell'apparecchio, vi preghiamo di mettervi in contatto con il Servizio Clienti di LPG Italia:

**Numero Verde: 800 - 905699**

### **ATTENZIONE**

LPG Systems cerca continuamente di migliorare la concezione e la qualità dei suoi prodotti onde soddisfare sempre più le esigenze e le aspettative dei clienti. Per questo motivo, può essere che talvolta vi siano delle differenze minime tra l'apparecchio che possedete e quello descritto nel presente manuale.

## → CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Un apparecchio Mobilift M6 i
- Una testina Ergolift
- Due camere di trattamento (TML20 e TML 10)
- Un cavo d'alimentazione
- Un manuale d'uso
- Materiale pubblicitario

## → SOMMARIO

1. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO . . . . .	4
2. DESCRIZIONE DEI COMANDI . . . . .	6
3. PRECAUZIONI D'USO . . . . .	7
4. MANUTENZIONE . . . . .	10
5. TESTINA ERGOLIFT . . . . .	16
6. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO . . . . .	19
7. SPECIFICHE TECNICHE . . . . .	20
8. GARANZIA . . . . .	21
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA . . . . .	21
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA . . . . .	24
9. APPENDICE - COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA . . . . .	25


### ATTENZIONE

Conservare il materiale di imballo.  
Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso.  
Eventuali riproduzioni, anche parziali, sono proibite. Tutte le illustrazioni del presente manuale non sono contrattuali.

→ MOBILIFT® M6 S



→ MOBILIFT® M6 S (SEGUE)

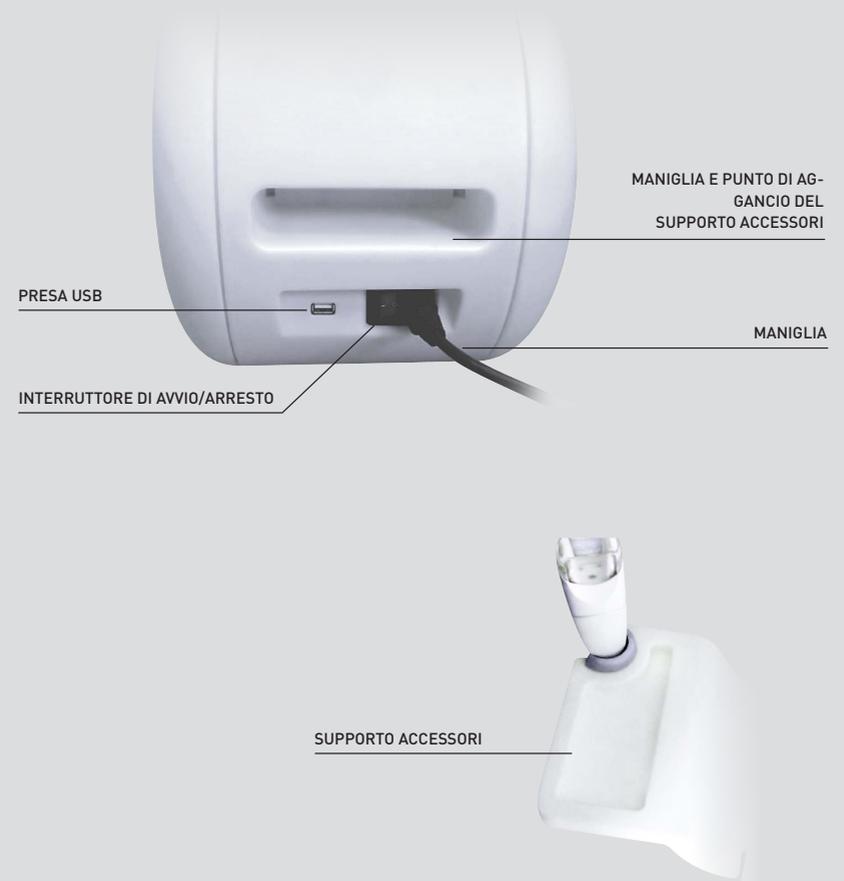

ATTENZIONE

L'apparecchio funziona solo se è collegato alla rete tramite il cavo d'alimentazione e se l'interruttore per l'accensione è verde. Dopo l'accensione dell'apparecchio, dovrete attendere qualche secondo prima di visualizzare le prime informazioni sullo schermo.

## → SCHERMO DI COMANDO



INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO

SCHERMO TATTILE

REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI TRATTAMENTO

## → TESTINA ERGOLIFT

TESTINA ERGOLIFT

CAMERA DI TRATTAMENTO

ALETTE



## → AVVISO DI SICUREZZA IMPORTANTE

Bisogna sempre osservare le precauzioni d'uso quando si utilizza un apparecchio elettrico, comprese le seguenti: leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

**PERICOLO - PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:**

- Staccare sempre l'apparecchio dalla presa dopo l'utilizzo e prima della pulizia.
- Verificare che la tensione dell'apparecchio indicata sulla placca segnaletica corrisponda alla tensione nominale della presa.
- L'apparecchio deve essere collegato con il cavo fornito ad una presa manuale di terra nel rispetto delle norme elettriche in vigore. Nessun adattatore deve essere utilizzato con l'apparecchio.

## → AVVERTENZE

**PER RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE E LESIONI SULLA PERSONA:**

- Un'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è sotto tensione.
- Staccare la presa quando non viene utilizzato per un lungo periodo o prima di inserire o staccare dei pezzi di ricambio.
- È importante sorvegliare con la massima attenzione l'apparecchio quando viene utilizzato da, su o in vicinanza di bambini o di persone handicappate. Non usare l'apparecchio con altri fini differenti da quelli di LPG Systems. Non utilizzare pezzi non raccomandati da LPG Systems.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente, se si è rovinato o se ha preso eccessiva umidità. Ritornare l'apparecchio al centro di assistenza tecnica LPG Systems per diagnosi e riparazioni.
- Non spostare l'apparecchio tirando la presa.
- Srotolare la presa dal suo supporto e tenerla lontano da superfici calde.
- Non usare mai l'apparecchio se le aree di apertura sono ostruite. Mantenere le aperture senza polvere e simili.
- Non far cadere o inserire un oggetto in un'apertura, non aspirare corpi solidi o liquidi.
- Non usare l'apparecchio su un suolo polveroso, inclinato, in un ambiente umido o esposto a intemperie.
- Non usare in presenza di prodotti vaporizzatori o ad ossigeno.
- Per staccare l'apparecchio, mettere tutte le funzioni in posizione stop poi staccare l'apparecchio.
- È proibito modificare l'apparecchio senza l'autorizzazione preliminare del fabbricante.

## ⚠ ATTENZIONE

1 Europe VIIG-H05VVF3G1,00-C13; Italy I/3/16-H05VVF3G1,00-C13; Switzerland 12G-H05VVF3G1,00-C13; UK BS13/13-H05VVF3G1,00-C13; Japan 498GJ-VCTF3X1,25-C13; USA, Canada, Mexico HG/TR-SJT3X18AWG-C13 (connect to Hospital grade receptacle in hospital environment)

## → PRECAUZIONI D'UTILIZZO

### ATTENZIONE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato su pelli sane e in buona salute. È essenziale leggere e rispettare tutte le precauzioni d'uso e tutte le controindicazioni descritte di seguito prima di iniziare a usare l'apparecchio.

- Non toccare mai simultaneamente il paziente e i cavi o le connessioni non protette dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'adattatore come manipolo, direttamente a contatto con la pelle.
- Utilizzare solo i manipoli forniti assieme al vostro apparecchio o raccomandati da LPG.
- LPG declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non appropriato.
- L'utilizzatore dovrà essere particolarmente attento alle reazioni della persona trattata.
- L'utilizzatore deve assicurarsi che i parametri (intensità, sequenzialità, differenziale...) siano sempre adattati ai tessuti trattati.
- Non utilizzare le prese USB ed Ethernet durante il trattamento.
- Non far funzionare l'apparecchio al di fuori dei limiti ambientali indicati (vedere le specifiche tecniche)

## → COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Il Mobilift M6 S utilizza dell'energia RF unicamente per le sue funzioni interne. Di conseguenza, le sue emissioni RF sono deboli e non provocano interferenze con apparecchiature elettroniche poste nelle vicinanze.
- Il Mobilift M6 S può essere utilizzato in qualsiasi luogo, compresi i locali domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione che alimenta gli immobili ad uso domestico.
- Il Mobilift M6 S deve essere posizionato su un pavimento in legno, in cemento o in ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti da materiali sintetici, si raccomanda di avere una umidità relativa di almeno il 30%.
- Il Mobilift M6 S deve essere collegato alla rete di alimentazione elettrica la cui qualità deve essere pari a quella di un locale commerciale od ospedaliero.
- Se l'utilizzatore ha la necessità di utilizzare l'apparecchio in modo continuo anche in presenza di interruzione della corrente elettrica, si raccomanda di ricorrere ad un'alimentazione senza interruzioni oppure ad una batteria.
- Gli apparecchi di comunicazione RF portatili o mobili non devono essere utilizzati troppo vicino al Mobilift M6 S, compresi anche i flessibili.
- Delle interferenze possono prodursi a prossimità di apparecchio con il simbolo seguente:

## → CONTROINDICAZIONI

- Non effettuare il trattamento sulle piaghe aperte, sugli occhi, nelle zone tra le cavità, le mucose, le parti genitali, le mammelle.
- Non effettuare il trattamento su pazienti che presentano patologie infettive, tumori in fase evolutiva, flebiti, ferite o aree infette.
- Non effettuare il trattamento su pazienti affetti da cancro della pelle, che presentano tumori o altre lesioni cancerose. In caso di tumore in fase di remissione, chiedere il parere del medico curante.
- Non effettuare il trattamento su zone infiammate o gonfie o su cui sono visibili cicatrici dovute a interventi chirurgici recenti senza prima aver chiesto il parere del medico e senza aver seguito una formazione sulla tecnica LPG nel settore interessato.
- Non effettuare il trattamento su persone con problemi circolatori senza aver prima chiesto il parere del medico curante.
- Non effettuare il trattamento su un paziente che presenta un dolore anomalo e persistente senza prima aver chiesto il parere del medico e senza aver seguito una formazione sulla tecnica LPG nel campo in questione.
- Non effettuare il trattamento su un paziente che ha già subito un trattamento medico invasivo senza prima aver chiesto il parere del medico o del chirurgo e senza aver seguito una formazione sulla tecnica LPG nel campo in questione.
- Questo elenco non è completo, in caso di dubbi, chiedere sempre il parere del medico curante.
- Interrompere immediatamente il trattamento se il paziente avverte dolore e consultare un medico.
- Questo apparecchio non dev'essere utilizzato su aree affette da eruzioni cutanee, herpes, acne infiammata o infetta, vitiligine.
- Per evitare il rischio di interferenze, il professionista deve accertarsi che il paziente non sia un portatore di dispositivi medici impiantabili, come ad esempio un pacemaker. In tal caso, si consiglia di informarsi sul dispositivo in questione per assicurarsi che eventuali interferenze non compromettano il corretto utilizzo dell'apparecchio.
- Per evitare qualsiasi rischio di contusioni, agire con delicatezza e attenzione per determinare il livello di sensibilità del paziente ed escludere i pazienti che assumono medicinali anti-coagulanti.
- Per una lista più dettagliata delle controindicazioni della tecnica Endermolift, siete pregati di fare riferimento al manuale di formazione.

### ATTENZIONE

Il presente apparecchio contiene dei programmi che guidano l'utente ad ottenere risultati migliori in funzione di ogni caso trattato. In nessun caso, rappresentano una garanzia di riuscita del trattamento, che varia in base alla morfologia, alla fisiologia ed al comportamento alimentare di ogni paziente.

## → TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

L'apparecchio è identificabile grazie ad un numero di serie indicato sulla targhetta. Sulla targhetta figura altresì la tensione d'alimentazione dell'apparecchio. Quando ci si rivolge al Servizio Clienti di LPG Systems per un problema tecnico, indicare il numero di serie del Mobilift M6 S che contiene le informazioni relative all'anno ed al mese di fabbricazione dell'apparecchio.

La lettera indica l'anno di fabbricazione:  
Z=2009, A=2010, B=2011...

Le due cifre indicano invece il mese di produzione:  
01=gennaio; 02=febbraio; 03=marzo...



 Questo simbolo indica che l'apparecchio è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2006. Ai sensi della direttiva 2002/96/CE, non può essere smaltito come un normale rifiuto ma deve subire un determinato e specifico trattamento. Conferire l'apparecchio a fine vita a un punto di raccolta appropriato oppure consegnarlo al proprio distributore. Sarà un gesto a difesa dell'ambiente e un contributo alla salvaguardia delle risorse naturali, nonché alla protezione della salute dell'uomo.

 Questo simbolo indica che determinate avvertenze o precauzioni specifiche associate a questo dispositivo non si trovano sull'etichetta

 Questo simbolo indica che è indispensabile consultare i documenti accompagnatori del prodotto prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio.

 Questo simbolo indica che il prodotto dev'essere conservato al riparo dalle intemperie

 Questo simbolo indica che si applicano limiti di temperatura

 Questo simbolo indica che si applicano limiti di umidità relativa

 Questo simbolo significa « Tensione Pericolosa »

## → PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Si consiglia di effettuare il più spesso possibile una pulizia dell'apparecchio, non solo per motivi d'igiene ed estetica ma altresì per contribuire a mantenere l'apparecchio in buono stato di funzionamento ed a prolungarne la durata.

**Mediante una spugna umida pulire:**

- Le protezioni esterne.
- I flessibili.
- Il cavo d'alimentazione.

**Mediante un panno intriso di un prodotto di pulizia che non contenga alcool, pulire:**

- Lo schermo di controllo ed il pannello di comando.

**ATTENZIONE**

La targhetta d'identificazione si trova dietro l'apparecchio in basso.

**ATTENZIONE**

Evitare l'uso di prodotti aggressivi, quali acetone, trichloroetilene o alcool a 90°

## → SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA FILTRANTE

L'apparecchio dispone di 2 filtri a cartuccia e un filtro con gomma piuma. Questi componenti garantiscono l'efficacia della macchina prolungandone la sua durata. Dovete cambiare i vostri filtri a cartuccia all'apparire di uno dei messaggi riportati di seguito sullo schermo :



FIG. 1

MESSAGGIO DI AVVISO



FIG. 2

ICONA CHE INDICA CHE BISOGNA CAMBIARE I FILTRI

Bisogna accedere al menu «cambio del filtro» come indicato di seguito :  
Selezionare il menu premendo il pulsante di manutenzione (fig.3).  
Selezionare il menu « filtro » premendo il pulsante (fig.4).  
Lo schermo «cambio del filtro» indica il filtro che deve essere sostituito : (fig.5).



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

## → SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA FILTRANTE (SEGUE)

Sostituire la cartuccia filtrante con una cartuccia nuova. (Fig.6)  
Quando il filtro è sostituito, bisogna inizializzare il contatore premendo il pulsante corrispondente (fig.7).



FIG. 6



FIG. 7

## → ISTRUZIONI PER COLLEGARE IL FLESSIBILE

- Per collegare il flessibile, procedere come indicato di seguito:
- Occorre che quest'ultimo sia bloccato (fig.1).
- Quindi, posizionarlo in modo che il raccordo venga inserito nell'apposito alloggiamento (fig. 2) e infine premere finché non scatta in posizione.



FIG. 1 SBLOCCATA

BLOCCATA


FIG. 2

### ➤ ATTENZIONE

Non utilizzare mai l'apparecchio senza cartuccia filtrante.  
Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di sostituire la cartuccia filtrante

## → ISTRUZIONI PER COLLEGARE IL FLESSIBILE


- **Per scollegare il flessibile**, procedere all'operazione inversa: Sbloccare il collegamento ruotando la boccola di bloccaggio (fig. 3). Sollevare la boccola di bloccaggio, quindi rimuovere il flessibile con delicatezza tirando per la boccola bianca (fig. 4).

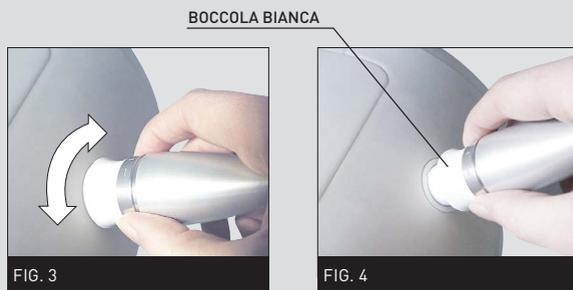

## → TRASPORTO/SPOSTAMENTO

Durante il trasporto del Mobilift M6 i, si raccomanda:

- Di togliere il supporto accessori (fig. 1).
- Di trasportarlo tenendolo per la maniglia prevista a tale scopo (fig. 2).

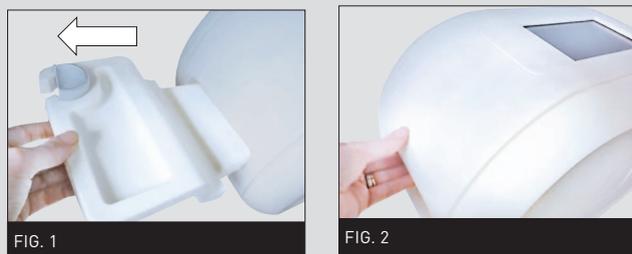

## → SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio risulta danneggiato, contattare il Servizio Clienti di LPG Italia, il quale provvederà alla sostituzione.

**Servizio Clienti di LPG Italia:**  
**Numero Verde: 800 - 905699**

## → MANUTENZIONE


- Sostituzione delle alette: quando le alette non consentono più un trattamento corretto della pelle, devono essere sostituite. La sostituzione va eseguita approssimativamente ogni 20 sedute.
- È disponibile per la vendita anche un Kit Endermolift per uso personale del cliente.

DATA	NUMERO DI ORE	OPERAZIONI EFFETTUATE

### ⚠ ATTENZIONE

Non trasportare mai l'apparecchio tenendolo per il supporto accessori

→ DESCRIZIONE DELLA TESTINA ERGOLIFT

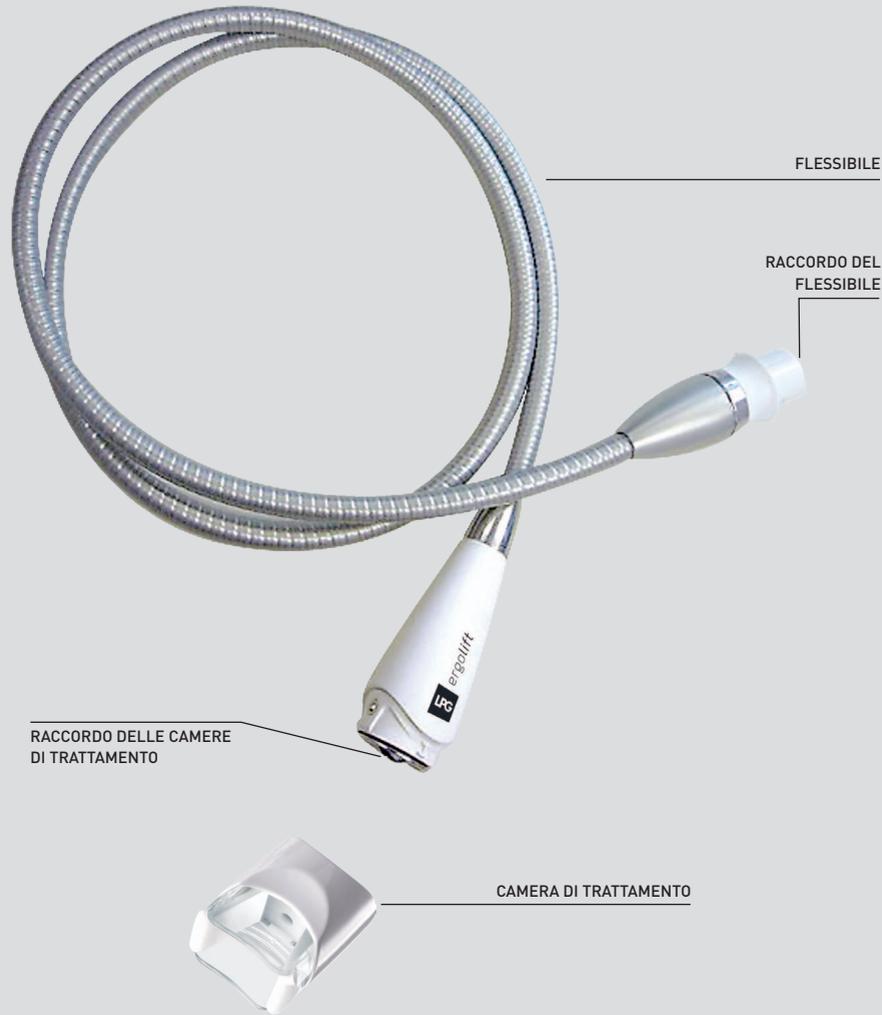

→ CAMERA DI TRATTAMENTO



**Aletta TML 20**  
Camera di trattamento TML 20 con aletta smontabile



**Aletta TML 10**  
Camera di trattamento TML 10 con aletta smontabile

Solo le camere di trattamento TML20 e TML10 possono essere collegate alla testina Ergolift. La connessione/disconnessione avviene tramite un semplice meccanismo Push Pull.



## → PULIZIA DELLA TESTINA ERGOLIFT E DELLE CAMERE DI TRATTAMENTO

Per motivi d'igiene, la pulizia dei manipoli di trattamento deve essere effettuata dopo ogni utilizzo, mediante un panno imbevuto di una soluzione antisettica, battericida e fungicida.

Prima di ogni utilizzo, pulire l'aletta e la camera di trattamento.

**1.** Scollegare la camera di trattamento dalla testina Ergolift

**2.** Estrarre le alette

Pulire accuratamente la camera di trattamento e l'aletta per almeno 1 minuto con le salviette LPG imbevute di una soluzione battericida e fungicida.

Per uso personale del paziente, è disponibile per la vendita un Kit Endermolift valido per un programma di circa 20 sedute.

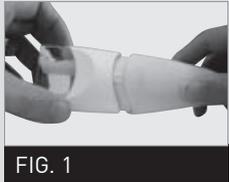


FIG. 1

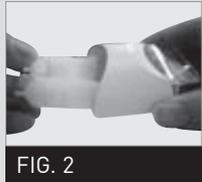


FIG. 2



FIG. 3

## → UN PICCOLO PROBLEMA! CHE FARE?

**Prima di rivolgersi al Servizio Clienti, nel caso di un funzionamento anomalo dell'apparecchio, effettuare i seguenti controlli:**

- L'apparecchio è collegato ad una presa di corrente?
- La presa riceve corrente?
- L'interruttore di corrente è acceso?
- Le cartucce filtranti sono pulite e correttamente posizionate?
- I flessibili sono collegati in modo corretto a livello dei bracci mobili dell'equilibratore?
- La camera di trattamento e le alette sono montate correttamente?

Se, dopo aver effettuato tutti questi controlli, l'apparecchio continua a presentare dei problemi, rivolgersi al Servizio Clienti o al più vicino distributore autorizzato, indicando il modello dell'apparecchio, il numero di serie e la durata del funzionamento in ore (accesso ai contatori orario).

**Servizio Clienti di LPG Italia:  
Numero Verde: 800 - 905699**

### ➤ ATTENZIONE

Non utilizzare prodotti aggressivi quali acetone, tricloretilene, alcool a 90°, spugne abrasive, ultrasuoni o lampade UV. Tutte le testine pulite e/o disinfettate dovrebbero essere riposte nell'apposito scomparto per evitare confusione. Utilizzare una soluzione disinfettante contenente il principio attivo ortoftaldeide (OPA) Prima di utilizzare la soluzione disinfettante, si raccomanda di leggere e rispettare le indicazioni, le contro-indicazioni e le avvertenze relative al prodotto. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso di questa soluzione. Tutte le procedure descritte in questa parte devono essere effettuate mentre l'apparecchio non è collegato all'alimentazione; i cavi di alimentazione devono essere scollegati.

## → CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni L x l x h: .....	65 x 26 x 31 cm
Peso netto: .....	10,5 kg
Depressione massima regolata: .....	35 kPa (350 mbar)
Raffreddamento: .....	A ventilazione meccanica integrata alla pompa
Indice di protezione: .....	IP 20
Classe di protezione elettrica: .....	1
Temperatura di funzionamento: .....	+10°C à +30°C
Temperatura di deposito: .....	-20°C à +70°C
Caratteristiche elettriche: .....	100-240V 50/60Hz 80VA

## Caratteristiche ambientali:

Temperatura dell'ambiente: .....	da + 10 a + 30°C con funzionamento normale.
Umidità relativa dell'ambiente: .....	da 30% a 75% (senza condensa)
Pressione atmosferica: .....	nessuna influenza percepibile sul funzionamento.
Altitudine max: .....	2500m

Apparecchio dotato di manipoli di trattamento brevettati.  
Apparecchio per uso continuo.

**Mobilift M6 i** è dotata del marchio  come dispositivo medico in base all'allegato II della direttiva 93/42/CEE (norme applicabili: IEC 60601-1 Ed3 e norme collaterali)

**COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA**

Per ulteriori informazioni riguardanti la compatibilità elettromagnetica, fare riferimento all'appendice «Compatibilità elettromagnetica».

## → CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

L'apparecchio acquistato è distribuito da LPG Systems o da un distributore autorizzato LPG Systems. Sarà compito dell'acquirente/utente informarsi presso le autorità locali sulle condizioni e qualifiche professionali da possedere per utilizzare questo apparecchio.

L'acquisto di questo apparecchio implica l'accettazione, a pieno diritto da parte dell'acquirente/utente professionista, delle presenti condizioni generali di garanzia. Nel caso in cui l'apparecchio sia venduto da un distributore autorizzato LPG Systems, l'acquirente/utente farà riferimento alle condizioni generali di garanzia del fornitore. Tali condizioni non possono in alcun caso comportare l'aumento dell'impegno preso dal costruttore a titolo della presente garanzia. La presente garanzia può essere attivata ed è valida solo se il modulo è stato debitamente compilato e spedito a LPG Systems entro 15 giorni dalla consegna in qualsiasi paese. I moduli di garanzia incompleti non sono validi.

LPG Systems garantisce il presente apparecchio contro difetti di costruzione o di materia prima. La durata della garanzia corrisponde al più breve dei due periodi seguenti: un (1) anno o duemila (2 000) ore di utilizzo a partire dalla data di fatturazione. Nel corso di questo periodo, ci impegniamo a sostituire o riparare gratuitamente e nei

tempi più rapidi possibili, i pezzi da noi ritenuti difettosi, senza dover procedere alla sostituzione completa dell'apparecchio. Le spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici e dell'eventuale trasporto dell'apparecchio e/o dei pezzi di ricambio da e verso i laboratori del servizio di assistenza sono escluse da questa garanzia.

Le sostituzioni e riparazioni a titolo di garanzia, che possono comportare o meno un'immobilizzazione dell'apparecchio, non ne prolungano in alcun caso la sua durata. Le parti sostituite diventano di proprietà di LPG Systems o del distributore autorizzato. Non verrà assegnato alcun tipo di indennità per mancanza di utilizzo. L'acquirente/utente è tenuto a fornire il tempo ed i mezzi necessari per procedere alle dovute riparazioni ed alle consegne dei pezzi di ricambio sostituiti. In caso contrario, saremo esonerati dall'obbligo della garanzia.

Nel caso di controversie, gli unici tribunali competenti saranno quelli ubicati nella circoscrizione della sede sociale di LPG Systems, ciò malgrado una diversa clausola d'attribuzione di giurisdizione che può figurare su qualsiasi documento a titolo contrario.

## → CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA (SEGUE)

### La garanzia è inoltre esclusa nei seguenti casi:

- Danni verificatisi nel corso del trasporto. Il presente apparecchio e/o i pezzi di ricambio viaggiano a rischio e pericolo del destinatario. Prima di accettare la consegna, quest'ultimo è tenuto a verificare lo stato del materiale spedito e, all'occorrenza, a esporre i reclami allo spedizioniere nelle forme e nei termini in vigore nel paese di consegna.
- La mancata osservanza delle regole di installazione e di utilizzo, difetti di manutenzione e/o mancata pulizia dell'apparecchio e/o delle cartucce filtranti, collegamenti su una linea elettrica difettosa o priva di messa a terra o con una tensione diversa da quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Se un apparecchio dovesse essere rivenduto prima della scadenza della garanzia, quest'ultima sarà trasferita per il periodo rimanente al nuovo acquirente a condizione che:
  - i) venga trasmessa la fattura originale,
  - ii) il venditore iniziale sia informato della cessione.
- Modifica, assemblaggio di accessori o smontaggio dell'apparecchio.
- Eventuali utilizzi e/o interventi non previsti dal manuale d'uso di LPG Systems ed effettuati sull'apparecchio da parte dell'acquirente/utente e/o da un terzo non autorizzato da LPG Systems.
- Impiego di materiali di consumo, di pezzi di ricambio, di componenti non idonei o di pezzi non forniti da LPG Systems.
- Ostruzione dell'apparecchio causata dall'aspirazione di un corpo estraneo.
- Usura normale di uno o più pezzi dell'apparecchio derivante da un normale utilizzo.
- Caduta, colpo, fulmine, incendio, forza maggiore, inondazione e catastrofe naturale.

## → LIMITAZIONE ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza delle condizioni generali di garanzia, durante e alla scadenza della garanzia, può costituire una causa di esonero della responsabilità da parte di LPG Systems nel caso di danno imputabile ai prodotti consegnati.

LPG Systems non potrà essere ritenuta responsabile dei danni materiali e/o immateriali, di qualsivoglia natura, e delle perdite subite di qualsivoglia natura (finanziarie, commerciali, d'immagine, ecc), che siano la conseguenza diretta o indiretta di un cattivo funzionamento e/o di un utilizzo non conforme dell'apparecchio.

In ogni caso, se la responsabilità di LPG Systems dovesse essere riconosciuta per un apparecchio venduto e/o per le prestazioni eseguite, l'importo massimo dei danni e gli interessi ai quali l'una e/o l'altra potrebbe essere condannata non eccederà il prezzo pagato dall'acquirente per l'apparecchio e/o la prestazione.

→ **ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA**

Potete attivare online la vostra garanzia sul sito:

<http://garanzia.lpgitalia.com>

→ **COMPLETARE E SPEDIRE A LPG ITALIA**

Nome: .....

Indirizzo: .....

Paese: .....

Tel.: .....

Email: .....

Centro: .....

Professione: .....

Tipo d'apparecchio: **MOBILIFT M6 s**

Numero di serie: .....

Data: .....

I dati personali raccolti tramite il presente modulo sono destinati alla società LPG Systems, che è responsabile del loro trattamento per finalità connesse alla gestione dei clienti, in particolare al servizio post vendita e alla garanzia.  
La trasmissione delle informazioni contrassegnate con un asterisco è necessaria per l'accettazione del modulo. Conformemente alla legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche, relativa all'informatica, ai file e alle libertà e denominata legge «Informatica e libertà», l'utente ha diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati a carattere personale che lo riguardano; tale diritto può essere esercitato scrivendo a LPG Systems al seguente indirizzo postale: LPG SYSTEMS -30, rue Dr Abel -Technoparc de la Plaine - 26000 VALENCE (FRANCIA).

**ATTENZIONE**

Per beneficiare della garanzia, staccare il modulo e spedirlo imperativamente entro 15 giorni dall'installazione dell'apparecchio a:

**LPG ITALIA Via del Lavoro, 30/15,  
40033 CASALECCHIO DI RENO, BOLOGNA**



**HEADQUARTERS LPG SYSTEMS S.A.S**  
TECHNOPARC DE LA PLAINE  
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE  
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

**INTERNATIONAL/MARKETING**  
ECOLUCIOLES - BAT A  
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE  
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

