



Modèle déposé

GUIDE D'UTILISATION

mobilit M6[®] Beauty

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de
ce guide avant d'utiliser votre appareil.**

© LPG Systems 2024. LPG, Endermolift et Mobilit M6[®] Beauty sont des marques exploitées et/ou enregistrées et/ou déposées par LPG Systems. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite

GU1303-FR_ind C2
Edition du 01/24



Félicitations pour l'achat de votre Mobilift M6® Beauty. Ce modèle représente le fruit de nombreuses années d'expérience dans la conception et la production d'appareils de soin des tissus cutanés. Vous pourrez en apprécier pleinement la perfection technique et la fiabilité qui ont fait de LPG Systems le leader dans ce domaine. Ce guide d'utilisation contient la description du fonctionnement, les instructions pour l'entretien de base à effectuer périodiquement et les consignes de sécurité. Nous vous rappelons que votre appareil est destiné au soin du tissu conjonctif. Il doit être utilisé uniquement par un professionnel qui aura préalablement assisté à la formation constructeur dispensée par LPG Systems ou un distributeur agréé si vous résidez hors de France. Il n'est pas adapté pour un usage domestique. Dans le moindre doute concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre appareil, n'hésitez pas à contacter LPG Systems par l'intermédiaire du Service Client ou de votre distributeur :

Service Client LPG Systems

N° Azur 0810 786 900

(Prix d'appel local, France uniquement)

Ou le +33 (0)4 75 78 69 89

ATTENTION

Pour mieux répondre aux besoins et attentes de ses clients, LPG Systems est continuellement à la recherche d'améliorations dans la conception et la qualité de ses produits. C'est pourquoi, il se peut qu'il y ait quelques différences minimales entre votre appareil et celui décrit dans le guide.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Un appareil Mobilift M6 Beauty
- Une tête Ergolift
- Deux chambres Ergolift (Lift 10 et Lift 20)
- Un cordon d'alimentation
- Un guide d'utilisation
- Un environnement PLV

ATTENTION

Notice de déballage à conserver

Le constructeur se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans notification préalable. Toute reproduction, même partielle, est interdite. Toutes les illustrations de ce guide d'utilisation sont non contractuelles.

SOMMAIRE

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL	4
DESCRIPTIF DES COMMANDES.	6
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	7
ENTRETIEN	10
TÊTE ERGOLIFT	16
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	19
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.	20
GARANTIE	21
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE	22
ACTIVATION DE GARANTIE.	24

LE MOBILIFT M6® BEAUTY

FLEXIBLE

BOITIER FILTRE

FACE AVANT : DALLE TACTILE

CHAMBRE ERGOLIFT

TÊTE ERGOLIFT

SUPPORT ACCESSOIRES



ATTENTION

L'appareil ne peut fonctionner que s'il est relié au secteur par son cordon d'alimentation et que l'interrupteur de mise sous tension est allumé en vert. Au démarrage de votre appareil, veuillez patienter plusieurs secondes avant l'apparition des premières informations sur votre écran.

LE MOBILIFT M6® BEAUTY (SUITE)



ECRAN DE COMMANDES



INFORMATIONS RELATIVES AU SOIN

DALLE TACTILE

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOIN

TÊTE ERGOLIFT

TÊTE ERGOLIFT

CHAMBRE ERGOLIFT

CLAPETS



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il convient de toujours observer les précautions d'usage lors de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris les suivantes : lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil

DANGER - POUR MINIMISER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE :

Toujours débrancher l'appareil de la prise secteur après utilisation et avant son nettoyage

Vérifier que la tension de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique correspond à la tension nominale de la prise secteur.

L'appareil doit être impérativement relié par l'intermédiaire du cordon secteur fourni à une prise murale avec terre et normes électriques en vigueur. Aucun adaptateur secteur ne doit être utilisé avec cet appareil.

AVERTISSEMENT

POUR MINIMISER LE RISQUE DE BRULURES, D'INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE LESIONS SUR LA PERSONNE :

Un appareil ne doit jamais être laissé sous surveillance lorsqu'il est branché.

Le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période ou avant de mettre ou de retirer des pièces.

Il est nécessaire de surveiller attentivement l'appareil lorsqu'il est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.

Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles préconisées par LPG Systems. Ne pas utiliser de pièces non recommandées par LPG Systems.

Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon secteur ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a pris une humidité excessive. Retourner l'appareil au Service client de LPG Systems pour examen et réparations.

Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le cordon secteur, ni sur le flexible

Ne pas transporter l'appareil en utilisant le support accessoire. Il est recommandé de l'enlever à chaque déplacement, et d'utiliser la poignée prévue à cet effet.

Dérouler entièrement le cordon secteur et le maintenir à l'écart de surfaces chaudes.

Ne jamais utiliser l'appareil si les aérations sont obstruées. Veiller à garder les ouvertures exemptes de poussière et assimilés.

Ne jamais faire tomber ni insérer un objet dans une ouverture, ne pas aspirer de corps solides ou liquides, ce qui endommagerait l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil sur un support poussiéreux, incliné, dans un environnement humide ou exposé aux intempéries.

L'appareil doit être posé sur une surface plane et rigide.

Ne pas utiliser en présence de produits aérosols (vaporisateurs) ou d'oxygène.

Pour débrancher l'appareil, mettre toutes les commandes en position arrêt puis débrancher l'appareil en suivant les instructions affichées sur l'écran.

Le produit est considéré comme un appareil fixe et ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.

ATTENTION

11Europe VIIG-H05VVF3G0,75-C13; Italy I/3/16-H05VVF3G0,75-C13; Switzerland 12G-H05VVF3G0,75-C13; UK BS13/13-H05VVF3G0,75-C13; Japan 498GJ-VCTF3X1,25-C13; USA, Canada, Mexico N5/15-SJT3X18AWG-C13

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

ATTENTION : CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Votre appareil est destiné à être utilisé sur peau saine, et en bonne santé. Il est important de lire et de suivre toutes les précautions d'utilisation et contre-indications qui vont suivre avant l'utilisation de votre appareil.

Ne jamais toucher simultanément le client et des câbles ou connexions non protégés de l'appareil.

Ne pas utiliser les têtes Ergolift pour un soin du cuir chevelu.

Utiliser uniquement les têtes Ergolift fournies avec votre appareil ou préconisées par LPG.

LPG Systems se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non appropriée.

L'utilisateur devra être particulièrement attentif aux sensations de la personne soignée.

L'utilisateur doit s'assurer que les paramètres (intensité, séquentialité, ...) sont toujours adaptés aux tissus cutanés à soigner.

Ne pas utiliser la prise USB pendant le soin

Ne pas faire fonctionner l'appareil en dehors de limites environnementales spécifiées (voir spécifications techniques)

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le Mobilift M6 Beauty utilise de l'énergie RF uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareil électronique voisin.

Le Mobilift M6 Beauty peut être utilisé dans tous les établissements, y compris dans les locaux domestiques et ceux directement reliés au réseau public d'alimentation électrique basse tension, alimentant des bâtiments à usage domestique.

Le Mobilift M6 Beauty doit être installé sur un sol en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, il convient que l'humidité relative soit d'au moins 30%.

Le Mobilift M6 Beauty doit être relié à

un réseau d'alimentation électrique dont la qualité est équivalente à celle d'un environnement typique commercial ou hospitalier.

Si l'utilisateur du Mobilift M6 Beauty exige le fonctionnement continu pendant les coupures du réseau d'alimentation électrique, il est recommandé de l'alimenter à partir d'une alimentation en énergie sans coupure ou d'une batterie.

Les appareils portatifs et mobiles de communications RF ne doivent pas être utilisés trop près de toute partie du Mobilift M6 Beauty, y compris des câbles.

Des interférences peuvent se produire à proximité d'appareil marqué du symbole suivant



ATTENTION

Il est strictement interdit de modifier votre appareil sans l'autorisation de LPG.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas soigner les plaies ouvertes, les yeux, les zones intra-cavitaires, les muqueuses, les parties génitales, les mamelons.

Ne pas soigner un client présentant une pathologie infectieuse, une tumeur évolutive, une phlébite, une plaie, une zone infectée.

Ne pas soigner un client atteint d'un cancer de la peau, présentant une tumeur ou autre lésions cancéreuses. En cas d'antécédent de tumeur et de réémission, demander l'avis du médecin traitant.

Ne pas soigner des zones enflammées ou enflées, ou des cicatrices suite à une chirurgie récente sans avis médical et sans formation à la technique LPG dans le domaine concerné.

Ne pas soigner les personnes présentant des troubles circulatoires, sans préalablement demander l'avis du médecin traitant.

Ne pas soigner un client qui présente une douleur inexpiquée et persistante sans avis médical et sans formation à la technique LPG dans le domaine concerné.

Cette liste n'étant pas exhaustive, demander systématiquement l'avis du médecin traitant en cas de doute.

Arrêtez immédiatement le soin si le client éprouve des douleurs et consulter un médecin.

Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des

éruptions cutanées, de l'herpès, de l'acné enflammé ou infecté, du vitiligo.

En raison des risques d'interférences possibles, il est important que le professionnel s'assure que le client n'est pas doté d'un dispositif médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque. Dans l'affirmative, il convient de se renseigner sur le dispositif en question pour s'assurer que des interférences éventuelles ne viennent pas perturber l'utilisation de l'appareil.

Pour éviter tout risque de contusions, faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de déterminer le niveau de sensibilité du client et exclure les clients prenant des médicaments anti-coagulant.

Pour une liste plus détaillée des indications et des contre-indications de la technique ENDERMOLIFT, se référer aux manuels de formation.

ATTENTION


Cet appareil contient des programmes destinés à guider l'utilisateur en vue de l'obtention des meilleurs résultats escomptés en fonction de chaque cas traité. En aucun cas, ils ne constituent une garantie de réussite du soin, laquelle varie selon la morphologie, et la physiologie de chaque client.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE D'IDENTIFICATION

La plaque signalétique d'identification est située au dessous de votre appareil.

Cette plaque indique la tension d'alimentation de l'appareil, mais aussi le numéro de série qui permet d'identifier votre appareil. Lorsque vous contactez le service client de LPG Systems pour un problème technique, veuillez indiquer le numéro de série de votre Mobilift M6 Beauty.

Ce numéro de série vous renseigne sur l'année et le mois de fabrication de votre appareil. La lettre donne l'année de fabrication : Z=2009, A=2010, B=2011... Tandis que les deux chiffres indiquent le mois de production : 01=janvier, 02=février, 03=mars...

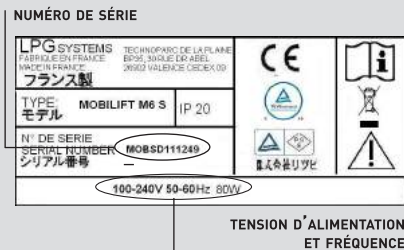

Ce pictogramme signifie que l'appareil est mis sur le marché après le 13 Août 2006. Conformément à la directive 2002/96/CE, il ne peut être jeté avec les ordures ménagères classiques et doit faire l'objet d'une collecte sélective appropriée. Lorsque votre appareil est en fin de vie, vous devez contacter Ecologic qui vous indiquera la solution de collecte la plus appropriée (www.e-dechet.com ou 01.30.57.79.14). Vous ferez ainsi un geste pour l'environnement et contribuerez à la préservation des ressources naturelles.



Ce pictogramme signifie que certains avertissements ou précautions spécifiques associés à ce dispositif ne se trouvent pas sur l'étiquette.



Ce pictogramme signifie consulter impérativement les documents d'accompagnements avant utilisation de votre appareil.



Ce pictogramme signifie stocker à l'abri des intempéries



Ce pictogramme signifie limites de température



Ce pictogramme signifie limites d'humidité relative



Ce symbole signifie « tension dangereuse »

ATTENTION

La plaque signalétique de votre appareil peut évoluer, celle qui est approuvée est celle qui est apposée sur votre appareil.

En réponse à la réglementation, LPG Systems adhère à l'éco-organisme Ecologic et finance ainsi la filière de recyclage agréée pour les déchets électroniques professionnels.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Il est conseillé de nettoyer votre appareil le plus souvent possible, non seulement pour des raisons d'hygiène et d'esthétique mais aussi parce que ce nettoyage contribue à le maintenir en bon état de marche et à prolonger sa durée de vie.

A l'aide d'une éponge humide, nettoyer les parties suivantes :

- Tous les capots extérieurs.
- Les flexibles.
- Le cordon d'alimentation.

A l'aide d'un chiffon imbibé d'un peu de produit ménager sans alcool, nettoyer les parties suivantes :

- Ecran de contrôle et tableau de bord.

ATTENTION

Proscrire les produits agressifs tels que l'acétone, le trichloroéthylène ou l'alcool à 90°

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

Votre appareil comporte une cartouche filtrante. Elle garantit l'efficacité de votre appareil et prolonge sa durée de vie.

Vous devez remplacer vos cartouches filtrantes dès qu'un des messages ci-dessous s'affiche sur votre écran :



FIG. 1

MESSAGE AVERTISSEMENT

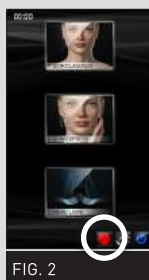


FIG. 2

ICÔNE INDICANT QU'IL
FAUT CHANGER LE FILTRE

Vous devez alors accéder au menu « changement de filtre » comme indiqué ci-après :

Sélectionner le menu maintenance en appuyant sur cette touche (fig.3).

Sélectionner le menu « filtre » en appuyant sur cette touche (fig.4).

L'écran « changement de filtre » vous indique que le filtre doit être remplacé : (fig.5).



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE (SUITE)

Remplacer la cartouche filtrante par une neuve. (Fig.6)

Lorsque votre cartouche filtrante est remplacée, vous devez initialiser son compteur filtre en appuyant quelques secondes sur le bouton correspondant (fig.7).



INSTRUCTION POUR CONNECTER LE FLEXIBLE

Pour connecter le flexible, procéder comme indiqué ci-dessous :

Verrouiller le flexible (fig.1).


Positionner le flexible de façon à ce que la clavette du flexible vienne se loger dans son logement (fig.2).

Poussez le flexible jusqu'à l'obtention d'un « clic ».

BAGUE DE VERROUILLAGE

BAGUE DÉCOR

CLAVETTE DU FLEXIBLE

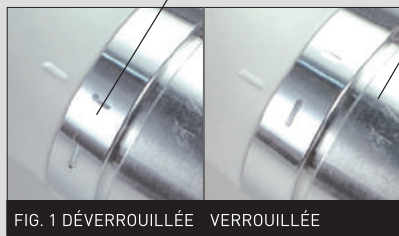

➤ ATTENTION

Ne jamais utiliser votre appareil sans cartouche filtrante.

Mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer le remplacement de votre cartouche filtrante

INSTRUCTION POUR DÉCONNECTER LE FLEXIBLE

Pour déconnecter le flexible, procéder à l'opération inverse : Déverrouiller la connexion en tournant la bague de verrouillage (fig.3). Soulever la bague de verrouillage, puis retirer le flexible délicatement en tirant sur la bague blanche (fig.4).

BAGUE BLANCHE



FIG. 3



FIG. 4

TRANSPORT/DÉPLACEMENT

Lors du transport de votre Mobilift M6 Beauty, il est recommandé :

D'enlever le support accessoire (fig. 1).

De le porter par la poignée de préhension prévue à cet effet (fig. 2).



FIG. 1



FIG. 2

⚠ ATTENTION

Ne jamais porter l'appareil par son support accessoires

REPLACEMENT DU CORDON SECTEUR

Si le cordon d'alimentation de votre appareil est endommagé, veuillez contacter le Service Client de LPG Systems qui vous le remplacera.


Service Client de LPG Systems :
N° Azur 0810 786 900
(France uniquement)
ou le +33 (0)4 75 78 69 89

MAINTENANCE

Remplacement des clapets : lorsque les clapets ne permettent plus un soin correct de la peau, ils doivent être remplacés. Ils doivent être remplacés toutes les 20 séances environ.
A usage personnel du client, un **Kit Endermolift** est proposé à la vente.

DATE	NOMBRE D'HEURES	OPÉRATIONS EFFECTUÉES

DESCRIPTIF DE LA TÊTE ERGOLIFT

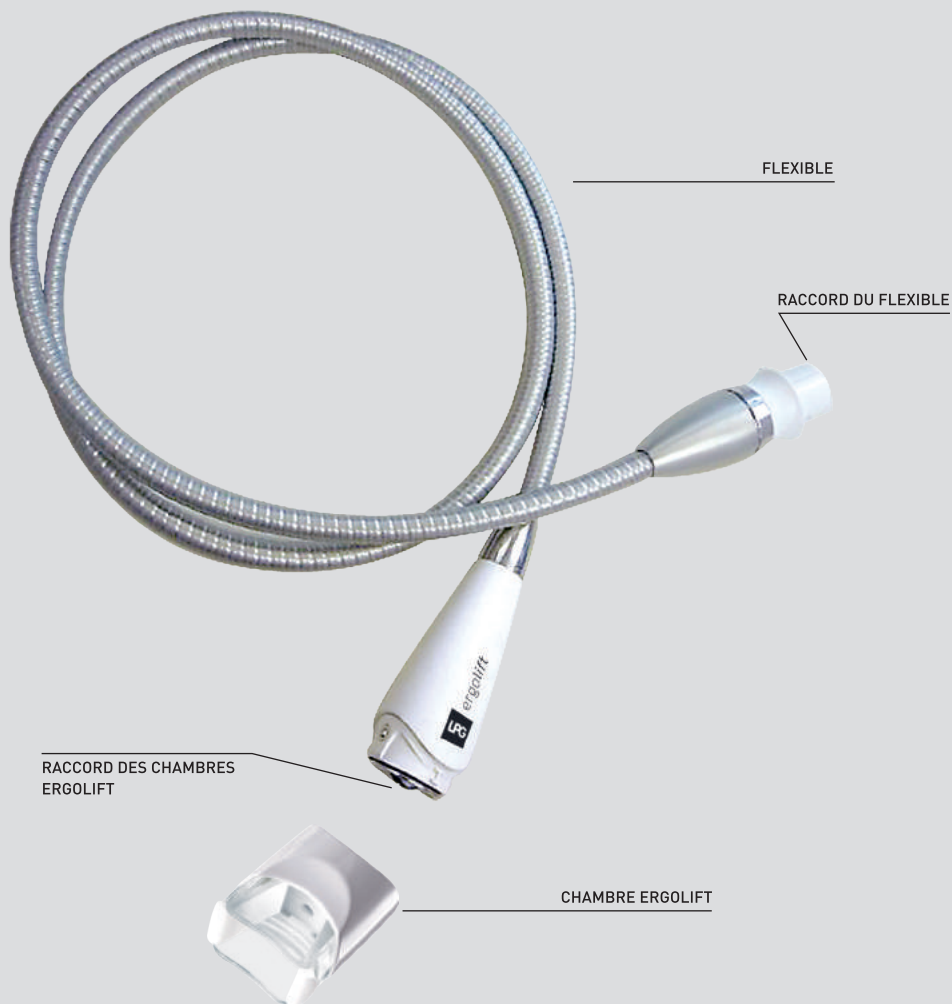

CHAMBRES ERGOLIFT




Chambre
Lift 20 à clapet
démontable
Lift 20



Chambre
Lift 10 à clapet
démontable
Lift 10

Seules les chambres Lift 20 et Lift 10 peuvent être connectées à la tête Ergolift.
La connexion/déconnexion se fait par un simple push pull.

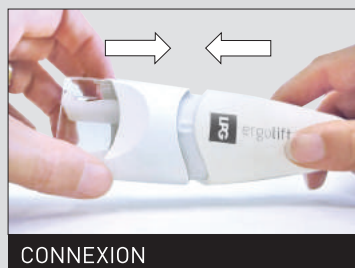

NETTOYAGE DE LA TÊTE ERGOLIFT ET DES CHAMBRES ERGOLIFT

Pour des raisons d'hygiène, le nettoyage des têtes Ergolift est à effectuer avant et après chaque utilisation, têtes déconnectées de l'appareil, à l'aide de lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide. Une attention particulière doit être portée sur la propreté des parties en contact avec le patient.

Avant chaque utilisation, nettoyer le clapet et la chambre Ergolift.

Après chaque utilisation :

1. Déconnecter la chambre Ergolift de la tête Ergolift. (fig.1)
2. Sortir les clapets à l'aide de l'outil de démontage prévu à cet effet (fig.2)
3. Nettoyer méticuleusement la chambre Ergolift, le clapet et l'outil de démontage pendant au moins 1 minute avec les lingettes décrites ci-dessus. (fig.3)
4. Remonter le clapet dans la chambre Ergolift à l'aide de l'outil de démontage en suivant l'opération inverse. (fig.4)



FIG. 1

OUTIL DE DÉMONTAGE



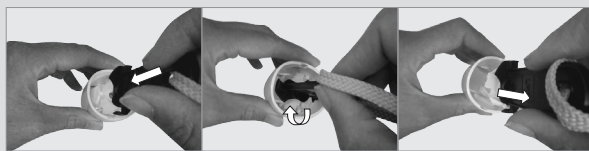


FIG. 2

ROTATION 90°

NETTOYAGE DE LA TÊTE ERGOLIFT ET DES CHAMBRES ERGOLIFT (SUITE)

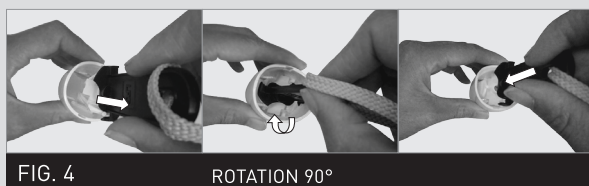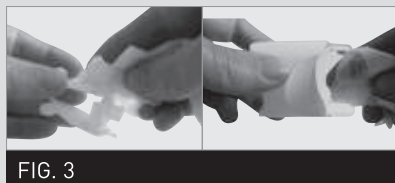

⚠ ATTENTION

Proscrire les produits agressifs tels que l'acétone, le trichloroéthylène ou l'alcool à 90°, les éponges abrasives ainsi que l'utilisation d'ultra sons ou de lampe à UV. Toutes têtes nettoyées devraient être déposées sur le support accessoire pour éviter toutes confusions.

UN PETIT PROBLÈME ! QUE FAIRE ?

En cas de fonctionnement anormal de votre appareil, avant de faire appel au Service Client de LPG Systems ; il est conseillé d'effectuer les contrôles suivants :

L'appareil est-il raccordé à une prise secteur ?

La prise secteur est-elle alimentée ?

L'interrupteur de mise sous tension est-il allumé ?

- La cartouche filtrante est-elle propre et bien en place ?
- Le flexible est-il correctement raccordé ?
- Le flexible n'est pas obturé ?
- La chambre Ergolift et les clapets sont-ils correctement montés ?

Une fois ces contrôles effectués, si le dysfonctionnement persiste, faire appel au service Client de LPG Systems ou au distributeur agréé le plus proche de chez vous en indiquant le modèle de votre appareil et son numéro de série.

Service Client de LPG Systems :

N° Azur 0810 786 900

(France uniquement)

ou le +33 (0)4 75 78 69 89

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : L x l x h : 65 x 26 x 31 cm
Poids net : 10,5 kg
Dépression maximum régulée: 35 kPa (350 mbar)
Refroidissement : par ventilation mécanique intégrée à la pompe
Indice de protection : IP 20
Classe de protection électrique : 1
Température de fonctionnement: +10°C à +30°C
Température de stockage : -20°C à +70°C
Caractéristiques électriques : 100-240V 50/60Hz 80W

Caractéristiques environnementales :

Température ambiante : + 10 à + 30°C en fonctionnement normal.
Humidité relative ambiante : 30 à 75% sans condensation.
Pression atmosphérique : pas d'influence notable des conditions ambiantes en fonctionnement.
Altitude max : 2500m

Appareil équipé d'une tête Ergolift brevetée.

Appareil destiné au travail continu

Le Mobilift M6 Beauty est marqué  conformément aux normes et textes applicables dans le cadre des directives CEM 2004/108/CEE et basse tension 2006/95/CEE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Vous venez d'acquérir un appareil distribué par LPG Systems ou un distributeur agréé LPG Systems.

Il appartient à l'acheteur / utilisateur de s'informer auprès des autorités locales des conditions et des qualifications professionnelles à remplir pour utiliser cet appareil.

L'acquisition de cet appareil emporte l'acceptation de plein droit par l'acheteur / utilisateur professionnel des présentes conditions générales de garantie.

Dans le cas où l'appareil est vendu par un distributeur agréé LPG Systems, l'acheteur se réfèrera aux conditions générales de garantie de son fournisseur, lesquelles ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter l'engagement pris au titre de la présente garantie. Cette garantie ne peut être mise en œuvre et n'est valable que si le volet de garantie dûment rempli a été retourné à LPG Systems dans les 15 jours de la livraison et ce pour quelque pays que ce soit.

Tout volet de garantie incomplètement rempli sera refusé.

Cet appareil est garanti contre tout vice de construction ou défaut de matière première. La durée de la garantie est égale à la plus courte des deux périodes suivantes : un (1) an OU deux mille (2 000) heures d'utilisation à compter de la date de facturation.

Pendant cette période, nous nous engageons à échanger ou à réparer gratuitement, dans les meilleurs délais, toute pièce reconnue par nous défectueuse, sans que toutefois l'échange complet de l'appareil puisse être exigé. Les frais de déplacement et de séjour des techniciens ainsi que les coûts de transport éventuels pour l'aller et le retour de l'appareil et / ou des pièces détachées dans l'atelier du service après vente, sont exclus de cette garantie.

Les échanges et réparations au titre de la garantie causant ou non une immobilisation de l'appareil ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'en prolonger la durée. Les pièces remplacées deviennent la propriété de LPG Systems ou du distributeur agréé. Aucune indemnité ne pourra être rattachée pour privation de jouissance.

L'acheteur / utilisateur est tenu de nous donner le temps et les moyens nécessaires pour procéder à toutes les réparations et les livraisons de remplacement des pièces détachées, faute de quoi, nous sommes dégagés de notre obligation de garantie.

Les tribunaux situés dans le ressort du siège social de LPG Systems sont les seuls compétents en cas de différend et ceci malgré toute clause d'attribution de juridiction différente figurant dans tout document à l'effet contraire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE (SUITE)

La garantie est en outre exclue en cas :

De dommages survenus au cours du transport. L'appareil et / ou les pièces détachées voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient à celui-ci avant d'en prendre livraison, d'en vérifier l'état et le cas échéant procéder auprès du transporteur aux réclamations dans les formes et délais en vigueur dans le pays de livraison.

De non-observation des règles d'installation et d'utilisation, de défaut d'entretien et / ou de négligence dans la maintenance de l'appareil et / ou des cartouches filtrantes, du branchement sur une ligne électrique défectueuse ou ne possédant pas de raccordement à la prise de terre ou d'une tension autre que celle indiquée sur l'appareil.

Si un appareil devait être revendu avant le terme de la garantie, celle-ci sera transférée pour la durée restant à courir au nouvel acquéreur à condition :

- I Que la facture originale lui soit communiquée.
- II Que le vendeur initial soit informé de la cession.

De modification, de montage d'accessoires ou démontage de l'appareil.

De toute utilisation et / ou intervention non prévue au présent guide d'utilisation LPG Systems et effectuée sur l'appareil par l'acheteur / utilisateur et / ou un tiers non-agréé par LPG Systems.

D'utilisation de consommables, de pièces détachées, composants inappropriés ou de pièces non fournies par LPG Systems.

D'obturation de l'appareil par l'aspiration d'un corps étranger.

D'usure normale d'une ou plusieurs pièces de l'appareil résultant d'une utilisation normale.

De chute, choc, foudre, incendie, force majeure, dégâts des eaux et catastrophe naturelle.

LIMITATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Le non-respect des conditions générales de garantie pendant la durée de garantie et après l'expiration de celle-ci, peut constituer une cause exonératoire de responsabilité de LPG Systems en cas de dommage imputable aux produits livrés.

LPG Systems ne pourra être tenue responsable des dommages matériels et / ou immatériels, de quelque nature que ce soit, ainsi que des pertes subies de toute nature (financières, commerciales, image etc..), qui seraient notamment la conséquence directe ou indirecte d'un mauvais fonctionnement et / ou d'une utilisation non-conforme de l'appareil.

En tout état de cause, si la responsabilité de LPG Systems venait à être reconnue au titre d'un appareil vendu et / ou des prestations réalisées, le montant maximum des dommages et intérêts auxquels l'une et / ou l'autre pourrait être condamnée ne saura excéder le prix payé par l'acheteur pour l'appareil et / ou la prestation réalisée.

ACTIVATION DE GARANTIE

Vous pouvez activer votre garantie directement en ligne en vous connectant sur :

<http://garantie.lpgsystems.fr>



OU REMPLIR ET REnvoyer À LPG SYSTEMS

Nom* :

Adresse* :

Pays* :

Tél.* :

Email :

Type d'établissement :

Profession :

Type d'appareil : **Mobilift M6 Beauty**

Numéro de série* :

Date :

Les données à caractère personnel recueillies par le présent formulaire sont destinées à la société LPG Systems, qui est le responsable du soin, afin d'effectuer les opérations relatives à la gestion des clients, et notamment le service après-vente et la garantie.

La transmission des informations accompagnées d'un astérisque est nécessaire pour la prise en compte de ce formulaire.

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « Informatique et Libertés », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant, que vous pouvez exercer en contactant LPG Systems en écrivant à l'adresse postale suivante : LPG SYSTEMS -30, rue Dr Abel -Technoparc de la Plaine - 26000 VALENCE (FRANCE).

ATTENTION

2^{ème} partie du volet à détacher pour bénéficier de la garantie et à retourner impérativement dans les 15 jours suivant la mise en service à :

LPG SYSTEMS SA - Technoparc de la Plaine
30, rue du docteur Abel - CS 90035 - 26902 VALENCE Cedex 9 - France



SIÈGE SOCIAL LPG SYSTEMS S.A.S.
TECHNOPARC DE LA PLAINE

30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING
ECOLUCIOLES - BAT A

955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

