



GUÍA DE UTILIZACIÓN

Pack Endermolift

Antes de usar su aparato lea atentamente
esta guía de utilización.

GS 04 GE d i i c i d d G
d i i id d d cci i c ci



Acaba de adquirir un pack Endermolift. El cabezal Ergolift y sus cámaras de tratamiento incluidas en este pack están preparadas para ser conectadas a los aparatos LPG, Cellu M6 Integral y Cellu M6 Endermolab. Este documento contiene la descripción del funcionamiento y las instrucciones de mantenimiento básico que hay que realizar periódicamente en su cabezal Ergolift.

Le recordamos que el aparato ha sido diseñado para el tratamiento del tejido conjuntivo. Únicamente deberá utilizarlo un profesional que haya asistido previamente a la formación del fabricante impartida por LPG Systems, o un distribuidor autorizado en caso de residir fuera de Francia.

Ante la mínima duda sobre el funcionamiento o el mantenimiento de su aparato, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su distribuidor.

→ DESCRIPCIÓN DEL CABEZAL ERGOLIFT



→ DESCRIPCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TRATAMIENTO




Aleta TML 20
Cámara de
tratamiento
TML 20 con aleta
desmontable



Aleta TML 10
Cámara de
tratamiento
TML 10 con aleta
desmontable

Sólo las cámaras de tratamiento TML20 y TML10 pueden conectarse al cabezal Ergolift.

La conexión/desconexión se realiza mediante un acoplamiento simple de tipo empujar-tirar.

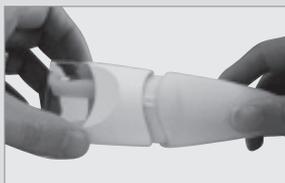

→ LIMPIEZA DEL CABEZAL ERGOLIFT Y DE LAS CÁMARAS DE TRATAMIENTO

MANTENIMIENTO



Por razones de higiene, la limpieza de los cabezales de tratamiento debe realizarse después de cada utilización, mediante toallitas impregnadas en una solución antiséptica, bactericida y fúngica. Merece especial atención la limpieza de las partes en contacto con el paciente.client.

LIMPIEZA DEL CABEZAL ERGOLIFT Y DE LAS CÁMARAS DE TRATAMIENTO

Antes de cada uso, limpiar la válvula y la cámara de tratamiento.

1. Desconectar la cámara de tratamiento del cabezal Ergolift
2. Sacar las aletas.
3. Limpiar meticulosamente la cámara de tratamiento y la aleta durante al menos 1 minuto con los toallitas LPG impregnadas de una solución bactericida y fungicida.

Para el uso personal del paciente, se propone la venta de un Kit Endermolift, válido para un programa de unas 20 sesiones.

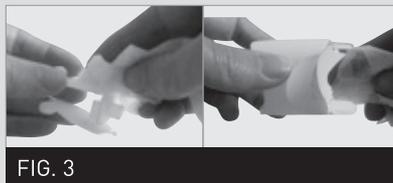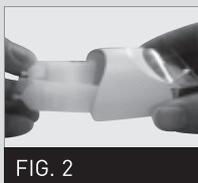

DESINFECCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TRATAMIENTO

El cabezal Ergolift está indicado para ser utilizado directamente sobre la piel. En el marco de aplicación específico, es preciso proceder a la desinfección después de cada uso:

1. Aplicar el procedimiento de limpieza descrito anteriormente.
2. Sumergir la aleta y la cámara de tratamiento en una solución desinfectante durante 12 minutos a 20° C siguiendo las recomendaciones indicadas en el embalaje del producto desinfectante.
3. Aclarar con cuidado la aleta y la cámara de tratamiento con agua esterilizada o potable durante al menos 1 minuto utilizando abundante cantidad de agua (en torno a 8 litros de agua). Repetir la operación 2 veces, aclarando así un total de 8 veces.
4. Secar la cámara de tratamiento y la aleta.
5. Depositar la cámara de tratamiento y la aleta en el cajón de ordenación previamente limpiado con las toallitas LPG.

⚠ ATENCIÓN

No utilizar productos agresivos como acetona, tricloroetileno o alcohol de 90°, ni esponjas abrasivas. Tampoco utilizar ultrasonidos ni lámparas UV. Todos los cabezales limpiados o desinfectados deberían ser depositados en el cajón de ordenación para evitar cualquier confusión. Utilizar una solución desinfectante con el principio activo ortoformaldehído (OPA). Antes de utilizar la solución desinfectante, se recomienda leer y seguir las recomendaciones, contraindicaciones y precauciones relacionadas con este producto. Consulte el folleto de uso de esta solución.



HEADQUARTERS LPG SYSTEMS S.A.S

TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 900 35 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING

ECOLUCIOLES - BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

