



MANUALE D'USO

Pack Endermolift

**Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio,
leggere attentamente l'intero manuale.**

© LPG Systems 2024. LPG, Cellu M6, Integral e Keymodule sono marchi depositati di LPG.
Eventuali riproduzioni, anche parziali, sono strettamente proibite.



Congratulazioni per aver acquistato un pack Endermolift. La testina Ergolift e le camere di trattamento contenute in questo pack sono da collegare agli apparecchi LPG, Cellu M6 Integral e Cellu M6 Endermolab. Il presente documento contiene informazioni sul funzionamento e istruzioni relative alla manutenzione di base da effettuarsi periodicamente sulla testina Ergolift.

Le ricordiamo che il suo apparecchio è destinato al trattamento del tessuto connettivo e deve essere utilizzato esclusivamente da un professionista che abbia seguito la formazione costruttore impartita da LPG Systems o da un distributore autorizzato qualora lei risieda al di fuori della Francia.

Nel caso in cui sorgano dei dubbi relativi al funzionamento o alla manutenzione dell'apparecchio, vi preghiamo di mettervi in contatto con il Servizio Clienti di LPG Italia:

Numero Verde 0800-905699

→ DESCRIZIONE DELLA TESTINA ERGOLIFT



→ DESCRIZIONE DELLE CAMERE DI TRATTAMENTO




Aletta TML 20
Camera di trattamento TML 20 con aletta smontabile



Aletta TML 10
Camera di trattamento TML 10 con aletta smontabile

Solo le camere di trattamento TML20 e TML10 possono essere collegate alla testina Ergolift.

La connessione/disconnessione avviene tramite un semplice meccanismo Push Pull.

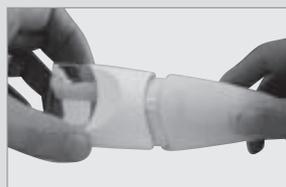

→ PULIZIA DELLA TESTINA ERGOLIFT E DELLE CAMERE DI TRATTAMENTO

MANUTENZIONE

Per motivi d'igiene, la pulizia dei manipoli di trattamento deve essere effettuata dopo ogni utilizzo, mediante un panno imbevuto di una soluzione antisettica, battericida e fungicida.

Prestare particolare attenzione alla pulizia delle parti che sono a contatto con il paziente.

PULIZIA DELLA TESTINA ERGOLIFT E DELLE CAMERE DI TRATTAMENTO

Prima di ogni utilizzo, pulire l'aletta e la camera di trattamento.

1. Scollegare la camera di trattamento dall'adattatore
2. Estrarre le alette

Pulire accuratamente la camera di trattamento e l'aletta per almeno

1 minuto con le salviette LPG imbevute di una soluzione battericida e fungicida.

Per uso personale del paziente, è disponibile per la vendita un Kit Endermolift valido per un programma di circa 20 sedute.

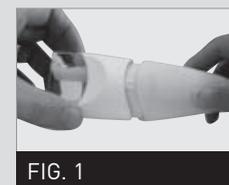


FIG. 1



FIG. 2

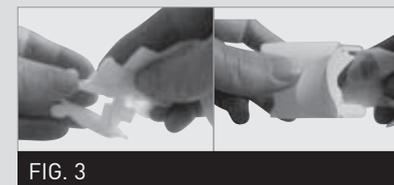


FIG. 3

DISINFESTIONE DELLE CAMERE DI TRATTAMENTO

1. La testina Ergolift è progettata per essere utilizzata direttamente sulla pelle. In caso di applicazioni specifiche, la disinfezione è necessaria dopo ogni utilizzo:
2. Attenersi alla procedura di pulizia descritta sopra
3. Immergere l'aletta e la camera di trattamento in una soluzione disinfettante a 20°C per 12 minuti seguendo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto disinfettante.
4. Sciacquare accuratamente l'aletta e la camera di trattamento con acqua sterile o potabile per almeno 1 minuto utilizzando una quantità elevata d'acqua (circa 8 litri). Ripetere l'operazione 2 volte, per un totale di 3 risciacqui.
5. Asciugare la camera di trattamento e l'aletta
6. Riporre la camera di trattamento e l'aletta nell'apposito scomparto precedentemente pulito con salviette LPG.

ATTENZIONE

Non utilizzare prodotti aggressivi quali acetone, tricloretilene, alcool a 90°, spugne abrasive, ultrasuoni o lampade UV. Tutte le testine pulite e/o disinfettate dovrebbero essere riposte nell'apposito scomparto per evitare confusione. Utilizzare una soluzione disinfettante contenente il principio attivo ortoformaldeide (OPA) Prima di utilizzare la soluzione disinfettante, si raccomanda di leggere e rispettare le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze relative al prodotto. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso di questa soluzione.



HEADQUARTERS LPG SYSTEMS S.A.S

TECHNOPARC DE LA PLAINE

30, RUE DU DR. ABEL - CS 900 35 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE

TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING

ECOLUCIOLES - BAT A

955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE

TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

