

DÉMARRAGE RAPIDE

TABLETTE




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**


Agir de l'intérieur. Pour le meilleur.

DÉMARRAGE RAPIDE TABLETTE

1. CONNEXION DE LA TABLETTE À VOTRE RÉSEAU WI-FI

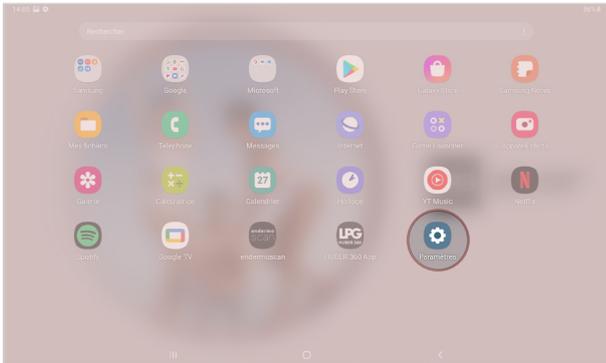


Démarrez l'application « **Paramètres** » présent sur l'écran de votre tablette.

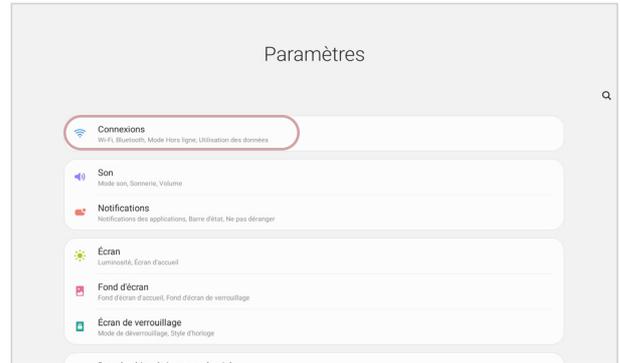


Sélectionnez la rubrique « **Connexions** » puis cliquez sur « **WI-FI** ». **Sélectionnez** votre réseau **WI-FI**.

2. LANCEMENT DE L'APPLICATION **ENDERMOSCAN™**

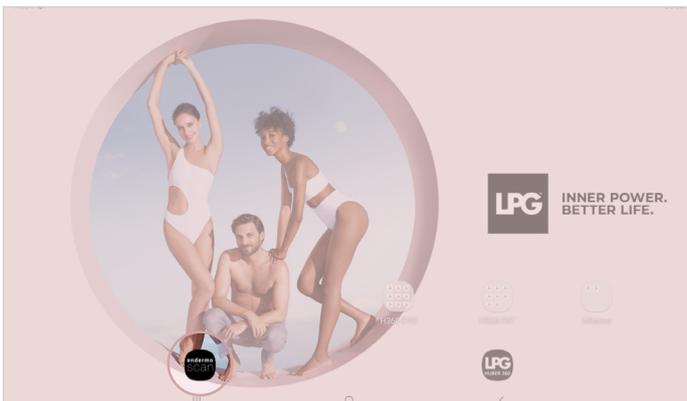

Cliquez sur l'icône **endermoscan™** présent sur l'écran d'accueil de votre tablette pour lancer l'application.

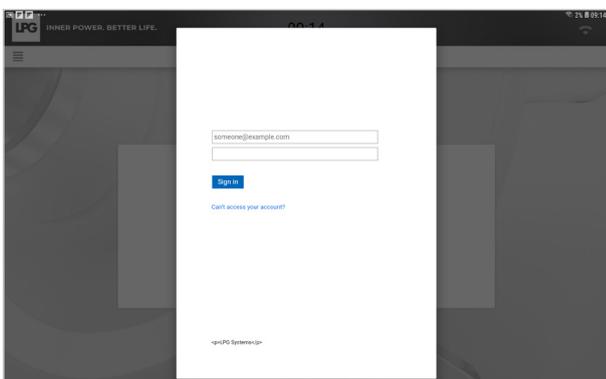

Renseignez votre identifiant (adresse email rattachée à votre compte LPG®) et votre mot de passe (choisi par vos soins). En cas de mot de passe oublié, cliquez sur « Votre compte n'est pas accessible ? » ou sur le lien suivant : <https://portal.lpgsystems.com/password> pour réinitialiser votre mot de passe.




**INNER POWER.
BETTER LIFE.**


Agir de l'intérieur. Pour le meilleur.

DÉMARRAGE RAPIDE TABLETTE

2. LANCEMENT DE L'APPLICATION ENDERMOSCAN™

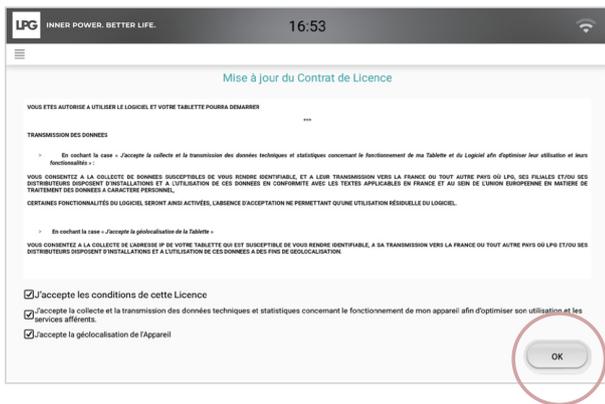


Le contrat de licence apparaît. Veuillez faire défiler le texte jusqu'en bas, puis cocher les cases d'acceptation. Cliquez sur **OK**.

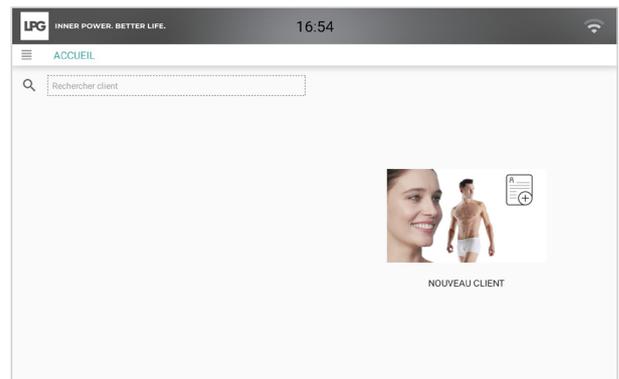

Vous pouvez dès à présent utiliser l'application.

3. ASSOCIATION CELLU M6 ALLIANCE® - TABLETTE

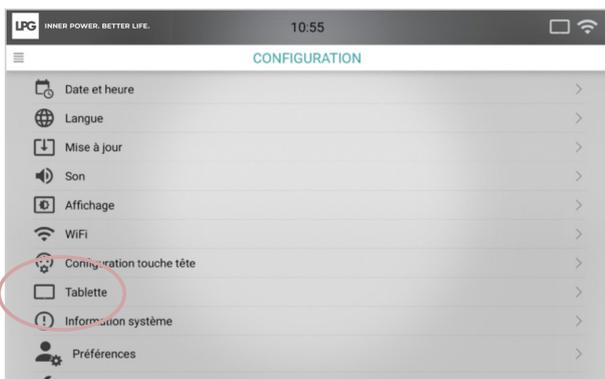


Tout d'abord, avant de relier votre tablette à votre CELLU M6 ALLIANCE®, veillez à ce que :

- 1 Votre tablette et votre CELLU M6 ALLIANCE® soient connectés au **même réseau WI-FI**.
- 2 Votre application endermoscan® soit bien lancée.

Sélectionnez ensuite la rubrique « **Tablette** » dans le menu « Configuration » de votre CELLU M6 ALLIANCE®.



Votre CELLU M6 ALLIANCE® détecte automatiquement votre tablette. L'icône « tablette » qui s'affiche en haut à droite de l'écran de votre appareil et de celui de votre tablette vous assure que la connexion est opérationnelle.

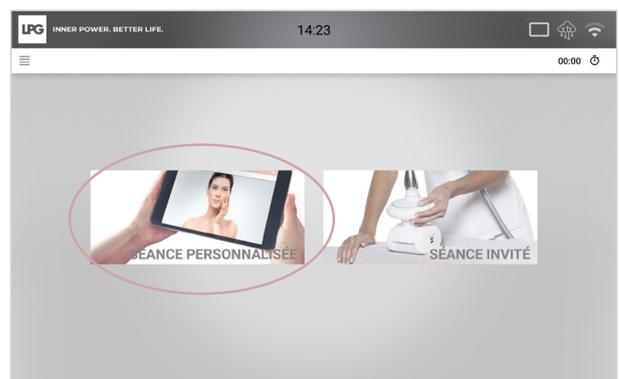

De retour sur l'écran d'accueil de votre CELLU M6 ALLIANCE®, sélectionnez le menu « **Séance personnalisée** » pour accéder aux programmes personnalisés de vos clients (préalablement créés sur l'application).



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

DÉMARRAGE RAPIDE TABLETTE

SAUVEGARDEZ ET **PROTÉGEZ VOS DONNÉES**



Pour plus de sécurité, sauvegardez régulièrement **l'intégralité de vos données sur un support externe de votre choix** : carte

micro SD (disponible en grande surface ou dans les magasins spécialisés), ordinateur personnel*, disque dur externe...

Lors de la sauvegarde**, choisissez un mot de passe de protection à niveau de sécurité élevé **connu uniquement de vous**.

Ce mot de passe est sous votre entière responsabilité.

Ne le perdez pas car sans lui, il vous sera impossible de restaurer vos sauvegardes.



Pour des raisons de confidentialité, le Groupe LPG® n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. Le Groupe LPG® ne pourra être tenu responsable d'une perte éventuelle de vos données.

*Utilisez le câble USB fourni avec la tablette pour relier la tablette à votre ordinateur personnel.

** Rendez-vous dans le menu configuration de l'application ENDERMOSCAN™, rubrique « Paramètres » et « Base de données »

BESOIN **D'AIDE ?**

Découvrez nos tutoriels vidéo pour vous guider pas à pas dans la prise en main de votre appareil. Scannez le QR Code ci-dessous avec l'appareil photo de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Vous serez alors redirigé(e) vers la playlist correspondante. Si la lecture du QR Code ne fonctionne pas, il vous suffira de télécharger l'application gratuite « Unitag » sur Google Play Store ou Apple Store.

Pour tout autre question, nous sommes à votre disposition :

Tél : 04 75 78 69 00

Mail : sav@lpgsystems.com



<http://firstusetutorial.lpgsystems.com>

